

***Använda Focus 14 Blue  
och Focus 40 Blue  
tillsammans med iOS***

Freedom Scientific

PUBLICERAD AV  
Freedom Scientific  
11800 31<sup>st</sup> Court North  
St. Petersburg, Florida 33716-1805  
USA  
<http://www.FreedomScientific.com>

Informationen i detta dokument kan förändras utan föregående notis. Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något ändamål, utan uttryckligt skriftligt godkännande från Freedom Scientific.

Copyright © 2012 Freedom Scientific. Alla rättigheter förbehålls.

# Använda Focus 14 Blue och Focus 40 Blue tillsammans med iOS

---

## Parkoppla Focus-displayen

Gör följande för att etablera en Bluetooth-anslutning mellan Focus och en iOS-enhet från Apple, såsom en iPhone:

**Observera:** Focus 14 Blue stöds i iOS 6 och senare.

1. Slå på Focusen.
2. På iOS-enheten, öppna Inställningar, gå sedan till Allmänt, Bluetooth och försäkra dig om att Bluetooth är påslaget. I fall du använder iOS 6 finns Bluetooth i huvudfönstret för Inställningar.
3. Dubbeltryck på Tillbaka-knappen för att återvända till Allmänt, bläddra sedan neråt till och dubbeltryck på Hjälpmedel. I fall du använder iOS 6 kommer dubbeltryck på Tillbaka-knappen att ta dig tillbaka till Inställningar. Du kan då dubbeltrycka på Allmänt och sedan Hjälpmedel.
4. Bläddra till och dubbeltryck på VoiceOver för att öppna VoiceOver-inställningarna.
5. Bläddra till och dubbeltryck på Punktskrift för att öppna punktskriftsinställningarna. iOS-enheten kommer att börja söka efter en punktdisplay.
6. Svep ett steg bortanför "Välj en punktskriftenhet". Här kommer det först att stå "Söker". Focus-namnet kommer att visas här när den har hittats.

7. När displayen väl har hittats, dubbeltryck på namnet för att öppna parkopplingsfönstret. Skriv in 0000 på iOS-enheten och dubbeltryck sedan på knappen Parkoppla, belägen i det övre högra hörnet, för att etablera anslutningen.

När Focusen väl har parkopplats kommer displayen automatiskt att anslutas om du slår på displayen innan du tar iOS-enheten ur viloläget. Kom ihåg att låsa enheten innan du slår av Focus för att försäkra dig om att den automatiska igenkänningen av punktskriftsenheter fungerar ordentligt nästa gång du vill använda punktskrift.

## Focus-kommandon i iOS

De följande avsnitten innehåller listor med iOS-kommandon som kan utföras från tangentbordet i Perkins-stil såväl som med andra kontroller på Focus-displayerna.

### Navigeringskommandon

Ackordskommando	Funktion
<b>PUNKT 1 PLUS MELLANSLAG</b>	Flytta till föregående objekt
<b>PUNKT 4 PLUS MELLANSLAG</b>	Flytta till nästa objekt
<b>PUNKT 2 PLUS MELLANSLAG</b>	Panorera punktraden åt vänster
<b>PUNKT 5 PLUS MELLANSLAG</b>	Panorera punktraden åt höger
<b>PUNKTERNA 1-2-3 PLUS MELLANSLAG</b>	Flytta till första objektet

Ackordskommando	Funktion
<b>PUNKTERNA 4-5-6 PLUS MELLANSLAG</b>	Flytta till sista objektet
<b>PUNKTERNA 1-3-5 PLUS MELLANSLAG</b>	Bläddra en sida åt höger
<b>PUNKTERNA 2-4-6 PLUS MELLANSLAG</b>	Bläddra en sida åt vänster
<b>PUNKTERNA 3-4-5-6 PLUS MELLANSLAG</b>	Bläddra en sida uppåt eller öppna Notiscenter när fokuset är på statusfältet
<b>PUNKTERNA 1-4-5-6 PLUS MELLANSLAG</b>	Bläddra neråt en sida
<b>PUNKTERNA 2-3-4 PLUS MELLANSLAG</b>	Flytta till statusfältet
<b>PUNKTERNA 2-3 PLUS MELLANSLAG</b>	Välj föregående rotorinställning
<b>PUNKTERNA 5-6 PLUS MELLANSLAG</b>	Välj nästa rotorinställning
<b>PUNKT 3 PLUS MELLANSLAG</b>	Flytta till föregående objekt med hjälp av rotorinställningen
<b>PUNKT 6 PLUS MELLANSLAG</b>	<b>Flytta till nästa objekt med hjälp av rotorinställningen</b>
<b>PUNKTERNA 1-2-5 PLUS</b>	Starta Programväxlaren

Ackordskommando	Funktion
<b>MELLANSLAG</b> snabbt två gånger	

## Läskommandon

Ackordskommando	Funktion
<b>PUNKTERNA 1-2-3-5 PLUS MELLANSLAG</b>	Läs allt från valt objekt
<b>PUNKTERNA 2-4-5-6 PLUS MELLANSLAG</b>	Läs allt från början
<b>PUNKTERNA 1-2-3-4 PLUS MELLANSLAG</b>	Pausa eller låt talet fortsätta läsa

## Allmänna kommandon

Ackordskommando	Funktion
<b>PUNKTERNA 1-2 PLUS MELLANSLAG</b>	Aktivera Tillbaka-knappen om den finns
<b>PUNKTERNA 1-4-5 PLUS MELLANSLAG</b> eller <b>PUNKT 7 PLUS MELLANSLAG</b>	Aktivera Radera-tangenten
<b>PUNKTERNA 1-5 PLUS MELLANSLAG</b> eller <b>PUNKT 8 PLUS MELLANSLAG</b>	Aktivera Retur-tangenten

Ackordskommando	Funktion
<b>PUNKTERNA 1-2-4-5 PLUS MELLANSLAG</b>	Växla mellan förkortad punktskrift och fullskrift (stöds inte i svensk punktskrift i nuläget)
<b>PUNKTERNA 1-2-5 PLUS MELLANSLAG</b>	Aktivera Hem-knappen (snabbt två gånger för att starta Programväxlaren)
<b>PUNKTERNA 1-3-4 PLUS MELLANSLAG</b>	Slå på/av talet
<b>PUNKTERNA 2-3-4-5 PLUS MELLANSLAG</b>	Aktivera Tabbar-tangenten
<b>PUNKTERNA 3-5-6 PLUS MELLANSLAG</b>	Markera text
<b>PUNKTERNA 2-3-6 PLUS MELLANSLAG</b>	Avmarkera text
<b>PUNKTERNA 3-4-5 PLUS MELLANSLAG</b>	Volym upp
<b>PUNKTERNA 1-2-6 PLUS MELLANSLAG</b>	Volym ner

### Focus Blue-specifika kommandon i iOS 5

Kommando	Funktion
<b>VÄNSTER PANORERINGSKNAPP</b>	Panorera punktraden åt vänster

Kommando	Funktion
<b>VÄNSTER VICKKNAPP NER</b>	Flytta till nästa objekt (bestäms av rotorinställningen)
<b>VÄNSTER VICKKNAPP UPP</b>	Flytta till föregående objekt (bestäms av rotorinställningen)
<b>VÄNSTER VÄLJARKNAPP</b>	Aktivera valt objekt
<b>HÖGER VÄLJARKNAPP</b>	Aktivera valt objekt
<b>HÖGER VICKKNAPP NER</b>	Flytta till nästa objekt
<b>HÖGER VICKKNAPP UPP</b>	Flytta till föregående objekt
<b>HÖGER PANORERINGSKNAPP</b>	Panorera punktraden åt höger
<b>VÄNSTER NAV-VICKKNAPP NER</b>	Panorera punktraden åt höger
<b>VÄNSTER NAV-VICKKNAPP UPP</b>	Panorera punktraden åt vänster
<b>VÄNSTER NAV-LÄGESKNAPP</b>	Aktivera valt objekt
<b>HÖGER NAV-VICKKNAPP NER</b>	Panorera punktraden åt höger
<b>HÖGER NAV-VICKKNAPP UPP</b>	Panorera punktraden åt vänster
<b>HÖGER NAV-LÄGESKNAPP</b>	Aktivera valt objekt

## Focus Blue-specifika kommandon i iOS 6

Kontroll	Funktion
<b>CURSOR ROUTING-TANGENT</b>	Dubbeltryck på det valda objektet
<b>CURSOR ROUTING-TANGENT OVANFÖR STATUSCELL</b>	Visa utökad statusbeskrivning
<b>VÄNSTER NAV-VICKKNAPP UPP</b>	Flytta till föregående objekt med hjälp av rotorinställningen
<b>VÄNSTER NAV-VICKKNAPP NER</b>	Flytta till nästa objekt med hjälp av rotorinställningen
<b>VÄNSTER LÄGESKNAPP</b>	Välj objektet under ditt finger
<b>HÖGER NAV-VICKKNAPP UPP</b>	Flytta till föregående objekt
<b>HÖGER NAV-VICKKNAPP NER</b>	Flytta till nästa objekt
<b>HÖGER LÄGESKNAPP</b>	Välj objektet under ditt finger
<b>VÄNSTER PANORERINGSKNAPP</b>	Panorera punktraden åt vänster
<b>HÖGER PANORERINGSKNAPP</b>	Panorera punktraden åt höger
<b>VÄNSTER VÄLJARKNAPP</b>	Aktivera Tillbaka-knappen om den finns
<b>HÖGER VÄLJARKNAPP</b>	* Aktivitetskommando (starta/stoppa)

<b>Kontroll</b>	<b>Funktion</b>
<b>VÄNSTER VICKKNAPP UPP</b>	Bläddra uppåt en sida
<b>VÄNSTER VICKKNAPP NER</b>	Bläddra neråt en sida
<b>HÖGER VICKKNAPP UPP</b>	Bläddra en sida åt vänster
<b>HÖGER VICKKNAPP NER</b>	Bläddra en sida åt höger

\* Aktivitetskommando:

Startar och stoppar den aktuella aktiviteten. Till exempel: Besvarar och lägger på ett telefonsamtal; startar och stoppar uppspelningen av musik och video; startar och stoppar tidtagaruret; startar och stoppar videoinspelningen; tar en bild i Kamera; startar och stoppar röstmemoinspelningen; pausar och återupptar uppspelningen av röstmeddelanden; stoppar inspelningen av eget hälsningsmeddelande till röstbrevlådan.