

i-loview



Användarmanual

Var god läs omsorgsfullt igenom denna manual för att försäkra dig om att du använder produkten på ett säkert och korrekt sätt.

VIKTIGT: Vårdslös användning eller felaktig användning av produkten kan förorsaka eldsvåda, personskador eller allvarliga skador på produkten.

- För att förhindra elektrisk chock eller eldsvåda, använd inte en skadad nätpänningskontakt eller ett eluttag som inte passar.
- För att förhindra elektronisk chock, vidrör inte nätpänningskontakten med blöta händer.

VIKTIGT: Felaktig användning av produkten kan resultera i personskador eller skador på enheten.

- Använd endast nätadaptern som medföljer produkten. En annan nätadapter kan skada enheten.
- Använd inte denna enhet i fuktiga miljöer såsom ett badrum eller duschrum.
- Placera inte tunga saker ovanpå enheten.
- Försök inte plocka isär, göra om eller reparera enheten. Detta kan skada enheten och göra garantin för denna produkt ogiltig.
- Efter 6 månaders användning kan batteriets livslängd förkortas.
- Håll produkten borta från direkt solljus och extrema temperaturer. Displayen (0,16) kanske inte fungerar ordentligt. Den rekommenderade temperaturen vid användning är mellan 0°C~ 35°C.

INNEHÅLL

1. Kartongen	4
2. Instruktioner innan användning	4
3. Konfigurering	5
4. Kommandon och funktioner	10
(1) Ljud PÅ/AV	10
(2) Batteristatus	10
(3) Spara bild	10
(4) Magiskt läge	10
(5) Återvänd till användarens favoritinställningar	11
(6) Energisparläge	11
(7) Belysning PÅ/AV	11
(8) Fabriksåterställning	11
(9) Meny	12
5. Tekniska specifikationer	15
6. Garanti	16
MEMO	17

1. Kartongen

**Tack så mycket för att du har valt i-loview.
Vänligen kontrollera att följande saker finns i
i-loviews kartong:**

- (1) i-loview (430B)
- (2) SD-kort
- (3) Nätspänningsadapter
- (4) Kabel för TV-ut
- (5) Bärväska
- (6) Handledsrem
- (7) Användarmanual
- (8) LCD-rengöringsduk


2. Instruktioner innan användning

- (1) Batteriet måste laddas i ungefär 3 timmar helt och hållet innan det första användningstillfället. Vänligen anslut den medföljande nätspänningsadaptern till DC-uttaget för att ladda batteriet.
- (2) Avlägsna LCD-skyddsfilmerna innan enheten används.
- (3) Var försiktig så att du inte låter främmande material fastna på kameranlinserna. I fall något främmande material finns på linserna, torka bort det med en mjuk trasa.

3. Konfigurering



3. Konfigurering (forts)

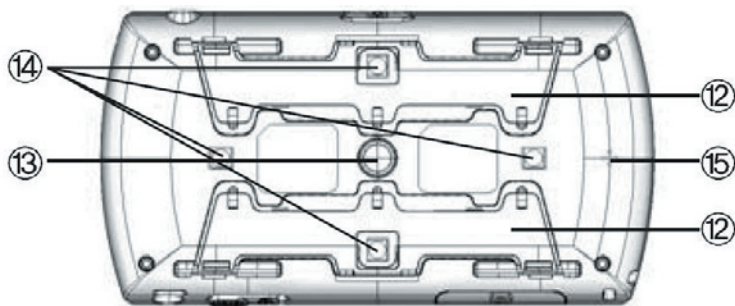

1. PÅ-/AV-knapp

För att slå på enheten, skjut knappen åt höger. För att slå av enheten, skjut knappen åt höger igen när strömmen är på. I fall det inträffar en driftsstörning eller ett tekniskt fel, skjut på-/avknappen åt höger i 6 sekunder för att stänga av systemet.

2. SD-kortfack

Du kan spara bilder och överföra bildfiler till andra enheter.

3. Konfigurering (forts.)

3. Zooma (+): Tryck på knappen för att förstora bilden som visas.

4. Zooma (-): Tryck på knappen för att minska storleken på bilden. Det finns 12 olika förstöringsnivåer. Varje gång du trycker på zoomningsknappen ökar eller minskar nivån enligt följande:

Zoomningsnivå	Avstånd till objektet	
	25 mm	55 mm
Nivå 1	3,5 x	1.5 x
Nivå 2	3,8 x	1.7 x
Nivå 3	4,6 x	2.0 x
Nivå 4	5,4 x	2.4 x
Nivå 5	6,5 x	2.8 x
Nivå 6	7,3 x	3.2 x
Nivå 7	8,2 x	3.6 x
Nivå 8	9,6 x	4.0 x
Nivå 9	11,2 x	4.7 x
Nivå 10	12,6 x	5.5 x
Nivå 11	14,0 x	6.1 x
Nivå 12	17,0 x	6.9 x

3. Konfigurering (forts.)

5. Färglägesknappen

Bilden på skärmen kan visas med fem färginställningar:

- Naturliga färger
- Vitt på svart bakgrund
- Svart på vit bakgrund
- Blått på gul bakgrund
- Gult på blå bakgrund

6. Stillbildsknappen

Tryck kort på knappen och bilden som enheten visar vid det tillfället kommer att bli kvar på skärmen. Du kan zooma in/ut på stillbilden och justera dess färg och ljus. Tryck på knappen igen för att återvända till det normala visningsläget.

7. Skärmljusknappen

Du kan ändra skärmens ljusstyrka i upp till fem nivåer. Varje gång du trycker på den här knappen kommer ljusstyrkan att öka med en nivå. Om du på nivå 5 trycker på knappen igen kommer ljuset att återvända till nivå 1.

8. Pilknappen

Du kan röra pilknappen åt höger, vänster, uppåt och neråt samt trycka på knappen för att välja en önskad meny eller ett menyalternativ.

- a) Normalt läge, Stillbild Du kan flytta runt en förstora bild genom att på förstöringsnivå 2 eller högre röra pilknappen åt höger, vänster, uppåt eller neråt.
- b) Visa sparade bilder
Du kan välja och visa sparade bilder.

3. Konfigurering (forts.)

- c) Menyfönstret Du kan gå till en annan meny genom att röra pilknappen åt höger eller vänster. Tryck på knappen för att välja alternativet du vill använda.

9. Anslutning för TV-/skärm-ut

Du kan ansluta din i-loview till en TV eller datorskärm. I TV-läget kan du inte komma åt menyn.

10. DC-uttag

Du kan sätta i nätspänningsadaptorn här för att ladda batteriet.

11. Batteriladdningsindikator

Indikatorn visar batteriladdningens status. Lampan är röd när du laddar batteriet och den kommer att slå om till grönt efter att det har laddats fullt.

12. Ben

Du kan vika ut de här benen för att låta enheten vila på ytan av det som du läser.

13. Kamera

Var försiktig så att du inte låter främmande material fastna på kameranlinserna. I fall något främmande material fastnar på linserna, torka bort det med en mjuk trasa.

14. LED-lampor

15. Högtalare

16. LCD-skärm

17. Fäste för rem

Detta remfäste används för att knyta fast den medföljande remmen.

4. Kommandon och funktioner

(1) Ljud PÅ/AV

Du kan slå på/av ljudet genom att trycka och hålla inne zoomningsknappen (+) samt ljusknappen i 2 sekunder eller mer.

(2) Batteristatus

Statusen för den återstående batteriladdningen visas normalt inte men indikatorn dyker upp när batteriladdningen fallit till 30 procent av full kapacitet. Du kan kontrollera statusen för återstående batteriladdning genom att samtidigt trycka zoomningsknappen (+) och färglägesknappen i 2 sekunder eller mer. Indikatorikonen försvinner i fall du trycker på knapparna på samma sätt igen.

(3) Spara bilder

I fall du trycker och håller inne stillbildsknappen i 2 sekunder eller mer kommer kameraikonen att dyka upp på skärmen. Bilden på skärmen kan sparas som en bildfil på SD-kortet. När bilden väl har sparats kommer kameraikonen att försvinna.

(4) Magiska läget

I fall du trycker och håller inne färglägesknappen i 2 sekunder eller mer och ordet [Magic] visas har enheten bytt till det magiska läget med vilket texten ser tydligare ut. Detta läge är användbart när du skriver ditt namn eller skriver upp någonting. Tryck och håll inne knappen igen i 2 sekunder eller mer eller vänta 2 minuter för att återvända till det normala läget.

4. Kommandon och funktioner (forts.)

(5) Återvänd till användarens favoritinställningar

I fall du trycker och håller inne zoomningsknappen (-) kan du återställa dina favoritinställningar som du sparat via menyalternativet Save Settings.

(6) Energisparläge

I fall du lämnar enheten påslagen och oanvänd i 3 minuter går den automatiskt in i energisparläget. Om enheten lämnas i ytterligare 3 minuter efter att den gått in i energisparläget slås strömmen automatiskt av.

(7) Belysning PÅ/AV

Du kan slå på/av belysningen genom att trycka och hålla inne Brt-knappen i 2 sekunder eller mer.


(8) Fabriksåterställning

I fall du slår av strömmen med zoomningsknappen (+) intryckt startas enheten automatiskt om och återställs till tillverkarens standardinställningar.

4. Kommandon och funktioner (forts.)

(9) Meny

För att visa menyn, tryck och håll samtidigt inne knapparna 5 och 7 i 3 sekunder eller mer. Gå med pilknappen åt höger eller vänster och menyn kommer att visas i nedanstående ordning. Tryck på pilknappen för att välja ett alternativ. När du befinner dig under ett menyalternativ kan du gå tillbaka till den övre menynivån genom att samtidigt trycka och hålla inne knapparna 5 och 7 i 3 sekunder eller mer.

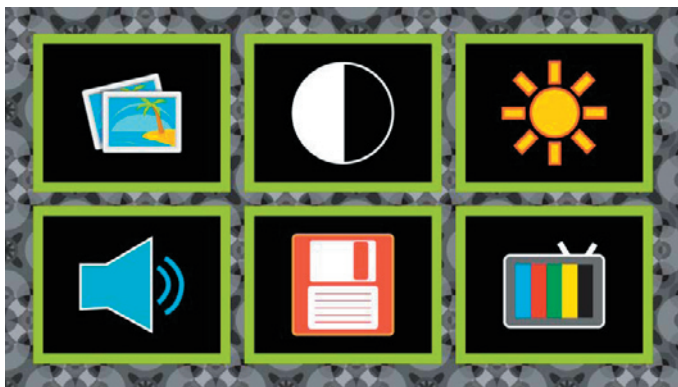

4. Kommandon och funktioner (forts.)



View Photo (visa foto): Detta alternativ låter dig visa bilderna som sparats på SD-kortet. Du kan visa andra bilder genom att förflytta vyn åt höger eller vänster. I fotovisningsläget kan du också zooma in/ut på bilderna samt justera deras färger och ljusnivåer.

Tryckning på stillbildsknappen kommer att återställa den förstörade bilden till dess originalstorlek.

I fall du vill radera bilden på skärmen, tryck på pilknappen.



YES NO

Vänligen tryck på pilknappen en gång till för att bekräfta raderingen. Om du inte vill radera bilden på skärmen kan du välja No genom att gå med pilknappen åt höger och trycka på pilknappen för att bekräfta.

4. Kommandon och funktioner (forts.)



Image Contrast (bildkontrast): Detta alternativ låter dig justera kontrasten för bilderna som visas på skärmen. Det finns 16 kontrastnivåer.



Light Brightness (ljusstyrka): Detta alternativ låter dig justera LED-lampans ljusstyrka. Det finns 4 olika nivåer.



Sound Volume (ljudvolym): Du kan slå på, av samt justera volymen för ljuden som hörs när du trycker på knapparna. Det finns 16 olika nivåer.



Save Settings (spara inställningar): Du kan spara dina favoritinställningar för följande: Zoomningsnivå, färg, skärmens ljusstyrka, bildkontrast, lampans ljusstyrka samt ljudvolym. Tryck på zoomningsknappen (-) i 2 sekunder eller mer för att återvända till de sparade inställningarna.



TV OUT (TV-ut): TV-visningen kan ställas in på antingen NTSC- eller PAL-formatet (Sverige).

5. Tekniska specifikationer

Förstoringsintervall	1,5x - 17x
Färglägen	Naturliga färger Vitt på svart bakgrund Svart på vit bakgrund Blått på gul bakgrund Gult på blå bakgrund
Skärm 4,3"	Widescreen TFT-LCD (16:9)
SD-kort	Max. 32 GB SD-kort stöds
Batteri	Uppladdningsbart litiumpolymer - Kontinuerlig användning: 3,5 timmar - Uppladdningstid: 3,5 timmar
Vikt	220 gram
Storlek	146(B) x 83(H) x 22,5(D) mm
Förutsättningar för användning	Temperatur: 0°C~ 35°C

Denna apparat är en EMC-registrerad enhet som kan användas var som helst, inklusive bostadsmiljöer.

6. Garanti

- (1) Garantiperioden gäller i ett (1) år, bortsett från batteriet som har en garanti på sex (6) månader.
- (2) Garantin täcker inte några produktproblem som förorsakats på grund av användaren.

MEMO

C & P
Creativity and Personality for Assistive Technology
www.chrisparkdesign.com

Designed in Newport Beach, California
Made in South Korea

i-loview

Designed By Chris Park



Adress: Ankdammsgatan 22, 171 43 Solna,

Tel: 08-446 63 60 **Fax:** 08-446 63 69

E-post: info@insyn.se

www.insyn.se