

Användarmanual i-loview 7



insyn



Introduktion





Varning

Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten.

Viktigt

Vårdslös eller felaktig användning av produkten kan förorsaka en eldsvåda, personskador eller allvarlig skada på produkten.


- För att förhindra elektrisk chock eller eldsvåda, använd inte en skadad nätadapter eller ett eluttag som inte passar.
- För att förhindra elektrisk chock, vidrör inte nätadaptern med våta händer.



Viktigt



Felaktig användning av produkten kan resultera i personsador eller skador på enheten. Använd endast nätadaptern som medföljer produkten. Andra adaptrar kan skada enheten.

- Använd inte denna enhet i fuktiga miljöer såsom ett badrum eller en dusch.
- Placera inte tunga saker ovanpå enheten.
- Försök inte plocka isär, göra om eller reparera enheten. Det kan skada enheten och kommer att göra garantin ogiltig.
- Efter sex (6) månaders användning kan batteriets livslängd förkortas.

- 
- Håll produkten borta från direkt solljus och extrema temperaturer. Skärmen kanske inte fungerar korrekt annars. Den rekommenderade temperaturen vid användning är
 - mellan 0 och 35 grader Celsius.

Innehållsförteckning

1. Kartongen	8
2. Instruktioner före användning	9
3. Konfigurering	10
4. Kommandon och funktioner	19
5. Tekniska specifikationer	29
6. Garanti	32

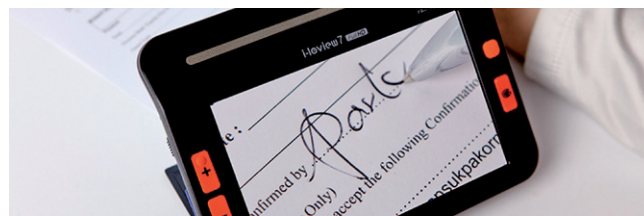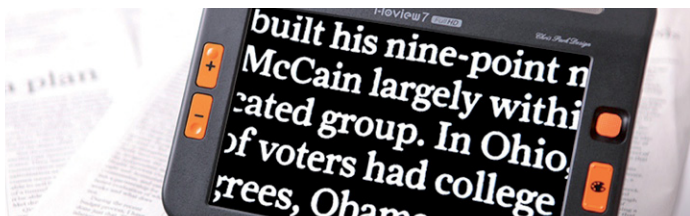

1. Kartongen


Vänligen kontrollera att följande saker finns i kartongen med **i-loview 7 (700Z)**:


- (1) Det bärbara förstoringsglaset **i-loview 7 (700Z)**
- (2) SD-kort
- (3) Nätadapter
- (4) Bärväska
- (5) Användarmanual
- (6) Mikrofibertrasa för rengöring av skärmen

2. Instruktioner före användning

- (1) Batteriet måste laddas upp helt och hållet i ungefär 4 timmar innan den första användningen. Var god anslut den medföljande nätadaptern till DC-uttaget för att ladda upp batteriet.
- (2) Ta bort LCD-skyddsfilmerna innan du använder enheten.

3. Konfigurering

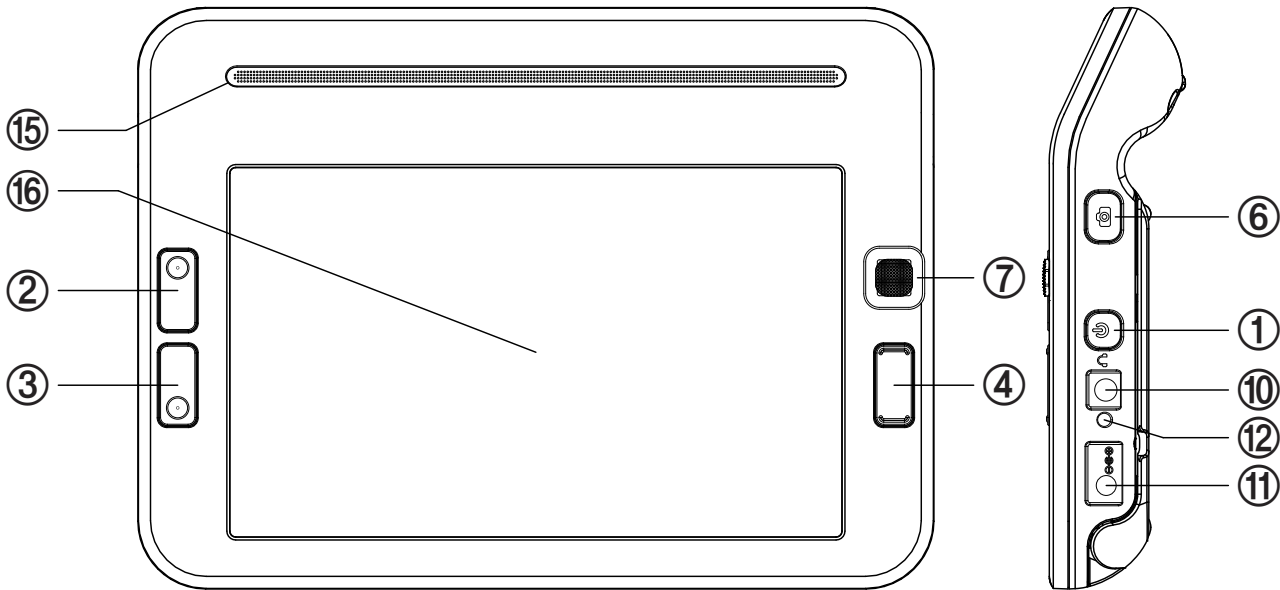

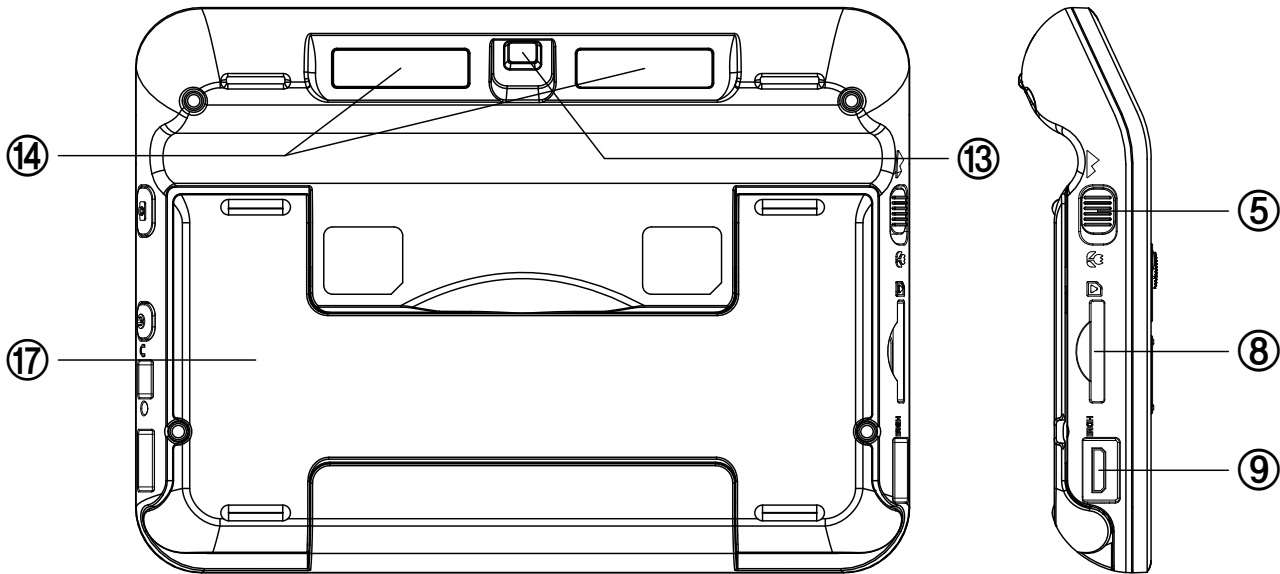

① På-/avknapp

- **Slå på:** För att slå på enheten, tryck på knappen i 2 sekunder eller mer.
- **Slå av:** För att slå av enheten, tryck på knappen i 2 sekunder eller mer igen när enheten är påslagen.
- I fall du råkar ut för ett användnings- eller funktionsfel, tryck på knappen i 6 sekunder för att slå av systemet.

② Zoomningsknapp (+)

Tryck på knappen för att förstora skärmbilden.

③ **Zoomningsknapp**


Tryck på knappen för att minska storleken på skärmbilden. Förstoringsnivåerna är som följer:

- **Live-bild:** 1,8x ~ 50x
- **Digitalbild inklusive förstoring i fotoläget:** ~ 275x

④ **Färglägesknapp**

Bilden på skärmen kan visas med åtta (8) färglägen:

- Naturliga färger
- Vit text på svart bakgrund
- Svart text på vit bakgrund
- Gul text på svart bakgrund

- 
- Svart text på gul bakgrund
 - Grön text på svart bakgrund
 - Blå text på gul bakgrund
 - Gul text på blå bakgrund

⑤ **Vylägesväljarknapp**
Genom att ändra läget för denna knapp kan du ställa in visningsläget på antingen nära eller längre bort.

- **Läget nära (blomikon):**
När du tittar på saker inom en meter från dig.
- **Visningsläget längre bort (bergsikon):**
När du tittar på saker mer än en meter bort från dig.

⑥ **Fotoknapp**

Tryck kort på knappen och bilden på skärmen kommer att frysas. Du kan sedan zooma in/ut på stillbilden samt justera dess färger och skärmens ljusstyrka. Tryck på knappen igen och skärmbilden kommer inte längre att vara fryst.

⑦ **Pilknapp**

Du kan trycka **pilknappen** åt **vänster, höger, uppåt** eller **neråt** för att navigera i menyer eller byta menynivå. Tryck på **pilknappen** för att välja det önskade menyalternativet.

1) Normalt läge, stillbild, visa foto

Du kan flytta runt en förstorad bild genom att trycka **pilknappen** åt **vänster, höger, uppåt** eller **neråt**.

2) Menyskärmen

Du kan gå till en annan meny genom att trycka **pilknappen uppåt** eller **neråt** samt byta menynivå genom att trycka **pilknappen** åt **vänster** eller **höger**. Tryck på **pilknappen** för att välja det önskade alternativet.

8) **SD-kortfack**

Används för att spara bilder samt överföra bildfiler till andra enheter.

9) **HDMI-uttag**

Du kan ansluta din **i-loview 7** till en TV eller datorskärm. I HDMI-läget stöds endast ökning/minskning av förstoringnivån samt frysning av skärmbilden.




⑩ **Hörlursuttag**

⑪ **DC-uttag**

Du kan ansluta nätadaptern här för att ladda batteriet.

⑫ **Batteriladdningsindikator**

Indikatorn visar batteriladdningsstatusen. Indikatorn är **röd** när batteriet laddas och kommer att ändras till **grönt** när det är fulladdat.

- 
- ⑬ **Kamera**
Var försiktig så att du inte låter främmande material fastna på kameranlinsen. I fall något främmande material finns på linsen, torka bort det med den medföljande mikrofibertrasan.
 - ⑭ **LED-lampor**
 - ⑮ **Högtalare**
 - ⑯ **LCD-skärm**
 - ⑰ **Ben**
När du placerar enheten på läsmaterialet, vik ut benet.

4. Kommandon och funktioner

① **Ljud på/av**
Du kan slå på/av ljudet genom att trycka och hålla nere zoomningsknappen och färglägesknappen i tre sekunder eller mera.

② **Batteristatus**
Statusen för den kvarvarande batteriladdningen visas normalt inte utan indikatorn visas när batterinivån faller till 30 % av full laddning. Du kan kontrollera statusen för den kvarvarande batteriladdningen genom att trycka på färglägesknappen i tre sekunder eller mera. Indikatorikonen försvinner om du trycker på någon av knapparna igen.



3

Spara bilder

Om du trycker och håller nere stillbildsknappen i tre sekunder eller mera kommer kameraikonen att dyka upp på skärmen. Bilden på skärmen kan sparas som en bildfil på SD-kortet. När bilden har sparats kommer kameraikonen att försvinna.

4

Fabriksåterställning

I fall du samtidigt trycker pilknappen uppåt och färglägesknappen i tre sekunder eller mera kan du återställa enheten till fabriksinställningarna.



⑤ **Energisparläge**

Om du lämnar enheten påslagen utan att användas i tre minuter går den automatiskt in i energisparläget. I fall enheten lämnas i ytterligare tre minuter efter att den har gått in i energisparläget slås strömmen automatiskt av.

⑥ **Visa foto**

Om du samtidigt trycker på zoomningsknappen och pilknappen åt höger i tre sekunder eller mera visas bilderna som lagrats på SD-kortet.




⑦ **Återgå till personliga inställningar**

Om du samtidigt trycker på zoomningsknappen och pilknappen neråt i tre sekunder eller mera återgår du till de sparade personliga inställningarna.

⑧ **Meny**

För att visa menyn, tryck samtidigt på zoomningsknappen och färglägesknappen i tre sekunder eller mera.


4. Kommandon och funktioner

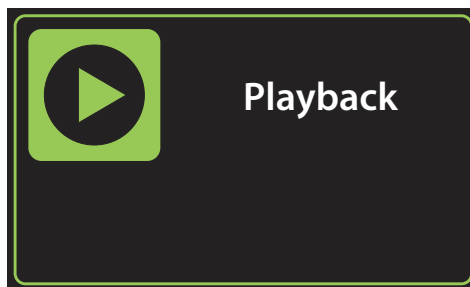


Playback Photo (Visa foto): Detta låter dig visa bilderna som har sparats på SD-kortet. Du kan visa andra bilder genom att trycka **pilknappen** åt **vänster** eller **höger**. I fotovisningsläget kan du också zooma in/ut på bilderna samt justera deras färger och skärmens ljusnivå. Tryckning på **fotoknappen** kommer att återställa den förstörade bilden till dess originalstorlek. I fall du vill radera bilden på skärmen, tryck på **pilknappen**.



Tryck på **pilknappen** en gång till för att bekräfta. I fall du inte vill radera bilden på skärmen kan du välja **[NO]** genom att trycka **pilknappen** åt **vänster** eller **höger** och trycka på **pilknappen** för att bekräfta.

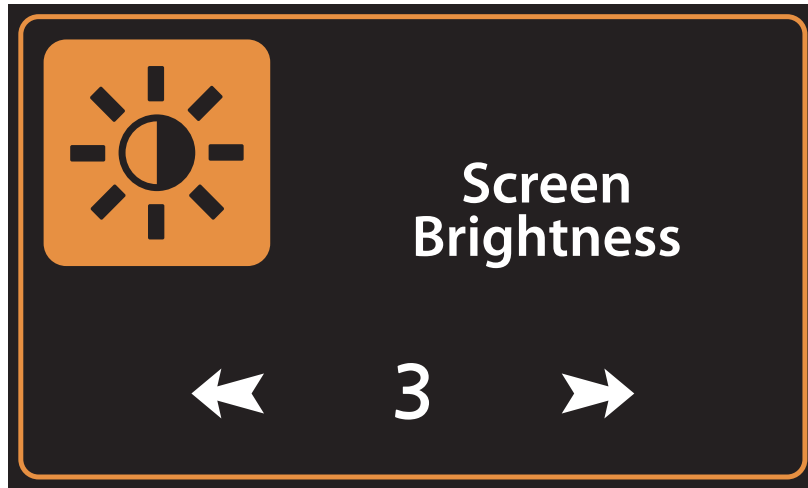


Screen Brightness (Skärmens ljusstyrka): Detta låter dig justera skärmens ljusstyrka. Det finns fem (5) olika nivåer.

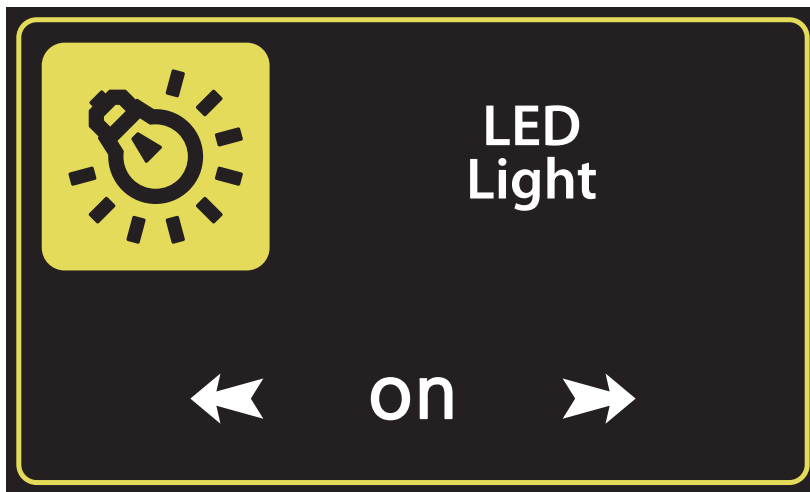

LED Light (LED-lampa): Detta låter dig slå av/på LED-lampan.



Sound Volume (Ljudvolym): Detta låter dig justera ljudvolymen. Det finns fem (5) olika nivåer.

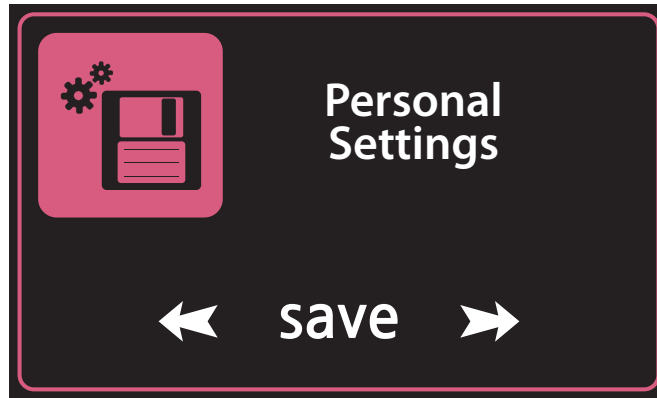

Personal Settings (Personliga inställningar): Om du väljer **[save]** kan du spara dina personliga inställningar för färgläget, skärmens ljusstyrka, LED-lampans status och ljudvolymen. Du kan välja **[return]** för att återvända till de sparade personliga inställningarna.



5. Tekniska specifikationer

Förstoringsnivåer	0.3x ~ 275x (inklusive digital zoom i fotoläget) 0.3x ~ 50x (vid live-bild)
Färglägen	Naturliga färger Vit text på svart bakgrund Svart text på vit bakgrund Gul text på svart bakgrund Svart text på gul bakgrund Grön text på svart bakgrund Blå text på gul bakgrund Gul text på blå bakgrund


Skärm	7" widescreen TFT-LCD (16:9)
SD-kort	Stöd för max. 64 GB
Batteri	Uppladdningsbart litumpolymer-batteri - Kontinuerlig användning: 4,1 timmar (skärmljusstyrka nivå 3) - Uppladdningstid: 4,0 timmar
Vikt	535 gram
Storlek	200 mm (B) x 146 mm (H) x 25 mm (D)
Användningsförhållanden	Temperatur: 0 ~ 35 grader Celsius

Detta är en EMC-registrerad enhet som kan användas var som helst inklusive i bostäder.

- FCC del 15 Klass B
- CISPR 22 Klass B

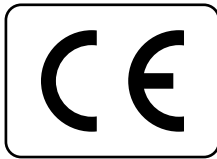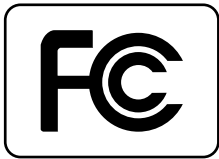

Denna enhet bär märkning för godkännande från FCC och CE. Information om kassering i andra länder utanför Europeiska Unionen kasseringsmetod.

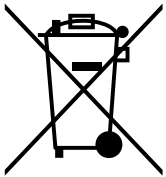

Dessa symboler är endast giltiga inom Europeiska Unionen. Om du önskar kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller din återförsäljare och fråga efter rätt kasseringsmetod.

6. Garanti

- (1) Garantien gäller för ett (1) år, bortsett från batteriet som har en garanti på sex (6) månader.
- (2) Garantien täcker inte några produktproblem förorsakade på grund av felaktig användning eller misskötsel.



Tel: 010-455 04 01, **E-post:** info@insyn.se

www.insyn.se

