

Bruksanvisning

Dotpad X



Ver. 1.0



1. Innehåll

1.	Innehåll.....	2
2.	Om Dot Pad X	4
2.1	Introduktion	4
2.2	Vad är Dot Pad X.....	4
2.2.1	Vad finns i förpackningen	4
2.3	Innan du använder din Dot Pad X	5
2.4	Dot Pad X Utseende.....	5
2.4.1	Dot Pad X sett uppifrån.....	5
2.4.2	Dot Pad X höger sida.....	6
2.4.3	Dot Pad X vänster sida	7
2.4.4	Dot Pad X undersida	7
3.	Grundläggande funktioner	7
3.1	Slå på Dot Pad X.....	7
3.2	Stänga av Dot Pad X.....	8
3.3	Ladda Dot Pad X	8
3.3.1	Kontrollera batterinivån	8
3.4	Kontrollera laddningsstatus.....	9
3.4.1	Laddning när enheten är påslagen.....	9
3.4.2	Laddning när enheten är avstängd	10
3.4.3	Laddning klar	10
4.	Använda Dot Pad X.....	10
4.1	Använda Dot Pad X med Dot Canvas	10
4.2	Använda Dot Pad X med Dot Book (TBD).....	11
4.3	Använda Dot Pad X med Voiceover i	11

4.4	Använda Dot Pad X med JAWS (TBD.....	11
4.5	Använda Dot Pad X med NVDA.....	12
5.	Specifikationer.....	12
5.1	Hårdvaru Specifikationer	12
5.2	Kommunikationsspecifikationer	13
6.	Handhavande och säkerhetsföreskrifter	13
7.	Kundsupport.....	18

2. Om Dot Pad X

2.1 Introduktion

Välkommen till Dot-familjen! Vi är glada att du har valt Dot Pad X. Dot Pad X är utformad för att ge en rik taktil grafik och en upplevelse av flerradig punktskrift, vilket förbättrar tillgängligheten till visuell information och ökar produktiviteten för synskadade användare. Dot Pad X representerar ett betydande framsteg inom hjälpmedelstekniken och förenar taktil grafik och punktskrift i en innovativ enhet.

2.2 Vad är Dot Pad X

Dot Pad X är en taktil informationsdisplay som kan visa både punktskrift och taktil grafik samtidigt. Denna funktion gör det möjligt för användare att få tillgång till ett brett utbud av visuellt innehåll i ett taktilt format, vilket gör det lättare att förstå och interagera med komplex information. Dessutom kan användare med hjälp av flerradig punktskrift se flera rader punktskrift på en enda skärm, vilket gör det möjligt att ta del av detaljerat innehåll på ett mer effektivt sätt.

Som en taktil display är Dot Pad X kompatibel med skärmläsare som JAWS, NVDA och Voiceover. Dessutom måste den anslutas till mjukvarutjänster som utvecklats av Dot eller tredjepartsutvecklare som använder Dots SDK, vilket möjliggör mångsidig användning på olika plattformar och i olika applikationer.

2.2.1 Vad finns i förpackningen

När du köper en Dot Pad X ingår följande komponenter:

1. Dot Pad X: 1 enhet
2. Dot Pad X-fodral: 1 st
3. Dot Pad-skyddsfodral: 1 st
4. C till C-kabel: 1 st



5. 300-cells skydd: 3 st
6. 20-cells skydd för skyddsceller: 3 st
7. Skruvmejsel för byte av skydd för skyddsceller: 1 st
8. Extra skruvar: 10 st
9. Bruksanvisning: 1 set

2.3 Innan du använder din Dot Pad X

- Ladda Dot Pad X helt innan du använder den för första gången. Vi rekommenderar att du laddar den i minst 2 timmar med den medföljande USB-C-kabeln och en certifierad strömadapter som uppfyller de angivna specifikationerna (5 V, 3 A).
- När Dot Pad X är fulladdad kan den normalt användas i 8 timmar eller mer. Den faktiska batteritiden kan variera beroende på användningsmönster och miljöförhållanden.
- När batterinivån når nivå 5 (cirka 90 % eller högre) saktar laddningshastigheten för att förhindra överladdning och förlänga batteriets livslängd. Det kan ta upp till 2 timmar att ladda batteriet helt från nivå 5, men du kan koppla bort laddaren och använda din Dot Pad X även om laddningsmeddelandet inte visas.
- Dot Pad X måste vara ansluten till en värd Din Dot Pad X via Bluetooth eller en USB-kabel. När både Bluetooth och USB är anslutna samtidigt har USB företräde.

2.4 Dot Pad X Utseende

När du tar ut Dot Pad X ur förpackningen och placerar den på ett skrivbord är Dot Pad X korrekt placerad när huvuddelen är något lutad nedåt mot dig.

2.4.1 Dot Pad X sett uppfifrån

När Dot Pad X är korrekt orienterad består ovansidan av följande



komponenter, ordnade från närmast till längst bort från användaren:

- Textdisplayområde: Detta område består av 20 punktskriftsceller arrangerade i en horisontell rektangulär ram. Varje cell följer standardavståndet för punktskrift, vilket möjliggör samtidig visning av upp till 20 punktskriftstecken.
- Kontrollknappar: Från vänster till höger finns kontrollknapparna, föregående panoreringstangent, funktionsknapparna (F1, F2, F3, F4) och nästa panoreringstangent.
- Taktila indikatorer finns på tangenterna F1 och F4 för att skilja dem från de andra. Panoreringstangenterna är triangulära, vilket gör dem lätta att skilja från de ovala funktionstangenterna.
 - ✕ Panoreringstangenterna används för att navigera till föregående eller nästa rad, baserat på det 20-celliga.
- LED-statusindikator: LED-statuslampan sitter längst till höger i kontrollknappsområdet och visar Dot Pad X:s status, t.ex. ström, Bluetooth-anslutning och laddning, med hjälp av färger och blinkmönster.
- Grafisk visningsyta: Detta är den största ytan på framsidan av Dot Pad X och består av 300 8-punkts punktskriftsceller (30 kolumner × 10 rader).

Cellerna i detta område är tätare placerade än i textområdet, med jämnt fördelade stift i alla riktningar, vilket möjliggör exakt taktil återgivning av grafiskt innehåll.

Den kan visa skärminnehåll i realtid från iPhones eller iPads, samt taktila bilder från dedikerade applikationer som är kompatibla med Dot Pad X.

2.4.2 Dot Pad X höger sida

På höger sida av Dot Pad X finns en USB-C-port märkt med punktskriftstecknet för bokstaven "p". Denna port är endast avsedd för laddning av enheten och stöder inte dataöverföring. Under USB-C-porten finns strömbrytaren. För att slå på Dot Pad X, skjut strömbrytaren framåt, bort från dig, så känner du en lång vibration som bekräftelse. För att stänga av den, skjut strömbrytaren bakåt, mot dig.



2.4.3 Dot Pad X vänster sida

På vänster sida av Dot Pad X finns en USB-C-port märkt med "d". I punktskrift (punkterna 1, 4 och 5) ansluts den till skärmläsare och appar eller utför firmwareuppdateringar med Dot Canvas.

✂ Observera: Denna port stöder inte laddning. Använd alltid USB-C-porten på höger sida för att ladda din Dot Pad X.

2.4.4 Dot Pad X undersida

På undersidan av Dot Pad X hittar du batterifacket och skruvarna som ger åtkomst till skyddsfilmerna som täcker punktskriftscellerna. Det inbyggda batteriet kan inte bytas ut av användaren. Om byte är nödvändigt måste det utföras av Dot Inc. eller en auktoriserad servicepartner.

Skyddsfilmerna på punktskriftscellernas yta kan bytas ut genom att ta bort skruvarna på undersidan av din Dot Pad X.

För mer information eller hjälp angående skyddsfilmerna, kontakta Dot Inc.s kundsupport.

3. Grundläggande funktioner

I det här avsnittet presenteras de grundläggande funktionerna och meddelandena för Dot Pad X.

3.1 Slå på Dot Pad X

För att slå på Dot Pad X, skjut strömbrytaren framåt bort från dig – den sitter mitt på höger kant av din Dot Pad X. Din Dot Pad X kommer att vibrera länge, vilket indikerar att den startar.

Vid start visas Dot-logotypen på den grafiska displayen med 300 celler. Cirka 4 sekunder senare visas ett Bluetooth-ID med 4 tecken, bestående av versaler och siffror, i taktilt latinskt format.

Samma 4-teckens ID visas också i engelsk punktskrift (grad 1) på den 20-celliga textdisplayen, föregånget av prefixet "le", som står för Low Energy Bluetooth-läge. Detta indikerar att din Dot Pad X är redo att anslutas trådlöst till en iOS-enhet eller dator.



Denna 4-teckens ID är unik för varje enhet, så kontrollera koden när du ansluter din Dot Pad X till en PC eller iOS-enhet för att säkerställa korrekt parkoppling.

När enheten har startats blinkar LED-indikatorn i det nedre högra hörnet på din Dot Pad X med blått ljus, vilket indikerar att Dot Pad söker efter en värdenhet. När anslutningen har upprättats lyser LED-lampan med fast blått ljus (slutar blinka).

3.2 Stänga av Dot Pad X

För att stänga av Dot Pad X, skjut strömbrytaren bakåt mot dig. Alla punktskriftsnålar dras in och återställs, vilket indikerar att din Dot Pad X har stängts av korrekt. När du slår på din Dot Pad X igen, vänta minst 3 sekunder efter att du har stängt av den. Om strömmen slås på igen omedelbart kan det hända att nålarna inte har dragits in helt och att den tidigare punktskriftsdisplayen fortfarande är synlig. För att säkerställa korrekt initialisering, vänta alltid några sekunder innan du startar om din Dot Pad X.

3.3 Ladda Dot Pad X

Använd alltid USB-C-porten på höger sida av din Dot Pad X. Vi rekommenderar att du använder den medföljande USB-C-kabeln och en certifierad strömadapter som stöder QC 3.0 och har en utgång på DC 5V / 3A.

För optimal prestanda är det bäst att använda din Dot Pad X när batteriet är fulladdat. Om batterinivån är låg, se till att din Dot Pad X är tillräckligt laddad innan du använder den.

Du kan kontrollera den aktuella batterinivån med hjälp av metoden som beskrivs i avsnittet nedan.

3.3.1 Kontrollera batterinivån

För att kontrollera batterinivån på Dot Pad X, se till att din Dot Pad X är påslagen.



Håll sedan in både föregående och nästa panoreringstangent samtidigt i minst 1,5 sekunder och släpp.

Batterinivån är indelad i fem nivåer och kan kontrolleras genom vibrationer och taktil feedback.

- När Bluetooth inte är anslutet visas batterinivån på den 20-celliga textdisplayen som taktil feedback i 7 sekunder, tillsammans med vibrationsfeedback.
- När Bluetooth är anslutet ges endast vibrationsåterkoppling och ingen information visas på 20-cellersdisplayen.

Batterinivån är indelad i fem nivåer, och varje nivå indikeras av antalet vibrationer.

Antalet vibrationer motsvarar batterinivån: 5 för nivå 5, 4 för nivå 4 och så vidare ner till 1 för nivå 1.

Antal vibrationer för	5	4	3	2	1
Batterinivå	Nivå 5	Nivå 4	Nivå 3	Nivå 2	Nivå 1

Förutom vibrationssignal visas batterinivån även taktilt på den 20-celliga textdisplayen.

Batterinivån är indelad i fem nivåer (nivå 1 till nivå 5) och cellerna fylls sekventiellt enligt aktuell batterinivå.

Taktil feedback					
Batterinivå	Nivå 5	Nivå 4	Nivå 3	Nivå 2	Nivå 1

Om din Dot Pad X används intensivt när batteriet är på nivå 1 kan det bli helt urladdat och stängas av oväntat.

Om din Dot Pad X vibrerar två gånger var 5:e minut betyder det att batterinivån är låg och att den behöver laddas. När detta meddelande visas ska du ladda batteriet till nivå 5 innan du använder enheten igen. Det tar normalt cirka 2 timmar och 30 minuter att ladda batteriet från denna låga batterinivå till nivå 5.

3.4 Kontrollera laddningsstatus

3.4.1 Laddning när enheten är påslagen

När Dot Pad X är påslagen men inte ansluten till en värdenhet via



Bluetooth visar Dot Pad X flera indikatorer under laddningen. En röd LED-lampa tänds i det nedre högra hörnet av Dot Pad X för att indikera att laddningen pågår. Samtidigt avges en vibrationssignal för att visa aktuell batterinivå. Dessutom visar den 20-celliga textdisplayen en taktil signal som motsvarar batterinivån, så att användaren kan kontrollera laddningsstatus genom beröring. När Dot Pad X är påslagen och ansluten till en värdenhet via Bluetooth indikeras laddning med en röd LED-lampa i det nedre högra hörnet av din Dot Pad X, tillsammans med vibrationssignaler som återspeglar den aktuella batterinivån. I detta läge visas ingen taktil feedback på den 20-celliga textdisplayen för att undvika att störa användarupplevelsen under Bluetooth-kommunikationen.

3.4.2 Laddning när enheten är avstängd

När din Dot Pad X är avstängd ges ingen vibrationssignal för att indikera batterinivån. Den röda LED-indikatorn i det nedre högra hörnet lyser dock, så att användarna kan se att laddningen pågår.

3.4.3 Laddning klar

Om Dot Pad X slås på under laddning vet du att batteriet är fullt när den röda LED-indikatorn slocknar och du känner två vibrationer. Om Dot Pad X stängs av under laddning slocknar den röda LED-lampan fortfarande när batteriet är fulladdat, men du får ingen vibrationssignal.

4. Använda Dot Pad X

Dot Pad X är en punktskrämsenhet som måste anslutas till andra enheter, såsom en bärbar dator, iPad eller iPhone. Den erbjuder en ny upplevelse av att använda punktskrift och taktila bilder genom programvara som utvecklats baserat på Dot Pad SDK, tillsammans med skärmläsare som JAWS, NVDA och Voiceover, vilket ger flerradig och taktil grafisk punktskrift. Din upplevelse av Dot Pad X.

4.1 Använda Dot Pad X med Dot Canvas



Dot Canvas är ett mångsidigt digitalt verktyg för Dot Pad X som utvecklats av Dot Inc. och finns både som app och webbaserad plattform. Det gör det möjligt för användare att skapa, redigera, spara och dela taktila bilder och punktskriftstext. Dot Canvas är skräddarsytt för synskadade och blinda användare och underlättar skapandet av rikt innehåll som stimulerar flera sinnen, vilket förbättrar inlärning, kreativitet och tillgänglighet. För omfattande användningsinstruktioner, se den senaste manualen "Använda Dot Pad X med Dot Canvas".

Länk för nedladdning: [Använda Dot Pad X med Dot Canvas](#)

Länk till Dot Canvas webbplats: <https://apps-dotincorp.com/>

Länk för nedladdning av Dot Canvas-appen:

<https://apps.apple.com/kr/app/dot-canvas/id1613110785>

4.2 Använda Dot Pad X med Dot Book (TBD)

4.3 Använda Dot Pad X med Voiceover i

Voiceover är Apples avancerade skärmläsare som är utformad för att hjälpa användare med synnedsättning genom att ge både ljud- och taktil feedback. När Voiceover används tillsammans med Dot Pad X ger den taktil feedback för både text och grafik, vilket erbjuder en omfattande och intuitiv tillgänglighetslösning.

Denna kombination förbättrar interaktionen mellan din Dot Pad X och användaren avsevärt.

För detaljerade instruktioner, se den senaste guiden med titeln "Använda Dot Pad X med Voiceover".

Länk för nedladdning: [Använda Dot Pad X med VoiceOver](#)

4.4 Använda Dot Pad X med JAWS (TBD)



4.5 Använda Dot Pad X med NVDA

NVDA (NonVisual Desktop Access) är en gratis och öppen källkodsbaserad skärmläsare som utvecklats av NV Access för Microsoft Windows. Dot Inc. tillhandahåller en dedikerad NVDA-drivrutin för att säkerställa sömlös kompatibilitet med Dot Pad X, vilket förbättrar den taktila grafiska upplevelsen för användarna. För detaljerade instruktioner om hur du använder Dot Pad X effektivt med NVDA, se den senaste guiden med titeln "Använda Dot Pad X med NVDA".

Länk för nedladdning: [Använda Dot Pad X med NVDA](#)

5. Specifikationer

5.1 Hårdvaru Specifikationer

- Taktil display: 300 celler
- Punktskrift: 20 celler
- Cellskydd: Separata skydd för 300-cells (grafik) och 20-cells (text) områden
- Processor: ARM Cortex-M4, 32-bitars, 120 MHz
- RAM: 64 KB
- Flashminne: 128 KB.
- Externt minne: Ej stöd.
- Trådlöst: Bluetooth LE 5.0
- Sensor/kamera: Ingen
- Storlek: 273,5 (B) × 228,5 (D) × 31,0 (H) mm
- Vikt: Cirka 1 200 g ±10 %
- Funktionstangenter: 4
- Panoreringssknappar: Vänster, höger
- Strömbrytare: 1
- Vänster USB-C: Data och firmwareuppdateringar.
- Höger USB-C: Ström och laddning
- Batteri: Li-ion 3,60 V, 10,05 Ah, 36,18 Wh (1S3P)



- Laddning: DC 5 V / min. 3 A
- Snabbladdning: QC och PD stöds.
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 35 °C
- Förvaringstemperatur (kort): -20 °C ~ 45 °C
- Förvaringstemperatur (lång): -20 °C ~ 25 °C
- Återhämtningstid (min. temp): 24 timmar
- Luftfuktighet vid drift: 20 % ~ 75 % R.H.
- Förvaringsfuktighet: 10 % ~ 80 % R.H.
- Driftstryck: 500 ~ 1060 hPa

5.2 Kommunikationsspecifikationer

- Specifikation: Bluetooth 5.0 (LE, upp till 10 kbps)
- Utgångseffekt: 0 dBm.
- Datahastighet: 10 kbps
- Protokoll: GAP, GATT, SM, L2CAP, integrerade skydd för offentliga profiler.
- Känslighet: -90 dBm
- Frekvensband: 2,402 GHz – 2,480 GHz

6. Handhavande och säkerhetsföreskrifter

Innehållet i denna bruksanvisning kan skilja sig från den faktiska produkten, beroende på produktens programvaruversion, modellens specifikationer och användarens inställningar. Använd endast Dot Pad X för avsedda ändamål enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Var försiktig vid användning, eftersom produkten kan skadas vid stötar.

- Håll Dot Pad X torr. Om produkten används på en fuktig plats eller blir våt kan den sluta fungera korrekt.
- Dot Pad X har en inbyggd magnet. Placera den inte nära andra magnetiska produkter eller metaller. Det finns risk för skador på produkten.
- Använd Dot Pad X på ett bord på avstånd från kroppen. Vid användning i dammiga miljöer kan främmande föremål tränga in



och störa funktionen hos Dot Pad X.

- Använd endast tillbehör som tillhandahålls av Dot Inc. Användning av tillbehör från tredje part kan orsaka att produkten inte fungerar korrekt och kan leda till att användaren inte får garantiservice från Dot Inc.
- Dot Pad X har klarat EMC-testet (elektromagnetisk kompatibilitet). Situations- eller miljövariabler kan fortfarande orsaka störningar eller påverka signaler via omgivande produkter. Värmeutveckling och funktionsfel kan uppstå.
- Dot Pad X:s trådlösa överföringskraft följer RF-standarden (radiofrekvens). Om spänningen och temperaturen inte ligger inom standardintervallet kan produktens trådlösa överföringskraft dock bli instabil och påverka prestandan.
- Dot Pad X har klarat RSE-testet (Radiated Spurious Emission). Om Dot Pad X används med tillbehör som inte ingår i produkten kan det dock orsaka funktionsfel.
- Dot Pad X:s kortdistansfunktion för trådlös kommunikation uppfyller säkerhetsstandarderna för dataöverföring. Om programvaran eller firmware modifieras eller ändras utan tillstånd kan produktens säkerhet för dataöverföring fungera onormalt.
- Dot Pad X har klarat alla ovan nämnda kvalificeringstester utförda av kvalificerade laboratorier. Om produkten placeras i andra förhållanden som kan orsaka funktionsfel eller används på ett icke-normalt sätt kan produkten dock fungera på ett onormalt sätt. Vi rekommenderar att du stänger av Dot Pad X, kopplar bort strömmen, slutar använda Dot Pad X och kontaktar kundtjänst.
- Om tryck utövas medan punktskriftcellerna rör sig kan produkten sluta fungera normalt. I detta fall är det inte ett fel, så vi rekommenderar att du tar bort handen och försöker skriva ut önskad bild igen.
- Om produkten används i motsatt riktning kan den eventuellt inte återge bilden eller punktskriften korrekt.

- Vissa produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produkten.
- Om Dot Pad X:s firmware som tillhandahålls av Dot Inc. ändras eller appliceras på produkten via en inofficiell kanal kan det orsaka skador på produkten eller fel. I detta fall upphör garantin att gälla.
- Eftersom Dot Pad X kan utsättas för radiostörningar under användning kan den inte utföra tjänster som rör människors säkerhet.
- När Dot Pad X laddas kan produkttemperaturen stiga, och om batteriets temperatur stiger över en viss nivå kan laddningen av säkerhetsskäl stoppas automatiskt.

Använd produkten på ett säkert sätt i följande situationer:

1. Använd inte Dot Pad X under kraftigt åskväder.

Undvik att använda produkten och koppla bort laddaren från strömkällan vid kraftig åska och åskväder. Fortsatt användning kan orsaka personskador, brand eller funktionsfel.

2. Använd inte Dot Pad X i förbjudna områden.

Använd inte Dot Pad X i områden där användning av produkten är förbjuden, till exempel i flygplan eller på sjukhus. Elektronik- och kommunikationsprodukter kan påverkas av elektromagnetiska vågor.

3. Demontera eller modifiera aldrig produkten.

Ta inte isär eller utsätt produkten för stötar. Det finns risk för elstötar, kortslutning eller brand. Garantitjänster omfattar inte demontering av produkten. Om din Dot Pad X behöver service, kontakta kundtjänst hos din lokala återförsäljare eller kontakta Dot Inc. Använd inte produkten i skadat eller trasigt skick, eftersom det kan orsaka brand, brännskador och elstötar. I så fall ska du sluta använda produkten och kontakta kundtjänst.

4. Använd endast rätt strömkabel och ett lämpligt eluttag.

Anslut och använd USB-kabeln korrekt för att undvika att laddningskabeln lossnar. Böj, dra, värm, klipp eller lossa inte kablarna, eftersom det kan orsaka brand eller elstötar. Koppla bort



laddarens kabel när den inte används. Det kan finnas risk för elstötar om din Dot Pad X används under laddning. Håll i adaptern när du tar bort den. Om du tar bort adaptern genom att dra i kabeln kan en kopplingsfel i kabeln orsaka laddningsfel.

5. Undvik höga temperaturer och fuktiga miljöer.

Använd inte produkten på varma och fuktiga platser. Om produkten blir våt, stäng av den och torka den noggrant innan du använder den igen. Placera den inte på täcken, mattor, hushållsapparater eller i direkt solljus (t.ex. bilstolar) under längre perioder. Ytan kan deformeras, gå sönder eller explodera. Om produktens temperatur stiger kraftigt, sluta använda produkten och kontakta kundtjänst.

Driftstemperatur: 0 °C ~ +50 °C, förvaringstemperatur: -20 °C ~ +60 °C

6. Använd inga kemikalier.

Använd aldrig kemikalier som alkohol eller bensen för att rengöra Dot Pad X. Detta kan orsaka brand. Om främmande föremål kommer på produkten eller laddaren, torka av dem med en mjuk trasa.

7. Undvik metall och magnetism.

Förvara inte laddningsportarna nära metallföremål som halsband, nycklar, mynt, naglar, klockor etc. Om ett metallföremål kommer i kontakt med laddningsporten finns det risk för explosion. Förvara inte Dot Pad X i närheten av magnetfält. Magnetfält kan påverka Dot Pad X. Det kan orsaka funktionsfel om produkten utsätts för magnetfält.

8. Var särskilt försiktig med barn och husdjur

Förvara produkter, laddare, delar etc. utom räckhåll för barn och husdjur. Om produkten, laddaren eller delar hamnar i munnen eller skadas av stötar kan det finnas risk för elstötar eller exponering för elektromagnetiska vågor. Var försiktig så att barn och husdjur inte sväljer produkter, laddare, delar etc. Det finns risk för kvävning, explosion och brand.

9. Använd inte i explosiv atmosfär.

Använd inte produkten i explosiva miljöer. Detta kan påverka högfrekvensen i din Dot Pad X. Placera inte produkten på en instabil yta, t.ex. på en skakig eller sluttande yta. Om din Dot Pad X faller kan



det orsaka personskador eller skador på produkten.

10. Var medveten om brandrisker.

Täck inte över eller linda in Dot Pad X med tygmateriel, t.ex. en filt, under användning eller laddning. Kasta inte Dot Pad X i vanligt avfall. Det kan orsaka brand, explosioner och miljöföroreningar.

11. Undvik överdriven kontakt under uppvärmda förhållanden.

Undvik att använda produkten när temperaturen på produktens yta stiger över lämplig nivå. Om du kommer i kontakt med produkten i detta tillstånd under en längre tid finns det risk för brännskador eller störningar i cellskyddspigmenteringen. Om det yttre skyddshöljet lossnar eller om du får en allergisk reaktion mot produktens material, sluta omedelbart att använda produkten och kontakta läkare.

12. Förvara Dot Pad X på en säker plats.

När enheten inte används under en längre tid ska laddaren kopplas bort från Dot Pad X och förvaras på en säker plats. Var försiktig så att USB-kabeln inte viks eller vrids för mycket när laddaren förvaras. Om USB-kabeln förvaras eller används med kraftiga vikningar eller vridningar kan silikonbeläggningen på kabeln lossna eller kabeln gå sönder, vilket kan orsaka fel eller olyckor.

13. Var försiktig när du hanterar batteriet.

I varma och fuktiga miljöer kan batteriet laddas dåligt eller laddas ur snabbt. Utsätt inte batteriet för direkt solljus och använd inte Dot Pad X i fuktiga miljöer, t.ex. badrum.

- Om du vill använda Dot Pad X efter en längre tids användning, vänligen ladda den helt innan du använder den igen.
- Observera att batteriet kan explodera om det avlägsnas med våld.
- Ändra inte, modifiera eller utsätt Dot Pad X för vätskor. När Dot Pad X är fulladdad, koppla bort laddaren från uttaget och Dot Pad X för att undvika onödig strömförbrukning.
- Ta med produkten och laddaren när du besöker ett servicecenter på grund av batteriproblem.
- Om produkten blir varm under laddning, använd handskar eller ett annat verktyg än din kropp för att separera laddaren och Dot Pad X.



- Överhettning kan skada produkten. Om din Dot Pad X överhettas under laddning, koppla ur USB-laddningskabeln och kontakta ett auktoriserat servicecenter för Dot Inc.

14. Undvik stötar och slag.

Om du utsätter din Dot Pad X för stark kraft, placerar tunga föremål på den etc. kan det orsaka stötar på produkten. Detta kan skada din Dot Pad X, orsaka funktionsfel eller förkorta dess livslängd. Det kan också orsaka överhettning, antändning eller brand. När du inte använder den ska du förvara den på en säker plats för att undvika stötar och skador på din Dot Pad X.

15. Använd inte laddare som inte är certifierade.

Undvik att använda icke-certifierade laddare, eftersom det kan leda till skador på batteriet och orsaka personskador eller skador på din Dot Pad X.

7. Kundsupport

För frågor, support eller ytterligare information kan du kontakta Dot Inc. på följande sätt:

Dot E-post: inquiry@dotincorp.com

Dot Telefonnummer: +82) 2-864-1113

Dot hemsida: <https://www.dotincorp.com/>

✂ Den trådlösa utrustning som används kan orsaka radiostörningar.

✂ Tillverkaren och installatören kan inte tillhandahålla tjänster relaterade till människors säkerhet, eftersom den trådlösa utrustningen kan orsaka radiostörningar.

2. FCC: Federal Communications Commission



FCC klass A

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital Your Dot Pad X av klass A, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd

mot skadlig störning när utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Användning av denna utrustning i bostadsområden kan orsaka skadlig störning, i vilket fall användaren är skyldig att åtgärda störningen på egen bekostnad.

FCC klass B

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital Your Dot Pad X av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadlig störning av radio- eller TV-mottagning. Detta kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen. Användaren uppmanas att försöka åtgärda störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Varning

Tillverkaren ansvarar inte för radio- eller TV-störningar som orsakas av otillåtna ändringar eller modifieringar av denna utrustning. Sådana ändringar eller modifieringar kan göra att användaren förlorar rätten att använda utrustningen.

Denna utrustning måste installeras och användas i enlighet med de medföljande anvisningarna och antennerna som används för denna sändare måste installeras så att de är minst 20 cm från alla personer och får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Alla rättigheter förbehållna. Denna handbok får inte reproduceras i



någon form, inte ens delvis, eller dupliceras eller bearbetas med hjälp av elektroniska, mekaniska eller kemiska processer utan skriftligt tillstånd från utgivaren. Denna broschyr kan innehålla fel eller tryckfel. Informationen i den kontrolleras regelbundet och korrigeringar inkluderas i senare utgåvor. Vi frånsäger oss allt ansvar för tekniska fel eller tryckfel och deras konsekvenser. Alla varumärken och patent är erkända.

3. CE: Europeisk överensstämmelse



CE-märkningen anger att denna produkt uppfyller de europeiska kraven för säkerhet, hälsa, miljö och kundskydd. CE-märkta enheter är avsedda för försäljning i Europa.

4. WEEE: Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning



Denna symbol [överkorsad soptunna WEEE bilaga IV] anger separat insamling av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning i EU-länderna. Släng inte utrustningen i hushållsavfallet. Använd de retur- och insamlingssystem som finns i ditt land för korrekt avfallshantering av denna produkt.

Ansvarsfriskrivning

Ingen garanti eller utfästelse, varken uttrycklig eller underförstådd, ges avseende innehållet i denna dokumentation, dess kvalitet, prestanda, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Informationen i denna dokumentation har noggrant kontrollerats med avseende på tillförlitlighet, men inget ansvar tas för felaktigheter. Informationen i denna dokumentation kan ändras utan föregående meddelande.



Dot Inc. ansvarar under inga omständigheter för direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga eller följdskador som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda denna produkt eller dokumentation, även om vi har informerats om risken för sådana skador.

[FCC- och CE-överensstämmelseförklaring]

Dessa gränser är avsedda att ge rimligt skydd mot frekvensstörningar i bostadsinstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras eller används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i TV-mottagningen, vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen.

Användaren uppmanas att försöka åtgärda störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.



Tel: 010-455 04 00, E-post: info@insyn.se
www.insyn.se

