



# **SenseView P430**

## **Användarhandledning**



**Insyn Sverige AB**

**Tel 08-446 63 60**

**Fax 08-446 63 69**

**[info@insyn.se](mailto:info@insyn.se)**

**[www.insyn.se](http://www.insyn.se)**

# INNEHÅLL

P430-paketet.....	1
2. Batterianvändning/-underhåll .....	2
3. Knappar och handhavande .....	3
4. Strömsparläge .....	6
5. Batteriindikatorikon.....	7
6. Av- och på-pipljud.....	7
7. Specifikationer.....	8
8. Garanti: 1 år (undantaget batteriet) .....	8
9. En FCC-varning .....	8

## P430-paketet

- A. P430.
- B. AC-nätspänningsadapter.
- C. Användarhandledning.
- D. Väska.
- E. Bärrem.

## 2. Batterianvändning/-underhåll

- A. Batteriet måste laddas fullt i ungefär 3 timmar innan första användningen. Var god anslut den medföljande AC-nätspänningsadaptern till DC-uttaget för att ladda batteriet.
- B. Var god ta bort skyddsplasten från LCD-displayen innan du använder enheten.
- C. Var god använd endast den medföljande AC-nätspänningsadaptern för att undvika skador.
- D. Utsätt inte denna enhet för vatten eller fukt. Detta för att förhindra risken för brand eller elstötar.
- E. Var god montera inte isär. Var god överlämna service endast till kvalificerad personal.
- F. Efter 6 månaders användning kan batteriets livslängd förkortas.
- G. Standardvärden;  
Standardinställningarna koms ihåg och är de senaste värdena (färg, zoomning, ljusstyrka) som ställdes in innan enheten stängdes av. När den slås på igen återställs de senaste inställningarna och börjar gälla.

### 3. Knappar och handhavande



< Förklaring av varje knapp på alla panelerna >

A. Av- och påbrytare: Var god skjut ner och släpp upp denna brytare för att slå på eller av. När enheten slås på visar den "logo" på skärmen i ungefär 2 sekunder och sedan övergår den i förstoringläget.

B. Zoomningsknapp : Genom att

trycka på in-/utzoomningsknappen (+/-) kan du kontrollera förstoringen från steg 1 till 9.

### Zoomningsförhållande

steg	Ben utvikta	Ben ihopvikta
1	4,7	6,7
2	6,0	8,0
3	6,8	9,5
4	8,4	11,6
5	9,5	13,0
6	10,3	13,6
7	11,9	15,8
8	13,6	19,0
9	15,8	22,5

- C. Stillbildsknapp: Var god tryck på knappen och bilden fryses.  
Var god tryck på knappen igen för att avsluta stillbildsläget.
- D. Kameraindikator: Denna indikerar kameralinsens position. Denna indikerar när enheten befinner sig i strömsparkläget. (Strömsparkläget kommer att förklaras i sektion 4 i denna användarmanual.)
- E. Ljusstyrkeknapp: Justera ljusstyrkan hos de mörkare och ljusare bilderna på LCD-displayen med hjälp av ljusstyrkeknappen från nivå 1 till nivå 4. Om du trycker på knappen igen på nivå 4 återvänder den till nivå 1.
- F. Extern videoingång: Detta är ett uttag för en extern kamera som finns som tillval.

G. Färglägesknapp: Tryckning på denna knapp kommer att ändra färgen på displayen. Det finns 6 färglägen som följer.

- (1) Alla färger.
- (2) Svart på vitt.
- (3) Vitt på svart.
- (4) Gult på blått.
- (5) Blått på gult.
- (6) Blått på vitt.

Om du trycker på knappen igen på läge 6 återvänder den till läge 1.

H. DC-uttag: För att hålla ett internt batteri 100 % laddat ansluter du AC-nätspänningsadaptern till detta DC-uttag.

I. Utdragbart handtag: Var god dra ut det utdragbara handtaget för att förhindra störningar som kan förorsakas av att kameran skymms av din hand.

J. Hål för bärrem: Detta är hålet där du fäster bärremmen.

## 4. Strömsparläge

- A. Om användaren lämnar denna enhet påslagen och inte förflyttar enheten på 3 minuter aktiveras strömsparläget. I strömsparläget kommer LCD-displayens bakgrundsbelysning att slås av och kameraindikatorn börjar blinka.
- B. För att avsluta strömsparläget trycker du helt enkelt på någon knapp eller förflyttar enheten.
- C. Om användaren låter enheten vara i ytterligare 7 minuter efter det att strömsparläget aktiverats kommer strömmen att slås av automatiskt. Om du behöver använda enheten igen ska du slå på av- och på-brytaren.
- D. Om stillbilder visas på LCD-displayen och enheten inte förflyttas på mer än 10 minuter kommer strömmen att slås av automatiskt.

## 5. Batteriindikatorikon

A. Batteriindikatorikonen  
högre hörnet av LCD-  
indikerar



visas i det övre  
skärmen. Den

laddningstillståndet. Om batteriet måste laddas blinkar  
batteriindikatorikonen.

B. Var god tryck på färglägesknappen och utzoomningsknappen (-)  
samtidigt för att visa batteriindikatorikonen på LCD-skärmen. Om du  
trycker på båda knapparna igen kommer batteriikonen att försvinna.

C. Batteriindikatorikonen är röd när enheten laddas upp med en AC-  
nätspänningsadapter ansluten till DC-uttaget. När enheten är  
fulladdad ändras batteriindikatorikonens färg till grönt.

\* Var god låt AC-nätspänningsadaptern vara ansluten ytterligare  
några timmar även om batteriikonen har ändrats till grönt.

D. Om AC-nätspänningsadaptern kopplas ur enheten kommer  
batteriindikatorikonens färg att ändras till blått.

## 6. Av- och på-pipljud

A. Varje gång knappen trycks hörs ett pip.

B. Samtidig tryckning på inzoomningsknappen (+) och  
ljusstyrkeknappen kommer att slå på eller av detta pip ljud.



## 7. Specifikationer

- A. LCD-fönsterstorlek: 4,3 tum brett QVGA TFT-LCD (16:10 bred).
- B. Zoomning: x4,7 ~ x22,5.
- C. Ljusstyrka: nivå 1 till 4.
- D. Färg: 6 färglägen.  
Alla färger / Svart på vitt / Vitt på svart / Gult på blått / Blått på gult / Blått på vitt.
- E. Extern videoingång.
- F. Batterityp: Laddningsbart litiumpolymer.
  - (1) Batterianvändningstid: 5 timmar.
  - (2) Laddningstid: 3 timmar.
- G. Utdragbart handtag.
- H. Dimensioner: 83x146x22,5 mm. (25 mm med utvikta ben).
- I. Vikt: 221 g.

## 8. Garanti: 1 år (undantaget batteriet)

## 9. En FCC-varning

Obs: Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av Klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna utrustning genererar, använder och utstrålar radiofrekvensenergi och kan, om inte installerad och använd i överensstämmelse med instruktionerna, förorsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Emellertid finns det ingen garanti att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning förorsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna genom att vidta ett eller flera av följande mått och steg:

- Rikta om eller flytta på den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

**WARNING :** Ändringar eller modifieringar ej uttryckligen godkända av tillverkaren, som är ansvarig för att regler följs, kan frånta användaren rätten att handha utrustningen.