



Lathund Milestone 312



Innehållsförteckning

<i>Innehållsförteckning</i>	2
<i>Knappbeskrivning</i>	4
Bild och knappbeskrivning.	4
Ovansidan	4
Övre kortsidan	4
Högra långsidan	5
Nederkant	5
<i>Allmänt</i>	5
Olika funktionerna i Milestone 312	5
Ladda batteriet	5
Knapplös på/av	5
Väcka/Slå på spelaren	5
Väljknappen	5
Informationslista	5
Grundinställningar	6
Ställa in klockan	6
Ställa in datum	6
Läshastighet ledtext	6
Höra programversion	6
Höra tid och datum	6
<i>Tillgängliga inställningar</i>	6
Gå till tillgängliga inställningar	7
Automatisk avstängning	7
Uppspelningshastigheter i "Böcker".	7
<i>Talsyntes</i>	7
Välj röst	7
<i>Minneskort</i>	7
Sätta in och ta ut minneskortet	7
Milestone och datorn.	8
Anslutning med kabel	8
Ansluta minneskortet	8
<i>Daisyfunktionen</i>	8
Lägga in en ny Daisybok	8
Spela upp Daisyboken	9
Ändra uppläsningshastighet	9
Höj och sänk volym	9
Navigera i Daisyboken	9
Gå till sida	9
Lägga in bokmärke	9
Ta bort bokmärke	10
Ta bort alla bokmärken	10
Byta bok	10
Ta bort bok	10
<i>Andra böcker</i>	11
<i>Musik</i>	11
<i>Navigera i mappar</i>	11
<i>Spela in</i>	12
Kortare minnesanteckning	12
Kontinuerlig inspelning	12
Spela upp inspelning	12


Lathund Milestone 312

Radera inspelning _____	12
<i>Textfiler</i> _____	13
Omvandla Worddokument till en .txt fil. _____	13
Spela upp textfil _____	13
<i>Alarm</i> _____	13
<i>Bilaga Menykarta</i> _____	14

Knappbeskrivning

Bild och knappbeskrivning.

Text knappbeskrivning, se nedan

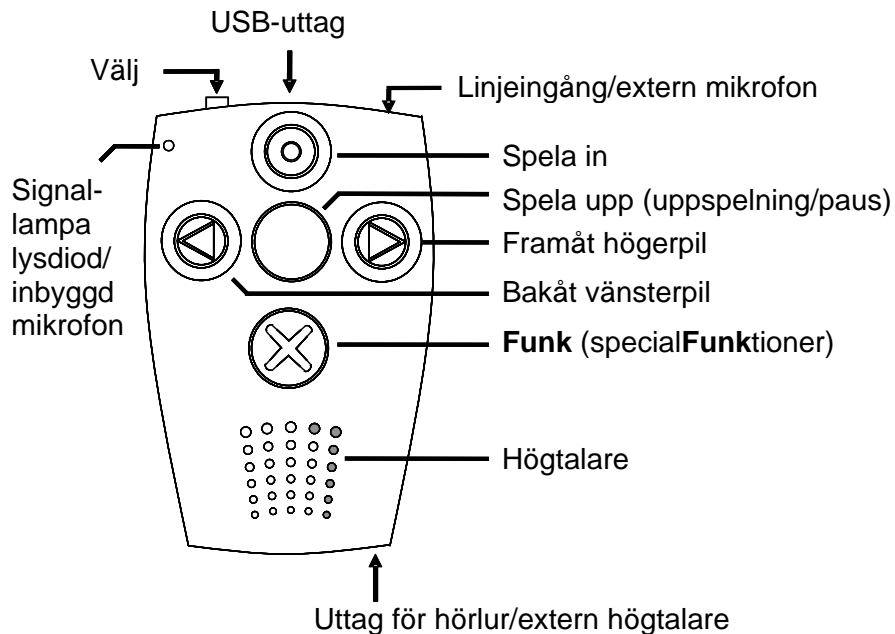

Ovansidan

Här har du fem taktila knappar och längst ner ett högtalarraster. Knapparna sitter i tre rader, en knapp på övre raden, tre på mittraden och en knapp på nedre raden.

- Lampa: sitter längst upp till vänster. Under lampan är den inbyggda mikrofonen placerad.
- Översta knappen: heter **Spela in** och du känner en ring.
- Mittraden, där heter knapparna:
 - Vänstra knappen, heter **Bakåt** och du känner en vänsterpil.
 - Mittenknappen, heter **Spela upp** och är slät.
 - Högra knappen, heter **Framåt** och du känner en högerpil.
- Nedre knappen, heter **Funktionsknappen** (här **Funk**) och du känner ett kryss.

Övre kortsidan

Där har du två olika funktioner.

- Till vänster har du **Välj**.
- I mitten har du **Mini-USB-uttag**, anslutning för laddare och datorkabel.
- Till höger **linjeingång/extern mick**.

Högra långsidan

Här har du anslutning för minneskortet.

Nederkant

Till höger har du anslutning för hörlurar eller externa högtalare.

Allmänt

Minneskort: SD, maxminne 32 GB. Minneskortet som följer med spelaren är på 2 GB.

Interna minnet: 0,75 GB.

Röstinspelningskapacitet på interna minnet 70 timmar.

Spelaren går in i viloläge om den inte används på 10 min.

Max speltid 12 timmar vid fulladdat batteri.

Olika funktionerna i Milestone 312

Med Milestone 312 kan du:

- Läsa Daisy och andra böcker
- Lyssna på Musik
- Inspelningsfunktion
- Talsyntes, för att lyssna på textfiler
- Alarm, klocka och timer

Ladda batteriet

Innan användning ska du ladda batteriet ca 5 timmar.

Det kan du göra med hjälp av den medföljande batteriladdaren eller genom att ansluta Milestone till datorn med medföljande kabel för detta.

Knapplås på/av

Tryck in **Funk** och **Spela in**.

Väcka/Slå på spelaren

Det gör du genom att tryck på **Spela upp** minst en halv sekund.

Väljknappen

Du väljer funktion med **Välj** som sitter till vänster på överkanten.

I standardutförande har du valen; Alarm, Audio, Böcker.

I funktionen Audio gör du inspelningar och lyssnar på musik och textfiler.

Den säger även Radio och Speakout men dessa är extra funktioner.

Informationslista

Genom att hålla nere **Funk** 1,5 sekunder kan du få information vart du står i spelaren, minnesstatus, tid, datum och batteristatus.

Batteristatus meddelas på följande sätt:

Batteriet är fulladdat, laddat, ladda batteriet, ladda genast batteriet.

Grundinställningar

Trycker du **Framåt** två gånger när du valt **Information** kommer du till **Grundinställningar**.

Trycker man då **Funk** kan du ställa in tid och datum samt höra vad du har för programversion och serienummer på din spelare.

Ställa in klockan

1. Håll nere **Funk** tills du hör Informationslistan.
2. Tryck **Framåt** tills du hör **Grundinställningar**.
3. Tryck **Funk** tills den säger **Klocka Ställ timme**
4. Tryck **Framåt/Bakåt** för att ställa in timtid
5. Tryck **Funk** igen för att ställa in minut
6. Tryck **Framåt/Bakåt** för att ställa minuttid.

Ställa in datum

1. Håll nere **Funk** tills du hör **Informationslistan**.
2. Tryck **Framåt** tills du här **Grundinställningar**.
3. Tryck **Funk** till **Datum, Ställ dag**.
4. Tryck **Framåt/Bakåt** för att ställa in dag.
5. Steg 3-4 upprepas för att ställa in månad och år.

Läshastighet ledtext

1. Tryck **Framåt/Bakåt** för att ställa in hur fort Milestone ska läsa upp ledtexterna.

Höra programversion

1. Håll nere **Funk** tills du hör **Informationslistan**.
2. Tryck **Framåt** tills du här **Grundinställningar**.
3. Tryck **Funk** tills du hör **Mjukvara**.
4. Därefter hör du vilken programversion din spelare har.
5. Ett tryck till på **FUNK** och du hör din spelares serienummer.

Höra tid och datum

1. Tryck **Välj till Alarm**.
2. Tryck **Spela upp**, tiden läses upp.
3. Tryck och håll nere **Spela upp**, tid och datum läses upp.

Tillgängliga inställningar

Under tillgängliga inställningar kan du tex ställa in:

- Automatisk avstängning
- Ställ tid för automatisk avstängning
- Språk – se nedan under talsyntes

Vilka val du kan göra i Tillgängliga inställningar beror på var du befinner dig.

Gå till tillgängliga inställningar

1. Håll in **Funk** ca 1,5 sek.
2. Tryck **Framåt** till **Tillgängliga inställningar**

Automatisk avstängning

1. Välj med **Framåt/Bakåt** om den ska vara på eller av.
2. Tryck **Funk** igen för att välja **Ställ tid för automatisk avstängning**
3. Tryck **Framåt/Bakåt** för att välja antal minuter för avstängning.

Uppspelningshastigheter i "Böcker".

1. Håll ner **Funk** till **Information**.
2. Tryck **Framåt** till **Tillgängliga inställningar**.
3. Tryck **Funk** till **Uppspelningshastighet**.
4. Tryck **Framåt/Bakåt** för att ställa in hastighet.

Talsyntes

Du har tillgång till rösterna Erik, Elin och Emma för svenskt tal. Dessa finns i kvalitet 50, som är den högre kvaliteten. Engelska rösten är Heather och kan väljas i olika kvaliteter, 20 och 50.

Välj röst

1. Håll ner **Funk** tills du hör **Information** om var du står.
2. Tryck då **Framåt** och du hör **Tillgängliga inställningar**.
3. Tryck **Funk** tills du hör **Språk**, 5 gånger.
4. Bläddra mellan rösterna och kvalitéerna med **Framåt/Bakåt**.
5. Bekräfta röst genom att trycka **Spela upp**.

Minneskort

Sätta in och ta ut minneskortet

Kortet sätts in på spelarens högra sida, en bit ovanför mitten. Se till att ha det avfasade hörnet på kortet inåt spelaren och mot dig. Tryck in kortet i spelaren tills det snäpps fast och du hör ett pip. Du tar ut kortet genom att först trycka det inåt och sedan dra ut. Inget pip hörs.

På minneskortet kan du skapa mappar för de olika funktionerna i Milestone 312. Du skapar helt och hållet den mappstruktur du vill. Daisyböcker måste alltid läggas in i en separat mapp. Andra filer kan identifieras av spelaren även om du lägger dem direkt på kortet. Men vi föreslår att du gör olika mappar för god struktur.

Exempel: Musik, Text, Böcker.

Om du skapar mappen **Böcker** och lägger in alla dina böcker i undermappar under den, får du tillgång till dina böcker när väljer funktionen Böcker vilket kan vara en fördel.

Milestone och datorn.

Du kan arbeta med Milestone och datorn på två sätt, genom att använda medföljande USB-kabel eller ta ut minneskortet ur spelaren och sätta in i datorns minneskortsläsare (intern eller extern).

Anslutning med kabel

1. Sätt in kabel i uttaget överst på Milestone och anslut till datorn via USB-uttag.
2. Ett fönster kommer upp på skärmen.
3. Tryck **Escape** för att stänga det fönstret.
4. Starta **Den här datorn** tex genom att trycka **Start + E**.
5. Du ser Milestone som två Flyttbara diskar. Enhetsbokstav kan variera beroende på vilka enheter du har tillgång till på din dator. Du ser skillnad på enheterna eftersom det interna minnet har namnet M312 och minneskortet enbart namnet flyttbar disk.

Det är på minneskortet du lägger in din musik, dina böcker mm.

Ansluta minneskortet

Om du tar ut minneskortet ur spelaren och ansluter det till datorn så ser du givetvis enbart det externa minnet.

Daisyfunktionen

Daisy = Digital Accessible Information System, eller Digitalt Audiobaserat Informationssystem på svenska.

Daisyböcker lägger du in på det externa minneskortet.

Lägga in en ny Dasiybok

1. Se till att ha **Den här datorn** öppet.
2. Anslut **Milestone** till datorn med medföljande kabel. Du hör meddelandet "Anslutning till datorn".
3. Tryck **Escape** för att stänga fönstret som kommer upp.
4. Stoppa in Daisyskivan in datorns **CD-enhet**.
5. Tryck **Escape** för att stänga fönstret som kommer upp.
6. Gå till **Cd-enheten**.
7. Tabba till **Innehållsdelen**.
8. Markera alla filer med **Ctrl+A**.
9. Kopiera med **Ctrl+C**.
10. Gå nu till Milestones **externa** minne (flyttbar disk, ej M312).

11. Skapa en mapp för boken, förslagsvis med bokens namn och under mappen **Böcker**.
12. **Öppna** mappen.
13. Klistra in med **Ctrl+V**.

Spela upp Daisyboken

1. Tryck **Välj** tills du hör **Böcker**.
2. Tryck **Spela upp** för att spela upp.
3. Tryck och håll nere **Framåt/Bakåt** för att spola fram och tillbaka.

Ändra uppläsninghastighet

Håll nere **Väljknappen** och tryck på **Framåt/Bakåt** för att öka/minska hastighet.

Höj och sänk volym

Håll ner **Funktionsknappen** och tryck **Framåt/Bakåt** för att öka och minska volym.

Navigera i Daisyboken

Det gör du på samma sätt som på andra Daisy-spelare.

1. Tryck **Spela in** eller **Funk** för att välja nivå.
2. Tryck **Framåt/Bakåt** för att bläddra på den nivån.

Liksom andra spelare kan det ta lite tid för spelaren att hitta till rätt ställe. Bli inte för ivrig och knappa igen och igen – då blir den ledsen!

Gå till sida

- Gå med **Spela in** eller **Funk** tills du hör **Sidhopp**.
- Håll in **Välj** och tryck:
- Bakåt för hundratal
- Spela upp för tiotal
- Framåt för ental

Exempel:

- Gå till sidan 123
- Se till att stå på **Sidhopp** i navigationen.
- Håll in **Välj** och tryck 1 gång på **Bakåt**, 2 gånger på **Spela upp**, 3 gånger på **Framåt**
- Milestone säger sidnumret och börjar läsa.

Lägga in bokmärke

Tryck och håll nere **Spela in** i två sekunder. Milestone säger ”**Bokmärke inlagt**”

Bokmärkena läggs in i kronologisk ordning i boken, inte i den ordning du lagt in dem.

När du lagt in bokmärken hittar du det valet i navigationsnivåerna.

Ta bort bokmärke

Enstaka: för ta bort senast inlagde bokmärke trycker du **Funk** och **Spela upp** samtidigt. Milestone säger ”**Bokmärke raderat**”

Ta bort alla bokmärken

För att ta bort alla bokmärken från en daisybok trycker du samtidigt, och i följande ordning på tangenterna **Funk – Spela upp – Spela in**.

Milestone säger ”Alla bokmärken raderade”.

Byta bok

Om du har flera böcker på ditt minneskort byter du bok genom att använda navigationsnivåerna.

1. Tryck **Spela in** eller **Funk** tills du hör **Böcker**.
2. Tryck **Framåt/Bakåt** för att gå till rätt bok.

Ta bort bok

Det gör du genom att ansluta Milestone eller minneskortet till datorn och radera bokens mapp på vanligt sätt.

Andra böcker

Dessa lägger du in på samma sätt som en Daisybok, tex i MP3.

Har du vanliga CD-böcker så är de oftast i CDA-format.

Då måste du först ripa boken i tex Windows Media Player.

Välj där ett format som Milestone stöder.

Filformat som Milestone stöder är: MP3, AAC, WAV, WMA

Vi rekommenderar MP3 då dessa är minst.

Textfiler som stöds är .txt

Musik

Här gäller samma sak som ovan, Milestone stöder inte det vanligaste formatet på en musik-cd, CDA. Därför måste du först ripa dina skivor för att föra över till Milestone. Lägg in dina musikfiler i mappar efter artist, spellistor eller dylikt.

Du hittar din musik under funktionen **Audio** som du väjer med **Välj**.

Navigera i mappar

För att hitta bland dina mappar måste du först välja enhet.

Det gör du med **Spela in**.

1. Tryck **Spela in** tills du hör den enhet du vill titta på, tex Externa minneskortet.
2. Med **Funk** går du neråt i mappstrukturen
3. Med **Spela in** går du uppåt i mappstrukturen.
4. Tryck **Framåt/Bakåt** för att bläddra mellan dina mappar.
5. Har du undermappar till någon mapp så trycker du **Funk** igen för att gå ner en nivå.
6. Sedan trycker du **Framåt/Bakåt** för att bläddra mellan undermapparna.
7. Vill du spela upp en fil ur den undermapp du står på trycker du **Funk** igen för att öppna mappen och sedan **Spela upp**.

Spela in

Kortare minnesanteckning

Din inspelning hamnar i den mapp där du befinner dig.
Så här gäller det att kunna mappnavigationen ordentligt.
Se ovan Navigera i mappar.

1. Gå till funktionen **Audio** med hjälp av **Välj**.
2. Vanligtvis används det interna minnet för inspelningar.
3. Där finns mappen **Röstinspelning** och två undermappar till den, Att göra lista och Inköpslista.
4. Välj mapp där du vill lagra din inspelning.
5. Tryck därför **Spela in** till det interna minnet.
6. Tryck och håll in **Spela in** tills du hör ett kort klickljud.
7. Lampan överst till vänster på ovansidan av spelaren blinkar.
8. Avsluta inspelning genom att släppa **Spela in**.

Kontinuerlig inspelning

1. Håll ner **Spela in**.
2. Tryck **Spela upp**.
3. Du hör en signal.
4. Lampan blinkar och du spelar in.
5. Du kan göra paus i inspelningen genom att trycka **Spela upp**.
6. Lampan blinkar snabbare och du hör en dov signal.
7. Starta inspelningen igen med **Spela upp** igen, den dova signal hörs.
8. Avsluta genom att trycka **Spela in** igen.

Spela upp inspelning

Se till att gå till rätt mapp och öppna den mappen.
Tryck **Spela upp**.
Har du fler inspelningar i mappen bläddrar du till filerna med **Framåt/Bakåt**.

Radera inspelning

Se till att gå till rätt mapp och öppna den mappen.
Tryck **Spela upp**.
När du hör den inspelning som du vill radera.
Tryck **Funk** och **Spela upp**.

Textfiler

Du kan spara textfiler (.txt) och lägga på ditt minneskort. Förslagsvis lägger du alla dina textfiler i en och samma mapp, tex Text.

Omvandla Worddokument till en .txt fil.

1. Öppna ditt Worddokument.
2. Tryck **F12** för att komma till **Spara som...**
3. Öppna den mapp på minneskortet där du vill spara filen.
4. Vid **Filformat** väljer du **Oformaterad text (*.txt)**.
5. **Spara.**

Spela upp textfil

1. Välj **Audio** med **Välj-knappen**.
2. Gå till externa minnet med **Spela in..**
3. Pila till din **Textmapp**.
4. Gå in i mappen med **Funk**.
5. Bläddra mellan dina textfiler med **Framåt/Bakåt**.
6. Spela upp med **Spela upp**.
7. Det går att ställa in hastighet på uppspelningen genom att hålla ner **Funk** och **Framåt/Bakåt**.

Alarm

1. Tryck **Välj-knappen** till **Alarm**.
2. Först ställer du in om du ska ha alarm på eller av.
3. Det gör du med **Framåt/Bakåt**.
4. Tryck sedan **Funk** för att ställa in timme.
5. Välj timme med **Framåt/Bakåt**.
6. Tryck **Funk** igen för att ställa in minut.
7. Välj minut med **Framåt/Bakåt**.
8. Tryck **Funk** igen för nästa val.
9. Föregående inställning sparas automatiskt.


Vill du bara veta vilken tid du satt alarmet på trycker du **Välj** till **Alarm** och sedan håller du ner **Funk** så säger den Klockan är och alarmtiden.

Uppdateringar

Spelaren har en mjukvara som styr de olika funktionerna. Mjukvaran är under ständig utveckling för att göra din spelare successivt bättre och än mer effektiv. Den är versionshanterad och kan enkelt uppdateras via vår hemsida. Gå in på www.iris.se/Milestone och följ instruktionerna. Ta för vana att titta med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du har den senaste versionen. Uppdateringar är kostnadsfria.

Bilaga Menykartan

Här ser du en bild över vad du har för val i de olika menyerna.

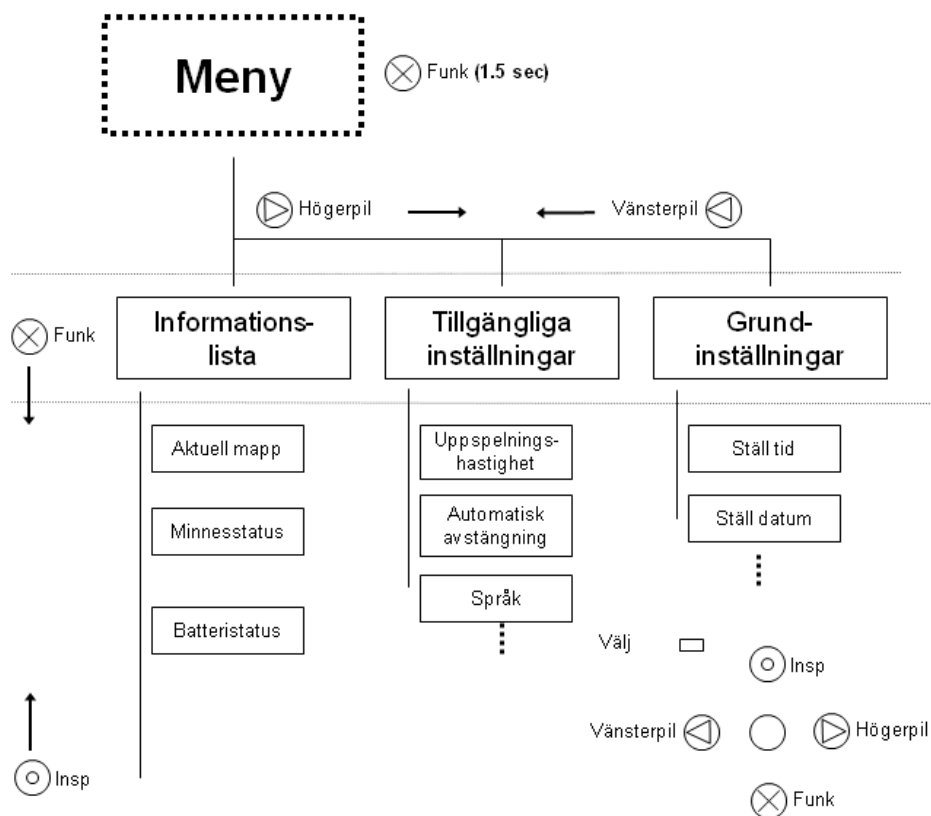

Iris Hjälpmedel AB
 S-122 88 Enskede, Besök: Sandborgsvägen 52
 Telefon: 08-39 94 00
www.iris.se/internetbutik