

M5 HD Plus



BRUKSANVISNING

Innehåll

01 Introduktion	3
02 Säkerhet och underhåll	3
03 Din M5HD PLUS	4
3.1 Lära känna din M5 HD PLUS	4
3.2 Läspositioner	5
3.3 batteri och laddning	6
04 Allmänna riktlinjer	6
05 Att använda M5 HD PLUS	6
5.1 PÅ/AV	6
5.2 När-och Avståndskamera	7
5.3 Zoom	7
5.4 Färgval	7
5.5 Frysa bild	8
5.6 Läslinjer och kuliss	8
06 Avancerade funktioner	9
6.1 Spara och ta bort bilder	9
6.2 Meny läge	10
6.3 Koppla till en monitor eller tv	11
6.4 Energisparläge	11
6.5 Minnes funktioner	11
6.6 Fabriksinställningar	12
07 Felsökning	12
08 Kontaktuppgifter	14

01 Introduktion

Grattis till ditt köp av M5 HD Plus. Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din M5. Denna bruksanvisning kommer att hjälpa dig med förklaringar på M5's olika funktioner. M5 är utrustad med en skärm och knappar som är enkla att använda. Skärmen visar en tydlig bild som gör det möjligt att enkelt att läsa tidningar, prislappar eller se på foto.


02 Säkerhet och underhåll

För att din M5 ska bibehålla bästa prestanda, läs igenom Säkerhetsinformationen


- ▶ Utsätt inte M5 för överdriven hetta eller direkt solljus för att undvika brandrisk.
- ▶ För att undvika elektriska skador, undvika att M5 kommer i kontakt med vätskor eller kemikalier.
- ▶ Undvik att reparera eller öppna chassiet på din M5.
- ▶ Koppla ur och stäng av M5 före rengöring. Använd en mjuk trasa.
- ▶ Notering: Om man använder ett skydd runt skärmen, kan touch hanteringen bli sämre.

03 DIN M5 HD PLUS


3.1 Lära känna dig M5 HD PLUS

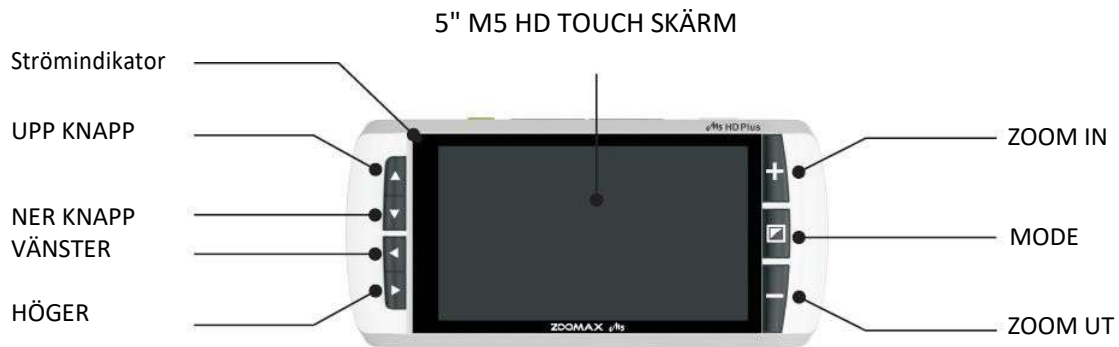

FIGUR 1: Framsida

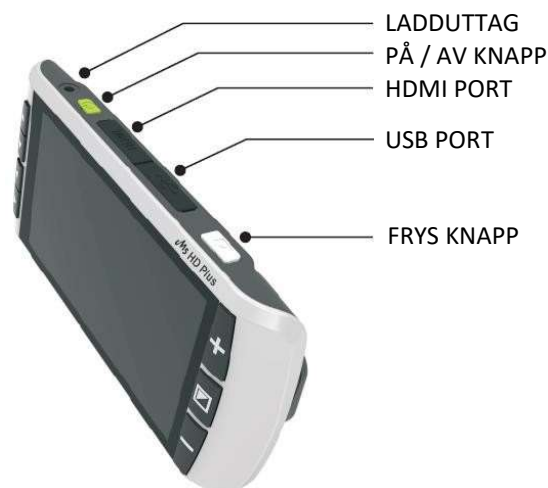

FIGUR 2: SIDVISNING

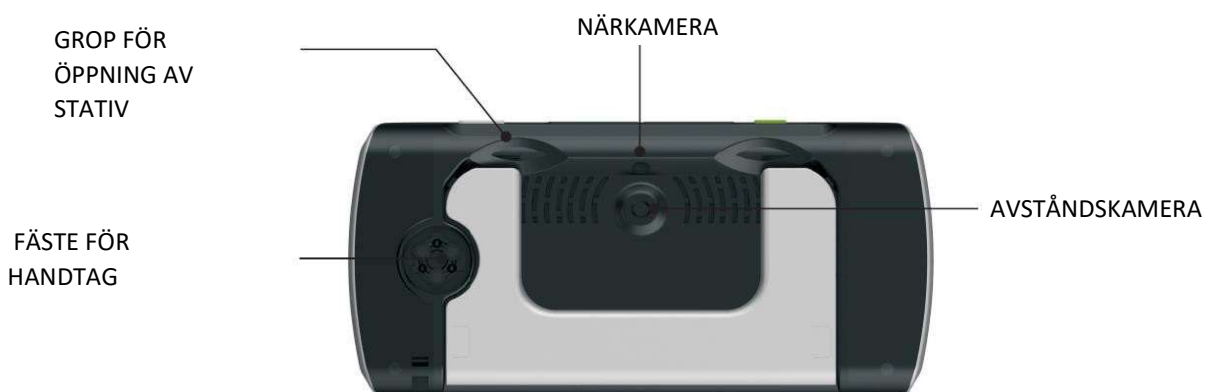

1. M5 är utrustad med dubbla kameror. En för när-avstånd och en för Avstånd. Varje kamera fungerar separat och specifikt för varje visningsläge.
2. Det finns 2 spår som gör det enklare att öppna och ta fram stativet
3. På vänster sida finner du ett infällt hål där man kan fästa handtag om man önskar.
4. Lässtativet används för när-kameran.

3.2 LÄSPOSITIONER



FIGUR 4



FIGUR 5

M5 HD Plus med stativ stängt (se figur 4) är ideellt för avstånds visning. Stäng stativet och håll upp M5 HD Plus för att se objekt eller texter på avstånd (se figur 5)



FIGUR 6



FIGUR 7

M5 HD Plus med stativ öppet (se figur 6) för när visning. Tryck ut stativet och skärmen vill bli satt i rätt ergonomisk vinkel. Placera M5 HD Plus på materialet och börja läsa (se figur 7)

3.3 BATTERI OCH LADDNING

Batteri ikonen visas i nedre vänstra hörnet på skärmen när M5 slås på. Efter 5 sekunder försvinner ikonen. När 5% av batterikapaciteten återstår kommer M5 att meddela med en varningssignal och en ikon med låg batterinivå visas på skärmen.

M5 är utrustad med ett inbyggt batteri. För att ladda, sätt i batteriladdaren till ett vägguttag och den andra änden till M5. Laddnings lampan lyser rött medans laddning pågår. Det tar ca. 4,5 timmar för att ladda fullt. M5 kan användas upp till 4 timmar på en laddning.

04 Allmänna riktlinjer för användande

- 1.Ladda batteri före användning
- 2.Använd endast den medföljande batteriladdaren. Använd inte andra laddare, detta kan skada enheten och garantin upphör.
- 3.Stäng alltid av enheten när den inte används.
- 4.Använd endast M5 i temperaturer mellan 10°C and 40°C.

05 Använda M5 HD PLUS

5.1 SLÅ PÅ / AV

För att starta M5, tryck och håll den gröna Av/På knappen i 3 sekunder, lampan ändras till grönt och en ljudsignal hörs. För att stänga av, håll samma gröna Av/På knapp i 3 sekunder och enheten stängs av.

5.2 NÄR- OCH AVSTÅNDSKAMERA

M5 ändrar sig automatisk mellan när och avstånds vy när man öppnar eller stänger stativet.

Öppna stativet för att använda när-vy läget. Kameran ändrar sig till fixerad fokus och LED belysningen slås på.

Stäng stativet för att byta till Avstånds-vy läge. Kameran ändras till autofokus och belysningen slås av. Vid behov kan man klicka till på skärmen för att fokus ska ändras beroende på vad man tittar på.

5.3 ZOOM KONTROLL

Tryck på “+” knappen för att zooma in och på “-” för att zooma ut.

Förstoringsgraden är 2.3x till 16x.

Om du lyfter M5 från materialet i avstånd-vy läget minskar förstoringen. Kopplas M5 till en monitor eller tv ökar förstoringen.

5.4 FÄRGVAL

I färgläge, tryck på mode knappen för att bläddra genom följande 11 färglägen och välj det du föredrar.

- Full Färg
- Högkontrast vit text på svart bakgrund
- Högkontrast svart text på vit bakgrund
- Högkontrast vit text på blå bakgrund
- Högkontrast blå text på vit bakgrund
- Högkontrast gul text på svart bakgrund
- Högkontrast svart text på gul bakgrund
- Högkontrast blå text på gul bakgrund
- Högkontrast gul text på blå bakgrund
- Högkontrast grön text på svart bakgrund
- Högkontrast svart text på grön bakgrund

För att gå in i favoritfärgläge, välj först din favoritkontrast färg i normal läge, tryck och håll inne mode knappen i 3 sekunder tills du hör ett BEEP. I detta läge trycker du på Mode-knappen för att bläddra igenom 3 grundlägen: full färg, din favoritkontrastfärg och den omvända färgen (Exempel vit på blå och blå på vit). För att avsluta favoritläge, tryck och håll mode knappen 3 sekunder tills du hör ett BEEP.

5.5 FRYS FUNKTION

I avstånds-vy läge, efter att kameran har fokuserat eller fokuserat med hjälp av ett tryck på skärmen, tryck på frys knappen för att frysa en bild. Efter att bilden är fryst, tryck på "+" knappen för att zooma in eller "-" knappen för att zoom ut. Om bilden är zoomad kan man panorera i bilden genom att trycka på pilknapparna eller med ett finger. Det är också möjligt att ändra färg genom att trycka på mode knappen. Tryck på frys knappen igen för att återgå till Live läge.

5.6 Läslinje och kuliss

Under färgläge, tryck snabbt på "+" och "-" samtidig för att bläddra igenom 4 alternativ: läslinje (horisontal / vertikal), kuliss (horisontal / vertikal).

Horisontal läslinje

För att flytta den horisontala läslinjen, tryck pil upp/ner till önskad position.

Vertikal läslinje

För att flytta den vertikala läslinjen, tryck pil vänster/höger till önskad position.

Horisontal kuliss

För att justera bredden på en horisontal kuliss tryck pil upp/ner till önskad bredd.

Vertikal kuliss

För att justera bredden på en vertikal kuliss, tryck pil höger/vänster till önskad bredd.

06 Avancerade funktioner

6.1 Spara och ta bort bilder

När en bild är fryst, tryck på frys-knappen och zoom in-knappen samtidigt i 3 sekunder, en bock ikon visas på skärmen att bilder är sparade.

När lagringsplatsen är full och fler bilder inte kan lagras visas "minnet är fullt" och du måste först ta bort sparade bilder innan nya kan sparas.

M5 kan lagra upp till 50 bilder.

Se på sparade bilder


Tryck och håll nere frys-knappen i 3 sekunder. Ett bildindex presenteras med set av 4 bilder. Bilderna presenteras med omvänd ordning. Exempel, om det är 24 bilder sparade kommer nr 24 vara den senaste sparade bilden. Bläddra mellan bilderna med hjälp av + eller - knappen. Tryck på färgvals-knappen för att visa en bild och använd knapparna "+" eller "-" för att ändra förstoring. Snabbt tryck på frys-knappen för att komma tillbaka till index och ännu en gång för att återgå till live bild.

Ta bort bilder.

När en sparad bild visas i lägsta förstoring, tryck och håll nere färgvals-knappen i 5 sekunder, efter att knappen släppts så kommer 1 ikon "papperskorg" fram. Om du tar bort den sista kvarvarande bilden kommer meddelande "no picture saved". Tryck på frys-knappen för att återgå till live bild.

6.2 MENY LÄGE

Ett långt tryck på "+" knappen och "-" knappen samtidigt i 3 sekunder öppnar menyläget. Här kan du justera inställningar som LED ljus, ljud, bildfrekvens, och skärmens ljusinställningar.

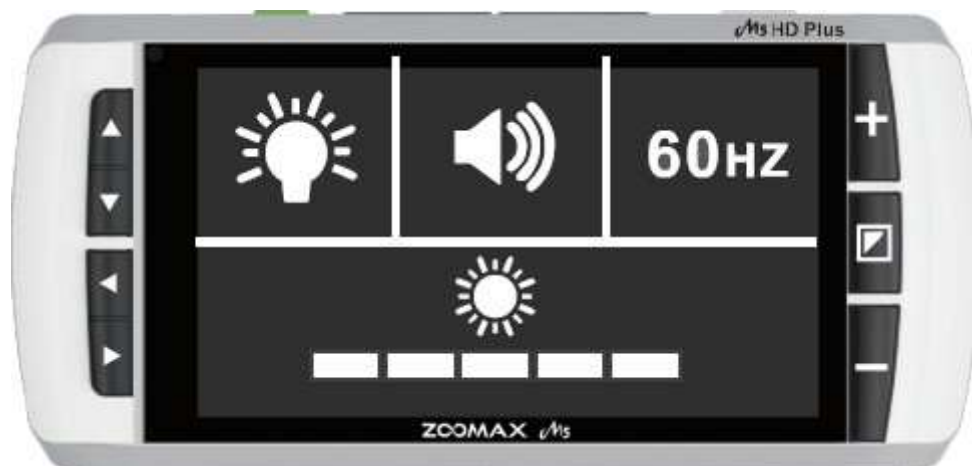

LED PÅ/AV

Tryck "+" -knapen eller "-" -knapen för att bläddra igenom de fyra ikonerna och välj LED-ikonen. Tryck på Mode knappen för att slå PÅ/AV LED-lampan. Som standard är LED-lampan på i närbild och av i avståndsläge. När du har gjort din inställning, trycker du på frys knappen för att gå tillbaka till live bild.

LJUD PÅ/AV

Tryck "+" -knapen eller "-" -knapen för att bläddra igenom de fyra ikonerna och välj ljudikonen. Tryck på mode knappen för att slå ljud på eller av. Som standard är ljud på. När du har gjort inställningen, trycker du på frys knappen för att gå tillbaka till live bild.

BILDFREKVENS

Tryck "+" -knapen eller "-" -knapen för att bläddra igenom de fyra ikonerna och välj bildfrekvens ikon. Tryck på Mode-knappen för att välja 50 Hz eller 60 Hz.

Standard är 60 Hz. När du har gjort din inställning, trycker du på frys knappen för att gå tillbaka till live bild.

LJUSJUSTERING.

knappen för att bläddra igenom de fyra ikonerna och välj ljusstyrka ikonen och tryck på mode knappen. Bakgrunden färgläge, som indikerar att ljusstyrka justeringsfunktionen har blivit vald. Tryck därefter "+" knappen eller "-" knappen för att öka eller minska ljusstyrkan. Det är totalt 6 intensitets inställningar: 5,4,3,2,1,0. Som standard, intensitetsnivån satt till 3. När du har gjort inställningen, trycker du på frysknappen för att gå tillbaka till live bild.

6.3 KOPPLA TILL TV ELLER MONITOR

Använd den medföljande HDMI kabeln och sätt en ände i din M5 och den andra till din Monitor eller TV. M5 skärm kommer att släckas ner och bilden visas istället på din tillkopplade TV eller monitor.

6.4 ENEGISPARLÄGE

Som standard slår M5 HD Plus av sig automatisk av efter 3 minuter av inaktivitet.

6.5 MINNESFUNKTION

Alla inställningar sparas när enheten stängs av för att automatiskt återupptas när enheten startas nästa gång. Detta gäller inte belysning som alltid är på i När-vy läge.

6.6 FABRIKSINSTÄLLNING

Vid leverans:

- Skärms ljus inställning 3.
- Ljud är på.
- Live läge när den startar.
- Full färgs läge.
- Bildformat är 60HZ.

För att återställa till fabriksinställningar, Gå till maxförstoring. Tryck och håll ”+” knappen i 5 sekunder. En signal hörs och enheten stängs av. Efter har startats igen, är alla inställningar som den var vid leverans.

07 FELSÖKNING

Problem	Åtgärd
Svart skärm	<ul style="list-style-type: none">●Kolla att enheten är på.●Ladda batteri.●Minska förstoringen.
Enheten vill inte starta	<ul style="list-style-type: none">●Ladda batteriet●Kontrollera att enheten har rätt vinkel mot objektet den tittar på.
Bilden är svart.	<ul style="list-style-type: none">●Kontrollera att vägguttaget har ström samt att alla kontakter är isatta korrekt.
Laddaren är ansluten men batteriet laddar ej	<ul style="list-style-type: none">●Putsa kameran + skärm med mjuk trasa.
Fläckar på skärmen	

Texten är för liten att läsa

- Justera förstorings graden.
- Koppla enheten till en monitor eller TV.

Texten är för stor att läsa

- Justera förstorings graden.
- Flytta enheten från materialet den tittar på.

Enheten är kopplad till en TV men ingen bild på TV

- Kontrollera att TV är på.
- Kontrollera att kabeln är på rätt plats

Bilden är fryst eller andra fel

- Tryck Av/på '+' zoom "+" knappen samtidigt för att göra en "reset"

08 KONTAKTUPPGIFTER

Producerad av

ZOOMAX TECHNOLOGY CO., LIMITED

Add.: 9F, Building D, Paradise Software Park,
No.3 Xidoumen Road, Xihu District, Hangzhou, China



ZOOMAX[®]

Återförsäljare i Sverige



Nordic Eye

Illervägen 15

352 45 Växjö

Sweden

www.nordiceye.eu

info@nordiceye.eu

0470 72 98 88