

| | |
|--|--|
| | Av/På (Grön) |
| | Sök (Röd) Håll in knapp. Förstoringen minskar och ett sökkors visar var kameran tittar, Släpp knapp, återgår till förstoring. |
| | Flip (Ljust Blå) Roterar bild i fyra orienteringar. |
| | Färgval (Blå) Roterar mellan olika kontrast-färger eller färgläge. |
| | Ljus (Gul) Ökar eller minskar Ljus i bild. |
| | Zoom (Svart) Ökar eller minskar förstoring. |
| | Frys (Röd) Fryser bild, tryck igen för att släppa bild. |
| | FocusLås (Orange) Slår av eller på autofokus. |
| | Under ett täcklock på kontrollens underkant finns extra knappar för Referenslinjer och Kulisser. Se manual för mer information. |
| | Avancerad (Svart) Använd i kombination med andraknappar för att utföra avancerade uppgifter. Se manual för mer information. |

