



**Av/På (Grön)**



**Avancerad (Svart)**

Använd i kombination med andra knappar för att utföra avancerade uppgifter. Tryck och håll in knappen först, och tryck sedan på annan knapp.



**Sök (Röd)**

Håll in knapp. Förstoringen minskar och ett sökkors visar var kameran tittar, Släpp knapp, återgår till förstoring.



**Flip (Ljust Blå)**

Roterar bild i fyra orienteringar.



**Färgval (Blå)**

Roterar mellan olika kontrastfärger eller färgläge.



**Ljus (Gul)** Ökar eller minskar Ljus i bild.



**Zoom (Svart)**

Ökar eller minskar förstoring.



**Frys (Röd)**

Fryser bild, tryck igen för att släppa bild.



**FocusLås (Orange)**

Slår av eller på autofokus.



**Referenslinje (Vit och Svart)**

Visar två horisontella eller vertikala referenslinjer.



**Kuliss (Svart och Vit)**

Kulisser skärmar av bilden i vertikal eller horisontell led.



**Width (Vit)**

Ändrar avstånd mellan Referenslinjer eller kulisser.



**Up and Down (Svart)**

Flyttar referenslinjer eller kulisser upp/ner eller i sidled.



**Avancerad + Av/På**

Håll in i 6 sekunder för att komma till inställningar. Här kan du lägga till eller ta bort färgval.