

OpenBook Kortkommandon

Mellanslag eller F4	Skanna ny text och börja uppläsning
F12 eller ESC	Avbryter uppläsning
F12	Stoppar eller återupptar uppläsning
CTRL + 3	Minskar textstorlek
CTRL+ALT+Page Up	Ökar talhastighet
CTRL+ALT+Page Down	Minskar talhastighet
CTRL + 4	Ökar textstorlek
CTRL + 5	Byter kontrastfärg text & Bakgrund
CTRL + 6	Byter typsnitt (Font)
CTRL + E	Växlar mellan redigeringsläge och skyddad vy (läsvy)
CTRL+SKIFT +V	Växlar mellan visningsvyer: Textvy, ExaktVy, DeladVy, KameraVy
CTRL + L	Belysning på eller av.
ALT + F4	Stäng OpenBook