

Bruksanvisning

OmniReader

Portabel Skann och Läsmaskin



Innehåll


Snabbstart	3
Ladda Enheten	4
Slå på och Av OmniReader	5
Kontrollpanel.....	6
Skanna, Läs och spara dokument.....	8
Spara ett skannat dokument.....	9
Spara en bok (Flera sidor).....	10
Skapa en Bokfil.....	10
Öppna ett dokument eller en bok	11
Inställningar	12
Ändra Rösthastighet	12
Ändra läsröst.....	12
Ändra Text och Textstorlek.....	13
Ändra kontrastinställning vid läsning	13
Lägga till och ta bort kontrast färger	13
Läsläge	15
Ändra Menyröst	15
Läge för Vänster rullknapp.....	16
Läge för mittknapp Daisy	16
Tabelläge	17
Välj användarprofil.....	17
Anslutning på sidpanelen	18




Snabbstart

För att snabbt skanna ett papper, gör följande:


1. Se till att OmniReader är påslagen. (Se sid X).
2. Placera OmniReader med bildskärmen mot dig på ett plant underlag.
3. Placera pappret framför enheten, med överkant mot enhetens fot.
4. Tryck på stora skanner knappen (2) placerad på enhetens översida.

När skannad text börjar visas på skärmen, börjar OmniReader läsa upp texten. För att pausa uppläsning tryck på Höger väljar  knapp.

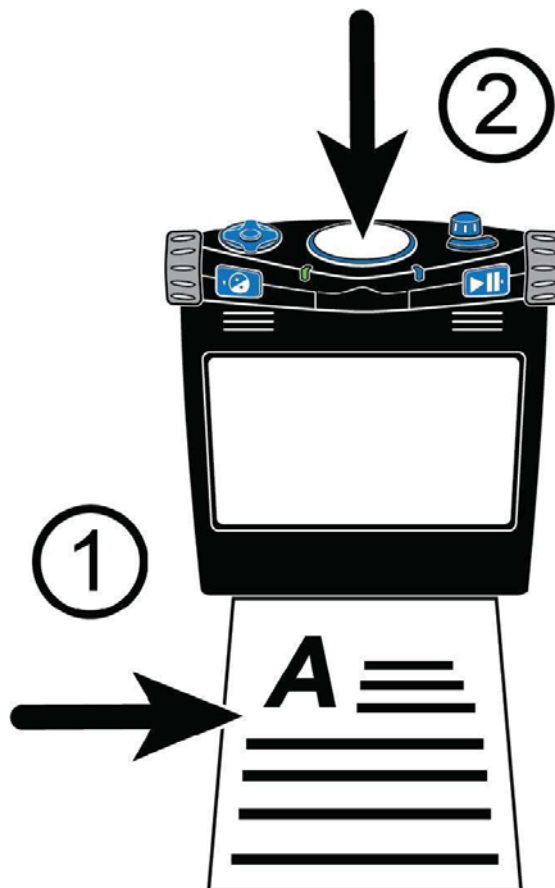

Ladda Enheten

Anslut medföljande AC adapter till enheten. Laddning tar ca 3 timmar. Ett fulladdat batteri räcker till ca 12 timmars användning. Du kan använda OmniReader under laddning.

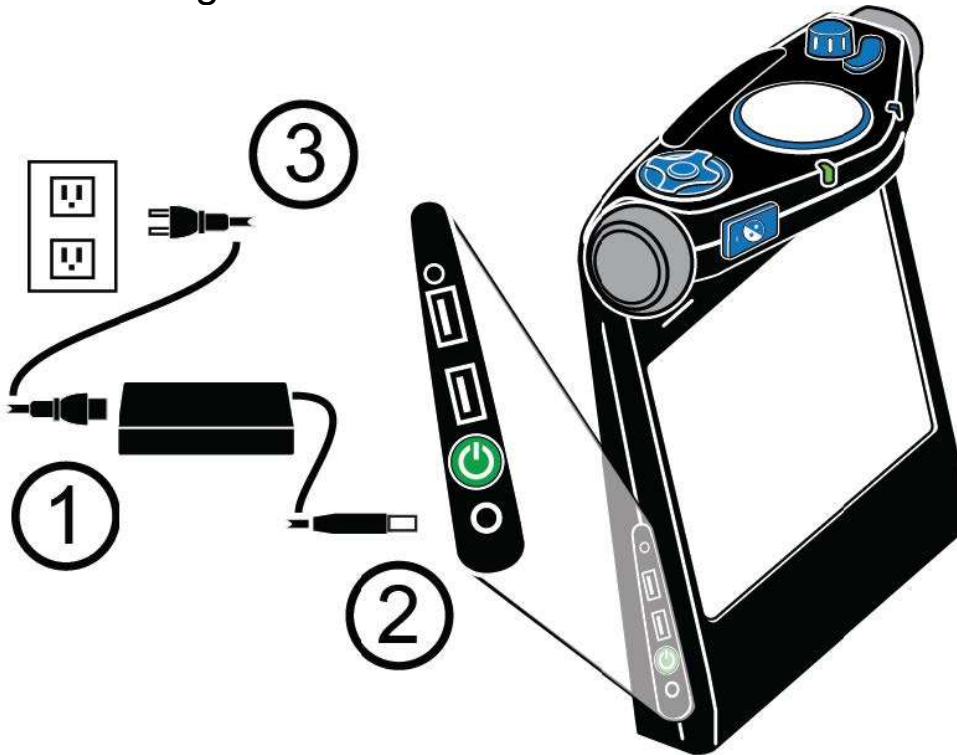

1. Anslut nätkabeln till AC adaptorn.
2. Anslut AC adaptorns DC pluggen till ladduttaget på OmniReader. (Längst ner på Vänster sida).
3. Anslut nätkabeln till vägguttaget.

Grön LED på fronten blinkar när enheten laddas.



Slå på och Av OmniReader

När OmniReader är placerad med skärmen mot dig, sitter Av/På knappen placerad längst ner på vänster sida, strax över ladduttaget.




Tryck och håll in Av/På knappen i ca 3 sekunder för att strata enheten.

- När enheten startar visas en startbild och toner spelas upp. En grön ljusring kring Skanner knappen blinkar.
- När enheten är klar, säger OmniReader "Filer" och ljusringen runt Skanner knappen lyser blå.
- Med ett kort tryck på Av/På knappen går enheten ner i viloläge.
- Tryck och håll in Av/på knappen i ca 8-10 sekunder för att stänga ner enheten. En ny ton spelas upp under nedstängning, och ringen runt Skanner knappen snurra moturs och lyser rött.








Kontrollpanel

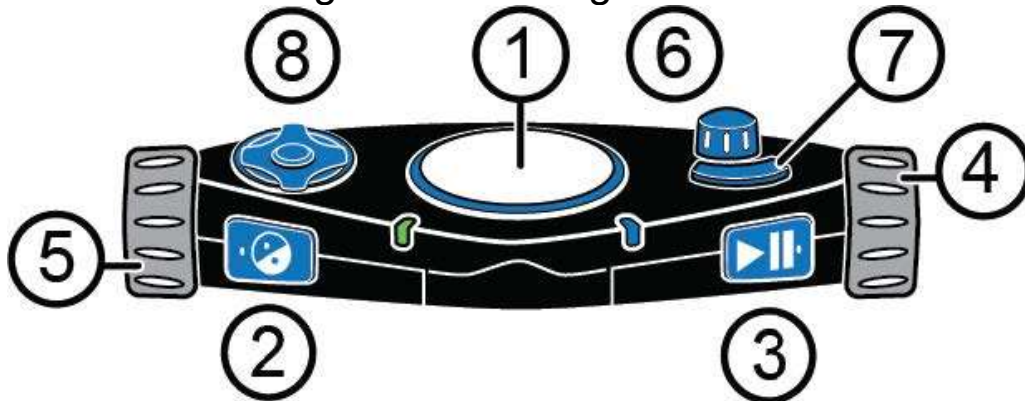OmniReaders kontrollpanel är placerad på enhetens överkant. Funktionen på knapparna går att välja i inställningar. Här visas dom funktion som är grundinställning vid leverans.




1		<p>Skanner knappen är en stor rund knapp, placera mitt uppe på enheten. Tryck för att skanna ett dokument, och börja läsa.</p>
2		<p>Vänster väljar knapp sitter på vänster sida, innan Vänster rull knapp. I en meny, backar till förgående meny. Synsvag-Profil (Se sid X för info). Ändrar kontrast färger på Text och bakgrund. Blind-Profil (Se sid X för info). Byter läsröst.</p>
3		<p>Play knappen sitter till höger innan höger innan Höger rull knapp. Vid läsning av dokument, pausar eller startas läsning. I en meny, gå vidare, eller välj markerar funktion.</p>

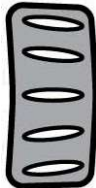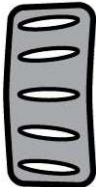

4		<p>Höger rullknapp Ett stort hjul placerad på enhetens övre högra sida. Rulla hjulet för att flytta i en meny eller i ett dokument.</p>
5		<p>Vänster rullknapp Ett stort hjul placerad på enhetens övre vänstra sida. Synsvag-Profil (Se sid X för info). Rulla hjulet för att ändra textstorlek. Blind-Profil (Se sid X för info). Rulla hjulet för att ändra talhastighet.</p>
6		<p>Meny knapp /Ratt Ratt placerad bakre övre högra sidan. Volym ratt: Vrid för ljud upp och ner. Meny knapp: Tryck för att öppna och stänga huvudmeny.</p>
7		<p>Lägesknapp Sitter framför Meny ratten. Synsvag-Profil (Se sid X för info). Växlar mellan kamerabild och aktuell meny eller dokument. Blind-Profil (Se sid X för info). Aktiverar eller inaktiverar tabelläge.</p>
8		<p>Daisy Kompass Sitter på enhetens övre vänstra sida. Består av fyra pilknappar och en mittknapp. Tryck på mittknappen för att få batteristatus i dokumentläge. I Kamerabild, släcks och tänds LED belysning. Tryck på pilknapparna för att navigera i menyer och dokument.</p>








Skanna, Läsa och spara dokument

1. Placera ett papper framför OmniReader, se till att papprets kant möter enhetens nedre framsida.
2. Tryck på den stora runda skannerknappen , placerad mitt uppe på enheten.

Pappret kommer visas på skärmen i kameravy, innan OmniReader fångar bilden.

3. När pappret är skannat, presenteras texten på skärmen i dokumentvy, och uppläsningen startar.

Vid uppläsning kan du göra följande:

- Tryck på Höger väljarknapp  för att pausa uppläsning. Tryck igen för att starta uppläsning.
- Tryck på Vänster väljarknapp  för att byta kontrastfärg på text och bakgrund.
- Tryck på Menyknappen  för att spara dokumentet, eller välj att stänga utan att spara.
- Tryck på Lägesknappen  för att växla mellan Kamervy och dokument.
- Tryck på Skannerknappen  för att avbryta och påbörja en ny skanning.




Spara ett skannat dokument





För att spara ett skannat dokument, gör följande:

1. Tryck på Menyknappen . Valet spara dokument eller stänga dokument visas på skärmen.
2. Med valet spara dokument markerat, trycker du Höger väljarknapp .
3. Använd höger Rullknapp för att välja mellan ett av dessa val och tryck på Höger Väljarknapp  för att välja.
 - Spara med Röst tagg.
 - Spara utan röst tagg.

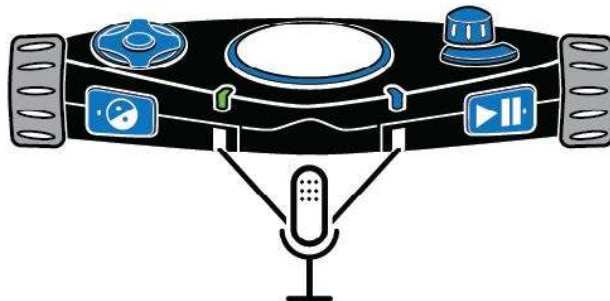Not. En röst tagg är en ljudinspelning, där du själv namnger ett Dokument med din röst. När du sedan bläddrar bland sparade dokument, hör din röst tagg istället för en numrerad fil.

Om du väljer att spara med röst tagg, får du besked att du ska ge dokumentet en enkelt namn.





- När du är redo, tryck på Vänster väljarknapp , och påbörja inspelning. Tryck på Vänster väljarknapp  för att stoppa inspelning, din inspelning kommer nu spelas upp.
- Om du är nöjd med inspelningen, tryck Vänster väljarknapp  för att spara.
- Om du vill höra inspelningen igen, tryck på Höger väljarknapp .



Om du sparar utan röst tagg, skapas ett löpande filnamn typ; Dokument_1, men ingen röst tagg skapas.

Not. Om ett USB minne är anslutet, sparas dokumentet på denna enhet under roten. Är inget USB minne anslutet, sparas dokumentet i OmniReader.





4. När ett dokument är sparat, visas dokumentet i dokumentvyn, och läses automatiskt upp.

5. För att stänga, tryck på Menyknappen  följt av höger väljarknapp  för att bekräfta att du stänga dokumentet. Efter stängning visas sparade dokument på skärmen.

Spara en bok (Flera sidor)

När du skannar två eller flera sidor, kallar OmniReader detta en Bok. Innan du skannar en bok, måste du skapa en Bokfil med hjälp av en Röst tagg, eller spara med ett automatiskt filnamn.






Skapa en Bokfil

1. Från huvudmenyn, gå med höger rullhjul till Filer, och tryck på höger väljarknapp .
2. Gå med höger rullhjul till Spara ny bok, och tryck höger väljarknapp . Du blir nu ombedd att skapa en röst tagg.
3. När du är redo att spela in, tryck på Vänster väljarknapp  Och börja inspelning., tryck på knappen igen när du är klar. Din inspelning kommer nu spelas upp, är du nöjd, tryck ytterligare en gång på knappen för att spara
4. När boken är sparad, kommer OmniReader meddela att du ska trycka på Skannerknappen  för att lägga till sida.



Öppna ett dokument eller en bok

Normalt visas som dokument eller böcker som är sparade i enhetens minne, men ansluts ett USB minne visas dessa filer.

1. Från huvudmenyn, gå med höger rullhjul till Filer, och tryck på höger väljarknapp .
2. Med höger rullhjul bläddrar du mellan sparade filer, tryck på höger väljarknapp , du kan nu välja på att Öppna, byta namn eller radera filen. Välj öppna och tryck på höger väljarknapp . Uppläsningen startar automatiskt.
3. För att stänga, tryck på Menyknappen  följt av höger väljarknapp  för att bekräfta att du stänga dokumentet.




Inställningar


Ändra Rösthastighet


Ändring av hastighet påverkar både läsröst och menyröst.


Från huvudmenyn, använd höger rullhjul för att gå till

Inställningar, och tryck Höger väljarknapp  två gånger för att välja Allmänna inställningar.

Tryck Höger väljarknapp  för att välja Läshastighet, hastigheten kan ändras i steg från 1 upp till 10 som är snabbast. Grundinställning är 5.





Skrolla med höger rullhjul bland valen, och välj med Höger väljarknapp .

Du kan nu fortsätta göra andra inställning, eller återgå till huvudmenyn med Menyknappen .

Not. Om Blind-Profil är vald, ändra läshastigheten med Vänster rullhjul. Och läsröst väljs med Vänster väljarknapp .







Ändra läsröst

Läsrösten kan vara en av dom Svenska rösterna Oskar och Alva eller en röst på annat språk.


1. Från huvudmenyn, använd höger rullhjul till Inställningar, och tryck Höger väljarknapp  två gånger för att välja Allmänna inställningar.
2. Skrolla med höger rullknapp till Läsröst och tryck Höger väljarknapp .
3. Skrolla och välj önskad röst/ språk och välj med höger väljarknapp , ny rösten är nu aktiv.
4. Du kan nu fortsätta göra andra inställning, eller återgå till huvudmenyn med Menyknappen .






Ändra Text och Textstorlek

1. Från huvudmenyn, använd höger rullhjul till Inställningar, och tryck Höger väljarknapp  två gånger för att välja Allmänna inställningar.
2. Skrolla med höger rullknapp till Text och tryck Höger väljarknapp .
3. Skrolla och välj önskad Font och välj med höger väljarknapp , ny font är nu aktiv.
4. Skrolla till Textstorlek och tryck Höger väljarknapp . Skrolla till önskad textstorlek och tryck Höger väljarknapp , ny storlek är nu aktiv.
5. Du kan nu fortsätta göra andra inställning, eller återgå till huvudmenyn med Menyknappen .

Ändra kontrastinställning vid läsning

5 olika kombinationer av text och bakgrund finns tillgängliga som grundinställning, för att lägga till eller ta bort kombinationer se nästa rubrik. I synsvag profilen används Vänster väljarknapp  till att byta kontrast vid uppläsning av dokument. Använder du Blind profil görs dessa inställningar under Allmänna inställningar och Kontrast.

Lägga till och ta bort kontrast färger


1. Från huvudmenyn, använd höger rullhjul till Inställningar, och tryck Höger väljarknapp  två gånger för att välja Allmänna inställningar.
2. Skrolla med höger rullknapp till Kontrast och tryck Höger väljarknapp .
3. Skrolla och välj önskad kontrast, en bock markerar om valet är aktivt, om inte välj med höger väljarknapp .



Gör på samma sätt för att avmarkera ett val.

4. Upprepa steg 3 för att lägga till eller ta bort kontraster.

5. Du kan nu fortsätta göra andra inställning, eller återgå till

huvudmenyn med Menyknappen .

Kontrastfärger

Följande kombinationer finns i grundinställningar:


- Färg (Finns endast i kameranläge).
- Svart på Vit.
- Vit på Svart.
- Gul på Blå.
- Gul på Svart.

Som tillägg finns:




- Grön på Svart.
- Svart på Grön.
- Svart på Gul.
- Blå på Gul.
- Vit på Blå.
- Blå på Vit.
- Blå på Svart.
- Svart på Blå.



Läsläge





OmniReader har två uppläsningsslägen. Som grundinställning startar uppläsning direkt när ett dokument är skannat, vad vi kallar Rösläge. Läsning stoppas och startas med höger väljarknapp .

Väljer man textläge, visas den skannade texten på skärmen, men talet är inaktiverat. Ändra läsläge:

1. Från huvudmenyn, använd höger rullhjul till Inställningar, och tryck Höger väljarknapp  två gånger för att välja Allmänna inställningar.
2. Skrolla till Läsläge, och tryck på Höger väljarknapp .
3. Välj önskat läsläge, och tryck på Menyknappen  för att återgå till huvudmenyn.

Ändra Menyröst





Menyrösten kan vara en av dom Svenska rösterna Oskar och Alva eller en röst på annat språk.

1. Från huvudmenyn, använd höger rullhjul till Inställningar, och tryck Höger väljarknapp  två gånger för att välja Allmänna inställningar.
2. Skrolla med höger rullknapp till Menyröst och tryck Höger väljarknapp .
3. Skrolla och välj önskad röst/ språk och välj med höger väljarknapp , ny rösten är nu aktiv.
4. Du kan nu fortsätta göra andra inställning, eller återgå till huvudmenyn med Menyknappen .







Läge för Vänster rullknapp

Med synsvag-Profil aktiverad, används vänster rullknapp till att ändra storlek på texten som presenteras på skärmen. Här kan du ändra funktion till att istället ändra talhastighet.

1. Från huvudmenyn, använd höger rullhjul till Inställningar, och tryck Höger väljarknapp  två gånger för att välja Allmänna inställningar.
2. Skrolla med höger rullknapp till Läge för Vänster rullknapp, tryck Höger väljarknapp .
3. Välj önskad funktion, tryck Höger väljarknapp  du återgår nu till menyn för Allmänna inställningar.
4. Du kan nu fortsätta göra andra inställning, eller återgå till huvudmenyn med Menyknappen .

Läge för mittknapp Daisy


Här väljer du om Daisykompassens mittknapp ska visa Batteristatus eller fungera som Paus och startknapp för uppläsning.


1. Från huvudmenyn, använd höger rullhjul till Inställningar, och tryck Höger väljarknapp  två gånger för att välja Allmänna inställningar.
2. Skrolla med höger rullknapp till Läge för mittknapp, tryck Höger väljarknapp .
5. Välj önskad funktion, tryck Höger väljarknapp  du återgår nu till menyn för Allmänna inställningar.
6. Du kan nu fortsätta göra andra inställning, eller återgå till huvudmenyn med Menyknappen .







Tabelläge

Tabelläge informerar OmniReader att texten som skannas är i tabellformat, och presenterar skannat resultat på samma sätt. Som grundinställning är funktionen avstängd. Märker du vid skanning att uppläsningen verkar konstig, prova att aktivera tabelläge och skanna om dokumentet.


1. Från huvudmenyn, Skrolla med höger rullknapp till tabelläge, tryck Höger väljarknapp . En bock framför tabelläge markerar att funktionen är aktiv.
2. Skanna om dokumentet.

Not. Om man använder Blind-profilen, tryck på Lägesknappen  för att växla Tabelläge på eller av.


Välj användarprofil

Enheten har två olika profiler, Synsvag eller Blind. Väljer man Synsvag finns fler visuella funktioner lättåtkomliga, Vänster väljarknapp  byter kontrastfärg på skärmen, Vänster skrollhjul ändrar textens storlek, Lägesknappen  växlar mellan kamerabild och dokumentvy. I Blindprofilen ändrar Vänster väljarknapp  Röst/Språk, Vänster skrollhjul ändrar talhastighet, Lägesknappen  Tabelläge på eller av.

Från huvudmenyn, använd höger rullhjul till Inställningar, och tryck Höger väljarknapp .


Skrolla med höger rullknapp till Systeminställningar, tryck Höger väljarknapp , du står nu på Användarprofil, tryck Höger



väljarknapp  . Här kan du välja mellan Blind eller Synsvag, tryck Höger väljarknapp  för att aktiva önskad profil.

Anslutning på sidpanelen

På vänster sida av enheten finns en rad med anslutningar.

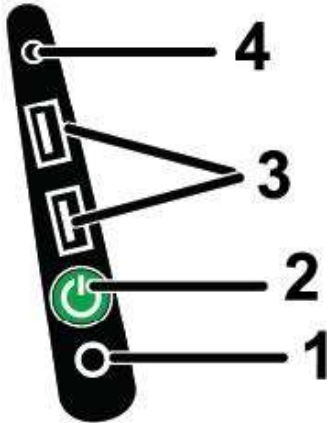

Presenterade från botten och uppåt:

1. Ladduttaget.
2. Av /På knappen.
3. Två stycken USB uttag.
4. Hörlursuttag



Tel: 010-455 04 00, E-post: info@insyn.se
www.insyn.se

