



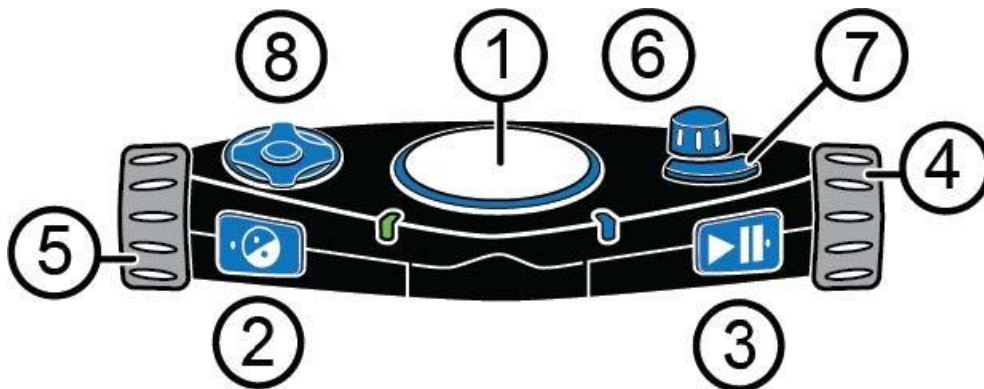


1		<p>Skanner knappen är en stor rund knapp, placera mitt uppe på enheten.</p> <p>Tryck för att skanna ett dokument, och börja läsa.</p>
2		<p>Vänster väljar knapp sitter på vänster sida, innan Vänster rull knapp.</p> <p>I en meny, backar till föregående meny.</p> <p>Synsvag-Profil - Ändrar kontrast färger på Text och bakgrund.</p> <p>Blind-Profil - Byter läsröst.</p>
3		<p>Play knappen sitter till höger innan höger innan Höger rull knapp.</p> <p>Vid läsning av dokument, pausar eller startas läsning.</p> <p>I en meny, gå vidare, eller välj markerar funktion.</p>
4		<p>Höger rullknapp</p> <p>Ett stort hjul placerad på enhetens övre högra sida.</p> <p>Rulla hjulet för att flytta i en meny eller i ett dokument.</p>

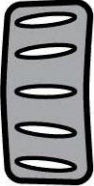

<p>5</p>		<p>Vänster rullknapp</p> <p>Ett stort hjul placerad på enhetens övre vänstra sida.</p> <p>Synsvag-Profil - Rulla hjulet för att ändra textstorlek.</p> <p>Blind-Profil - Rulla hjulet för att ändra talhastighet.</p>
<p>6</p>		<p>Meny knapp /Ratt Ratt placerad bakre övre högra sidan.</p> <p>Volym ratt: Vrid för ljud upp och ner.</p> <p>Meny knapp: Tryck för att öppna och stänga huvudmeny.</p>
<p>7</p>		<p>Lägesknapp Sitter framför Meny ratten.</p> <p>Synsvag-Profil - Växlar mellan kamerabild och aktuell meny eller dokument.</p> <p>Blind-Profil - Aktiverar eller inaktiverar tabelläge.</p>
<p>8</p>		<p>Daisy Kompass Sitter på enhetens övre vänstra sida.</p> <p>Består av fyra pilknappar och en mittknapp.</p> <p>Tryck på mittknappen för att få batteristatus i dokumentläge. I Kamerabild, släcks och tänds LED belysning.</p> <p>Tryck på pilknapparna för att navigera i menyer och dokument.</p>