

# Snabbguide

## PEARL



## Innehåll

Läs detta först.....	3
Introduktion.....	4
Fälla upp och ner PEARL.....	5
Fäll ihop PEARL.....	5
Placera dokument under PEARL.....	7
Visningslägen.....	8
Textvy.....	8
Exakt Vy.....	8
Delad Vy.....	9
Kamera Vy.....	9
Tangentkombinationer.....	10



## Läs detta först

- Se till att din Freedom Scientific-programvara installeras först på din dator innan du ansluter PEARLs USB-kontakt till datorn.
- Tryck in de gula knapparna på stativet innan du försöker fälla upp eller ner stativet.
- Läs informationen i manualen innan du öppnar och börjar använda PEARL, här får du en grundläggande information hur man ställer upp enheten, ansluter till datorn och placerar dokumentet rätt under PEARL.
- Övriga funktioner hänvisas till dokumentation till den programvara som ska användas.

## Introduktion

Gratulerar till ert inköp av PEARL!

PEARL är en portabel skanningskamera som används i kombination med Freedom Scientifics programvaror t.ex. OpenBook 9 eller senare, eller ZoomOffice för MAC.

PEARL-kameran har ett automatiskt läge som känner av rörelse och skannar en bild när en sida vänds. Det fungerar i de flesta rumsbelysningar. Om rummet är mörkt, Tänd bara den inbyggda LED-lampan. (Kortkommando **CTRL+L** i OpenBook).



## Fälla upp och ner PEARL


Använd följande steg och illustrationer för att fälla upp PEARL och ansluta den till din dator.

**Obs! Håll alltid in de två gula knapparna för att fälla upp eller ner PEARL.**

1. Ta upp PEARL från väskan och vrid ut pappersguiden, tills den är vinkelrät mot stativet och kamerans arm. Guiden låser i rätt läge. Se Figur 1
2. Placera PEARL på en fast, plan yta.
3. Håll in den gula knappen närmast foten, och fäll upp nedra stativet, armen låser i rätt läge. Se figur 2.
4. Håll in andra gula knappen och fäll upp övre armen med kamera till den klickar i rätt läge. Se figur 3.
5. Se till att programvaran (OpenBook) är installerad på datorn. Anslut PEARL till en ledig USB port.
6. Starta programvaran, se dokumentation för hantering.


## Fäll ihop PEARL

Utför stegen ovan i omvänd ordning.

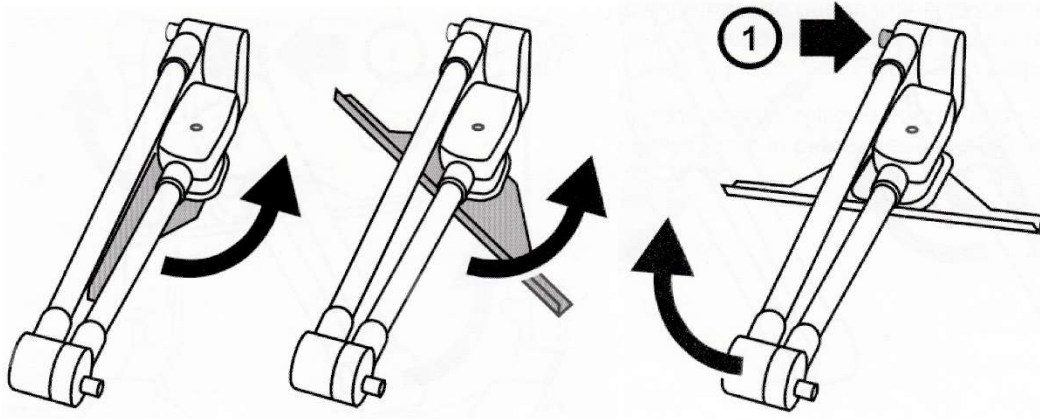

Figur 1.

Figur 2.

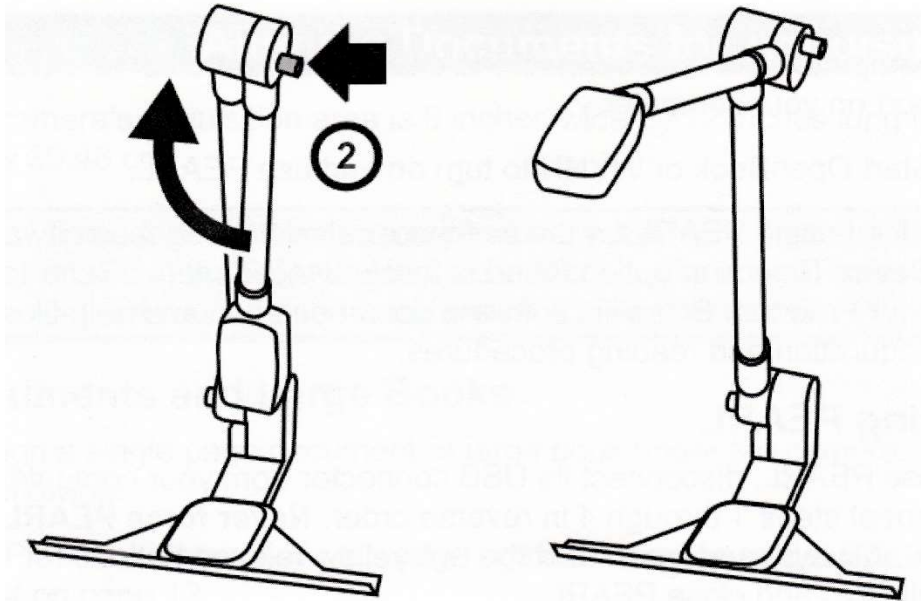

Figur 3.




## Placera dokument under PEARL

Kameran fångar bilder i storlek 22.86mm x 30.48mm.

**Notera. För bästa resultat, ha alltid en ljus bakgrund under kameran, där dokumentet placeras.**

1. Placera dokumentet med översidan mot pappersguiden, centrera pappret.
2. En större bok placeras så önskad sida är centrerad mot guiden.
3. Små böcker placera med höger eller vänster sida upp, då kan två sidor skannas samtidigt.
4. När texten är rätt placera tryck **F4** eller **MELLANSLAG** för att skanna (OpenBook).

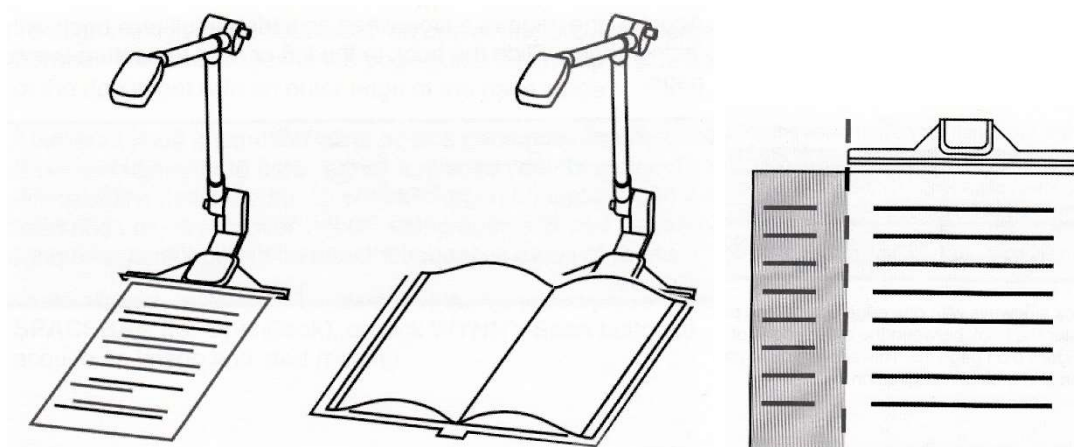

## Visningslägen

Du kan växla mellan följande visningslägen: Textvy, Exaktvy, Delad vy och Kameravy. Tryck **CTRL+SKIFT+V** upprepade gånger för att växla vy.

### Textvy

Textvy visar texten från en hämtad sida när den har tolkats av OpenBook. Textvy är den primära vyn och det är här du utför de flesta

redigeringsfunktionerna så som lägga till eller ta bort text och stavningskontroll, liksom också markering, kopiering, klippa ut, och klistra in text. I den här primära vyn kan du också använda olika OpenBook verktyg, så som markera text, lägga till bokmärken, infoga kommentarer, och lägga på olika funktioner för synsvaga så som teckenstorlek, typsnitt, teckenmellanrum, och text och bakgrundsfärg. Textvy är alltid aktiv som standard efter varje hämtning.

### Exakt Vy

Exakt vy är den hämtade sidan visad exakt som originaldokumentet. Du aktiverar Exakt Vy genom att öppna menyn Visa (**ALT+V**) och välja Exakt Vy. Du kan också trycka **CTRL+SHIFT+V** för att cirkulera mellan

Textvy, Exakt Vy, Delad Vy, och Kamera Vy. Om den aktuella sidan inte har någon Exakt Vy bild, visar OpenBook en bild innehållande meddelandet "Ingen Bild Tillgänglig."





## Delad Vy

Den här kraftfulla funktionen låter dig ha åtkomst till både exakt vy och textvy samtidigt, så du inte behöver skifta fram och tillbaka när du försöker jämföra den tolkade texten med originalbilden. Du aktiverar Delad Vy genom att öppna menyn Visa (**ALT+V**) och välja Delad Vy. Du kan också trycka **CTRL+SHIFT+V** för att cirkulera mellan Textvy, ExaktVy, Delad Vy, och Kamera Vy. När det är aktiverat, visas den Exakta

Vyn, eller den hämtade originalbilden i den nedre delen av skärmen, medan Textvyn, eller den tolkade texten, visas i den övre delen av skärmen.

## Kamera Vy

Kamera Vy visar en realtids vy från PEARL kameran på din bildskärm; det innebär att om du flyttar saker runt under kameran, så som vända sida eller flytta och ersätta saker, kommer bilden på bildskärmen att uppdateras omedelbart. Det är annorlunda jämfört med Exakt Vy vilken endast visar bilden som har hämtats. Du aktiverar Kamera Vy genom att öppna menyn Visa (**ALT+V**) och välja Kamera Vy. Du kan också trycka **CTRL+SHIFT+V** för att cirkulera mellan Textvy, Exakt Vy, Delad Vy, och Kamera Vy.

## Tangentkombinationer

För ytterligare tangentkombinationer, öppna Hjälpmenyn och välj Tangentbordskommandon.

- **F4**: Skanna och läs dokument (Skrivskyddat läge och Redigeringsläge).
- **MELLANSLAG**: Skanna och läs dokument (Skrivskyddat läge).
- **CTRL+SHIFT+V**: Skiftar Mellan Vyer.
- **CTRL+PLUS**: Ökar zoom (tryck och håll för kontinuerlig zoom).
- **CTRL+MINUS**: Minskar zoom (tryck och håll för kontinuerlig zoom).
- **CTRL+SHIFT+R**: Roterar kamera vy åt höger.
- **CTRL+SHIFT+L**: Roterar kamera vy åt vänster.
- **WINDOWSTangent+CTRL+PIL NER**: Panoreras vy ner.
- **WINDOWSTangent+CTRL+PIL UPP**: Panoreras vy upp.
- **WINDOWSTangent+CTRL+PIL VÄNSTER**: Panoreras vy vänster.
- **WINDOWSTangent+CTRL+PIL HÖGER**: Panoreras vy höger.
- **CTRL+ALT+PAGE UP**: Ökar talhastighet.
- **CTRL+ALT+PAGE DOWN**: Minskar talhastighet.
- **CTRL+L**: Tänder eller släcker kamerans LED belysning.





Tel: 010-455 04 00, E-post: [info@insyn.se](mailto:info@insyn.se)  
[www.insyn.se](http://www.insyn.se)

