

Video handledning OrCam Read Pro



Ver 1



Innehåll

Konfigurera OrCam Read.....	3
Video 1: Uppackning	3
Video 2: Delar och knappar.....	4
Video 3: Laddning, påslagning och avstängning	4
Video 4: Ansluter till Bluetooth.....	4
Läsa med OrCam Read	5
Handledning för röstkommandon för OrCam Read	6
Smart läsning Video Tutorial för OrCam Read	7
Video 5: Smart läsning	7
Inställningar och anslutningar Videosjälvstudier för OrCam Read	8
Ansluter till Bluetooth	8
Video 6: Ansluter till Bluetooth.....	8



Konfigurera OrCam Read


Här kommer information på hur du ställer in, läser och navigerar med din OrCam Read. I texten finns inbäddade länkar till Videoklipp. (Är på engelska).

Video 1: Uppackning

Klicka på länken nedan för att starta videohandledning, klicka i videon för att starta:

https://www.youtube.com/watch?v=yGNLI-EB-D4&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fknowledgebase.orcham.com%2Fknowledge%2Forcam-read-setup-tutorials&feature=emb_imp_woyt

Nedan är en bild som visuellt visar som en linjeritning alla objekt som finns i boxen

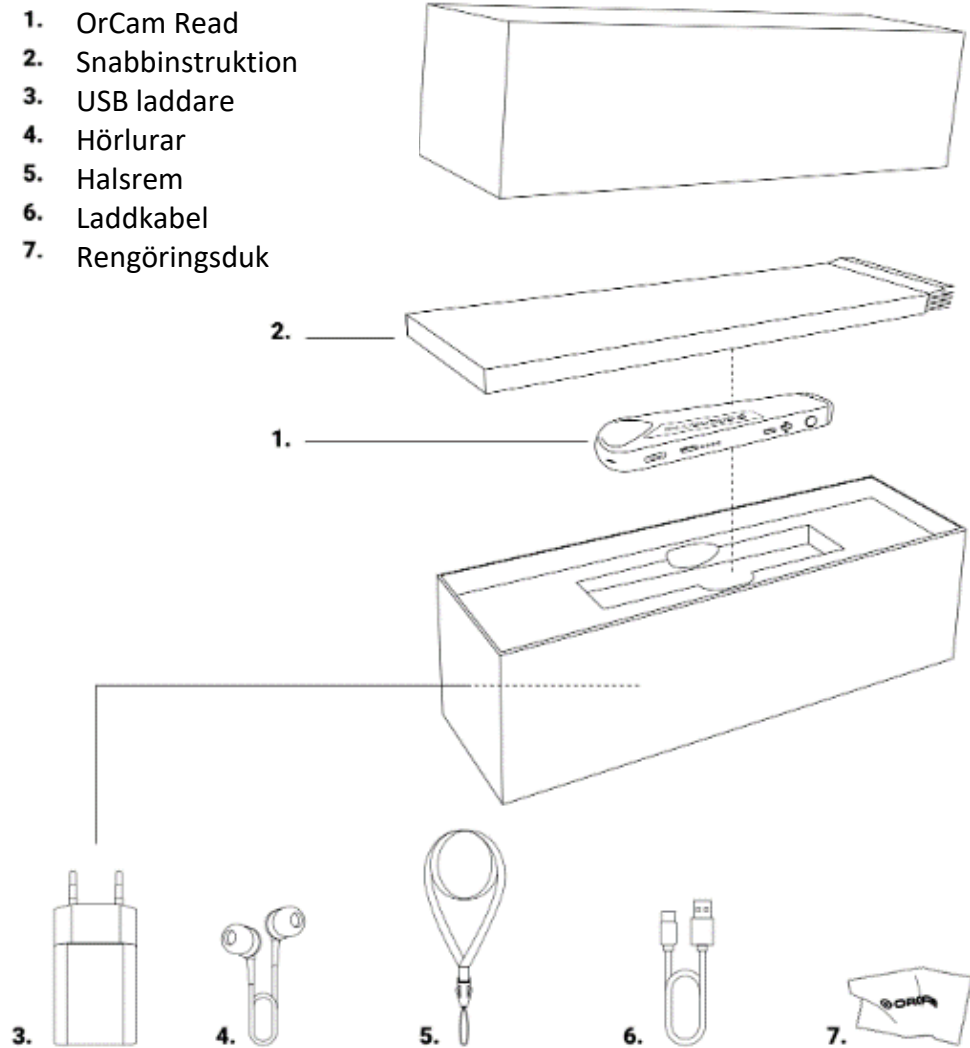

Video 2: Delar och knappar

Klicka på länken nedan för att starta videohandledning, klicka i videon för att starta:

<https://youtu.be/H6rowtFH5al>

Ytterligare användbar information:

- **HÖGTALARE:** Högtalaren är på undersidan av enheten, på långsidan, nära ljuduttaget.
- **LED PÅ/AV:** Detta är en rund LED lampa bredvid högtalaren. När enheten stängs av och sedan slås på kommer denna lampa att bli orange och sedan blå.
- **STARTKNAPP:** Den runda knappen nära kameran som används för att utföra de flesta funktionerna.
- **STRÖMKNAPP:** Den smala rektangulära knappen mellan de fyra LED-lamporna och laddningsuttaget som används för att slå på och stänga av enheten samt för att gå in i inställningsmenyn.

Video 3: Laddning, påslagning och avstängning

Klicka på länken nedan för att starta videohandledning, klicka i videon för att starta:

https://youtu.be/3GW_AtQ9YP4

Ytterligare användbara tips:

- **Viloläge:** Du kan gå in i det här läget när enheten är på och det låter dig spara batteritid utan att stänga av enheten helt.
- **SLÅ PÅ FRÅN VILOLÄGE:** Tryck och håll ned strömknappen tills du hör ett pip, lyft sedan fingret. LED-lamporna bredvid strömbrytaren tänds, medan på/av-lampan på undersidan av långsidan inte kommer att lysa. Enheten är omedelbart redo att användas.
- **SLÅ PÅ FRÅN AVSTÄNGTLÄGE:** Tryck och håll ned strömknappen tills du hör ett pip, lyft sedan fingret. På/av LED-lampan tänds omedelbart, först orange och sedan blå. Det kommer att ta cirka 20-30 sekunder för LED-lamporna bredvid strömknappen att tändas och för enheten att slå på helt.

Enheten går automatiskt in i Viloläget efter 3 minuters inaktivitet. Denna tidsram kan justeras i inställningsmenyn.

- Du hittar alternativet att ändra denna tid i menyn 'Allmänna inställningar', som är det sjunde alternativet i inställningsmenyn.
- När du väl väljer "Meny för allmänna inställningar" låter det tredje alternativet dig ändra den automatiska avstängningstiden.

Efter 3 timmar i Viloläge stängs den av automatiskt.

Det finns fyra LED-lampor bredvid strömbrytaren som indikerar batteristatus. Varje lampa representerar 25 % av den fulla laddningen. Till exempel betyder fyra lampor att batteriet är mellan 75 % - 100 % laddat.

Video 4: Ansluter till Bluetooth

Klicka på länken nedan för att starta videohandledning, klicka i videon för att starta:

<https://youtu.be/5v3p717-Jrg>

FÖR ATT GÅ IN I INSTÄLLNINGS-/INSTÄLLNINGSMENYN:

- Tryck och håll ned strömknappen medan du trycker på '+'-knappen och släpp sedan båda. Du kommer att höra enheten meddela, 'Huvudmeny, för att ställa in läshastigheten.....'.
- Använd '+'-knappen för att gå igenom menyalternativen. Menyn för anslutningsinställningar är det sjätte alternativet.
- Följ enhetens instruktioner.



Läsa med OrCam Read

Dessa två videor och tips hjälper dig att komma igång med att använda din enhet för att läsa text. Vi rekommenderar att du går igenom dessa videohandledningar i den ordning som presenteras, så att du kan lära dig att använda din enhet så enkelt och snabbt som möjligt. Börja med 'Setup' och fortsätt här med 'Reading', sedan 'Vocal Commands' och så vidare. Du hittar i slutet av varje avsnitt länken till nästa rekommenderade videohandledning.

Det finns två sätt att läsa med OrCam Read:

- Läsning med Startknappen, som beskrivs i detta avsnitt.
- Smart läsning, som tas upp i ett kommande avsnitt (eftersom det kräver förståelse för röstkommandon först).

Video 1: Läsa med lasern

Klicka på länken nedan för att starta videohandledning, klicka i videon för att starta:

<https://youtu.be/fthTQPq7I80>

Video 2: Lästips

Klicka på länken nedan för att starta videohandledning, klicka i videon för att starta:

https://youtu.be/lgJFF6Do0_Y

Laserpekarlägen

Det finns två laserpekarlägen som är utformade för att hjälpa dig fokusera din OrCam Read på vilken text du vill. ramläget och mus/pilläget:



Ram



Mus/Pil

Enheten levereras med Ram som standard. Du kan växla mellan de två genom att trycka på ('+') och ('-') knapparna samtidigt.

Alternativet du väljer är baserat på exakt vad du vill fånga. Med övning kommer du snart att bli bekant med vilket alternativ som är bäst vid vilken tidpunkt.

TIPS:

- Oavsett vilket laserläge du använder, håll startknappen intryckt i minst 2 sekunder. När du släpper avtryckarknappen hörs slutarljudet från kameran som tar en bild och sedan flera pip medan enheten bearbetar till information. Du kan röra handen så snart du har hört slutarljudet.
- När du väljer ett specifikt område, håll stadigt och räkna "en, två" innan du släpper startknappen. Detta för att säkerställa bästa resultat och att en kvalitetsbild tas.

1. RAM LASER:

Vi rekommenderar att du övar med alternativet ramlaser först. Det här är bra att läsa två sidor av en bok åt gången eller en halv tidningssida, eller så kan du välja mindre specifika textavsnitt inom ramen.

- Enheten börjar läsa från en rad eller två ovanför ramen.
- För att läsa en enda sida med text i stående läge, justera helt enkelt sidan inom tre sidor av



laserkanten. Du kan ha lasern hängande över kanten på sidan, och enheten kommer fortfarande att läsa texten i den.

2. MUS/PILLASER:

Det här är bra att läsa specifika textblock. Centrera pilen i mitten av textblocket för bästa resultat. Enheten börjar läsa från början av det specifika textblocket och inte från ordet som pekas på. Enheten ser en sida i en bok som ett textblock. För att fånga en sida i en bok med musen/pilen, centrera den i mitten av sidan.

Det här läget är perfekt för liten text, som visitkort, etiketter, textmeddelanden på din telefon, för att läsa text från din dator eller smartphone, enskilda spalter i en tidning eller välja specifika textblock i en tidning.

Läsnavigering

Navigera enkelt i vilken text som helst medan du läser.

- För att pausa eller återuppta läsningen, tryck på startknappen två gånger, mycket snabbt.
- För att hoppa till nästa mening, tryck på volymknappen plus ("+") en gång.
- För att gå tillbaka till föregående mening, tryck på minus ("-") volymknappen en gång.
- För att sluta läsa, tryck en gång på startknappen.

OrCam Read kommer att avge ett ljud när du har läst klart.

Handledning för röstkommandon för OrCam Read

Informationen i det här avsnittet kommer att lära dig hur du använder röstkommandon för din OrCam Read.

Notera att röstkommandon bara är på engelska, för att detta ska fungera på din enhet måste systemspråket ändras till Engelska. Uppläsningen kommer fortsatt vara på svenska.

Det finns två sätt att komma åt röstkommandon:

1. MANUELLT

- Dubbeltryck på startknappen,
- Vänta på det långa pipljudet och säg sedan röstkommandot.
- Efter 2-3 sekunder hör du en ljudsignal och enheten svarar.

OBS: Dubbeltryckningen för att använda röstkommandon måste vara snabb. När du gör det korrekt kommer du att höra ett långt pip. Om du trycker för långsamt kommer du att höra slutarljudet från enheten som tar en bild. Om du tycker att dubbeltryckningen är utmanande, använd alternativet "Hey OrCam" nedan.

2. RÖST använd "HEY ORCAM"

- Säg "Hey OrCam" följt av röstkommandot.
- Efter 2-3 sekunder hör du en ljudsignal och enheten svarar.

OBS: Om du provar alternativet 'Hey OrCam' och enheten inte svarar, betyder det att du först måste aktivera funktionen 'Hey OrCam' på din Read-enhet.

[Klicka här för att följa stegen för att aktivera den här funktionen.](#)

Röstkommandon är indelade i 3 kategorier:

1. **Informationskommandon** som gör att du kan få information från din enhet, såsom tid, datum, batteristatus, serienummer, etc.



PRÖVA DESSA:

- Tell the time
 - Tell the battery status
 - Tell the date
2. **Inställningskommandon** som gör att du kan konfigurera din enhet, som att ändra läshastighet, volym, röst, etc.

PRÖVA DESSA:

- Read slower
- Read faster
- Enter the user menu (dubbeltryck snabbt på startknappen för att avsluta)

3. **Smart Reading-kommandon** kopplade direkt till Smart Reading-funktionen

[Klicka här för en fullständig lista över alla röstkommandon för OrCam Read.](#)

Smart läsning Video Tutorial för OrCam Read

Video 5: Smart läsning

Funktionen Smart Reading är utformad för att hjälpa dig hitta den information du letar efter med hjälp av röstkommandon. Du kan be enheten att läsa saker som rubriker, specifika artiklar, datum, belopp eller hitta specifika ord.

Klicka på länken nedan för att starta videohandledning, klicka i videon för att starta:

<https://youtu.be/zeSerUmG6RU>

Smart läsning steg för steg guide:

Så här aktiverar du den här funktionen:

1. Rikta OrCam Read mot mitten av sidan eller mellan sidorna i en bok, håll den cirka 12 tum (30 cm) från texten och i 90 graders vinkel mot texten.
2. Dubbeltryck snabbt på startknappen och efter det långa pipet säg "Smart Reading". Efter 1-2 sekunder kommer enheten att avge ett "ringljud" och sedan göra slutarljud, följt av en serie pip medan den bearbetar bilden. Du kan röra handen efter att du har hört slutarljuden.
 - Alternativt kan du helt enkelt säga: "Hey OrCam, Smart Reading". Enheten kommer då att börja göra kameraslutarljud.
3. Efter att enheten säger "Ready", kommer enheten alltid att lyssna. Du behöver inte snabbt dubbeltrycka på startknappen före varje röstkommando.
4. Säg ett röstkommando.
 - Read everything
 - Read the headlines
 - Volume up
 - Find "X"
 - [Klicka här för en lista över Smart Reading Vocal Commands](#)
5. Om du vill säga ett nytt kommando medan enheten läser, tryck på startknappen en gång och enheten kommer att återgå till läget "Always Listening".
6. Så här avslutar du den här funktionen:
 - Säg "Exit" eller
 - Tryck länge på startknappen i 5 sekunder och släpp sedan.

OrCam Read kommer att säga "Exiting" när den lämnar Smart Reading-funktionen.



Inställningar och anslutningar Videosjälvstudier för OrCam Read

Dessa 2 videor och självstudieinformation kommer att lära dig hur du kommer åt och navigerar i inställningsmenyn, samt hur du ansluter till Bluetooth-enheter.

Video 1: Åtkomst till enhetsinställningarna (ljudmeny)

Klicka på länken nedan för att starta videohandledning, klicka i videon för att starta:

<https://youtu.be/H6P7esApXQA>

Inställningsmenyn låter dig anpassa din enhet, från läshastighet, till språk, volym, enhetsröst och mer.

[Klicka här för att se OrCam Read Settings Menylayout med alla tillgängliga anpassningar.](#)

Hur man kommer åt inställningsmenyn

Det finns tre sätt att komma åt inställningsmenyn:

1. Dubbeltryck snabbt på startknappen och efter det långa pipljudet, säg "Gå in i användarmenyn".
2. Om du har aktiverat "Hey OrCam" på din enhet kan du helt enkelt säga: "Hey OrCam, gå in i användarmenyn".

[Klicka här för instruktioner om hur du aktiverar funktionen "Hey OrCam".](#)

3. Tryck och håll ned den långa strömbrytaren med din ena hand, tryck sedan på knappen ('+') eller ('-') med din andra hand och släpp sedan båda knapparna.

Hur man navigerar i Inställningsmenyn

När du är i menyn för ljudinställningar, lyssna noga på ljudinstruktionerna.

- Genom att trycka på startknappen bekräftar du det valda alternativet.
- Genom att trycka på volymknapparna bläddrar du igenom alternativen.
- Genom att dubbelklicka på startknappen skickas enheten antingen tillbaka till föregående meny eller stänger ljudinställningsmenyn.

Om du inte gör ett val kommer enheten att upprepa samma meddelande. Om ingen åtgärd görs innan det går 30 sekunder kommer enheten automatiskt att stänga ljudinställningsmenyn.

Ansluter till Bluetooth

Video 6: Ansluter till Bluetooth

Klicka på länken nedan för att starta videohandledning, klicka i videon för att starta:

<https://youtu.be/5v3p717-Jrg>

Grattis! Du har slutfört videohandledningarna för din OrCam Read.



Tel: 010-455 04 00, E-post: info@insyn.se
www.insyn.se

