



MANO

Användarmanual



Innan första användningen


Sätta i det laddningsbara batteriet i höljet

- Ta ut MANO ur plastpåsen
 - Vik ut den ihopvikbara ställningen tills den låses på plats
 - Skjut upp batteriluckan genom att trycka i riktningen hos pil 1
 - Ta bort batteriluckan
 - Ta ut det laddningsbara batteriet ur förpackningen
 - Sätt i det laddningsbara batteriet i facket och försäkra dig om att kontakterna är rätt positionerade
 - Skjut batteriluckan tillbaka över facket enligt illustrationen (Försäkra dig om att hålen på batteriluckan passar in över pinnarna som finns i fyrkant på höljet)
 - Skjut batteriluckan mot batteriet.
- Tryck i riktningen hos pil 2 tills den låses på plats

Snabbreferensguide

- Tryck på den gula knappen: slå på/av MANO
- Tryck på zoomningsknappen: ändra färgläge
- Tryck zoomningsknappen uppåt/nedåt: zooma in/ut
- Tryck på stillbildsknappen vid visning av rörlig bild: spara bilden
- Tryck stillbildsknappen uppåt: växla mellan frusen och rörlig bild
- Tryck stillbildsknappen nedåt: nästa bild visas
- Håll stillbildsknappen intryckt: rulla zoomad bild

**Illustrationer:
Innan första användningen:**

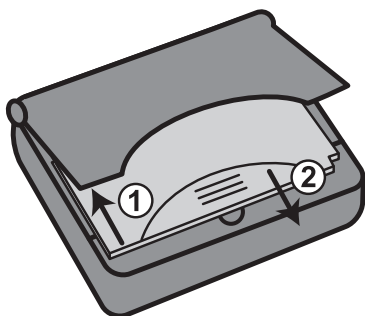

**Ihopvikbar
ställning**

Batterilucka

Snabbreferensguide



stillbild

på/av



Zoom

MANO är ett elektroniskt förstoringsglas som förstorar bilder och text. Du kan använda det hemma eller ta det med dig när du går och handlar eller besöker någon.

Tillbehör

Följande utrustning medföljer i paketet:

- **en laddare med fyra landsspecifika stickproppar (de landsspecifika stickpropparna garanterar en världsomspännande tillämpning)**
- **en handrem**
- **en skyddsväska**
- **en manual på tre språk: tyska, engelska, spanska**
- **en mikrofiberduk för att rengöra displayen**

Observera innan användning av enheten

Var god observera!

Läs manualen noggrant innan du slår på enheten. Förvara manualen på ett säkert ställe för framtida konsultering.


Om du behöver returnera din MANO för service, förpacka den i dess originalkartong och returnera den till din återförsäljare samt ange vilket problem du upplever.

Tillverkaren är inte ansvarig för krångel eller skador som förorsakats av olämplig användning.

1. Upstart

Var god sätt i det förladdade batteriet som beskrivs i snabbstartsguiden på omslagets framsida. MANO kan slås på genom att trycka på den gula på/av-knappen.

2. Beskrivning av kontrollerna

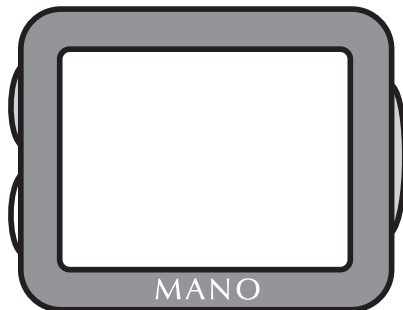

framsida



Vänster sida

rörlig bild
stillbild
bildväljare

på/av

Höger sida

Zoom plus
färgläge
Zoom Minus

plugg för
Ac-adapter



2.1 Gul "på/av"-knapp

På-/av-knappen är omisskännligt markerad med gult. När du trycker in knappen i 3 sekunder slås MANO på. För att slå av MANO, tryck kort på den gula knappen.

2.2 Zoomningsknappen med 4 funktioner

2.2.1 Zoom plus = Öka förstoring

Genom att trycka knappen uppåt kommer du att öka förstoringens graden

2.2.2 Zoom minus = Minska förstoring

Genom att trycka knappen nedåt kommer du att minska förstoringens graden

2.2.3 Ändra färgläge

Genom att trycka på zoomningsknappen kan du ändra färgvalsinställningarna på TFT-skärmen:

- Full färg
- Halv färg
- Positivt läge: svart-vitt
- Negativt läge:
vit-svart, grön-svart, gul-svart, gul-blått

2.2.4 Slå på/av belysning

Om du önskar slå av belysningen (för användning på bankomater och andra maskiner som kan förorsaka bländning), tryck på zoomningsknappen i 2 sekunder. För att slå på belysningen, tryck kort på knappen en gång till.

2.3 Knappen för stillbild/rörlig bild

Du kan ändra från frusen bild till rörlig bild med stillbildsknappen. Både text och bilder kan sparas och hämtas.

2.3.1 Spara en bild

Genom att trycka på stillbildsknappen kan du spara bilden som visas just nu på TFT-skärmen.

!Var god observera! Du kan spara upp till 3 bilder.

Om 3 bilder har sparats och du tar ytterligare en kommer den första att raderas.

2.3.2 Växla till rörlig bild

Genom att trycka stillbildsknappen uppåt växlar du tillbaka till rörlig bild.

2.3.3 Hämta sparade bilder

Genom att trycka stillbildsknappen nedåt kommer du att hämta de sparade bilderna. Upprepade tryckningar på knappen kommer att gå igenom efterföljande bilder.

2.3.4 Bildrullningsfunktion

Denna funktion gör det möjligt för dig att avläsa sparade bilder som inte kan visas i sin helhet på displayen efter att de förstörats. Detta kan användas för telefonnummer, e-postadresser, scheman, information som följer med mediciner, etc.

Tillvägagångssätt:

Välj en sparad bild. Använd zoom plus-knappen för att förstora i fall du inte kan läsa typsnittet. Skulle inte texten vara läslig pga. denna åtgärd, håll stillbildsknappen intryckt. Förflytta MANO jämnt över vilket som helst läsmaterial i vilken som helst riktning (till vänster, höger, upp och ner). Nu kommer texten att visas på displayen enligt dina rörelser.

2.4 Bildfrysingsfunktion

Funktionerna i 2.3 inklusive 2.3.4. har förinställts av tillverkaren.

Om du däremot föredrar en enkel bildfrysingsfunktion utan rullningsmöjligheter kan du inaktivera rullningen genom att trycka på stillbilda- och zoomningsknappen samtidigt i 3 sekunder. Rullningsfunktionen kommer att inaktiveras.

Genom att trycka på stillbildsknappen kommer den rörliga bilden att visas som en frusen bild på TFT-skärmen. Detta gör det möjligt för dig att ta en bild av någonting som inte är direkt framför dig (upp till 15 cm bort från MANO). Tryckning på stillbildsknappen en gång till kommer att växla tillbaka till rörliga bilder.

3. Tillämpningar

MANO kan användas på 3 olika sätt:

3.1 Läsning med ställning


Veckla ut den ihopvikbara ställningen tills den låses på plats.

Placera MANO på läsmaterialet.

Förflytta MANO med den utvecklade ställningen över läsmaterialet.


Nu kan du se ditt läsmaterial eller dina bilder på TFT-skärmen.

Vinkeln hos TFT-skärmen är ungefär 20°. Detta möjliggör en ergonomisk sittställning och en optimal framställning av kontrast och ljusstyrka.

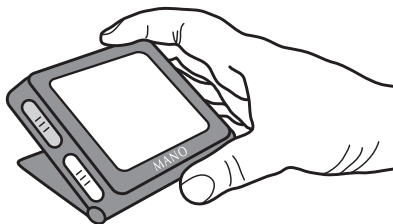

3.2 Frihandsläsning


Vik ner ställningen och håll MANO på ett avstånd av 1 till 15 cm ovanför läsmaterialet. Inom detta avstånd kan en skarp bild visas på TFT-skärmen.

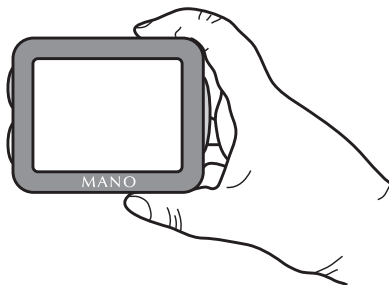

Om du önskar använda MANO för att visa skärmar så som på bankomater, datorer eller andra elektroniska displayer, kan du uppleva våldsamt bländning pga. den interna belysningen hos MANO. För att undvika bländning, stäng av det interna ljuset hos MANO (se 2.2.4).

3.3 Skrivning

Om du lyfter på MANO eller öppnar den ihopvikbara ställningen kan du skriva korta anteckningar.

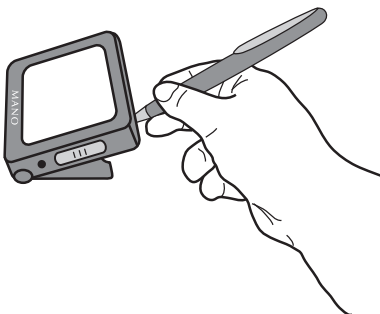

4. Batteridrift

4.1 Ladda batteriet

Stäng av MANO.

Sätt DC-pluggen hos laddaren (den mindre änden) i DC-jacket på MANO.

Sätt i laddaren i en elektrisk väggkontakt.

Det laddningsbara batteriet kommer att börja laddas. Laddningstiden är ca 2,5 timmar.

4.2 Batteriladdningsdisplay

När MANO slås på kommer du att se symbolen för det laddningsbara batteriet på TFT-skärmen.

Laddningsnivån kommer att indikeras.

Laddningsnivå 100 % = det laddningsbara batteriet är fulladdat

Laddningsnivå 50 % = det laddningsbara batteriet är halvaddat

Om symbolen för det laddningsbara batteriet blinkar rött måste batteriet laddas.

4.3 Blinkande laddningsbart batteri

Om ikonen för det laddningsbara batteriet blinkar behöver batteriet laddas omedelbart.

Om du inte börjar ladda på en gång kommer MANO att stänga av sig själv.

5. Laddare


Inkluderade i leveransen är en 100-240 volts växelströmladdare och 4 primära adaptrar. Dessa möjliggör för dig att ansluta laddaren var som helst i världen.

5.1 Medföljande stickproppar

- 1 stickpropp för Europa (EU)
- 1 stickpropp för England (UK)
- 1 stickpropp för USA, Sydamerika, Japan etc. (US/J)
- 1 stickpropp för Australien (AUS)

5.2 Ansluta stickproppen till laddaren

När du ansluter den primära adaptern får laddaren inte vara isatt i en elektrisk väggkontakt. Välj den primära adapter som krävs för din region och anslut den till laddaren. Tryck ihop delarna tills de låses på plats.

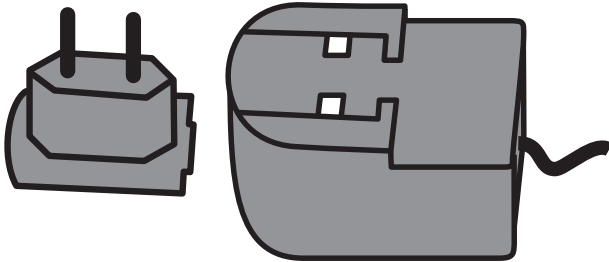

5.3 Ansluta MANO till nätspänning

Efter att du har anslutit den primära adaptern, sätt i laddaren i en elektrisk väggkontakt. Slå på MANO. Funktionerna och användningssättet är desamma som vid batteridrift. Om du använder MANO medan den är ansluten till en väggkontakt kopplas matningsspänningen till batteriet från för att bibehålla batterikapaciteten.

6. Vilolägesfunktion

Om MANO lämnas överksam i 2 minuter utan användning växlar enheten automatiskt till viloläget. Genom att helt enkelt flytta enheten slås den på igen.

7. Automatisk avstängning

Om MANO förblir i viloläget i mer än 5 minuter kommer enheten att stänga av sig helt och hållet. MANO måste sedan slås på med hjälp av på-/av-knappen.

8. Spara inställningarna


När enheten slås av kommer MANO att spara alla data och inställningar. De kommer att aktiveras så snart som du slår på enheten igen.

9. Observera vid byte av laddningsbart batteri

Du ska bara använda det laddningsbara batteri som är specificerat för MANO. Ett ersättningsbatteri kan endast köpas från Reinecker Reha-Technik GmbH eller från en av dess återförsäljare.

9.1 Byte av det laddningsbara batteriet

Slå av MANO och dra ut laddarens DC-plugg ur DC-jacket på MANO. Öppna den ihopvikbara ställningen. Skjut batteriluckan mjukt ut ur dess låsning (1), ta ut batteriluckan (2). Ta ut det laddningsbara batteriet ur facket (greppfördjupning vid kanten). Sätt i originalbatteriet i facket (Observera positionen hos kontakterna). Sätt tillbaka batteriluckan med hakarna framför låshålen ovanpå det laddningsbara batteriet. Tryck jämt på luckan och skjut den i riktning mot lysdioderna. Skjut hela vägen tills det tar stopp.

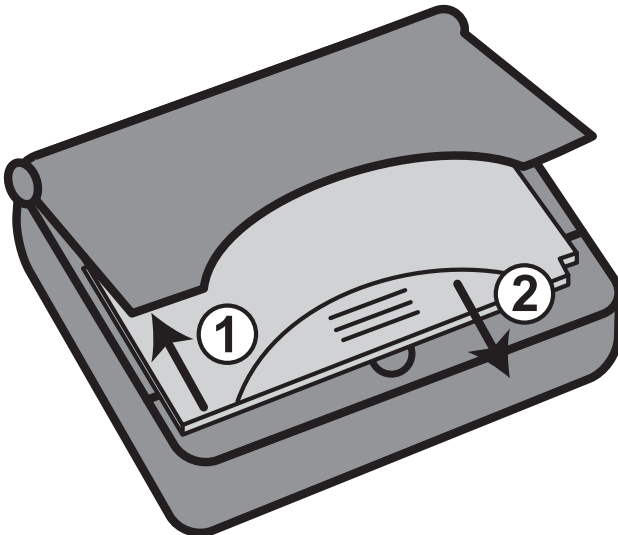

9.2 Friskrivning från ansvar vid användning av felaktigt laddningsbart batteri

Var god observera!

Du ska endast använda det laddningsbara batteri som är specificerat för MANO.

Användning av andra laddningsbara batterier än de som tillhandahålls av Reinecker Reha-Technik GmbH eller en av dess partners är uttryckligen förbjudet eftersom det kan förorsaka svår skada på enheten. MANO-garantin gäller inte i fall något annat laddningsbart batteri används.

Reinecker Reha-Technik är inte ansvarig för skada förorsakad av felaktiga eller trasiga laddningsbara batterier och inte heller olämplig hantering när det laddningsbara batteriet används, varken för skada på egendom eller på person.

9.3 Kassering av det laddningsbara batteriet


Laddningsbara batterier måste kasseras i enlighet med lagarna i respektive land. De får inte brännas. Tillåt inte att djur eller barn leker med batteriet.

9.4 Skyddskrets hos laddningsbara batterier

Trots skyddskretsen som är applicerad på det laddningsbara batteriet är det förbjudet att kortsluta kontakterna på batteriet med ett metalliskt objekt. Detta kan få det laddningsbara batteriet att explodera och därmed skapa potentiell fara för alla i närheten.

10. Skyddsväska

Var god använd alltid skyddsväskan för att förvara MANO. Displayen och höljet kommer på så sätt att skyddas från skada.

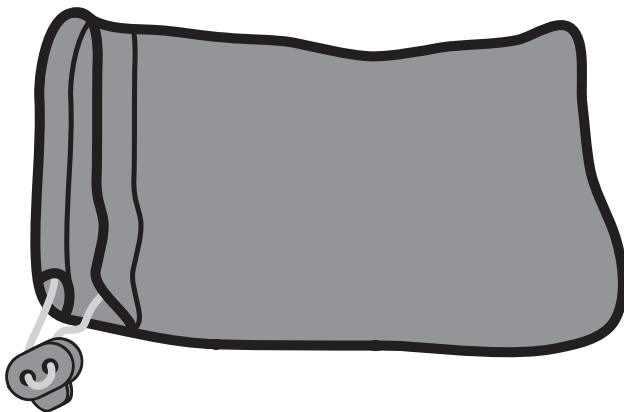

11. Handrem

I kartongen medföljer en handrem. Den kan fästas så att du kan bära MANO vid handleden.



12. Observera vid hantering

Var god observera!

- Bilderna som används i denna manual tjänar endast illustrativa ändamål och behöver inte överensstämja med de faktiska positionerna. Innehållsförändringar i denna manual kan ske utan föregående notis.
- Utsätt inte MANO för extremt direkt solljus. Förvara den till exempel inte nära fönster eller värmeelement.
- Skydda MANO från överdriven värme och placera inte andra objekt ovanpå den.
- Håll alla vätskor borta från MANO.
- Använd endast MANO i torra miljöer.
- Öppna aldrig höljet eftersom detta endast ska göras av en auktoriserad återförsäljare.
- Använd endast MANO med den angivna matningsspänningen.
- Skydda MANO från mekanisk skada som kan förorsakas av slag, stötar eller fall.
- Utsätt inte MANO för magnetiska fält.
- Förändra inte MANO på något sätt.
- Skicka endast MANO i dess originalförpackning.
- Använd aldrig MANO med blöta händer.
- Använd tygväskan för att bära i väskor eller andra behållare.

13. Rengöring av enheten

För att rengöra displayen, använd den medföljande mikrofiberduken eller en annan torr och mjuk duk. Använd inte några vätskor vid rengöring. Rengör aldrig displayen eller höljet med tinner, gasolin, alkohol eller andra kemikalier. Höljets delar kan skadas.

14. CE- och FCC-noteringar för elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)


MANO är ämnad för användning i alla inrättningar, inklusive alla hem och kontor anslutna till det allmänna elnätet. MANO är avsedd för drift i den angivna elektromagnetiska miljön. Användaren bör försäkra sig om att använda den i en sådan miljö som beskrivs i denna manual. MANO använder HF-energi uteslutande för dess egen funktion. Därför är kortvariga utstrålningar av högfrekvent energi begränsade. Det är osannolikt att den ska störa andra enheter i drift i närheten. MANO har verifierats enligt de europeiska föreskrifterna för varje land så väl som enligt FCC-föreskrifter. Det garanteras att gränserna fastslagna i bestämmelserna inte kommer att överskridas. Man ska hur som helst beakta att gemensam användning av MANO och andra enheter kan leda till störningar mellan MANO och andra enheter. Av denna anledning ska man inte placera enheten i närheten av en annan enhet. Håll ett avstånd på 1 meter.

15. Tekniska data

- Förstoring: ungefär x1 - x20
- Display: Full färg, halv färg: positivt läge: svart på vitt
Negativt läge: vitt på svart, grönt på svart, gult på svart, gult på blått
- Vikt: 139 gram
- Mått på höljet: 89 x 74 x 21 mm
- Storlek skärm: 3,5 tum Aktiv yta: 74 x 54 mm
- Elektrisk nätpänning: 100-240 VAC 50-60HZ
sekundär 12 VDC 0,5 A
- Effektförbrukning: ung. 6 watt
- Laddningsbart batteri: Li-Ion 1500 mAh
Drifttid ung. 2,5 tim
Laddningstid ung. 2,5 tim

16. Garanti information

Kraven enligt lag uppfylls.

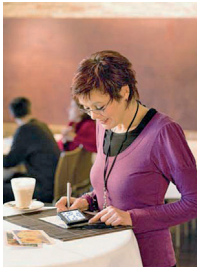



Insyn Sverige AB

Telefon: 08-446 63 60

Telefax: 08-446 63 69

Email: info@insyn.se

Mail: Ankdammsgatan 22
171 43 Solna-Sweden

www.insyn.se

ÅTERFÖRSÄLJARE: