

Bruksanvisning

Videomatic VEO

SWE



Vänligen läs denna manual innan du installerar, använder eller underhåller för din egna säkerhets skull och för att undvika fel på din förstöringsapparat.

Konformitätserklärung

Declaration of conformity

Wir erklären in alleiniger Verantwortung für alle unsere Systeme, dass diese mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen.

We declare under our sole responsibility that the systems, which have been brought into the market by us, meet the requirements of the following directives.

Videomatic VEO

**Richtlinie 93/42/EWG
des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte
Risikoklasse I nach Anhang IX Regel 12
CE Konformität nach Anhang VII
und
RoHS II (EG Richtlinie 2011/65/EU)**

**Council directive 93/42/EEC
of 14th June 1993 concerning medical devices
risk class I according to Annex IX standard 12
CE conformity of Annex VII
and
RoHS II (Council directive 2011/65/EEC)**


Die CE– Kennzeichnung auf dem Gerät dokumentiert diese Übereinstimmung.
The CE mark on the system points out this accordance.

Alsbach-Hähnlein,

08.10.2015

.....
Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue

M. Reinecker Geschäftsführer
M. Reinecker General Manager


.....
Name und Unterschrift des Befugten
Name and signature of the authorized person

Innehåll

I. Generell information	6
Anmärkningar om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	6
Lagring av instruktionsbok.	6
Produktbeskrivning	7
Medicinsk utrustning	7
Syfte	7
Livslängden för produkten.	7
Säkerhetsföreskrift.	8
Kombination med andra produkter	8
Försiktighetsåtgärder efter förändring av prestandan hos systemet.	8
Återplacering och installation	8
Rengöring av lässystem	9
Särskilda råd för transport och förvaring.	9
Kassering av enheten enligt EU-direktiv 2002/96/EG.	9
Strömförsörjning	9
Säkerhets instruktioner	10
II. Instruktioner för lässystem Videomatic VEO	11
Innehåll leverans	11
VEO har olika kameror	11
Vario kamera	11
Focus kamera MD (säljs ej i Sverige)	11
Focus kamera RP (säljs ej i Sverige)	11
Sätta i / byte av batterier i fjärrenheten.	12
Kassering av batterier	12
Uppackning av ditt system	13
Anslutning av enhet.	13
Anpassning av bildskärm	14
Anpassningen av xy-bord	15
Positionering av fjärrenhet.	16
Beskrivning av 3-knapps fjärrenhet.	17
Slå på enheten manuellt	19

Beskrivning av en-knapp fjärrenhet.	20
Automatisk avstängning	21
Belysning PÅ/dimmer/AV	22
Översiktsläge.	22
Menysystem	23
Förklaring av menysystem	24
Meny inställning.	24
Information om garanti	28
Noteringar	29

I. Generell information

Viktig information om driften av lässystemet Videomatic VEO!
Läs dem noga innan driften av lässystemet !

Anmärkningar om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Detta lässystem är lämpad för användning på alla platser inklusive hemmet som är direkt anslutna till ett allmänt strömförsörjning för byggnader med bostadsändamål.

Detta lässystem är utformat för att användas i den angivna elektromagnetiska miljön. Användaren ska se till att användas i den angivna miljön.

Detta lässystem fungerar på HF-energi uteslutande för sin egen funktion. den emitterade störningar av högfrekventa störningar är därför mycket låg och störningar med andra apparater som drivs nära håll är osannolik. När lässystemet arbetar samtidigt med andra system, bör dock inte försummas möjligheten av störningar i systemet eller andra system.

Av detta skäl bör det säkerställas att systemet inte placeras direkt bredvid eller ovanpå ett annat system. Om set-up av detta system i närheten av medicinska, mätinstrument som inte kan undvikas, måste operatören av dessa anordningar som skall informeras om att det är nödvändigt att observera prestandan hos systemet för att styra den konventionella användningen av systemet i valda set-up.

Elektroniska apparater är känsliga mot elektrisk urladdning och mot högfrekventa elektromagnetiska fält.

Observera: För att undvika högfrekventa störningar operatören bör respektera ett avstånd på minst en meter till bärbara och mobila HF-telekommunikationsenheter.

Lagring av instruktionsbok

Bruksanvisningen är en viktig del av ditt lässystem. Förvara häftet på en säker plats för framtida referens.

Produktbeskrivning

Videomatic VEO är en optoelektronisk lässystem, som förstorar text och bilder. Den kan användas permanent för privat och yrkesmässig användande. Texten eller bilderna fångas av den inbyggda kameran och visas sedan på skärmen.

- High Definition LED platt-skärmar i tre storlekar: 19" klass (48cm), 22" klass (56cm) och 24" klass (61cm)
- ergonomisk placering av skärmen i fyra dimensioner
- extremt platt, låg vikt, energisparande och flimmerfri
- 1080p upplösning av hela systemet = full HD = 1920 x 1080p baserat på 22" och 24" klass monitorer

Medicinsk utrustning

Detta lässystemet har klassificerats som en medicinteknisk produkt, klass I enligt 93/42 / EEG, annex IX, standard 12. För distribution till länder utanför EU respektive landsspecifika riktlinjer betraktas.

Syfte

Detta optoelektroniska lässystem är en medicinteknisk produkt för att hjälpa till med läsningen och förstoringsglas av tryckt text och bilder. Synskadade kan kompensera för deras förlust av synskärpan med hjälp av denna enhet.

Livslängden för produkten

Sju år från fakturadatum (ex Reinecker). Enligt EEG leverantör av medicintekniska produkter är skyldiga att definiera livslängden för en produkt.

Obs: Den nämnda livslängd återspeglar inte hela livslängd Videomatic VEO. Det är snarare en indikation på när produkten kan vara föråldrade och ersättning kan rekommenderas på grund av utvecklingen av nya produkter.

Säkerhetsföreskrift

Videomatic VEO skall installeras i enbart slutna och torra utrymmen. Anslut inte Videomatic VEO till en elektrisk krets som också används för något liv upprätthålla eller stödsystem. Enheten får inte användas i patient miljö.

Denna enhet får inte användas i explosions hotade miljöer. Detta optoelektronisk anordning skall endast installeras i samband med modern elektrisk krets.

Kombination med andra produkter

Varning: Detta lässystem får inte placeras direkt bredvid, intill eller ovanpå en annan medicinteknisk produkt. Om enheten används nära annan elektrisk anordning, övervaka den andra enheten för att säkerställa att den fungerar ordentligt. I tveksamma fall kontakta Reinecker Vision GmbH eller licensierade distributionspartner.

Försiktighetsåtgärder efter förändring av prestandan hos systemet

Sluta använda lässystemet om tekniska egenskaper eller prestanda skulle förändras. Stäng av enheten och ta bort strömförsörjningen från vägguttaget.

Hänvisa direkt till din auktoriserade återförsäljare eller till Reinecker Vision GmbH Service Center.

Återplacering och installation

Denna enhet kan tekniskt underhållas och repareras av Reinecker Vision GmbH enbart eller av en auktoriserad tekniker. Återplacering får endast ske efter det att systemet har rengjorts och säkerhet kontrolleras.

Rengöring av lässystem

- Videomatic VEO måste bortkopplas från strömförsörjningen före rengöring.
- Monitorn och systemet måste rengöras med fönsterputs.
- Inre enhet inte får komma i kontakt med vätskor.

Särskilda råd för transport och förvaring


Av säkerhetsskäl måste enheten endast transporteras och lagras i originalförpackningen. Enheten måste förvaras torrt och slutna rum i originalförpackningen.

Följande villkor för transport och lagring måste respekteras:

- Lufttryck 700 - 1000 hPa
- Temperaturområde +5°C till +50°C
- Relativ luftfuktighet 30% till 80%

Kassering av enheten enligt EU-direktiv 2002/96/EG

Videomatic VEO innehåller av elektroniska komponenter. För att undvika skador på miljön, de landsspecifika regler måste respekteras.

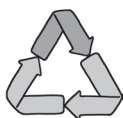

Strömförsörjning

Använd endast original strömförsörjningen som ingår i leveransen av Reinecker Vision GmbH.

Varning: Användning av annan utrustning kan leda till en ökad elektromagnetisk strålning och en produktskador.

Säkerhets instruktioner

Vänligen respektera följande säkerhetsanvisningar:

1. Anslut inte nätadaptern till en felaktig eluttag. Det kan leda till elektriska stötar eller brand.
2. Rör inte nätadaptern med våta händer.
3. Använd endast den ursprungliga strömförsörjningen som ingår i leveransen av Reinecker Vision GmbH. Användning av annan utrustning kan leda till en produktskador.
4. Utsätt inte systemet för direkt solljus eller mycket varm eller kall miljö, eftersom detta skulle skada bildkvaliteten.
5. Använd inte den här enheten under +5° C eller över +40° C.
6. Inga vätskor ska nå det inre av systemet. Endast använda enheten i en torr miljö.
7. Enheten får inte användas bredvid medicintekniska produkter (patienter miljö).
8. Inte luta på skärmen, peka på skärmen med något föremål eller lägga tunga föremål på enheten. Detta kan orsaka skada på enheten.
9. Försök inte att reparera eller demontera systemet på egen hand. Detta skulle göra garantin ogiltiga. Om du behöver teknisk assistans vänligen ta kontakt med den lokala distributören eller med Reinecker Vision GmbH.
10. Stäng alltid av systemet och koppla bort den från strömförsörjningen före rengöring. För rengöring använd skärmrengörare eller något annat mjukt, luddfritt, lätt fuktad trasa. Använd inte alkohol innehåller eller starka rengöringsmedel.

II. Instruktioner för lässystem Videomatic VEO

Innehåll leverans

- Lässystem Videomatic VEO
- LED-monitor 19"/22"/24"
- Fjärenhet 1-knapp / 3-knapps
- AC- adapter 12V DC / 5000mA
- Strömkabel
- Bruksanvisning

VEO har olika kameror

Videomatic VEO finns tillgängligt i kombination med följande tre kameratyper:

Vario kamera:

- förstoring från 1x till 100x (beroende på skärmstrolek)
- Autofokus kan aktiveras/inaktiveras med hjälp av knappar eller meny (se sid 18, 25)

Focus kamera MD: (säljs ej i Sverige):

- förstoring från 4x - 20x digital (fullfärgsläge)*
- förstoring från 4x - 40x digital (semifärgläge)
- Permanent-Fokus-teknologi: autofokus text, bild och objekt automatiskt

Focus kamera RP: (säljs ej i Sverige)


- förstoring från 2x - 10x digital (fullfärgsläge)*
- förstoring från 2x - 20x digital (semifärgläge)
- Permanent-Fokus-teknologi: autofokus text, bild och objekt automatiskt

*Sedan ställer den om automatiskt till semifärgläge

Sätta i / byte av batterier i fjärrenheten

Fjärrenheten fungerar med 2 x AA-batterier (1,5V).

- Ta bort luckan på baksidan av fjärrenheten.
- Sätt i batterierna och se till att polariteten är korrekt.
- Sätt fast luckan igen på fjärrenheten.

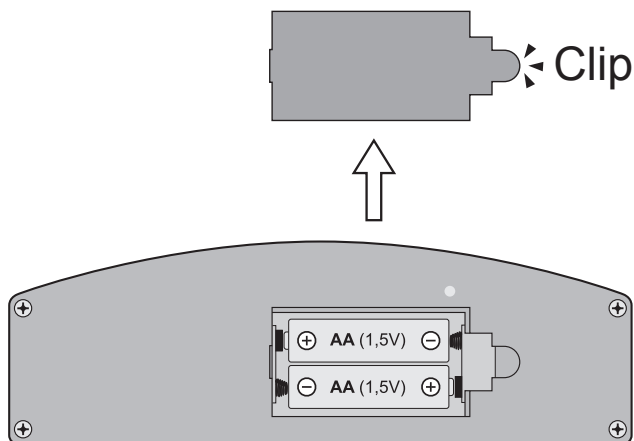

Kassering av batterier

Obs: Kassera batterierna enligt de nationella riktlinjerna!



Uppackning av ditt system

Ditt Videomatic systemet packas normalt upp och ställs in av leverantören eller representant. Om du inte har köpt en Videomatic stativ som passar till produkten måste du välja en plan för systemet med tillräcklig plats.


Obs: Flytta INTE bort CCTV enheten genom att hålla den i XY-bordet.

Anslutning av enhet

Anslut strömförsörjningen till ett vägguttaget och anslut sladden till DC12V eluttaget som finns på baksidan av Videomatic VEO.


Obs: Den levererade strömkabeln skall användas med Videomatic VEO.

När enheten är inkopplad, är den klar att användas.

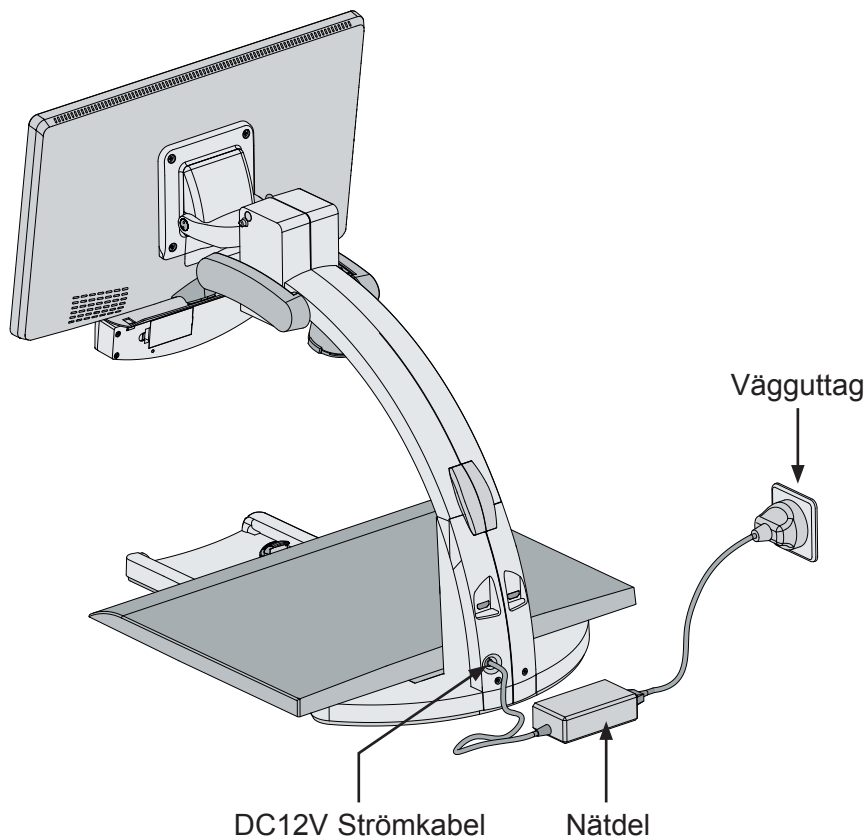


Anpassning av bildskärm


På grund av bildskärmens teknik ändras kontrast och ljusstyrka ändras beroende på betraktningvinkeln. Den mycket flexibla fyrdimensionell monitorarm gör det möjligt för användaren att justera skärmens höjd och vinkel enligt deras sittande ställning (se nedan).

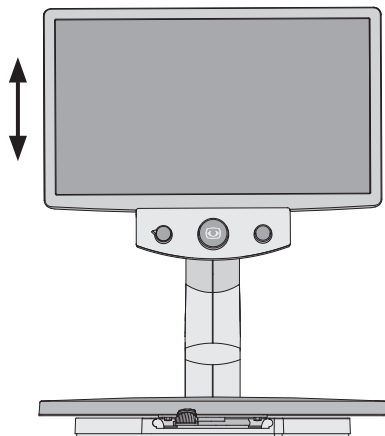


Monitorn kan förflyttas vertikalt uppåt och nedåt.

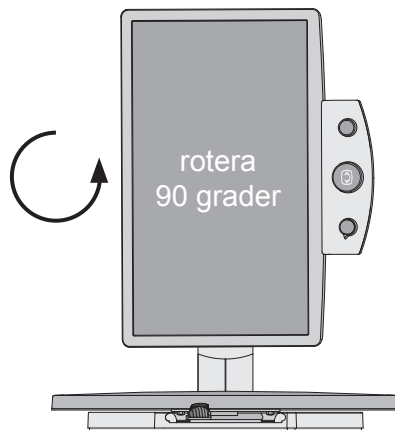

Monitorn kan roteras motsols 90 grader för att göra kolumn läsning enklare. Bilden npassas automatiskt till läget.

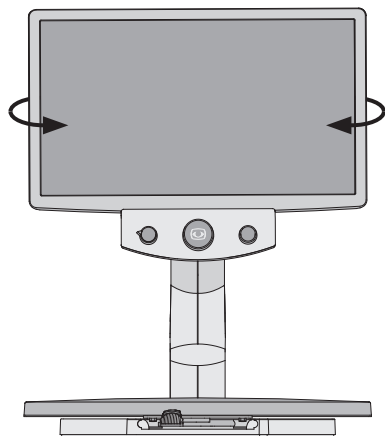


Monitorn kan vridas antingen åt vänster eller åt höger.

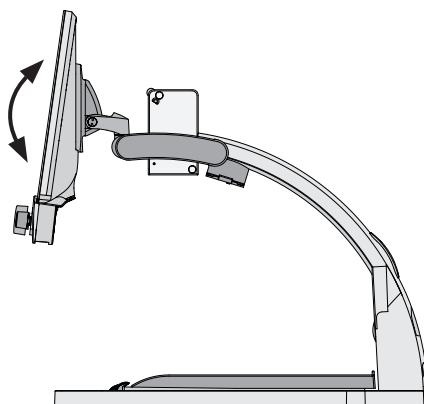


Monitorn kan vinklas uppåt eller nedåt.

Anpassningen av xy-bord


Xy-bordet har två oberoende friktionsbromsar för x- och y-axeln. Friktionen kan ställas in steglöst från lägsta till högsta. Den gula friktionsbroms används för x-axeln och den svarta broms för y-axeln.

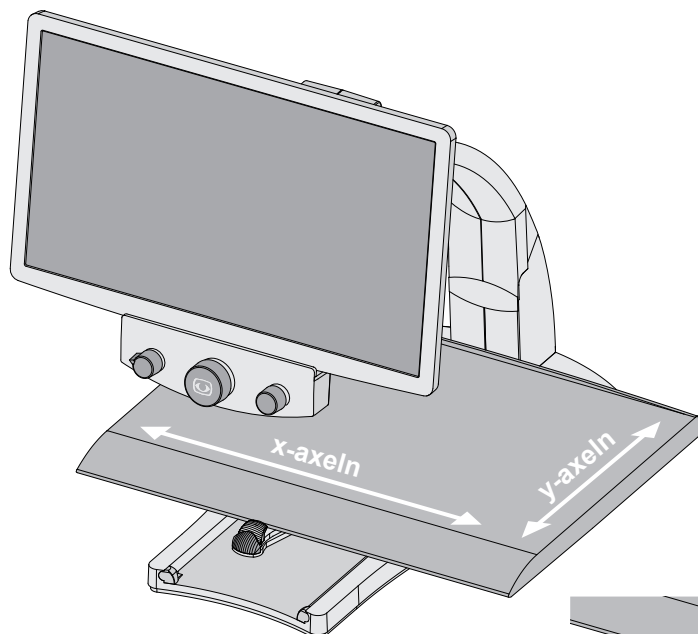


x- och y-axeln kan förflyttas
in i alla riktningar

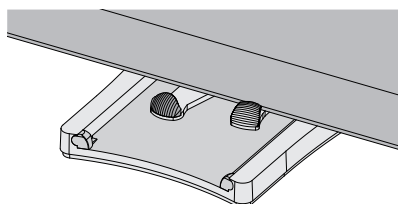

x-axeln är låst, y-axeln är
flexibel

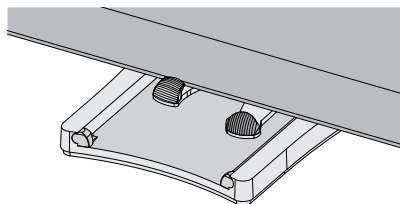


x-axeln är flexibel, är y-axeln låst

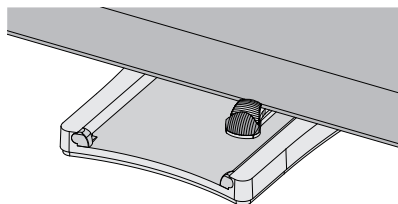

x-axeln är låst, y-axeln är låst


Positionering av fjärrenhet

Det finns två fjärrkontroller tillgängliga (en eller tre knappar) för Videomatic VEO. Beroende på vilken fjärrkontroll du väljer olika funktioner kommer att stödjas. Fjärrkontrollen kan vara fäst till avläsningsystemet VEO på den högra sidan av xybordet eller under bildskärmen. Dessutom fjärrkontrollen kan också hållas i användarens hand eller exempelvis placeras på bordet. Följaktligen har användaren möjlighet att hitta det bästa sättet att driva Videomatic VEO baserat på hans personliga ergonomiska krav.

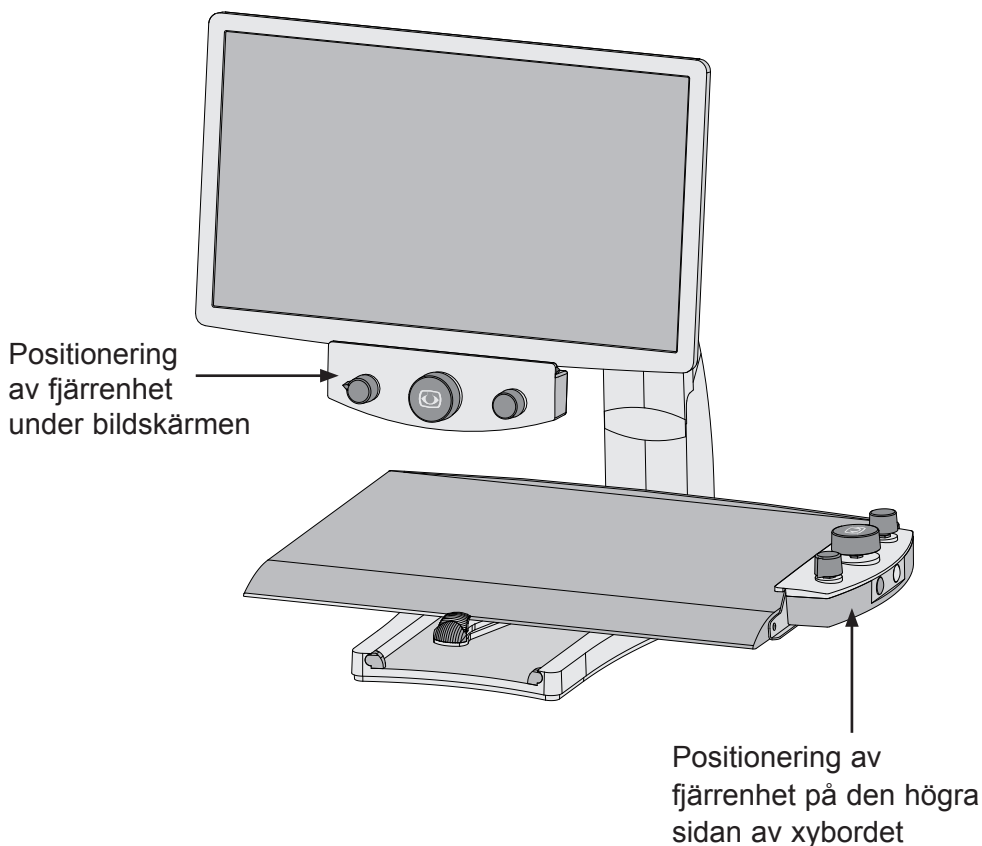

Beskrivning av 3-knapps fjärrenhet

Frontvy:

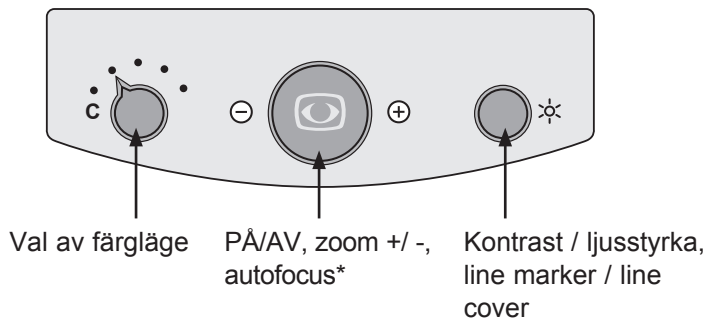

*Autofocus endast på Vario kamera

Vänstra ratten:



- **Val av färgläge**

Genom att vrida på ratten kan du välja följande från vänster till höger:

- Position 1. färgläge
- Position 2. svart text, vit bakgrund
- Position 3. vit text, svart bakgrund
- Position 4. grön text, svart bakgrund
- Position 5. gul text, svart bakgrund
- Position 6. gul text, blå bakgrund

Vald färgläge visas temporärt i nedre delen av skärmen (när det är aktiverat).

Obs: Ovan lista visar fabriksinställningarna. Går du in i menyn kan du ändra dessa individuellt.

Mitten ratten:



- **Ström PÅ/AV**
Tryck på "Zoom +/-" ratten, då startar lässystemet.
Genom att tryck in „Zoom +/-“ ratten i mer än 4 sekunder stängs lässystemet av.
- **Zoom +/-**
Genom att vrida knappen till vänster och höger ökar du och minskar förstoringen.
- **Autofocus***
Genom att snabb trycka och släppa ("zoom") ratten kan du aktivera/inaktivera autofokus. När autofokus är aktiverat justerar autofokusen bildskärpan automatiskt.

*Autofocus endast tillgängligt för Vario kamera

Högra ratten:



- **Kontrast/Ljusstyrka**
Denna ratt är utrustad med utdragbar funktion. När ratten är intryckt så kan du justera kontrast och ljusstyrka. Låg kontrast och låg ljusstyrka (vrid åt vänster) hög kontrast och hög ljusstyrka (vrid åt höger).




- **Ref linje/Kuliss**
Genom att dra ut ratten aktiveras ref linje och kuliss funktionerna. Vrid knappen för att välja vilken yta som ska markeras med ref linje eller döljas med kuliss.
För att inaktivera ref linjen/kuliss funktionen tryck in knappen igen.

Slå på enheten manuellt

När VEO är ansluten till vägguttaget på korrekt sätt kan det slås på genom att trycka på "Zoom +/-" ratten. När enheten slås på tänds lampor inledningsvis tänds och efter en kort tid går de tillbaka automatiskt till den senast använda ljusstyrkan.

Obs: Om xy-bordet inte automatiskt tänds kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till strömuttaget. Om den är korrekt ansluten så kolla manuellt ljusinställningar på fjärrkontrollen ifall belysningen kan ha manuellt deaktiveras (se bild nedan).

Underifrån:

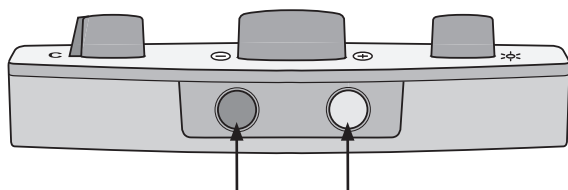


Menyval PÅ/AV,
Tidsinställning för auto-
matisk avstängning

Belysning PÅ / dim / AV,
Tidsinställning för automatisk
stänga av, översiktsläget

(Fungerar likadant med en-knappsfjärrenhet)

Beskrivning av en-knapp fjärrenhet

Framifrån:

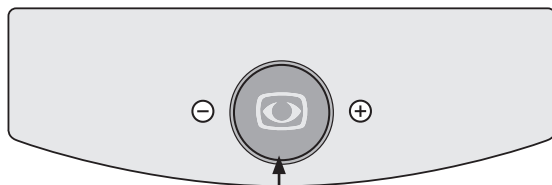

Ström PÅ/AV, zoom +/-,
färgval

Mitten ratten „Zoom +/-“:



- **Ström PÅ/AV**

Tryck på “Zoom +/-” ratten, då startar lässystemet.

Genom att tryck in „Zoom +/-“ ratten i mer än 4 sekunder stängs lässystemet av.

- **Zoom +/-**

Genom att vrida knappen till vänster och höger ökar du och minskar förstoringen.

- **Färgval**


Genom lätt tryck på knappen, när lässystemet är påslagen, kan följande färglägen väljas:

- | | |
|-------------|---------------------------|
| Position 1. | färgläge |
| Position 2. | svart text, vit bakgrund |
| Position 3. | vit text, svart bakgrund |
| Position 4. | grön text, svart bakgrund |
| Position 5. | gul text, svart bakgrund |
| Position 6. | gul text, blå bakgrund |

Vald färgläge visas temporärt i nedre delen av skärmen (när det är aktiverat).

Obs: Ovan lista visar fabriksinställningarna. Går du in i menyn kan du ändra dessa individuellt för att skapa anpassad färgval.

Nerifrån:

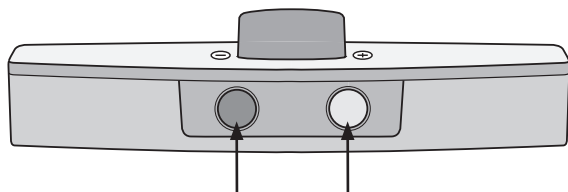

Menyval PÅ / AV,
Tidsinställning för auto-
matisk avstängning


Belysning PÅ / dim / AV,
Tidsinställning för automatisk
stänga av, översiktsläget

Automatisk avstängning

Videomatic VEO är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion .

VEO stänger automatiskt av om fjärrenhet på enheten har varit inaktiv under en förvald tidsperiod. Den automatiska avstängningsfunktionen kan inaktiveras eller ställas in på en av tre möjliga tid inställningar.

Genom att trycka både den svarta och den gula knappen på undersidan av fjärrenhet samtidigt kommer det att aktivera funktionen för att ändra den automatiska avstängningen tidsram - detta kan vara inställd på 60 min / 30 min / 15 min / auto OFF (behov att stängas av manuellt). Släpp knapparna när den valda tidsinställning visas. Tidsinställningen kommer sedan väljas och lagras.

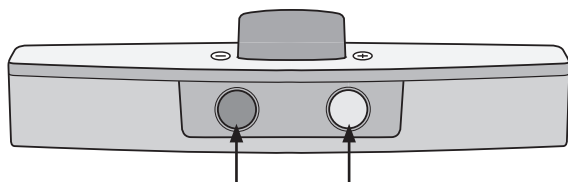

Svart knapp Gul knapp

Tidsinställning olika val:

- automatisk avstängning AV inaktiverat
- automatisk avstängning efter 15 min.
- automatisk avstängning efter 30 min.
- automatisk avstängning efter 60 min.

Obs: När VEO är avstängd är energiförbrukning mindre än 0,5 watt.

Belysning PÅ/dimmer/AV

Genom att trycka på den gula runda knappen på undersidan av fjärrenheten kan belysningen:

- sättas PÅ
- dimras
- stängas AV

När du stänger av din VEO kommer dina inställningar sparas till nästa gång.

Översiktsläge

När du arbetar med hög förstoring och vill veta på vilken del av sidan du är på kan du gå över till översiktsläge.

För att få en överblick när man läser på en högre förstoring, tryck och håll ner den gula knappen i ca. 3 sek. Bilden zoomas ut.

En kors visas och indikerar det område som för närvarande förstoras. När mittknappen släpps kommer VEO att återvända till läsläge och vald förstoring.

Menysystem

Tryck in den svarta knappen (på undersidan av fjärrenhet) och håll intryck i ca. 3 sekunder tills menyn dyker upp på skärmen.

Huvudmeny	
Ljus	+50
Kontrast	+50
Färgmättnad	- 30
Ref.inje/ Kuliss AV	Aus
Ref.linje / Kuliss inställning...	
AF läge*	Kontinuerlig/Zoom
Åter till Fabriksinställning	
Återställ användarinställning...	
Avancerade inställningar...	
Avsluta	

*Autofocus finns endast tillgängligt för Variokamera

Ändra menyinställningar

Vrid Zoom +/- ratten från vänster till höger för att navigera i menyn. Bekräfta ditt val genom att trycka på zoom +/- ratten.

Avsluta meny

Antingen vrider du Zoom +/- ratten till du kommer till menyvalet „Avsluta“ och bekräfta genom att trycka Zoom +/- ratten. Eller tryck på den svarta knappen på undersidan av fjärrenheten tills menyn försvinner.

Förklaring av menysystem

Nedan följer en beskrivning på hur menyn är uppbyggd.

Huvudmeny	← Meny nivå 1
Avancerade inställningar	← Meny nivå 2
Special inställningar	← Meny nivå 3
Anpassad knapp/rattar	← Meny nivå 4
Funktion	inställningsområde explikation

Meny inställning

Huvudmeny	
Ljus	inställningsområde från -50 till +50
Kontrast	inställningsområde från -50 till +50
Färgmättnad	inställningsområde från -50 till +50
Ref.linje / Kuliss	AV stänger av ref.linje och kuliss Ref.linje aktiverar ref.linje Kuliss aktiverar kuliss

Huvudmeny	
Ref.linje / Kuliss inställning	
Ref.linje / Kuliss	AV stänger av ref.linje och kuliss Ref.linje aktiverar ref.linje Kuliss aktiverar kuliss
Ref.linje position	0 till 100 ställ in ref.linjes position
Kuliss position	0 till 100 ställ in kuliss
Ref linje lägen	Horisontal rikta in ref linje horisontalt Vertikal rikta in ref linje vertikalt
Kuliss lägen	Vänster/Höger Skuggning vänster/höger; skuggning upp till 50% Topp/Botten Skuggning topp/botten; skuggning upp till 50% Vänster/Höger FS Skuggning vänster/höger; skuggning upp till 90% Topp/Botten FS Skuggning topp/botten; skuggning upp till 90% Helskärm Skuggning täcker hela skärmen
Kuliss genomskinlighet	50% 25% 0%

Huvudmeny	
Ref linje / Kuliss inställning	
Färg ref linje	
Röd	inställningsområde från 0 till 31
Grön	inställningsområde från 0 till 31
Blå	inställningsområde från 0 till 31

Huvudmeny	
AF läge*	Kontinuerlig Semi-Automatisk Semi-Autom. +Zoom Continuous / Zoom
Återgå till fabriksinställning	Återgå till fabriksinställning
Återgå till anpassad inställning	Återgå till anpassad inställning
Avancerade inställningar	(se <i>överblick</i>)

*Optionen gelten nur für die Vario Kamera. Die Kameras MD und RP sind mit der Permanent-Fokus-Technologie ausgestattet.

Överblick:	Avancerade inställningar
	Inställning färgkombinationer
	Antireflex läge Auto (5)
	Monitor ljusstyrka 100
	Språk Svenska
	Utför vitbalans
	Vitbalans läge Auto
	Sharpness Inställning
	OSD Meddelande AV
	Specialinställning
	Tillbaka

Huvudmeny	
Avancerade inställningar	
Val av färgkombination	
Färgkombination 1-6	
Läge	Inaktivera Fullfärg Gråskala Falska färger
Förgrund	Svart Röd Grön Blå Gul Magenta Cyan Vit Användar 1 Användar 2
Bakgrund	Svart Röd Grön Blå Gul Magenta Cyan Vit Användar 1 Användar 2
Växla För-/ Bakgrund	invertera förgrund och bakgrund färger

Huvudmeny	
Avancerade inställningar	
Färgkombination	
Användarfärger	
Användarfärg 1 - Röd	inställningsområde från 0 till 31
Användarfärg 1 - Grön	inställningsområde från 0 till 31
Användarfärg 1 - Blå	inställningsområde från 0 till 31
Användarfärg 2 - Röd	inställningsområde från 0 till 31
Användarfärg 2 - Grön	inställningsområde från 0 till 31
Användarfärg 2 - Blå	inställningsområde från 0 till 31

Huvudmeny	
Avancerad inställning	
Anti-reflex läge*	AV PÅ Auto (0-9) ändra grundvärde
Monitor ljusstyrka	Inställningsområde från 37 till 100
Språk	Engelska Tyska Franska Norska Svenska
Utför Vitbalans	Utför vitbalans
Vitbalans läge	Auto En-Tryck

Huvudmeny	
Advanced Inställning	
Skärpeinställning	
Skärpa färg	inställningsområde från 0 till 24
Skärpa falska färger	inställningsområde från 0 till 24

*Alternativen är enbart tillgängliga för Vario kameran. Kameran typer MD och RP är utrustad med permanent focus.

Huvudmeny	
Avancerade inställningar	
OSD Meddelande	PÅ AV
Specialinställning	(se översikt)

Överblick:	Specialinställning	
	Zoom utvidgning	PÅ
	Max. digital Zoom	3.5x
	Anpassa rattar/knappar	
	Spara anpassad inställning	
	Hämta anpassad inställning	
	Återställ till fabriksinställning	
	Expertinställning	
	Monitor storlek	Auto
	Tillbaka	

Huvudmeny	
Avancerade inställningar	
Specialinställning	
Zoom utvidgning	PÅ AV
Max. Digital Zoom	AV inställningsområde från 1,5x till 15x

Huvudmeny	
Avancerade inställningar	
Specialinställning	
Anpassade rattar/knappar	
Zoom tryck 1K	Inaktivera Auto-Focus Falsa färger
Zoom tryck 3K	Inaktivera Auto-Focus Falsa färger
Zoom intryckt 1K	Inaktivera Överblick
Zoom intryckt 3K	Inaktivera Överblick
Ljustyrka. utdragenl	Inaktivera Ref linje PÅ/AV Genom att dra ut knappen ljusstyrka / kontrast, aktiveras ref.linje och kulissfunktionen.

Huvudmeny	
Avancerade inställningar	
Specialinställning	
Spara anpassad inställning	Bekräftar att anpassad inställning sparas
Hämta anpassad inställning	Bekräftar att anpassad inställning hämtats
Återställ till fabriksinställning	Bekräfta för att återställa till fabriksinställning
Expertinställning	Tillgänglig - endast för auktoriserad service
Skärmstorlek	Auto 24"

Information om garanti

1. Reinecker Vision GmbH har en garanti på 24 månader (Garantiperioden gäller endast inom Europeiska unionen) mot defekter i tillverkning räknat från fakturadatum från t ex Reinecker Vision GmbH.
2. Alla delar som har ersatts vid reparation av lässystem blir automatiskt egendom Reinecker Vision GmbH.
3. Skador som orsakas av felaktig användning eller bristande hantering mot vad som står i bruksanvisningen kommer att resultera i att garantin ogiltigförklaras.
4. Insatser från andra än Reinecker Vision GmbH personer auktoriserade specialister kan leda till ogiltighet av garantin.
5. ingår inte i denna garanti är ljuskällor som tjänar till att belysa läsning objekt, batterier och andra delar som utsätts för slitage.
6. Om ett garantianspråk är nödvändigt, måste systemet returneras till tillverkaren i Alsbach-Hähnlein eller till din auktoriserade återförsäljare i originalförpackningen inklusive alla komponenter. Tillverkaren ersätter inte för kostnaderna för transport, förpackning och försäkring.

Din lokala representant:



Typ: Videomatic VEO

Serienummer:

Tillverkare: Reinecker Vision GmbH

Slutgiltigt prov:

Späningsområde: 100 VAC – 240 VAC 50-60 Hz

Driftspänning: 12V DC / 5000mA Typ: WTI205000

Förbrukning: max. 80 Watt

Mått B x H x D: 51 cm x 60,5 cm x 56 cm
(med 22" monitor)

Vikt: ca. 11 kg (med 22"-Monitor)

Reinecker Vision GmbH International Contact

sales department, customer relations:

Sandwiesenstraße 19
DE-64665 Alsbach-Hähnlein

customer service:

Erlenweg 3
DE-64665 Alsbach-Hähnlein

Tel.: +49 62 57-93 11-0

Fax: +49 62 57-93 11-8230

E-Mail: export@reineckervision.de
www.reineckervision.com

Reinecker Vision GmbH Zentrale Deutschland und Export

Vertrieb, Kundenberatung:

Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein

Kundendienst:

Erlenweg 3
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel.: 0 18 05-54 56 65*

Fax: 0 62 57-93 11-8008

E-Mail: info@reineckervision.de
www.reineckervision.de

*Festnetzpreis 14 ct/min, Mobilfunkpreis max. 42 ct/min

In case service is necessary, please contact your authorized distributor.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder einem Servicefall direkt an unser Hauptwerk in Alsbach-Hähnlein oder an eine unserer Niederlassungen.

Bei im Ausland erworbenen Produkten kontaktieren Sie im Servicefall bitte Ihren dort ansässigen Händler.