

# **Zoomtext Magnifier Reader**

## **11**

**Bruksanvisning**



## Innehåll

|  |    |
|--|----|
| Välkommen till ZoomText 11 .....                       | 3  |
| Förstoringsfunktioner.....                             | 4  |
| Magnifier/Reader funktioner .....                      | 6  |
| Börja använda ZoomText 11.....                         | 8  |
| Hur fungerar ZoomText .....                            | 8  |
| Ställ in förstorad vy.....                             | 8  |
| Ställ in ZoomText Talet och ekoinställningarna.....    | 8  |
| Använda Caps Lock tangent .....                        | 9  |
| Läsa dokument, webbsidor och e-post .....              | 10 |
| Växla mellan ZoomText På/Av och avsluta ZoomText ..... | 11 |
| Starta och stänga av ZoomText .....                    | 13 |
| Starta ZoomText .....                                  | 13 |
| Avsluta ZoomText.....                                  | 14 |
| ZoomText användargränssnitt .....                      | 15 |
| ZoomText kontrollpanel .....                           | 16 |
| Kortkommando.....                                      | 17 |
| Grundläggande ZoomText kortkommando.....               | 18 |
| Använd ZoomText hjälp.....                             | 20 |
| Öppna ZoomText Hjälp.....                              | 20 |
| För att använda ZoomText Hjälp .....                   | 20 |

## Välkommen till ZoomText 11

---

ZoomText är ett kraftfullt programverktyg som tillåter folk med synnedsättning att se, höra och använda allting på Windows datorer, notebook och surfplattor. ZoomText tillåter dig att se och höra allting som visas på bildskärmen.

ZoomText 11 finns i två versioner: Magnifier och Magnifier/Reader.



- **ZoomText Magnifier** erbjuder en komplett serie av verktyg för att förstora och förbättra allt på bildskärmen.
- **ZoomText Magnifier/Reader** erbjuder alla funktioner i ZoomText Magnifier, plus en massa användarvänliga läsfunktioner speciellt utformade för personer med synnedsättning. ZoomText läsverktyg är perfekta för personer med inlärningsproblem, låg läskunnighet och andra läshandikapp.

Båda versionerna av ZoomText 11 är utformade för användare i alla åldrar och olika kunskapsnivåer. ZoomText ger dig fullständig frihet i hemmet, skolan och arbetsplatsen.

## Förstoringsfunktioner

---

ZoomText Förstoring är ett avancerat förstoringsprogram som förstorar och förbättrar allting på bildskärmen.

ZoomText 11 Förstoring inkluderar:

- **Flexibel förstoring.** ZoomText ger förstoring upp till 60 ggr. Förstoringsgrad från 1x till 8x i steg om 1, 10x till 16x i steg om 2, 20x till 36x i steg om 4, 42x till 60x i steg om 6 och även 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x, 2.5x, 3.5x och 4.5x.
- **Bra förstoringmetoder.** ZoomText erbjuder bra lösningar på förstoringmetoder både för enkel eller multipla bildskärmar som gör att du kan konfigurera den förstorade vyn enligt dina behov.
- **Fontinställning.** xFont teknologin visar skarp text som är enkel att läsa i alla förstoringgrader. Kantutjämnad, fet och kondenserade inställningar för att justera tjocklek och mellanrum på texten. Ny geometriska kantutjämnning jämnar ut kanterna på texten (och grafiken) på ställen där xFont förstoringen inte fungerar.
- **Stöd för multipla bildskärmar.** Erbjuder dig att använda Multipla bildskärmar och se mer information på olika sätt. ZoomTexts unika Multipla lägen —MultiVy Lokal och MultiVy Global, tillåter dig att samtidigt se flera program eller flera ställen i samma program.
- **Stöd för touchskärmar.** ZoomText kan användas på Windows 10 och 8.1 touchskärmar inklusive tablet-PC, bärbara och stationära monitorer. ZoomText följer när du pekar, drar eller sveper dig igenom alla dina programvaror. Du kan även komma åt ZoomText funktioner genom ZoomText Touch Ikon och dess gester. OBS: Kräver en 5 punkter eller bättre touchskärm. För mer information, se Stöd för Touchskärm.

- **Möjligheten att ställa in egna färger.** Färginställningen för att skärmbilden blir tydligare och enklare att se. Du kan välja från förinställda eller göra egna inställningar. Speciella effekter med blå toning, tvåfärgslägen och ersätt jobbiga färger.
- **Pekar och markörförbättringar.** Storlek och färginställningar som gör att du ser pekaren och markören enklare. Speciella förbättringar runt muspekare och textmarkör för att de ska bli lättare att hitta och följa.
- **Fokusinställning.** Fokusinställning gör det lättare att lokalisera och följa en markerad kontroll när du navigerar genom menyer, dialogrutor och andra kontroller.
- **Jämn förflyttning.** Navigera genom dina program och skrollningen är alltid jämn och bekväm.
- **Sökare.** Sökaren hjälper dig att söka, skumma, navigera och läsa dokument, hemsidor och epost. Du kan söka efter ett ord eller mening i hela dokumentet, eller i speciella objekt som rubrik, formulär eller länkar.
- **ZoomText Kamera.** ZoomText Kamera ger dig möjlighet att förstora tryckt material som dokument, böcker eller annat material med en standard HD webbkamera.
- **Programinställning.** Spara unika inställningar för varje program som du använder. När du byter program laddar ZoomText automatiskt önskade inställningar.
- **Windows inloggningshjälp.** Förstoring och skärmläsning vid inloggningsrutan i Windows.

## Magnifier/Reader funktioner

---

ZoomText Magnifier / Reader är en helt integrerad förstoring och skärmläsningssprogram som förstorar, förstärker och läser upp allt högt på bildskärmen.

ZoomText 11 Magnifier/Reader innehåller alla funktioner i ZoomText Magnifier, plus:

- **Komplett skärmläsning** ZoomText läser automatiskt alla kontroller och händelser i program när du navigerar genom applikationer; inklusive menyer, dialogrutor , listvyer och meddelanden. Tre läsnivåer ger dig fullständig kontroll över mängden information som ska läsas.
- **Appläsare.** Med Appläsare kan du läsa mitt i programmet eller slå på i farten till hög kontrast textvy som är bättre för visuell avläsning. Du kan också snabbläsa stycken av text genom att klicka och dra med musen. Använd Appläsarens "Läs från pekare" kommando för att omedelbart starta Appläsare på ordet under muspekaren.
- **LäsZoner.** LäsZoner låter dig se och läsa valt område i ett programfönster. Du kan skapa upp till 10 LäsZoner per program.
- **Full Internettillgång** ZoomText läser en webbsida, i rätt läsordning. Du kan läsa automatiskt eller manuellt navigera genom ord, rad, mening och stycke.
- **Textnavigering** Navigeringsknapparna gör det enkelt att läsa medan man kan skapa och redigera dokument. Med enkla kommandon kan du läsa genom tecken, ord, rad, mening och punkt, även när du väljer text.
- **Skriveko.** Varje tangent eller ord som du skriver läses automatiskt. Du kan välja att ha alla tangenter läses eller endast utvalda grupper av tangenterna.

- **Museko** Museko läser automatiskt texten under pekaren. När du flyttar muspekaren på skärmen, enstaka ord eller hela rader läses direkt eller med lite fördröjning.
- **SägDet-verktyg** SägDet-verktyget läser valda områden av bildskärmen genom att klicka och dra med musen.
- **Bakgrundsläsare** Med Bakgrundsläsare kan du lyssna till dokument, webbsidor, e-post eller någon text samtidigt som du utför andra uppgifter.
- **ZoomText Inspelare** Med ZoomText Inspelare kan du göra om text från dokument, hemsidor, epost eller andra källor till ljud inspelningar för att lyssna på datorn eller överföra till din mobila enhet för att lyssna på när du är på språng.
- **Inbyggda Premium röster.** Alla versioner av ZoomText Magnifier/Reader levereras med en uppsättning av premium NeoSpeech engelska röster som automatiskt installeras av ZoomText installationsprogram. Den internationella versionen av ZoomText Magnifier / Reader kommer också med premium "ZoomText Voices" som ger de mest talade språk och dialekter från hela världen.

## Börja använda ZoomText 11

---

ZoomText 11 har en mängd funktioner som är avsedda att täcka de olika användarnas behov. Det här avsnittet innehåller en översikt över hur ZoomText arbetar och med kom igång instruktioner för de väsentliga funktioner som alla användare behöver lära sig och använda.

### Hur fungerar ZoomText

För det mesta arbetar ZoomText i bakgrunden, ger en förstoraad och förbättrad syn som följer allt ditt arbete. Så när du flyttar musen, skriver text och navigera dina applikationer, sätt alltid dina behov främst.

### Ställ in förstoraad vy

Eftersom det primära syftet med ZoomText är att göra allt större och lättare att se, är den första uppgiften att ställa in förstoringen och skärminställningarna för bekväm visning. Här är de snabba sätten för att ställa in detta.

- **För att öka och minska förstoringen**

Håll ner **Caps Lock** och tryck **Pil-Upp** och **Pil\_Ner**.

- **För att växla mellan aktuell förstoring och 1x**

Håll ner **Caps Lock** och tryck **Enter**.

- **Att invertera ljusstyrka på skärmen**

Håll ner **Caps Lock** och tryck **C**.

### Ställ in ZoomText Talet och ekoinställningarna.

Om du kör ZoomText Magnifier/Reader, kan ZoomText berättar allt du gör, så din andra uppgift är att justera ZoomText talhastighet och eko inställningarna så att ZoomText talar på det sättet som du önskar. Detta inkluderar hur tangentbordet



ska eka när du skriver och hur ZoomText ska läsa i menyer, dialogrutor och andra kontroller när du navigerar genom dina applikationer. Här är de snabba sätten för att ställa in detta.

- **För att öka och minska ZoomTexts talhastighet.**

Håll ner **Caps Lock** och tryck **Pil-Upp** och **Pil\_Ner** .

- **För att justera hur tangentbordet är ekade när du skriver**

Håll ner **Caps Lock** och tryck **Enter**. Varje tryckning växlar tangentekot från bokstav, ord, bokstav och ord eller ingenting.

- **Ändra läsnivåinställning på programeko**

Håll ner **Caps Lock + Alt** och tryck **B**. Varje tryckning växlar mellan Nybörjare, Normal och Expert. Expert talar minimalt med detaljer om varje objekt, medan Nybörjare talar maximala detaljer om varje objekt.

## **Använda Caps Lock tangent**

ZoomText utnyttjar Caps Lock tangenten för att utföra kommando. Ett resultat av detta blir att när ZoomText är startad kan du inte genom en knapptryckning ändra mellan stora och små bokstäver. Du kan fortfarande växla till stora bokstäver genom att dubbeltrycka på Caps Lock. Med andra ord när Caps Lock är avstängt dubbeltryck på Caps Lock-tangenten blir Caps Lock på, och vice versa.

## Läsa dokument, webbsidor och e-post

Appläsaren gör det enkelt att få dokument, webbsidor och e-post uppläst med enkla kommandon. Du kan välja var Appläsaren börjar läsa och låter den läsa kontinuerligt till slutet av dokumentet. Du kan ta kontroll för att pausa och återuppta läsningen, eller skumma framåt och bakåt genom texten. Du kan välja att starta i Appvy eller Textvy. Appvy läser direkt i programmet, medan Textvy läser i en speciell miljö där texten visas i hög kontrast i teleprompter och läsradsläge.

- **Starta Appläsaren från Läs från pekare kommando**

Ställ muspekaren på det ordet du önskar börja uppläsningen ifrån, tryck sedan kortkommando:

**Caps Lock + Alt + Vänster-Klick**

*Appläsaren startar i valt läge och börjar läsa från valt ord.*

- **Stoppa automatisk läsning**

Tryck **Enter**.

- **Återuppta automatisk läsning**

Tryck **Enter** på det ordet som du vill starta eller återuppta läsningen

- **Starta skumläsning för mening eller stycke**

Tryck på vänster och höger piltangenter för att läsa föregående eller nästa mening. Tryck på upp och ner piltangenterna för att läsa föregående eller nästa stycke.

- **Skifta mellan Appvy och Textvy**

Tryck **Tab**.

- **Avsluta Appläsare**

Högerklicka eller tryck **Esc**.

*När Appläsarens avslutas stannar markören på det sista markerade ordet i Appläsaren, om det finns en markör i programmet.*

## **Växla mellan ZoomText På/Av och avsluta ZoomText**

Medan de flesta ZoomText användare har ZoomText igång och aktiv under varje arbetspass, kan det finnas tillfällen då du vill stänga av ZoomText tillfälligt, eller avsluta ZoomText helt och hållet. Du kan göra på vart och ett av sätten som beskrivs nedan.


- **Växla ZoomText På/Av**

Tryck på **ZoomText** meny och välj **ZoomText Av** eller **ZoomText På**. Du kan också växla ZoomText på och av genom att hålla ner **Caps Lock + Ctrl** och trycka **Enter**.

- **Avsluta ZoomText**

I **ZoomText** meny, välj **Avsluta ZoomText**.

## ZoomText kontrollpanelen

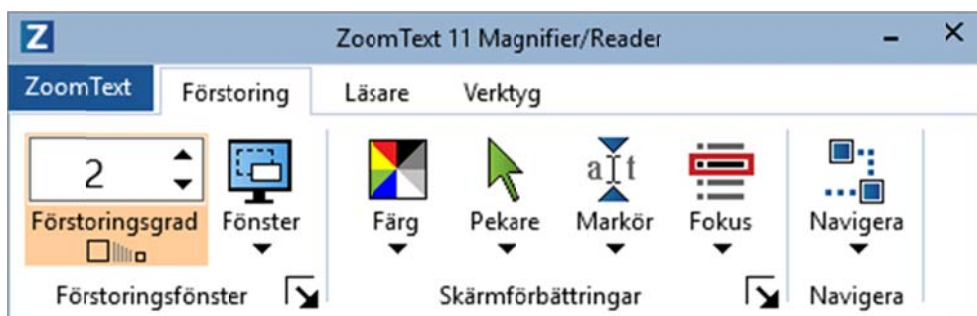

ZoomText kontrollpanel

För att göra hanteringen ännu enklare, kan du helt navigera och använda kontrollpanelen endast med hjälp av piltangenterna och Enter. Med hjälp av piltangenterna kan du navigera i, ut och mellan ZoomText -menyn, kontrollpanel, styra kontrollpanelen och knappmenyer. När fokus ligger på en delad knapp Enter kommer att växla funktionen, samtidigt som du trycker på nedåtpilen öppnar den bifogade menyn. När fokus ligger i förstoringsgradsrutan (på förstoringfliken) eller Fart (på Läsningfliken), trycka på knapparna Upp och Ner kommer att ändra värdet eller tryck på vänster- och högerknapparna så flyttar fokus till nästa kontroll. När du är på förstoringgrad och trycker Enter då växlar du även med Zoom till 1x funktionen.

## Starta och stänga av ZoomText

---

ZoomText är ett program som du kan starta och stänga av när som helst under din Windows session. Du kan ställa in ZoomText att starta automatiskt, både vid Windows inloggning och Windows skrivbordet.

Om ZoomText inte är inställd på att starta automatiskt när Windows startar, kan du starta ZoomText manuellt på följande sätt.

### Starta ZoomText

Gör enligt följande:

- På Windows skrivbord, välj **ZoomText 11** program ikon.
- I Windows **Start** meny, välj **ZoomText 11**.
- Tryck Start ZoomText kommando: **Ctrl + Alt + Shift + Z**

När ZoomText startar kommer den visa en förstora bild av den normala skärmbilden. När du flyttar musen, skriver in text eller förflyttar dig i applikationen, den förstora vyn följer med automatiskt. Om du installerade ZoomText Magnifier/Reader, då kommer ZoomText att tala om vad du går och stödja ditt dataarbete med alla dokument och program. Alla Windowsprogram kommer fungera normalt när ZoomText är igång.

Du kan starta och stänga av ZoomText när som helst, utan att avsluta programmet. När det är avstängt, visas ZoomText skärmen oförstora och allt tal tystnar.

- **Starta och stänga av ZoomText**

Gör enligt följande:

- Tryck ZoomText På/Av kommando **Caps Lock + Ctrl + Enter**
- I ZoomText meny, välj **ZoomText På** eller **ZoomText Av**.

## Avsluta ZoomText

Du kan avsluta ZoomText programmet när som helst. När ZoomText är avslutat återgår bildskärmen till normalt oförstorat och talet slås av.

### Avsluta ZoomText

Gör enligt följande:

- I **ZoomText** meny, välj **Avsluta ZoomText**.
- Klicka på Stäng-knapp i titelraden.




## ZoomText användargränssnitt

---

- ZoomText användargränssnitt ger en mängd olika sätt att styra ZoomText, inkluderar ZoomText kontrollpanel, kortkommando och touchskärmsgester.
- Det primära sättet att arbeta med ZoomText är genom **ZoomText kontrollpanel**, som ger fullständig tillgång till alla ZoomTexts funktioner och inställningar i kontroller, menyer eller dialogrutor som är enkla att ställa in. ZoomText användargränssnitt kan styra med tangentbord, mus och touchskärmsgester.
- Du bör lära dig några av ZoomText's **Kortkommando**, vilket gör att du kan ändra och styra ZoomText utan att aktivera kontrollpanelen och flytta dig från den platsen du jobbar på. Du behöver inte lära sig och använda alla kortkommandon, men att använda kortkommando för vanliga funktioner gör att du kan arbeta mycket snabbare i alla dina program.

## ZoomText kontrollpanel

När du starta ZoomText visas ZoomText kontrollpanel på bildskärmen. ZoomText kontrollpanel består av alla kontroller för att styra ZoomText, enkelt placerade i "ZoomText" meny och några flikar. Varje flik innehåller snabbknappar för att aktivera och ställa in ZoomTexts huvudfunktioner. Många av knapparna är flervalssknappar för att aktivera/avaktivera funktioner och öppna inställningsmöjligheterna. Knapparna är grupperade i kategorier och har en informativ ikon och etikett för enkel identifiering.

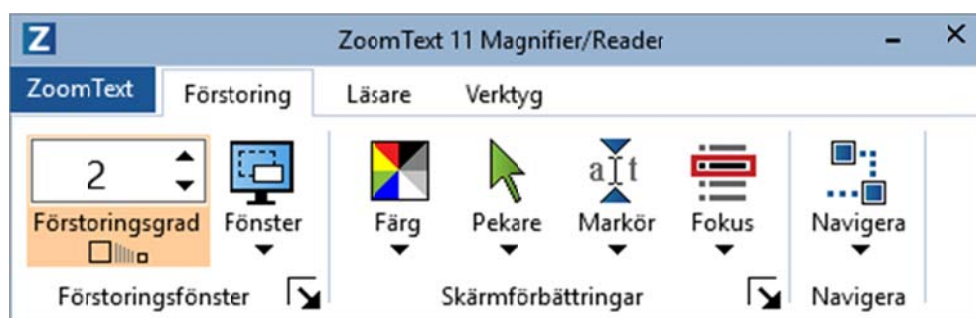

ZoomText kontrollpanel

- **ZoomText** meny. Visar ZoomText -menyn där du kan växla ZoomText på och av, öppna ZoomText Hjälpspara och ladda konfigurationer, konfigurera kommandotangenter, använd stödverktyg och mer.
- **Förstoring**. Visar verktygen för ZoomText's förstoringfunktioner.
- **Läsning**. Visar verktygen för ZoomText's skärmläsningfunktioner. **OBS:** Denna kontrollpanel finns endast i ZoomText Magnifier/Reader.
- **Verktyg**. Visar verktyg för styrning av ZoomText's Sökare, Kamera och Läsfunktioner.



## Kortkommando

---

Kortkommandon är en tangentkombination som utför ZoomText's kommandon utan att aktivera ZoomText kontrollpanel och lämna platsen där du jobbar. Använda kortkommandon gör att du kan arbeta snabbare och mer produktivt i alla dina program.

**Kortkommando** Snabbtangenter är det snabbaste och rekommenderade sättet att använda ZoomText, eftersom de gör att du kan utlösa kommandon i en enda tangentbord åtgärd. Kortkommando utförs genom att hålla ned en eller flera modifieringstangenter och sedan trycka på en primär. Till exempel, för att växla ZoomText på och av, håller du ner Caps Lock och Ctrl-tangenterna och tryck sedan på Enter. Kortkommandot visas **Caps Lock + Ctrl + Enter** i ZoomText kontrollpanel och dokumentation. Kortkommando för andra ZoomText kortkommando visas i samma format.

## Grundläggande ZoomText kortkommando

| Grundläggande kommando     | Kortkommando                    |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>ZoomText kommando</b>   |                                 |
| Starta ZoomText            | Ctrl + Alt + Shift + Z          |
| ZoomText På/Av             | Caps Lock + Ctrl + Enter        |
| ZoomText kontrollpanel     | Caps Lock + Ctrl + U            |
| <b>Förstoringskommando</b> |                                 |
| Zooma in                   | Caps Lock + Pil-Upp             |
| Zooma ut                   | Caps Lock + Pil_Ner             |
| Zoomtill 1x (växla)        | Caps Lock + Enter               |
| Skrolla uppåt              | Caps Lock + Shift + Pil-Upp     |
| Skrolla nedåt              | Caps Lock + Shift + Pil-Ner     |
| Skrolla vänster            | Caps Lock + Shift + Pil-Vänster |
| Skrolla Höger              | Caps Lock + Shift + Pil-Höger   |
| Färg                       | Caps Lock + C                   |
| <b>Läsning</b>             |                                 |
| Tal På/Av                  | Caps Lock + Alt + Enter         |
| Öka hastigheten            | Caps Lock + Alt + Pil-Upp       |
| Minska hastigheten         | Caps Lock + Alt + Pil-Ner       |
| Läsnivå (programeko)       | Caps Lock + Alt + B             |
| Läs tangenteko             | Caps Lock + Alt + K             |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Starta AppLäsare för pekare | Caps Lock + Alt + Vänster-Klick |
| Starta Appvy                | Caps Lock + Alt + A             |
| Starta Textvy               | Caps Lock + Alt + T             |
| Starta SägDet               | Caps Lock + Alt + S             |

## Använd ZoomText hjälp

---

Du kan öppna ZoomText Hjälp när som helst när du kör ZoomText.

### Öppna ZoomText Hjälp

Från ZoomText kontrollpanel gör något av följande:

- Tryck på **F1**.
- I **ZoomText** meny, välj **Hjälp och utbildning > ZoomText Hjälp**.
- Inuti ZoomText dialogruta, tryck på **Hjälp** längst ner i högra hörnet av dialogrutan. Denna åtgärd öppnar ett hjälpavsnitt om vald dialog och funktion.

### För att använda ZoomText Hjälp

I Hjälp, markera någon av följande flikar:

- **Innehåll**. Låter dig välja ett ämne i onlinehjälp.
- **Index**. Gör att du kan använda indexet för att hitta ett ämne.
- **Sök**. Tillåter dig att hitta ett ämne genom att söka efter ett visst ord eller en fras i onlinehjälp.

***OBS:** Varje ZoomText dialogruta innehåller också en hjälpknapp som, när den väljs, visar hjälp för dialogrutan.*