

Internet Explorer Kommandon

OBS: JAWS Hjälpsystem innehåller detaljerad information om att använda Internet Explorer. När du är i webbläsaren, håll **INSERT** inne och tryck **F1** två gånger i snabb följd. När JAWS hjälp är öppen, tryck **F6** för att flytta till fönstret med hjälpavsnitt.

Allmänna

Bakåt en sida	ALT+PIL VÄNSTER eller BACKSTEG
Framåt en sida	ALT+PIL HÖGER
Gå till startsidan	ALT+HOME
Läs adressfältet	INSERT+A
Nästa länk	TABB
Föregående länk	SKIFT+TABB
Öppna/Följ länk	ENTER
Lista med frames	INSERT+F9
Lista med länkar	INSERT+F7
Lista med rubriker	INSERT+F6
Rubrik på nivå	1 till 6
Virtuella HTML-funktioner	INSERT+F3
Aktivera "Mus över"	CTRL+INSERT+ENTER
Flytta till nästa klickbara element	STRECK
Flytta till föregående klickbara element	SKIFT+STRECK
Välj ett klickbart element	INSERT+CTRL+STRECK
Välj ett VidMusÖver-element	INSERT+WINDOWS +Ö
JAWS Sök nästa och föregående	F3 och SKIFT+F3 (Endast IE)
Lägg till Anpassad etikett	INSERT+CTRL+TABB
Flytta till nästa Landmärke	Ö
Flytta till föregående Landmärke	SKIFT+Ö
Välj ett Landmärke	INSERT+CTRL+Ö
ARIA Dra-och-släpp	WINDOWS+CTRL+' (apostrof till vänster om backsteg)
ARIA-område textfilter	WINDOWS+CTRL+- (streck till vänster om höger skift)

Internet Explorer Kommandon

Flikhantering snabbkommandon

Öppna en ny flik	CTRL+T
Öppna en ny flik från adressfältet	ALT+ENTER (i adressfältet)
Öppna en ny flik från sökfältet	ALT+ENTER (i adressfältet)
Visa en lista med öppna flikar	CTRL+SKIFT+Q
Skifta till snabbflikar (miniatyrer vy)	CTRL+Q
Hoppa till nästa flik	CTRL+TABB
Hoppa till föregående flik	CTRL+SKIFT+TABB
Hoppa till ett speciellt fliknummer	CTRL+n, där n är en siffra från 1 till 8
Hoppa till sista flik	CTRL+9
Stäng aktuell flik	CTRL+W eller CTRL+F4
Stäng alla flikar	ALT+F4
Stäng alla andra flikar	CTRL+ALT+F4
Öppna länkar i en ny flik i bakgrunden	CTRL+ENTER
Öppna länkar i en ny flik i förgrunden	CTRL+SKIFT+ENTER
Öppnar och sätter fokus på trädvy för Feeds	CTRL+J
Prenumerera på Feeds eller WebSlices	ALT+J (Internet Explorer 8 eller senare för WebSlices)

Navigeringstangenter

Tips: Om du håller **SKIFT** inne innan du trycker någon av följande Navigeringstangenter, kan du hoppa till föregående förekomst av det elementet. Till exempel, tryck **A** för att flytta till nästa ankare, tryck **SKIFT+A** för att hoppa till föregående ankare. Om du håller **CTRL+INSERT** inne när du trycker på tangenter med en asterisk (*), visar JAWS en lista med dessa element på sidan.

Navigeringstangenter

Nästa Ankare	A*
Nästa Knapp (Button)	B*
Nästa Kombinationsruta (Combo Box)	C*
Nästa annorlunda element (Different)	D
Nästa Skrivfält (Edit box)	E*
Nästa Formulärkontroll	F
Nästa Grafik	G*
Nästa Rubrik (Heading)	H
Nästa objekt i en lista (Item)	I
Hoppa till rad (Jump)	J*
Nästa Platsmärke	K*
Nästa Lista	L*
Nästa Frame	M
Hoppa över länkar	N
Nästa Objekt-etikett	O
Nästa Stycke (Paragraph)	P*
Nästa Citat (Quote)	Q*
Nästa Radioknapp	R*
Nästa Element av Samma sort	S
Nästa Tabell	T*
Nästa Obesökta Länk (Unvisited)	U
Nästa besökta länk (Visited)	V
Nästa Kryssruta	X*
Nästa Avsnitt	Z*
Nästa Element	SKIFT+PUNKT
Föregående Element	SKIFT+KOMMA

Internet Explorer Kommandon

Formulär

Aktivera Formulärläge	ENTER
Lämna Formulärläge	NUM PLUS
Lista Formulärfält	INSERT+F5
Första Formulärfält	INSERT+CTRL+HOME
Nästa Formulärfält	F
Föregående Formulärfält	SKIFT+F
Sista Formulärfält	INSERT+CTRL+END
Nästa Knapp (Button)	B
Föregående Knapp	SKIFT+B
Lista Knappar	CTRL+INSERT+B
Nästa Kombinationsruta (Combo Box)	C
Föregående Kombinationsruta	SKIFT+C
Lista Kombinationsrutor	CTRL+INSERT+C
Nästa Skrivfält (Edit box)	E
Föregående Skrivfält	SKIFT+E
Lista Skrivfält	CTRL+INSERT+E
Nästa Radioknapp	R
Föregående Radioknapp	SKIFT+R
Lista Radioknappar	CTRL+INSERT+R
Nästa Kryssruta	X
Föregående Kryssruta	SKIFT+X
Lista Kryssrutor	CTRL+INSERT+X

Tabeller

Lista med tangentkommandon för tabellnavigering	INSERT+MELLANSLAG, följt av T och sedan H
Nästa Tabell	T
Föregående Tabell	SKIFT+T
Välj Tabell	F8

Internet Explorer Kommandon

Tabeller

Nästa rad	WINDOWS+ALT+PIL NER
Föregående rad	WINDOWS+ALT+PIL UPP
Läs rad	WINDOWS+KOMMA eller WINDOWS+NUM 5
Nästa Kolumn	WINDOWS+ALT+PIL HÖGER
Föregående Kolumn	WINDOWS+ALT+PIL VÄNSTER
Läs kolumn	WINDOWS+PUNKT
Nästa cell i raden	ALT+CTRL+PIL HÖGER
Föregående cell i raden	ALT+CTRL+PIL VÄNSTER
Cell under i kolumnen	ALT+CTRL+PIL NER
Cell över i kolumnen	ALT+CTRL+PIL UPP
Flytta till tabellcell	CTRL+WINDOWS+J
Återgå till föregående cell	CTRL+WINDOWS+SKIFT+J

Platsmärken

Infoga tillfälligt platsmärke	CTRL+WINDOWS+K
Lägg till, ta bort, ändra eller byt namn på permanenta platsmärken	CTRL+SKIFT+K
Flytta till nästa eller föregående Platsmärke	K eller SKIFT+K
Läs text vid platsmärke 1 till 4	7 till 0 på siffraden
Flytta till Platsmärke 1 till 4	SKIFT+ 7 till 0 på siffraden
Återvänd till platsmärke i Word	WINDOWS +K
Markera text från platsmärke till markörposition i Word	INSERT+MELLANSLAG följt av M

Frames

Nästa Frame	M
Föregående Frame	SKIFT+M
Lista med frames	INSERT+F9

Internet Explorer Kommandon / Desktop Kommandon

Element

Nästa Element av Samma sort	S
Föregående Element av Samma sort	SKIFT+S
Nästa annorlunda element (Different)	D
Föregående annorlunda Element	SKIFT+D
Nästa Element	SKIFT+PUNKT
Föregående Element	SKIFT+KOMMA
Markera hela Elementet	F8
Visa hela Elementet	SKIFT+INSERT+F1
Visa detaljerad information om Elementet	CTRL+SKIFT+INSERT+F1
Aktivera "Mus över"	INSERT+CTRL+ENTER

Desktop Kommandon

För att läsa text

Läs Tecken	NUM 5
Läs Tecken Fonetiskt	NUM 5 två gånger i snabb följd
Säg Föregående Tecken	PIL VÄNSTER
Läs Nästa Tecken	PIL HÖGER
Läs Ord	INSERT+NUM 5
Bokstavera Ord	INSERT+NUM 5 två gånger i snabb följd
Läs Föregående Ord	INSERT+PIL VÄNSTER
Läs Nästa Ord	INSERT+PIL HÖGER
Läs Rad	INSERT+PIL UPP (NUM 8)
Bokstavera Rad	INSERT+PIL UPP två gånger i snabb följd
Läs Föregående Rad	PIL UPP
Läs Nästa Rad	PIL NER
Läs Mening	ALT+NUM 5

För att läsa text

Läs Föregående Mening	ALT+PIL UPP (NUM 8)
Läs Nästa Mening	ALT+PIL NER (NUM 2)
Läs Stycke	CTRL+NUM 5
Läs Föregående Stycke	CTRL+PIL UPP
Läs Nästa Stycke	CTRL+PIL NER
Läs till Markör	INSERT+HOME
Läs från Markör	INSERT+PAGE UP
Läs löpande	INSERT+PIL NER (NUM 2)
Backa under Löpande Läsning	PIL VÄNSTER
Framåt under Löpande Läsning	PIL HÖGER
Säg Färg	INSERT+5 på siffraden
Öka talhastighet under löpande läsning	PAGE UP
Minska talhastighet under löpande läsning	PAGE DOWN
Öka talhastigheten när löpande läsning inte är igång	ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)
Minska talhastigheten när löpande läsning inte är igång	ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)
Uppdatera skärmen	INSERT+ESC
Starta Skumläsning	CTRL+INSERT+PIL NER (NUM 2)
Ändra Inställning för Skumläsning	CTRL+SKIFT+INSERT+PIL NER (NUM 2)
Visa Skumläsning Sammanfattning	INSERT+WINDOWS+PIL NER (NUM 2)
Slå tal på och av	INSERT+MELLANSLAG följt av S

Informativa

Avbryt Läsning	CTRL
Säg Typsnitt (Font)	INSERT+F
Läs Fönstertitel	INSERT+T
Läs Fönstrets Namn och Text	INSERT+TABB
JAWS Sök (Find)	CTRL+INSERT+F

Informativa

JAWS Sök Nästa	INSERT+F3
JAWS Sök Föregående	INSERT+SKIFT+F3
Läs översta raden i fönstret	INSERT+END
Läs Nedersta Raden i Fönstret	INSERT+PAGE DOWN
Läs Markerad Text	INSERT+SKIFT+PIL NER (NUM 2)
Programmets Version	CTRL+INSERT+V

För markörer och mus

PC Markör	NUM PLUS
JAWS Markör	NUM MINUS
Dra PC Markör till JAWS Markör	INSERT+NUM PLUS
Dra JAWS Markör till PC Markör	INSERT+NUM MINUS
Vänster Musclick	NUM /
Höger Musknapp	NUM *
Dra och Släpp	CTRL+INSERT+NUM /
Begränsa JAWS Markör (Restrict)	INSERT+R

I Dialogrutor

Läs Förvald knapp i Dialogrutan	INSERT+E
Läs Fönstret från Början till Slut	INSERT+B
Läs Ord i Sammanhang (Context)	INSERT+C
Läs Aktuell Kontrolls Snabbtangent	SKIFT+NUM 5
Öppna Kombinationsruta	ALT+PIL NER (NUM 2)
Stäng Kombinationsruta	ALT+PIL UPP (NUM 8)
Notera Förloppsindikators Status	INSERT+TABB

För Hjälp

Aktuell Hjälp	INSERT+F1
Tangentbordshjälp	INSERT+1
JAWS Hjälp för Programmet	Dubbeltryckning INSERT+F1
Hjälp med Snabbtangenter	INSERT+H
Hjälp med Windowstangenter	INSERT+W

För Hjälp

JAWS Fönster	INSERT+J
Uppdatera skärm	INSERT+ESC
Ändra JAWS inställningar	INSERT+V
Kör JAWS Hjälpprogram	INSERT+F2
Avsluta JAWS	INSERT+F4
Fönsterlista	INSERT+F10
Välj en Ikon i Systemfältet	INSERT+F11
Säg Systemtiden	INSERT+F12
Namnge Grafik	INSERT+G
Automatisk Grafik Namngivning	CTRL+INSERT+G
Släpp Igenom Nästa	INSERT+3 på siffraden
Virtuellt Fönster (Window)	ALT+INSERT+W
Virtualisera aktuell kontroll	ALT+SKIFT+INSERT+W
Välj Schema	ALT+INSERT+S
Välj Språk	CTRL+WINDOWS+L
Välj Talsyntes	CTRL+INSERT+S
Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy	CTRL+INSERT+n, där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0
Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)	WINDOWS+C

För Frames

Sätt övre vänster hörn	CTRL+SKIFT+Å
Sätt nedre höger hörn	CTRL+SKIFT+” (höger om Å)
Skapa Frame efter fönstret	Dubbeltryckning CTRL+SKIFT+Å

För JAWS Tandem

Avsluta JAWS Tandemsession	INSERT+ALT+T
Skifta mellan måldator och kontrollator (endast från kontrollatorn)	INSERT+ALT+TAB
Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn (endast på kontrollatorn)	INSERT+CTRL+SKIFT+V

Desktop Kommandon / Laptop Kommandon

För sökaren

Starta Sökaren	INSERT+MELLANSLAG följt av R
Starta Sökaren med dess primära uppslagskälla	INSERT+WINDOWS+R

För SkärmOCR

Tolka aktuellt programfönster	INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan W
Tolka hela skärmen	INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan S
Tolka aktuell markerad kontroll	INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan C
Avbryt pågående tolkning	INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan Q
Ge hjälpmeddelande för OCR-kommandon	INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan H

Laptop Kommandon

För att läsa text

Läs Tecken	CAPS LOCK+KOMMA
Läs Tecken Fonetiskt	Dubbeltryckning CAPS LOCK+KOMMA
Säg Föregående Tecken	CAPS LOCK+M
Läs Nästa Tecken	CAPS LOCK+PUNKT
Läs Ord	CAPS LOCK+K
Bokstavera Ord	Dubbeltryckning CAPS LOCK+K
Läs Föregående Ord	CAPS LOCK+J
Läs Nästa Ord	CAPS LOCK+L
Läs Rad	CAPS LOCK+I
Bokstavera Rad	Dubbeltryckning CAPS LOCK+I
Läs Föregående Rad	CAPS LOCK+U
Läs Nästa Rad	CAPS LOCK+O
Läs Mening	CAPS LOCK+H
Läs Föregående Mening	CAPS LOCK+Y

För att läsa text

Läs Nästa Mening	CAPS LOCK+N
Läs Stycke	CAPS LOCK+CTRL+I
Läs Föregående Stycke	CAPS LOCK+CTRL+U
Läs Nästa Stycke	CAPS LOCK+CTRL+O
Läs till Markör	CAPS LOCK+SKIFT+J
Läs från Markör	CAPS LOCK+SKIFT+L
Läs löpande	CAPS LOCK+A
Backa under Löpande Läsning	PIL VÄNSTER
Framåt under Löpande Läsning	PIL HÖGER
Säg Färg	CAPS LOCK+5
Öka talhastighet under löpande läsning	PAGE UP
Minska talhastighet under löpande läsning	PAGE DOWN
Öka talhastigheten när löpande läsning inte är igång	ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)
Minska talhastigheten när löpande läsning inte är igång	ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)
Uppdatera skärmen	CAPS LOCK+ESC
Starta Skumläsning	CAPS LOCK+CTRL+PIL NER
Ändra Inställning för Skumläsning	CAPS LOCK+CTRL+SKIFT+PIL NER
Visa Skumläsning Sammanfattning	CAPS LOCK+WINDOWS+PIL NER
Slå tal på och av	INSERT+MELLANSLAG följt av S

Informativa

Avbryt Läsning	CTRL
Säg Typsnitt (Font)	CAPS LOCK+F
Läs Fönstertitel	CAPS LOCK+T
Läs Fönstrets Namn och Text	CAPS LOCK+TABB
JAWS Sök (Find)	CAPS LOCK+ CTRL+F
JAWS Sök Nästa	CAPS LOCK+F3
JAWS Sök Föregående	CAPS LOCK+SKIFT+F3

Informativa

Läs översta Raden i Fönstret	CAPS LOCK+SKIFT+Y
Läs Nedersta Raden i Fönstret	CAPS LOCK+SKIFT+N
Läs Markerad Text	CAPS LOCK+SKIFT+A
Programmets Version	CAPS LOCK+CTRL+V

För markörer och mus

PC Markör	CAPS LOCK+Ö
JAWS Markör	CAPS LOCK+P
Dra PC Markör till JAWS Markör	CAPS LOCK+Ä
Dra JAWS Markör till PC Markör	CAPS LOCK+Å
Vänster Musclick	CAPS LOCK+8
Höger Musknapp	CAPS LOCK+9
Vänster Musknapp Lås	CTRL+WINDOWS+8
Höger Musknapp Lås	CTRL+WINDOWS+9
Dra och Släpp	CAPS LOCK+CTRL+8
Begränsa JAWS Markör	CAPS LOCK+R

I Dialogrutor

Läs Förvald knapp i Dialogrutan	CAPS LOCK+E
Läs Fönster i Tabbordning	CAPS LOCK+B
Läs Ord i Sammanhang (Context)	CAPS LOCK+C
Läs Aktuell Kontrolls Snabbtangent	CAPS LOCK+SKIFT+KOMMA
Öppna Kombinationsruta	ALT+PIL NER (NUM 2)
Stäng Kombinationsruta	ALT+PIL UPP (NUM 8)
Notera Förloppsindikators Status	CAPS LOCK+TABB

För Hjälp

Aktuell Hjälp	CAPS LOCK+F1
Tangentbordshjälp	CAPS LOCK+1
JAWS Hjälp för Programmet	Dubbeltryckning CAPS LOCK+F1
Hjälp med Snabbtangenter	INSERT+H
Hjälp med Windowstangenter	CAPS LOCK+W

Diverse

JAWS Fönster	INSERT+J
Uppdatera skärm	CAPS LOCK+ESC
Snabbinställningar	CAPS LOCK+V
Kör JAWS Hjälpprogram	CAPS LOCK+F2
Avsluta JAWS	CAPS LOCK+F4
Fönsterlista	CAPS LOCK+F10
Välj en Ikon i Systemfältet	CAPS LOCK+F11
Säg Systemtiden	CAPS LOCK+F12
Namnge Grafik	CAPS LOCK+G
Automatisk Grafik Namngivning	CAPS LOCK+CTRL+G
Släpp Igenom Nästa	CAPS LOCK+3
Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy	CTRL+INSERT+n, där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0
Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)	WINDOWS+C

För Frames

Sätt övre vänster hörn	CTRL+SKIFT+Å
Sätt nedre höger hörn	CTRL+SKIFT+” (höger om Å)
Skapa Frame efter fönstret	CTRL+SKIFT+Å dubbeltryckning

För JAWS Tandem

Avsluta JAWS Tandemsession	INSERT+ALT+T
Skifta mellan måldator och kontrollator (endast från kontrollatorn)	INSERT+ALT+TAB
Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn (endast på kontrollatorn)	INSERT+CTRL+SKIFT+V

För Sökaren

Starta Sökaren	CAPS LOCK+MELLANSLAG följt av R
Starta Sökaren med dess primära uppslagskälla	CAPS LOCK+WINDOWS+R

Laptop Kommandon / Windows Kommandon

För Skärm-OCR

Tolka aktuellt programfönster	CAPS LOCK+MELLANSLAG , följt av O och sedan W
Tolka hela skärmen	CAPS LOCK+MELLANSLAG , följt av O och sedan S
Tolka aktuell markerad kontroll	CAPS LOCK+MELLANSLAG , följt av O och sedan C
Avbryt pågående tolkning	CAPS LOCK+MELLANSLAG , följt av O och sedan Q
Ge hjälpmeddelande för OCR-kommandot	CAPS LOCK+MELLANSLAG , följt av O och sedan H

Windows Kommandon

Allmänna

Hjälp	F1
Öppna Startmenyn	WINDOWS eller CTRL+ESC
Starta Utforskaren	WINDOWS+E
Öppna Dialogen Kör	WINDOWS+R
Sök Fil eller Mapp från Skrivbordet	F3
Minimera Alla Program	WINDOWS+M
Skifta mellan öppna program	ALT+TABB
Stäng aktuellt program	ALT+F4

För Windows och Menyer

Öppna menyn för programkontroll	ALT+MELLANSLAG
Flytta till aktuellt programs menyrad	ALT
Välj ett menyalternativ	ENTER
Flytta mellan menyer	ALT, PILTANGENTER
Avbryt eller stäng en meny	ESC
Avbryt eller stäng en meny	ALT
Öppna menyn för fönsterkontroll	ALT+STRECK (-)
Stäng ett underfönster	CTRL+F4
Öppna Snabbmenyn	SNABBMENY eller SKIFT+F10

I Dialogrutor

Flytta mellan dialogens kontroller	TABB
Flytta bakåt mellan dialogens kontroller	SKIFT+TABB
Flytta till annan flik	CTRL+TABB
Flytta andra hållet mellan flikar	CTRL+SKIFT+TABB
Markera eller avmarkera i lista	MELLANSLAG eller CTRL+MELLANSLAG
Kryssa i och ur kryssruta	MELLANSLAG

För Windows Utforskaren

Ta bort filer	DELETE
Byt namn på fil eller mapp	F2
Öppna Egenskaper för vald fil eller mapp	ALT+ENTER
Uppdatera fönstret	F5
Byt mellan delfönster	TABB och SKIFT+TABB
Upp en nivå	BACKSTEG

För att läsa text

Flytta ett tecken vänster	PIL VÄNSTER
Flytta ett tecken höger	PIL HÖGER
Flytta ett ord vänster	CTRL+PIL VÄNSTER
Flytta ett ord höger	CTRL+PIL HÖGER
Flytta till början av raden	HOME
Flytta till slutet av raden	END
Flytta ett stycke upp	CTRL+PIL UPP
Flytta ett stycke ner	CTRL+PIL NER
Rulla upp en skärm	PAGE UP
Rulla ner en skärm	PAGE DOWN
Flytta till början	CTRL+HOME
Flytta till slutet	CTRL+END

För redigering av text

Kopiera	CTRL+C
Klipp ut	CTRL+X
Klistra in	CTRL+V
Läs innehållet i klippbordet (Desktop eller Laptop Layout)	WINDOWS+INSERT+X eller WIN- DOWS+CAPS LOCK+X
Ångra	CTRL+Z
Radera aktuellt tecken	DELETE
Ta bort föregående tecken	BACKSTEG
Markera ett tecken vänster	SKIFT+PIL VÄNSTER
Markera ett tecken höger	SKIFT+PIL HÖGER
Markera ett ord vänster	CTRL+SKIFT+PIL VÄNSTER
Markera ett ord höger	CTRL+SKIFT+PIL HÖGER
Markera till början av raden	SKIFT+HOME
Markera till slutet av raden	SKIFT+END
Markera till början	CTRL+SKIFT+HOME
Markera till slutet	CTRL+SKIFT+END
Markera allt	CTRL+A