

Bruksanvisning i-loview 13 FHD

Portabel läskamera



Ver 4.9B



Innehåll

Vad finns i kartongen	4
Innan användning	4
Fäll upp i-loview	5
Fäll ihop i-loview	6
Kamerapositioner.....	7
Utseende	8
Anslutningar	11
Kontrollpanel.....	12
1. På /Av knapp.....	12
2. Ljusratt.....	12
3. Frysknapp	12
4. Förstoringsratt.....	12
5. Kontrastknapp.....	13
6. Färglägesknapp.	13
7. Funktion reglage.	13
Referens och Kulisser.....	14
Batteri status.....	15
Energisparläge	15
Färgval	15
Inställningsmeny	16
Fler inställningar har undermeny:	17
Rengöring.....	18
Felsökning	19
Teknisk Data.....	19



Vad finns i kartongen

Kontrollera att förpackningen innehåller följande:




- i-loview kamerasystem
- DC adapter med nätkabel
- Förvaringsväska
- Bruksanvisning
- Microfiberduk (Rengöring av bildskärm)

Innan användning

- Se till att enheten är fullt laddad innan första användning.
- Anslut medföljande DC adapter till uttaget på baksidan, för att ladda batteriet.
- Ta bort skyddsfilmen som täcker bildskärmen.




Fäll upp i-loview

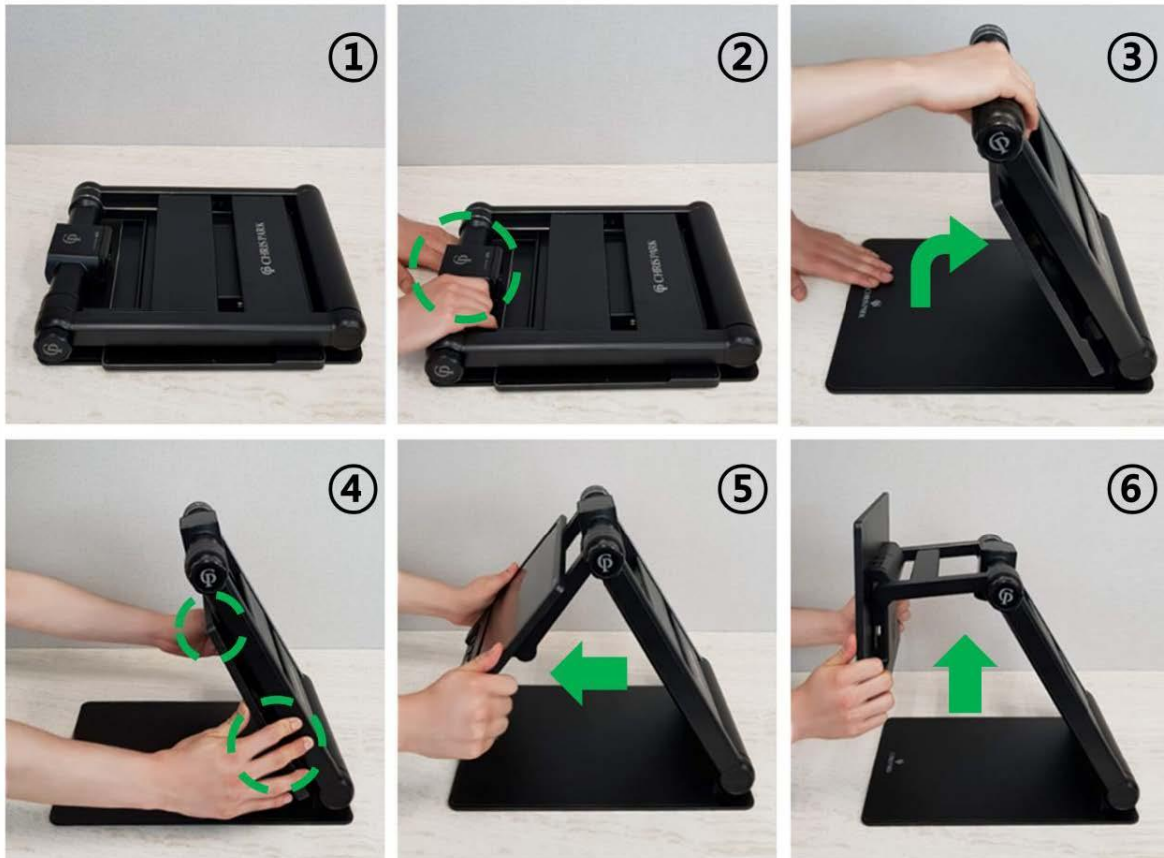

1. Placera enheten på ett stabilt underlag.
2. Håll en hand på basplattan, och ta med andra handen tag i överdelen på stativet.
3. Fäll upp stativet tills den låser i läge.
4. Ta tag i båda sidor av bildskärmen.
5. Dra skärmen mot dig.
6. Höj eller sänk skärmen och vinkla till behaglig position.



Fäll ihop i-loview

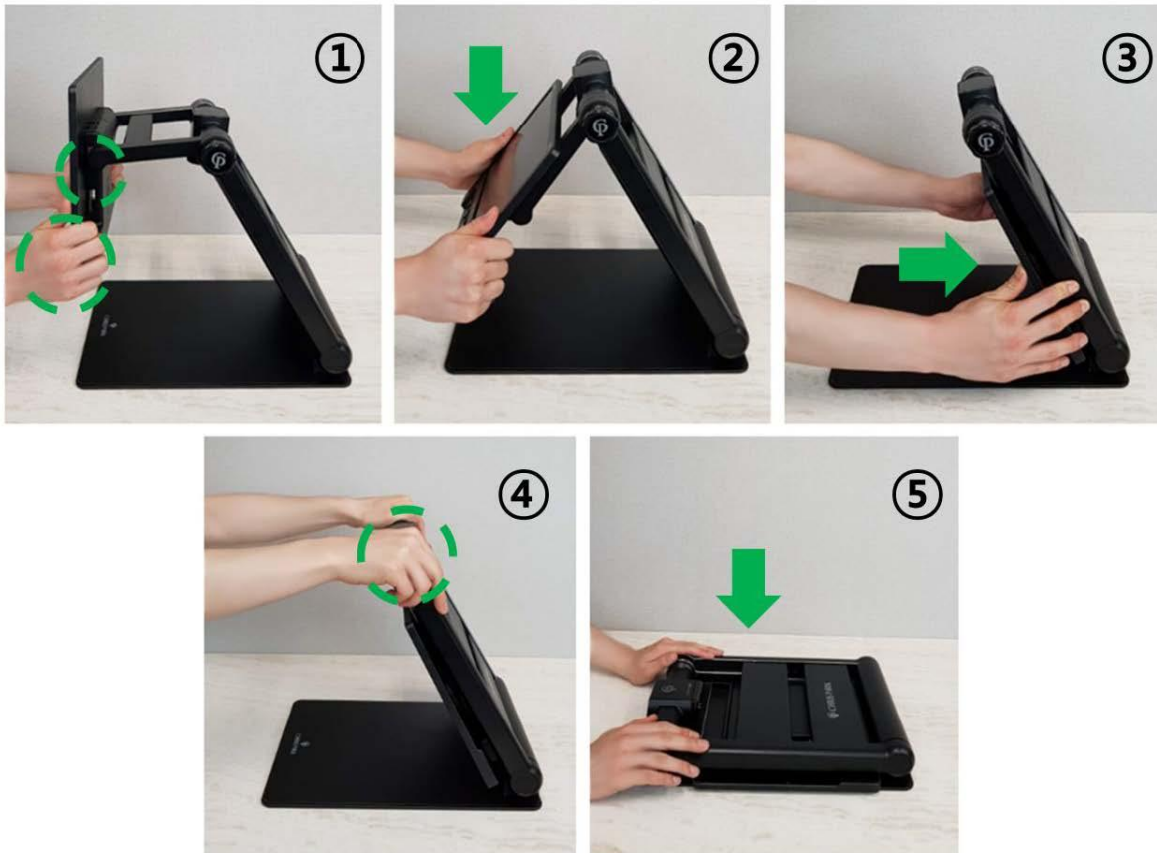


1. Ta tag i båda sidor av bildskärmen.
2. Tryck ner bildskärmen.
3. Tryck skärmen bakåt mot stativet.
4. Ta tag i stativet med båda händerna.
5. Fäll ihop stativet mot basplattan.



Kamerapositioner

Kameran kan justeras i olika positioner.

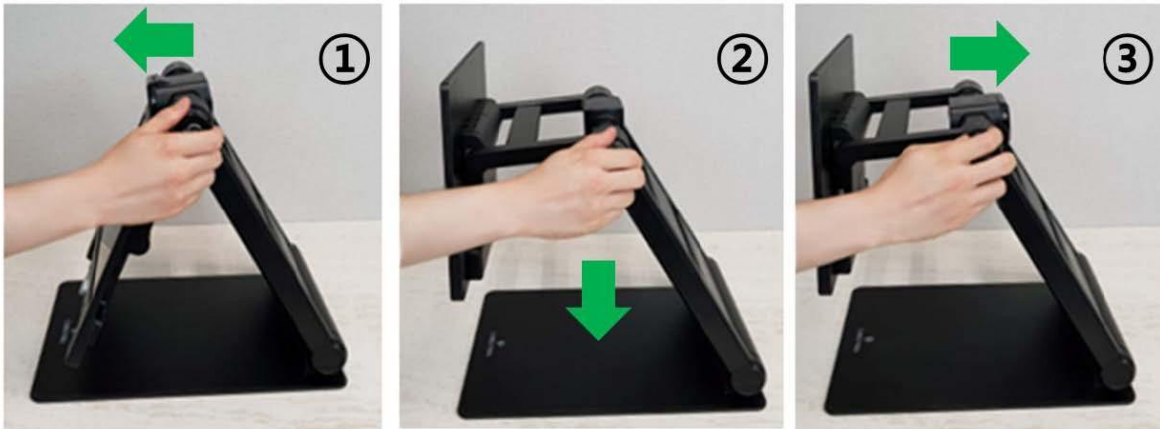

- Spegelläge (Du kan se dig själv).
- Läsläge (Kameran tittat ner på basplattan).
- Avståndsläge (Kameran tittar bakom enheten).



Utseende



1. På /Av knapp.
2. Ljusratt.
3. Frysknapp.
4. Förstoringsratt.
5. Kontrastknapp.
6. Färglägesknapp.
7. Funktionsreglage.
8. Bildskärm.





- 9.Kamera.
10.Närlins.
11.DC uttag.





12. LED belysning
13. Kameraläges ratt.



Anslutningar



1. HDMI UT.
2. Service anslutning (USB C).
3. HDMI IN (Tillägg).
4. USB 3.0 uttag (Tillägg).



Kontrollpanel



1. På /Av knapp.

Håll in knappen i ca två sekunder för att starta eller stänga av enheten.

2. Ljusratt.

- I färgläge justeras ljuset på skärmen (5-steg)
- I kontrastläge justeras bildkvaliteten, tryck på ratten för att återgå till grundinställning.
- Tryck in ratten i ca två sekunder för att koppla bort autofokus, upprepa för att koppla in igen.

3. Frysknapp.

- Tryck på knappen för att frysa bilden.
- Den frysta bilden kan justeras i storlek, kontrast och ljus.
- Med Funktionsreglaget går det panorera i bilden.
- Tryck på knappen för att släppa bilden.

4. Förstoringsratt.

- Förstoringsområde 1.8 till 30 gånger.
- Förstoring i Fryst bild upp till 150 gånger.
- Tryck och håll in ratten några sekunder för att komma till Inställningsmeny, Upprepa för att lämna meny och spara inställningar.





5. Kontrastknapp.

Bilden kan visas i 8 olika kontrastfärger:

- Färgbild.
- Vit text på Svart bakgrund.
- Svart text på Vit bakgrund.
- Gul text på Svart bakgrund.
- Svart text på gul bakgrund.
- Grön text på Svart bakgrund.
- Blå text på Gul bakgrund.
- Gul text på Blå bakgrund.



I inställningsmenyn kan upp till 30 färger väljas, eller kan några eller samtliga färger tas bort.

6. Färglägesknapp.

- Växlar till naturlig färgbild.
- Håll in knappen för att få fram en "Sök box" på skärmen.

7. Funktion reglage.

Används till många funktioner.

- Panorera i Frys bild.
- Välja Referens eller kuliss.




Referens och Kulisser

Tryck och håll in Funktionsreglaget för att aktivera denna funktion.

Tryck på höger eller vänster sida ◀ ▶ av reglaget för att växla mellan följande lägen:

Horisontal linje.

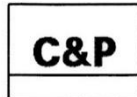

Vertikal linje.



Horisontal Kuliss




Vertikal kuliss



Tryck upp eller Ner ▲ ▼ på reglaget för att öka eller minska tjockleken på referens och avstånd mellan kulisser.



Vrid på reglaget ⤿ för att flytta position på referens och kuliss.

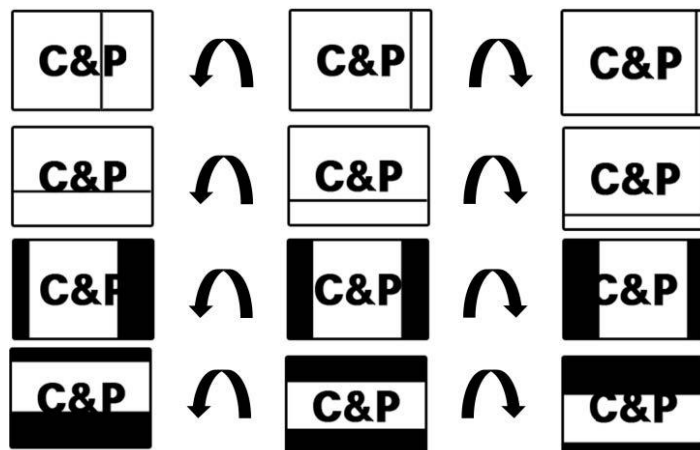

Batteri status

- Batteristatus visas normalt inte på skärmen.
- Håll in Frysknappen i 3 sekunder, så visas batterinivån på skärmen.
- När DC adaptern är ansluten, visas en laddningssymbol på skärmen.

Energisparläge

Om enheten inte används, går den ner i viloläge efter 10 minuter, efter ytterligare 3 minuter stängs den av.

Färgval

Håll in Kontrastknappen och vrid på Förstoringsratten för att byta kontrastfärg. (Ett snabbare sätt att bläddra mellan aktiva färger).

Många som hittat sin bästa kontrastfärg, växlar enklast genom att trycka på Färglägesknappen för fullfärg, och sedan på Kontrastknappen för att gå tillbaka till högkontrast.



Förskrivarinformation


Inställningsmeny

Tryck och håll in Förstoringsratten i några sekunder för att komma till Inställningsmenyn, Vrid på ratten för att välja, och tryck på ratten för att öppna menyval.



Färgläge


Som standard är sju färgkombinationer valda, markeras med en röd ram, vänster färg är text och höger bakgrund.

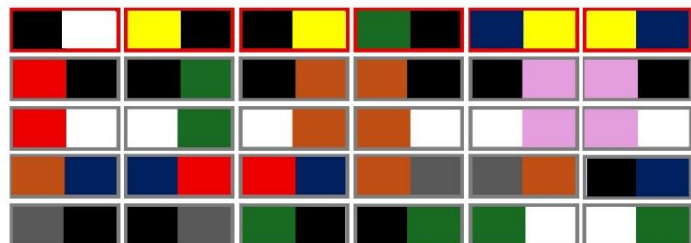

Vrid förstoringsratten för att välja, tryck på ratten för att markera eller avmarkera val. Tryck på Utökad för att aktivera alla val, och Standard för att återgå till grundinställning.

Förstoringsområde

Ställ in önskat förstoringsområde, som grund är 1.8x till 30x. Vrid på Förstoringsratten och välj genom att trycka.

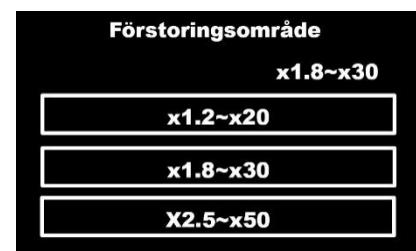

Ljusstyrka

Ändrar belysningen på läsplattan, vid på förstoringsratten för att justera, håll in ratt för att lämna och spara.



Återställning

Tryck och håll in Förstoringsratten i några sekunder för att spara och lämna menyn.

Fler inställningar har undermeny:



Språk

Vrid på förstoringsratten för att välja, och tryck på ratten för att markera önskat språk.




Panoreringshastighet

Vrid på Ljusratten för att ändra vilken hastighet bilden förflyttas i fryst läge med Funktions reglaget.



Minska funktioner

Minskar funktioner på enheten: Tar bort Ljusjustering, Fokuslås, Frysknapp, Panorering, Referens och kulisser.

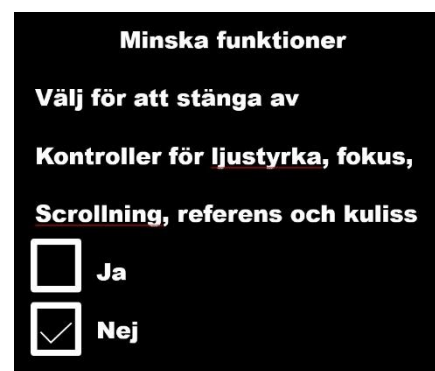

Personlig & Publik

Är som grund Personlig, alla inställningar sparas, i Publik återgår alla inställningar vid avstängning.

Personlig & Publik

Välj Personlig för att spara

Inställningen av förstoring, kontrast, Färgläge etc efter omstart

☒ Personlig

☐ Publik

Energisparläge

Bestämmer tid till skärmen släcks eller i-loview stängs ner.

Energisparläge Energialternativ				
Auto avstängning bildskärm	10 minuter	20 minuter	30 minuter	Används ej
Auto avstängning system	03 minuter	05 minuter	10 minuter	Används ej

Spara och avsluta

Spara alla inställningar och stänger menyn.

Rengöring

Till rengöring av bildskärmen rekommenderar vi en mjuk luddfri trasa och ljummet vatten. Använd inga starka medel. För grövre rengöring av övriga ytor, fungerar Isopropanol (Isopropylalkohol – IPA, IpaClean). Alternativt Vit destiller Ättika 10% blandning i vatten.

Viktigt! Tryck inte för hårt vid rengöring av bildskärm.



Felsökning

Ingen bild visas på skärmen

- Om batteriet är tomt, anslut laddare och prova igen.
- På/Av knappen till skärmen. (Längst till vänster på panel).

Bilden är suddig

- Kontrollera att kameran är vänd på rätt håll.
- Att linsen är uppfälld vid avstånd, och infälld vid läsavstånd.

Texten sitter fast på skärmen

- Tryck på Frysknappen för att släppa bilden. (Till vänster om förstoringsratten).

Teknisk Data

Skärmstorlek:	13.3" (338mm)
Skärmupplösning:	1920x1080 (Full HD)
Kamera:	1920x1080, 60fps Autofokus
Storlek:	320x373x420 mm 320x373x61mm (Hopfälld)
Vikt:	3.54 Kg (3.91 Kg med batteri)
Förstoring:	1.2 – 150X
Batteri:	16.8V, 5200MAh
Effekt:	14-20W
Drifttid:	5 Timmar



Tel: 010-455 04 00, E-post: info@insyn.se
www.insyn.se

