

Bruksanvisning i-loview MAX Premium Portabel läskamera



Ver 1.4



Innehåll

Vad finns i paketet	4
Instruktioner före användning.....	4
Fäll upp i-loview MAX	5
Fäll ihop i-loview MAX	6
Kamerapositioner.....	7
Användning	8
Anslutningar	11
Kontrollpanel.....	12
1. På /Av knapp.....	12
2. Ljusratt.....	12
3. Frys knapp	12
4. Förstoringsratt.....	12
5. Kontrastknapp.....	13
6. Färglägesknapp.	13
7. Funktion reglage.	13
Referens och Kulisser.....	14
Batteri status.....	15
Energisparläge	15
Färgval	15
Förskrivarinformation	16
Inställningsmeny	16
Fler inställningar har undermeny:	17
Felsökning	19
Teknisk Data.....	19



Vad finns i paketet

Kontrollera att förpackningen innehåller följande:



- i-loview kamerasystem
- DC adapter med nätkabel
- Manual
- Microfiberduk (Rengöring av bildskärm)

Instruktioner före användning


- Se till att enheten är fullt laddad innan första användning.
- Anslut medföljande DC adapter till uttaget på baksidan, för att ladda batteriet.
- Ta bort skyddsfilmerna som täcker bildskärmen.

Fäll upp i-loview MAX



1. Placera enheten på ett stabilt underlag.
2. Håll en hand på basplattan, och ta tag med andra handen i överdelen på stativet.
3. Fäll upp stativet tills den låser i läge.
4. Ta tag i båda sidor av bildskärmen.
5. Dra skärmen mot dig.
6. Höj eller sänk skärmen och vinkla till behaglig position.


Fäll ihop i-loview MAX

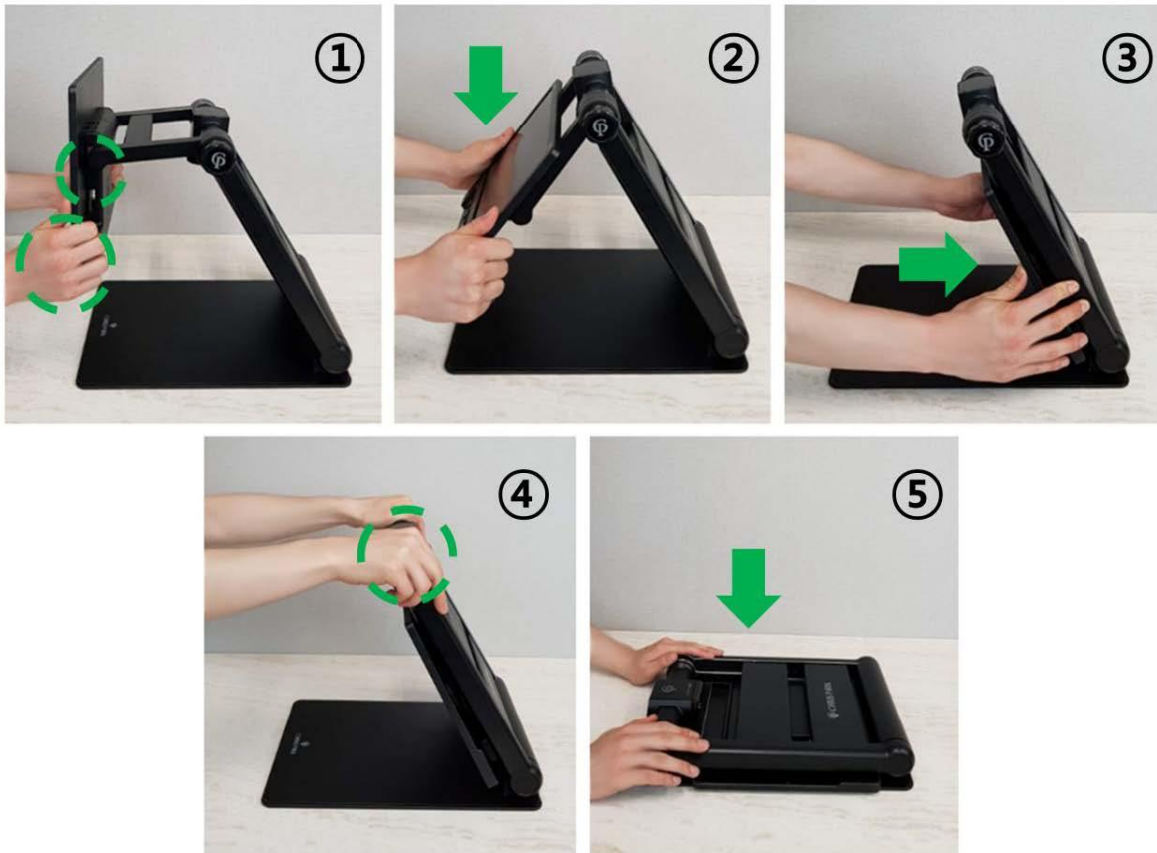

1. Ta tag i båda sidor av bildskärmen.
2. Tryck ner bildskärmen.
3. Tryck skärmen bakåt mot stativet.
4. Ta tag i stativet med båda händerna.
5. Fäll ihop stativet mot basplattan.

Kamerapositioner

Kameran kan justeras i olika positioner.

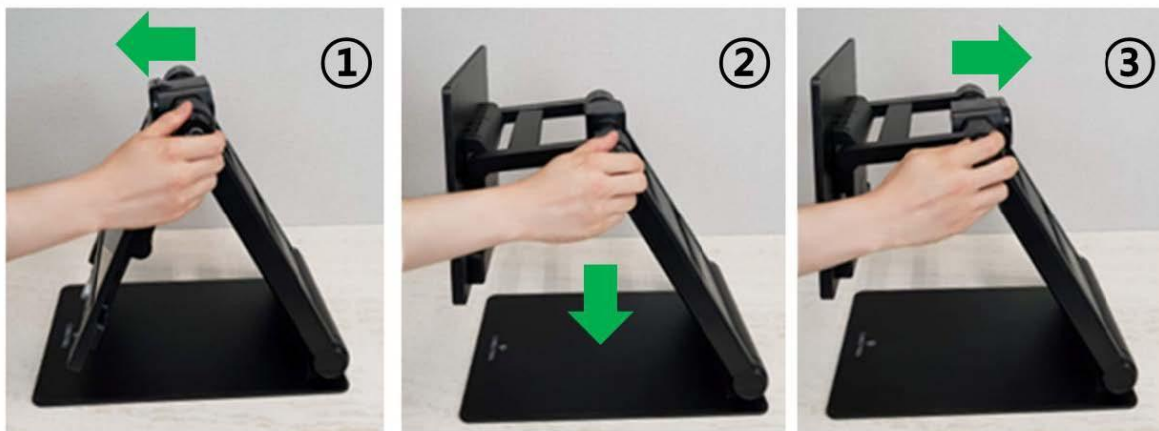

- Spegelläge (Du kan se dig själv).
- Läsläge (Kameran tittat ner på basplattan).
- Avståndsläge (Kameran tittar bakom enheten).

Användning



1. På /Av knapp.
2. Ljusratt.
3. Frysknapp.
4. Förstoringsratt.
5. Kontrastknapp.
6. Färglägesknapp.
7. Funktionsreglage.
8. Bildskärm.



- 9.Kamera.
10.Närlins.
11.DC uttag.





12. LED belysning
13. Kameraläges ratt.



Anslutningar



1. HDMI UT

För att ansluta en extern bildskärm eller projektor


2. Service anslutning (USB C).

3. HDMI IN

För att koppla in dator, smartphone, kamera

4. USB 3.0 uttag

Kontrollpanel

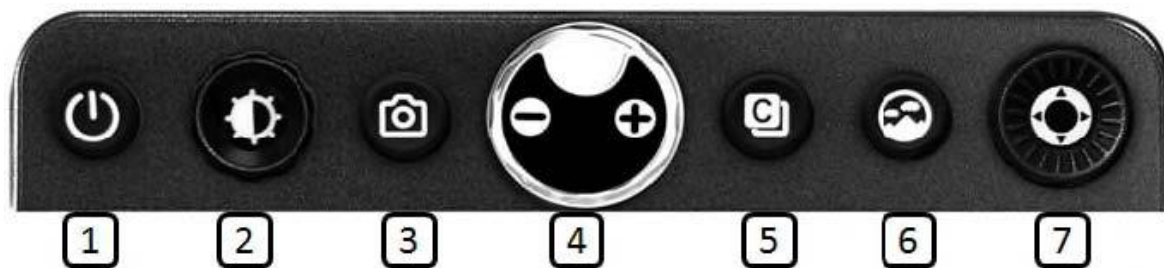

1. På /Av knapp

För att starta/stänga av enheten håll in knappen i två sekunder.

2. Ljusratt


- I färgläge justeras ljuset på skärmen (5-steg)
- I kontrastläge justeras bildkvaliteten, tryck på ratten för att återgå till grundinställning.
- Tryck in ratten i ca två sekunder för att koppla bort autofokus, upprepa för att koppla in igen.

3. Frysknapp.

- Tryck på knappen för att frysa bilden.
- Den frysta bilden kan justeras i storlek, kontrast och ljus.
- Med Funktionsreglaget (7) går det panorera i bilden.
- Tryck på knappen för att släppa bilden.

4. Förstoringsratt

- Förstoringsområde 2 till 32 gånger.
- Förstoring i Fryst bild upp till 174 gånger.
- Tryck och håll in ratten några sekunder för att komma till Inställningsmeny, Upprepa för att lämna meny och spara inställningar.

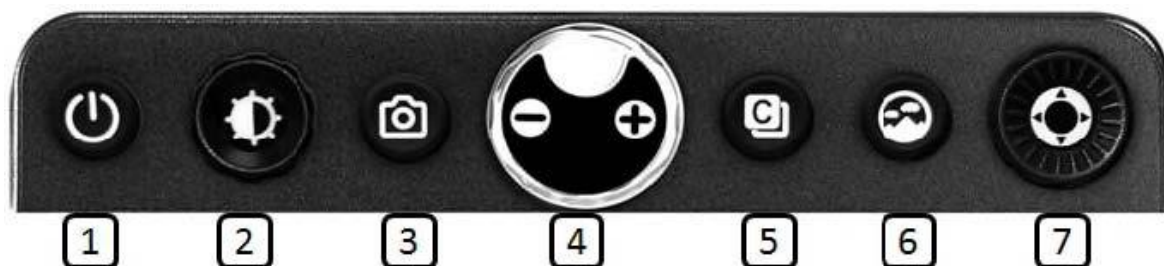

5. Kontrastknapp.

Bilden kan visas i 8 olika kontrastfärger:

- Färgbild.
- Vit text på Svart bakgrund.
- Svart text på Vit bakgrund.
- Gul text på Svart bakgrund.
- Svart text på gul bakgrund.
- Grön text på Svart bakgrund.
- Blå text på Gul bakgrund.
- Gul text på Blå bakgrund.



(I inställningsmenyn kan upp till 35 färger väljas)

6. Färglägesknapp.

- Växlar till naturlig färgbild.
- Håll in knappen för att få fram en "Sök box" på skärmen.

7. Funktion reglage.

Används till många funktioner.


- Panorera i Frys bild
- Välja Referens eller kuliss
- Hoppa mellan enheter t ex ifall dator, smartphone är inkopplad på HDMI IN då kan du hoppa mellan i-loview MAX kameran och smartphone

Referens och Kulisser

Tryck och håll in Funktionsreglaget för att aktivera denna funktion.

Tryck på höger eller vänster sida ◀ ▶ av reglaget för att växla mellan följande lägen:

Horisontal linje.

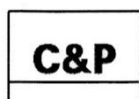

Vertikal linje.





Horisontal Kuliss




Vertikal kuliss



Tryck upp eller Ner ▲ ▼ på reglaget för att öka eller minska tjockleken på referens och avstånd mellan kulisser.

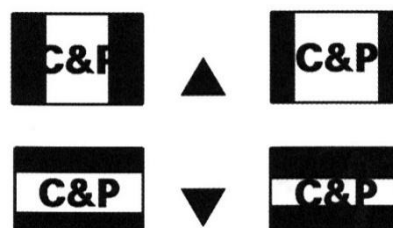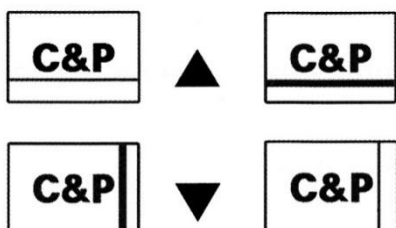

Vrid på reglaget ↻ för att flytta position på referens och kuliss.

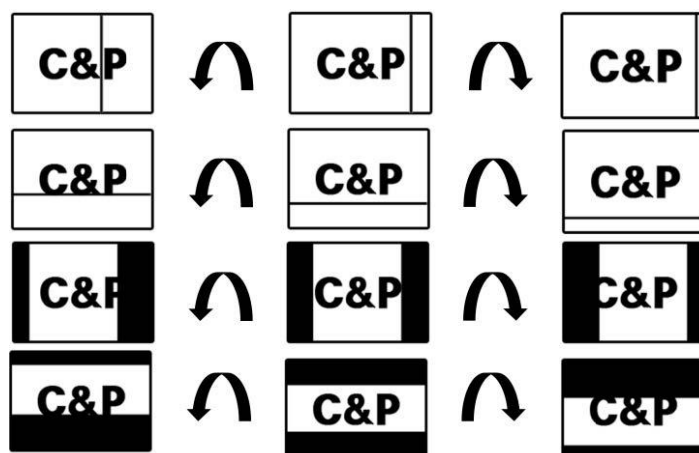

Batteri status

- Batteristatus visas normalt inte på skärmen.
- Håll in Frysknappen i 3 sekunder, så visas batterinivån på skärmen.
- När DC adaptern är ansluten, visas en laddningssymbol på skärmen.

Energisparläge

Om enheten inte används, går den ner i viloläge efter 10 minuter, efter ytterligare 3 minuter stängs den av.

Färgval

Håll in Kontrastknappen och vrid på Förstoringsratten för att byta kontrastfärg. (Ett snabbare sätt att bläddra mellan aktiva färger).

Många som hittat sin bästa kontrastfärg, växlar enklast genom att trycka på Färglägesknappen för fullfärg, och sedan på Kontrastknappen för att gå tillbaka till högkontrast.



Förskrivarinformation

Inställningsmeny


Tryck och håll in Förstoringsratten i några sekunder för att komma till Inställningsmenyn, Vrid på ratten för att välja, och tryck på ratten för att öppna menyval.



Färgläge

Som standard är sju färgkombinationer valda, markeras med en röd ram, vänster färg är text och höger bakgrund.

Vrid förstoringsratten för att välja, tryck på ratten för att markera eller avmarkera val. Tryck på Utökad för att aktivera alla val, och Standard för att återgå till grundinställning.

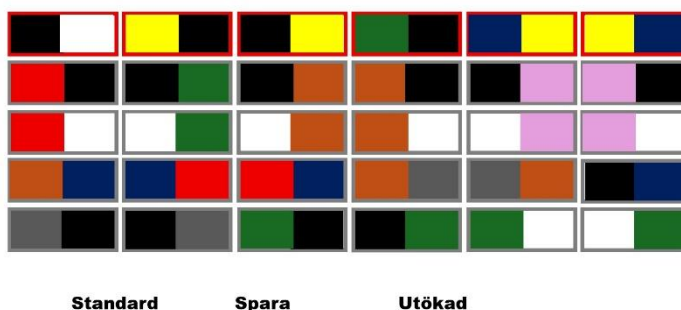


Förstoringsområde

Ställ in önskat förstoringsområde, som grund är 1.8x till 30x. Vrid på Förstoringsratten och välj genom att trycka.



Ljusstyrka

Ändrar belysningen på läsplattan, vid på förstoringsratten för att justera, håll in ratt för att lämna och spara.

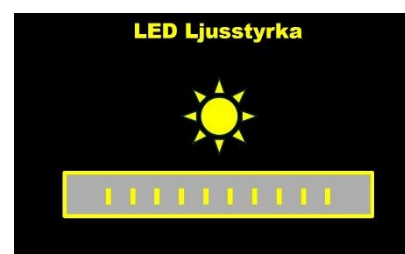

Återställning

Tryck och håll in Förstoringsratten i några sekunder för att spara och lämna menyn.

Fler inställningar har undermeny:



Språk

Vrid på förstoringsratten för att välja, och tryck på ratten för att markera önskat språk.




Panoreringshastighet

Vrid på Ljusratten för att ändra vilken hastighet bilden förflyttas i fryst läge med Funktions reglaget.



Minska funktioner

Minskar funktioner på enheten: Tar bort Ljusjustering, Fokuslås, Frysknapp, Panorering, Referens och kulisser.

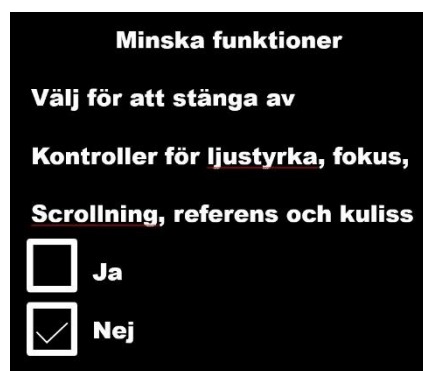

Personlig & Publik

Är som grund Personlig, alla inställningar sparas, i Publik återgår alla inställningar vid avstängning.

Energisparläge

Bestämmer tid till skärmen släcks eller i-loview stängs ner.

Energisparläge Energialternativ				
Auto avstängning bildskärm	10 minuter	20 minuter	30 minuter	Används ej
Auto avstängning system	03 minuter	05 minuter	10 minuter	Används ej

Spara och avsluta

Spara alla inställningar och stänger menyn.



Felsökning

Skärm svart ingen belysning	Batteri urladdat, anslut laddare
Ingen eller konstig bild	Kontrollera att kameraläge är vriden så kameran tittar ner på arbetsytan. Autofokus är avstängd.
Bilden är suddig på avstånd	Fäll ner närlinsen
Bild suddig på arbetsytan	Närlinsen öppen. Autofokus är avstängd.
Blanka papper eller föremål syns dåligt.	Vinkla kameralägesratten för att undvika reflektion.

Teknisk Data

Skärmstorlek:	17.3" (439 mm)
Skärmupplösning:	1920x1080 (Full HD)
Kamera:	1920x1080, 60fps Autofokus
Storlek:	413x445x520 mm 413x434x68 mm (ihopfälld)
Vikt:	5.5 Kg (med batteri)
Förstoring:	1.4 – 70x
Batteri:	16.8V, 5200MAh
Effekt:	14-20W
Drifttid:	5 Timmar



Tel: 010-455 04 00, E-post: info@insyn.se
www.insyn.se

