



På /Av knapp

Håll in knappen ca två sekunder för att starta eller stänga av enheten.



Ljusratt

I färgläge justeras ljuset på skärmen i 5 steg.

I kontrastläge justeras bildkvaliteten.



Frysknapp

Tryck på knappen för att frysa eller släppa bilden. Med Funktionsreglaget går det panorera i frysta bilden.



Förstoringsratt

Håll in frysknappen i 3 sekunder, för att få batteristatus presenterad. Vrid medurs för att öka förstoring, moturs för att minska.

Tryck och håll in knappen för att komma till inställningar.



Kontrastknapp

Växlar mellan 8 olika kontrastfärger. I inställningsmenyn kan upp till 35 olika färger väljas.



Färglägesknapp

Växlar till naturlig färgbild.

Håll in knappen för att aktivera en sökbox på skärmen.



Funktionsreglage Har många funktioner.

Panorera i fryst bild.

Välja och justera referenslinjer och kulisser.