

Bruksanvisning

Lumi



Ver. 1.0



INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

1. Ta bort all förpackning runt lampan före användning.


VARNING: Fjädrarna i armen är mycket starka, greppa runt armen med båda händerna och öppna långsamt för att undvika skador.

2. Fäst den medföljande klämman ordentligt på kanten av ett bord eller en arbetsbänk.

OBSERVERA: Det är viktigt att klämman är ordentligt fastsatt INNAN du monterar lampan. Om den medföljande klämman inte passar på bordkanten finns ett golvstativ som alternativ.

3. Sätt in lamparmens skaft i hålet i klämman och anslut nätadaptern till ett eluttag – lampan är nu klar att användas.

4. Tryck på strömbrytaren mitt på lamphuvudet så tänds lampan med 100 % ljusstyrka. Efterföljande tryck på knappen gör att ljuset dämpas, ytterligare ett tryck stänger av lampan.

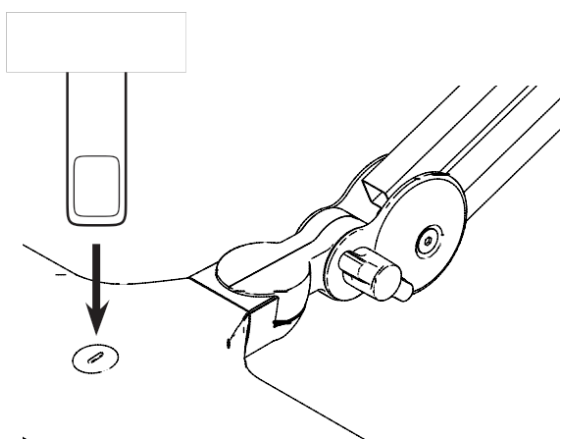

VARNING: Försök inte vrida armar eller lamphuvud utanför dess rörelsebegränsningar eftersom detta kan skada lampan och göra din garanti ogiltig.



UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Inget underhåll krävs. Lysdioderna kan inte bytas ut av användaren eller servicen eftersom de är konstruerade för att hålla under hela produktens livslängd.

VARNING: Titta inte direkt på lysdioderna.

FÖRE RENGÖRING: koppla bort elanslutning innan rengöring. Enheten kräver inget särskilt underhåll. Om den blir kraftigt smutsig kan den torkas av med en fuktad trasa med en mild tvållösning. Använd inte stora mängder vätska eftersom det kan komma in i lamphuvudet och påverka den elektriska säkerheten.

Använd inte alkohol, lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel eftersom dessa kan skada ytskiktet på lampan.



Tel: 010-455 04 00, E-post: info@insyn.se
www.insyn.se

