



1. Färgvalsknappar (Blå)

Tryck Pil upp eller Ner för att välja färgbild eller önskad högkontrast.

2. Av/På (Grön/Gul)

Tryck för starta och stänga RUBY.

3. + Öka förstoring (Gul)


Tryck för att steglöst öka förstoring.

4. - Minska förstoring(Gul)

Tryck för att steglöst minska förstoring.

5. Frysknapp (Röd)

Tryck för att fånga bilden, tryck ingen för att släppa bild.

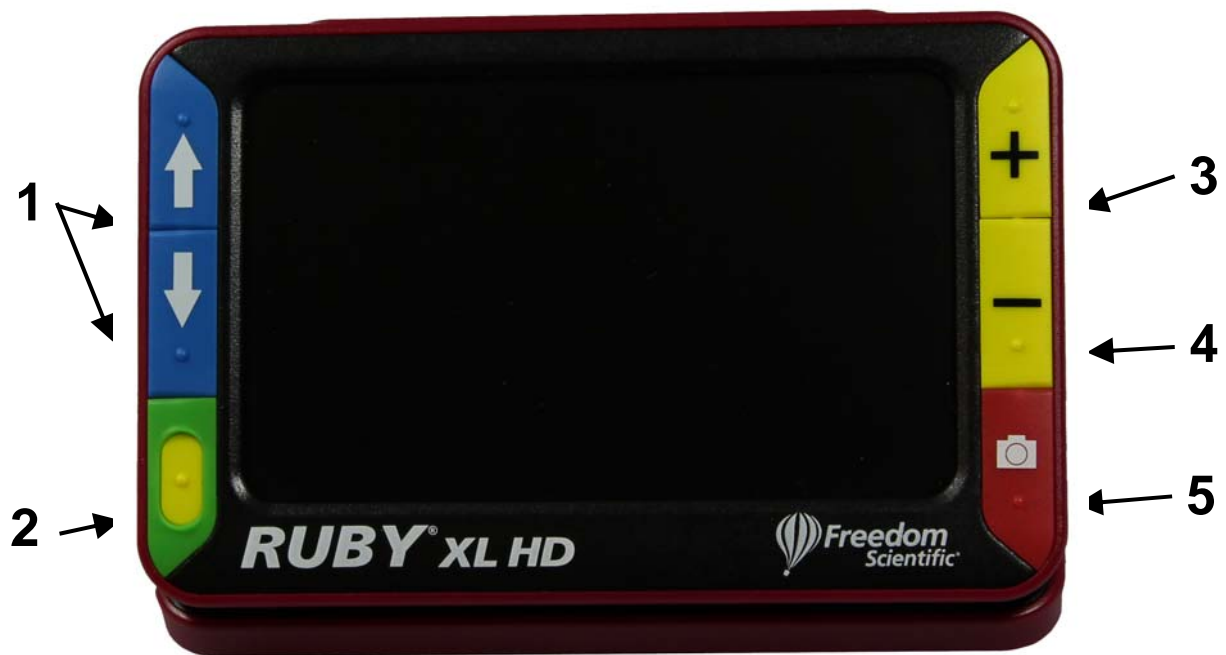

2+5 (Grön/Gul)+(Röd)

Tryck för att släcka belysning, tryck igen för att tända.

5 (Röd)

Tryck ner i cirka 3 sekunder för att spara bild.

5 (Röd)

Tryck ner i cirka 6 sekunder för att visa sparade bilder. Bläddra bland bilder med Blå pilknappar. Tryck ner Röd knapp i cirka 3 sekunder för att lämna bildvisning.

2+3+4 (Grön/Gul)+
(Gul+) +(Gul-)

Tryck ner dessa tre knappar för att visa Referenslinjer, upprepa för att visa kulisser. Tryck 2+3 eller 2+4 för att flytta linjer alt. Kulisser upp och ner. Tryck ner 2+3+5 för att ta bort kulisser och referenslinjer..