

Rengöra Focus- punktdisplayen

Det är inte nödvändigt att rengöra din Focus-punktdisplay efter ett fast schema. Hur ofta du måste rengöra displayen kommer snarare att bero på faktorer såsom hur rena händerna är, hur oljiga och/eller svettiga händerna är samt mängden fukt, damm och andra partiklar i din nuvarande miljö. Baserat på dessa hänsynstaganden rekommenderar Vispero följande:

- Undvik att använda din punktdisplay efter att du har ätit eller hanterat saker som har smutsat ner dina händer eller lämnat efter sig stoft eller andra rester på dina fingrar utan att först tvätta och ordentligt torka dina händer.
- Undvik att använda handkrämer såsom hudfuktare eller handrengörare innan du använder din punktdisplay. Dessa produkter kan förorsaka att smuts och andra föroreningar fastnar på dina fingrar och överförs till din punktdisplay. Balsam och krämer kan också överföras till punktskriftspunkterna samt ytan på din display och därigenom smutsa ner den direkt eller dra åt sig andra föroreningar.
- I fall det skulle inträffa att punktskriftspunkterna fastnar, var god tryck inte ner små vassa objekt (dvs. nålar, pennspetsar, etc.) i hålen för punktskriftspunkterna för att frigöra punktskriftspunkterna som fastnat. Detta kommer troligen att förorsaka skador på din punktdisplay och därför göra din produktgaranti hos Vispero ogiltig. Att följa rengöringsproceduren som sammanfattas nedan är ditt bästa alternativ för att lösa problem med punktskriftspunkter som fastnar.

Rengöra din Focus-punktdisplay

Saker som behövs för att rengöra din Focus-punktdisplay:

- Två rena, luddfria trasor; undvik att använda pappershanddukar eller papper av näsdukstyp som kan efterlämna papperspartiklar på eller i din punktdisplay.
- Isopropylalkohol med hög renhet. Undvik att använda alkoholer eller andra rengöringsmedel som innehåller luktämnen eller andra ingredienser som kan resultera i ytterligare nedsmutsning eller potentiellt skada din punktdisplay.

Observera: Om isopropylalkohol med hög renhet inte är tillgängligt så kan destillerat vatten med hög renhet användas istället. Användning av vatten istället kan kräva en större rengöringsinsats för att få bort föroreningar som fastnat.

- En ny, ren borste med fina strån som kommer att användas för att avlägsna föroreningar från punktrad & punkter (t.ex. en ny tandborste med mjuka strån eller en annan ny borste med mjuka strån som används endast för att rengöra punktdisplayen).

Rengör först din punktdisplay med borsten med fina strån genom att följa stegen nedan:

1. Om en USB-kabel är ansluten till displayens USB-port, koppla från den under hela tiden rengöringsproceduren pågår.
2. Om din Focus-punktdisplay är påslagen, tryck och håll inne Strömknappen tills displayen slås av.
3. Lyft upp och vänd din punktdisplay upp och ner och skaka displayen försiktigt. Detta kommer att hjälpa till att avlägsna lösa föroreningar på punktradens yta eller i punktskriftspunkternas hål.
4. Tryck samtidigt och håll inne **Strömknappen** och de två **Cursor Routing-tangenterna** längst till höger tills displayen slås på med alla punktskriftspunkter uppe.
5. Vänd försiktigt punktdisplayen upp och ner för att låta allt skräp som lossnat tack vare punktskriftspunkternas rörelser falla ut ur displayen.
6. Med punktdisplayen upp och ner, borsta lätt över hela punktraden flera gånger genom att använda borsten med fina strån för att säkerställa att alla punkter har borstats lätt. (Om det blir för svårt att borsta punktdisplayen upp och ner så kan du istället luta punktdisplayen på dess sida med punktskriftspunkterna något vända neråt och borsta den.

Observera: Det är viktigt att inte vända punktskriftspunkterna uppåt när du borstar eftersom detta ökar risken för att borsten trycker in föroreningar i hålen för punktskriftspunkterna, vilket kan få punktskriftspunkterna att fastna.

7. Behåll displayen upp och ner eller på dess sida lutad neråt, tryck **Höger NAV-lägesknapp** för att få alla punktskriftspunkterna att börja växla mellan nere och sedan uppe.
8. Medan punktskriftspunkterna rör sig upp och ner, använd borsten med fina strån för att borsta lätt över hela punktraden flera gånger för att säkerställa att alla punktskriftspunkterna har borstats lätt.
9. Tryck **Höger NAV-lägesknapp** igen för att stoppa växlandet av punktskriftspunkterna.
10. Placera punktdisplayen med ovansidan uppåt på ett bord eller annan plan, stabil yta.
11. Tryck och håll inne **Strömknappen** tills displayen slås av.

Rengör nu din display med de två luddfria trasorna genom att göra följande:

1. Fukta en luddfri, mjuk trasa lätt med isopropylalkoholen med hög renhet eller destillerat vatten med hög renhet. VIKTIGT! Dränk inte in trasan. Vrid ur trasan för att säkerställa att den inte är genomdränkt med vätska. Detta kommer att hjälpa till att minska risken för att vätska ska komma in i punktdisplayen, vilket kan skada interna komponenter.
2. Lägg den lätt fuktade trasan åt sidan på ett lättåtkomligt ställe.

3. Bekräfta att punktdisplayen är avstängd och verifiera att enheten är fränkopplad från laddaren eller datorns USB-port.

WARNING: Alla vätskor som kommer in i punktdisplayen kan potentiellt skada produkten. Så det är viktigt att ha displayen avstängd under rengöringsproceduren vid rengöring med den alkohol- eller vattenfuktade trasan.

4. Vänd displayen upp och ner eller på dess sida lutad med punktskriftspunkterna vända neråt (som i steg 5 & 6 i föregående procedur).
5. Behåll displayen upp och ner eller på dess sida lutad neråt, torka försiktigt av de uppstickande punktskriftspunkterna med den alkohol- eller vattenfuktade trasan. Använd så mycket av trasans ytarea som nödvändigt för att vara säker på att alla punkter har torkats av med den rena trasan.
6. Behåll displayen upp och ner eller på dess sida med punktskriftspunkterna vända neråt, ta den rena, torra trasan och torka av punktskriftsraden ordentligt; detta tar bort alla kvarvarande föroreningar och rengöringsvätskor som lämnats kvar i steg 5.
7. Inspektera punktradens yta efter eventuell kvarvarande fukt. Använd den rena, torra trasan för att avlägsna efter behov.
8. Efter att du har bekräftat att all kvarvarande fukt har avlägsnats, placera punktdisplayen med ovansidan uppåt.
9. Tryck samtidigt och håll inne **Strömknappen** och de två **Cursor Routing-tangenterna** längst till höger tills displayen slås på med alla punktskriftspunkterna uppe.
10. Tryck på **Höger NAV-lägesknapp** för att få alla punktskriftspunkterna att börja växla mellan nere och sedan uppe.
11. Efter några omgångar upp & ner för punktskriftspunkterna, kontrollera i fall punktskriftspunkterna och punktradens yta känns rena; punkterna och displayens yta ska få en "gnisslande" känsla när de är rena och fria från handoljor och andra föroreningar.
12. Eventuella punktskriftspunkter som fastnat kan kräva speciell omsorg för att få dem att röra sig fritt upp och ner. Du kan behöva upprepa hela rengöringsproceduren flera gånger för att bli säker på att punktskriftspunkterna och displayens yta är rena och att eventuella punktskriftspunkter som fastnat kan röra sig fritt.

Viktigt: När du upprepar rengöringsproceduren så rekommenderar vi att du rengör borsten med fina strån innan du borstar punktdisplayen. Var dessutom vänlig använd rena trasor när du upprepar rengöringsproceduren.

13. Du kanske också vill rengöra punktskriftstangenterna, andra kontroller och andra ytor på punktdisplayen för att bli säker på att resten av displayen också är fri från handoljor och andra föroreningar.
14. När du är nöjd med att displayen är ordentligt rengjord, tryck och håll nere **Strömknappen** tills displayen stängs av.