

Tryck snabbt på någon av dessa knappar för..

Utföra OCR tolkning och uppläsning.


1. Slå på Huvudströmbrytaren som sitter på fotens baksida.




2. Tryck i nederkant på kameraarmen, så fälls kameran ut och enheten startar.

3. Fäll ner kameran, ett klick hörs när den låser, Enheten stängs av.

Tryck igen för att återgå till förhandsgranskning

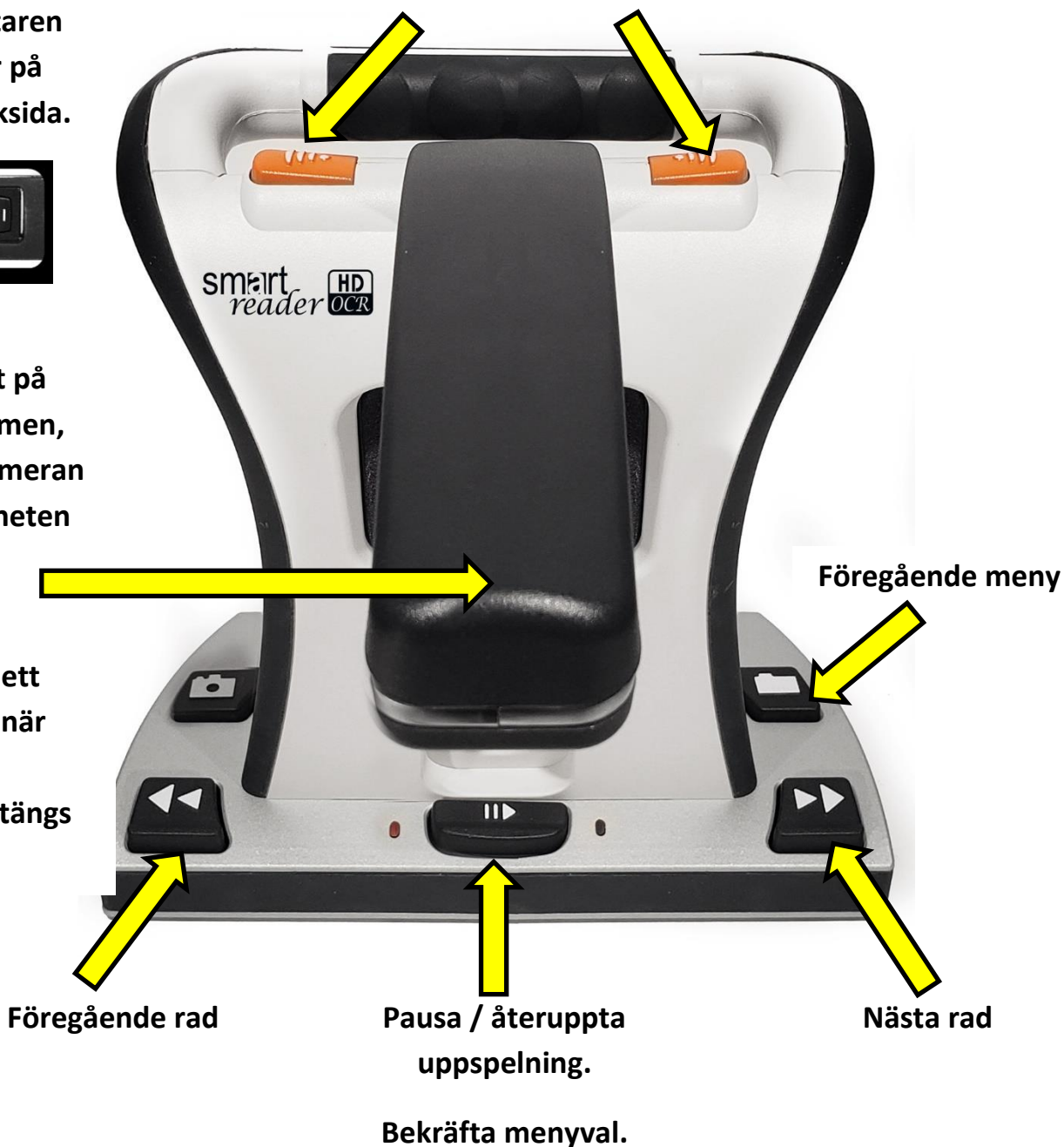

Tryck & håll i 5 sekunder på någon av dessa knappar för..

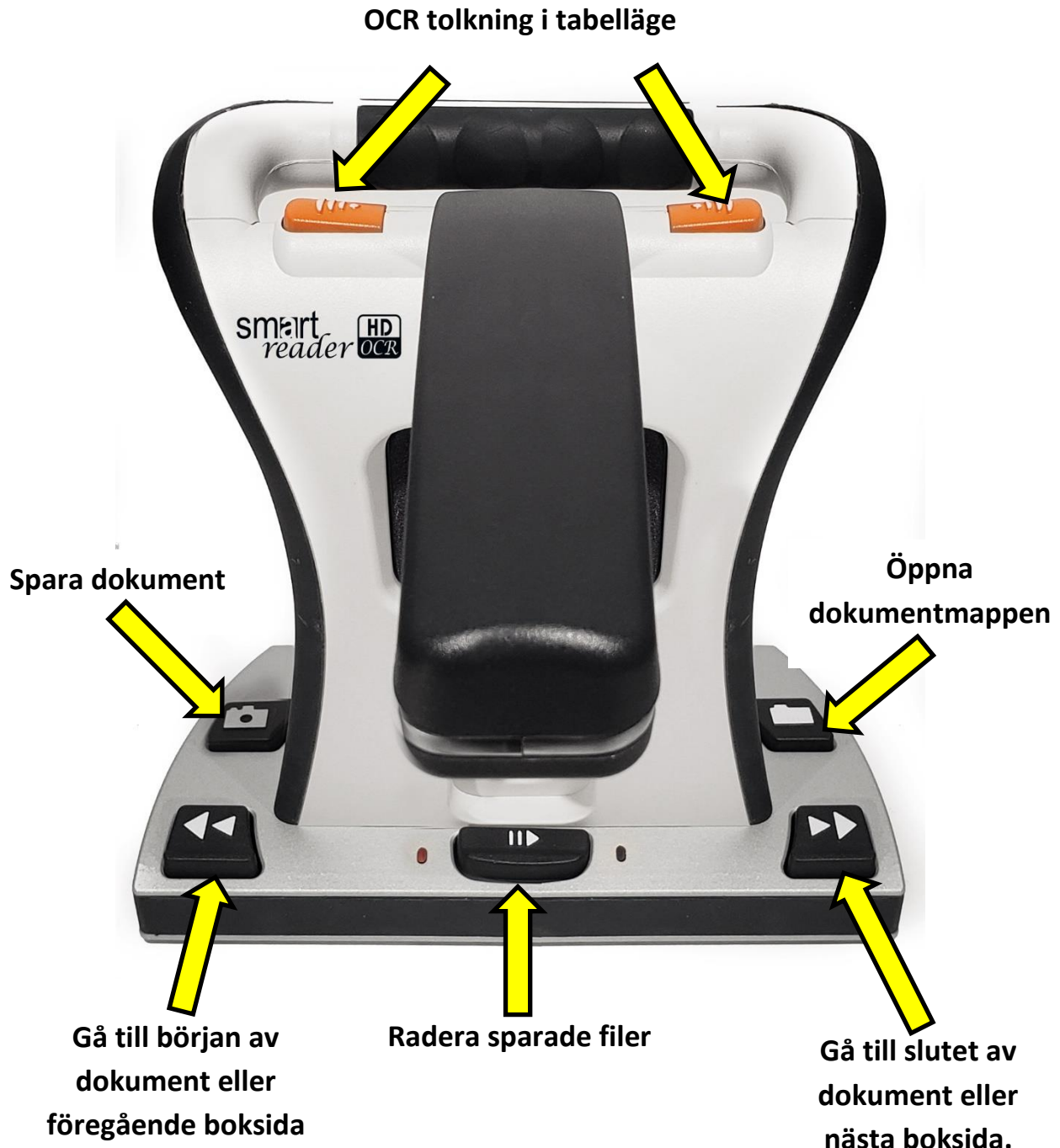

## Tumhjulsfunktioner



**Rotera för att ändra  
Hastighet på  
uppläsning.**

**Rotera för att panorera  
i bild Vertikalt.**



**Rotera för att ändra  
Volym på uppläsning.**

**Rotera för att panorera  
i bild Horisontellt.**

## Tangent kombinationer

		Tryck först	+	Tryck sedan
Föregående ord	→			
Ljus eller Förstoring	→			
Meny + Fabriksåterställning (Lång tryckning)	→			
Nästa ord	→			
Färgval	→			
Belysning På/Av	→			