



**PÅ /AV - knapp** håll in till ton hörs.



**Spela knapp** – Ett tryck startar inskanning och uppläsning, tryck igen pausar uppläsning.



**Stopp knapp** – Avbryter inskanning eller uppläsning.



**Volymratt** – Reglerar volymen på läsrösten.



**Hastighetsratt** – Reglerar hastighet på uppläsning.



**Pil Höger** – Hoppas ett ord framåt i skannade texten.



**Pil Vänster** – Hoppas ett ord bakåt i skannad text.



**Pil Ner** – Hoppas till nästa mening i skannad text.



**Pil Upp** – Hoppas till förgående mening i skannad text.



Kort tryck **PÅ /AV – Knapp** berättar batteristatus



**Spela Knapp** samtidigt med **Pil Höger** – Berättar datum och tid.