

# Bruksanvisning Daisybox



Ver 1.1



Sensotec BV  
Kalfjeslaan 38  
2623AJ Delft (The Netherlands)  
Tel: +31 15 262 59 55  
Fax: +31 15 257 15 95  
E-mail: [info@daisybox.nl](mailto:info@daisybox.nl)  
web : [www.daisybox.nl](http://www.daisybox.nl)

## **Daisybox**

V2.21 published 4 July 2023

© Copyright 2023

Ingen del av denna publikation får reproduceras och/eller offentliggöras genom tryckning, fotokopiering, mikrofilm eller på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Sensotec ([www.sensotec.com](http://www.sensotec.com)).

Sensotec förbehåller sig rätten att när som helst ändra publikationen utan föregående meddelande. Den senaste versionen av detta dokument finns på [www.daisybox.nl](http://www.daisybox.nl)

Röst aktiverad av Acapela

## Innehåll

Viktiga instruktioner .....	5
1. INTRODUKTION .....	6
Säkerhet .....	7
2 VAD BEHÖVS .....	9
3 HUR MAN ANSLUTER HEADSETET .....	10
4 EXTERIÖREN .....	11
Fjärrkontrollen .....	15
5 ANVÄNDA DAISYBOXEN .....	16
5.1 Slå på enheten .....	16
5.2 Batterianvändning .....	17
5.3 Pausmeny .....	17
5.4 Högre eller lägre .....	18
5.5 Daisybox-läge .....	18
5.6 Hur man väljer en bok .....	18
5.7 Justera hastighet eller ton .....	19
5.8 Ändra rösten .....	19
5.9 Konfigurera viloläget .....	20
5.10 Mediameny (USB, SD, CD...) .....	20
5.11 Ladda ner till tillgängligt minne .....	21
5.12 Kopiera en CD till tillgängligt minne .....	21
5.13 Ta bort från tillgängligt minne .....	22
5.14 Navigera i (DAISY) böcker .....	22
5.15 Extern CD-spelare .....	23
6 INSTALLATION .....	24
6.1 Vad finns i kartongen .....	25
6.2 Internetanslutningen .....	26
6.3 Anslut Daisybox .....	26
6.4 Inställning av trådlös anslutning .....	29

6.5 Ditt nätverk stöder inte DHCP .....	31
7 VANLIGA FRÅGOR.....	32
8 PAUSEMENY .....	34
9 RESET MENY .....	36
10 SPECIFIKATIONER .....	38

## Viktiga instruktioner

Vänligen observera följande riktlinjer:

- Undvik kontakt med vatten. Detta kan orsaka kortslutning!
- Försök inte att öppna Daisybox Om enheten inte fungerar korrekt, kontakta din leverantör.
- Täck eller lägg inte något ovanpå Daisybox. Detta kommer att göra högtalaren ohörbar.
- Om du flyttar Daisybox från en kall till en varm, vänta två timmar innan du använder den för att ge eventuell fukt som kan ha samlats på enheten tid att torka.

Daisybox uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav.

Detaljerad information om detta finns på vår hemsida:

[www.daisybox.nl](http://www.daisybox.nl)

## **1. INTRODUKTION**

Daisybox är en online DAISY-spelare utvecklad speciellt för personer med synnedsättning. Det gör att du kan lyssna för att lyssna på talböcker/tidningar/tidningar. Enheten har bara ett fåtal knappar och alla instruktioner är upplästa. Det är därför möjligt att använda enheten helt genom beröring och hörsel. Detta gör den till en innovativ och bekväm enhet för personer med synskada eller för äldre personer utan datorvana.

En internetanslutning, inte en dator, krävs för att använda Daisybox! Daisybox gör att du kan lyssna på talböcker, tidningar och tidskrifter. Daisybox är mycket lätt att använda.

Biblioteken behöver inte längre skicka ut Daisy-CD:s per post, utan kan istället erbjuda, eller streama, sin talade litteratur via internet. Daisyboxen kommer att presentera alla dina böcker på din privata bokhylla som underhålls av biblioteket. Alla gamla DAISY-CD-skivor du fortfarande har kan spelas på Daisybox via en extern CD/DVD-spelare (se avsnitt 5.15).

## Säkerhet

**Avsedd användning:** Tillhandahåller hörbart innehåll.

**Avsedd medicinsk indikation:** För att hjälpa blinda och synskadade patienter.

**Avsedd användare:** Blind och synskadad patient, från 12 års ålder. Eventuell monteringshjälp av släkt, vänner mm.

**Avsedd användningsmiljö:** Hemmiljö, vardagsmiljöer.







**Avsedd patient:** Samma som avsedd användare. Förutom släkt, vänner etc.

**Avsedda användningsförhållanden:** Avsedd att användas under normala inomhusförhållanden. Avsedd normal användning 0-8 timmar dagligen.

**Förvaringsvillkor:** Se kapitlet Specifikationer.

## Symboltabell:

	Tillverkare.
	Släng inte denna produkt i osorterat kommunalt avfall.
	Katalognummer.
	Serienummer.
	Conformité Européenne (Europeisk överensstämmelse). Denna symbol betyder att enheten helt överensstämmer med tillämpliga EU-lagar.

	Federal Communications Commission. Den här symbolen betyder att enheten helt överensstämmer med gällande lagar i USA.
	Uppfyller bestämmelser som begränsar eller förbjuder specifika ämnen.
	Medicinsk utrustning.
	Läs instruktionerna i denna manual.
	Potentiell icke-harmoniserad frekvens.
	Säker lagringstemperatur.

**Avfallshantering:** Lämna enheten, det interna batteripaketet, tillbehör och AAA-celler separat på din lokala avfalls- och återvinningsstation.

**Rapportera säkerhetsproblem och skador:** Vänligen rapportera alla säkerhetsproblem till oss och din lokala myndighet. Kontakta oss före användning när förpackningen, enheten eller tillbehören visar några skador, eller oavsiktligt öppnas före användning och om förpackningen utsätts för miljöförhållanden utanför specifikationerna (se kapitlet Specifikationer).

## **2 VAD BEHÖVS**

Daisyboxen är redo att användas direkt vid leverans. Vid behov konfigurerar enheten sig själv. Det enda du behöver göra är att packa upp enheten och ansluta den. Inställningarna har hållits till ett minimum för att göra enheten enkel att använda för alla.

### **Internet**

Daisybox använder sig av en internetanslutning. Denna kan anslutas antingen med en nätverkskabel eller trådlöst via den inbyggda WiFi-mottagaren. Din leverantör kan ge dig råd.

### **Biblioteksprenumeration**

Du behöver en prenumeration på biblioteket som distribuerar de talade böckerna och de kommer att fråga efter serienumret på din Daisybox så att de vet att presentera din privata bokhylla för just den Daisybox.

### **Daisybox-prenumeration**


Vissa områden kan behöva en extra 'Daisybox'-prenumeration om de lokala dotterbolagen eller ersättning från biblioteket inte täcker kostnaderna för att underhålla de system som behövs för att driva din Daisybox.

### **Ditt Daisybox serienummer**

Serienumret på din Daisybox är ett 5-siffrigt nummer på undersidan. Detta nummer läses också upp under "Enhetsstatus" i "Pausmenyn" (se även kapitel 8).

### 3 HUR MAN ANSLUTER HEADSETET

Du kan ansluta ett headset eller dövslinga till vänster sida av Daisybox.

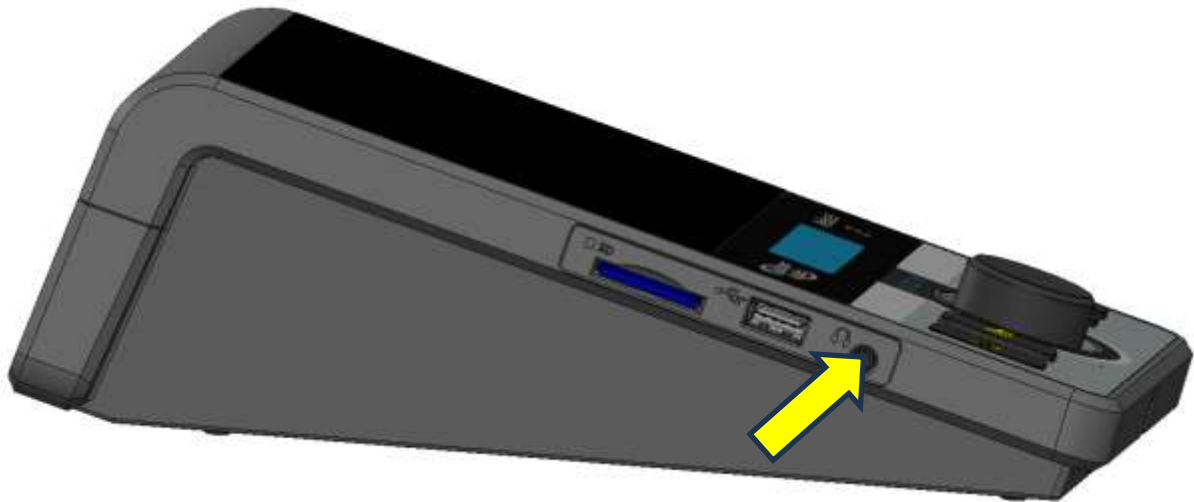

**Observera:** Om du ansluter ett headset eller dövslinga till telefonutgången på din Daisybox, stängs högtalaren automatiskt av. Du kan använda volymkontrollknappen på din Daisybox som vanligt för att reglera volymen på ditt headset.

**Observera:** Om du använder ett trådlöst headset (inte bluetooth!), se till att volymknappen är tillräckligt högt uppskruvad. Detta är särskilt viktigt om det är långa tystnader (till exempel under talad TV-textning som används i vissa länder) eftersom headsetet kan stängas av automatiskt och bara slås på igen när ljudsignalen återkommer och om volymen är tillräckligt hög.

## 4 EXTERIÖREN

### Frontpanel

Det finns fem knappar och en ratt på framsidan av din Daisybox. Från vänster till höger hittar du först [På/Av]-knappen, sedan [Tillbaka]-tangenter, i mitten volymkontrollen (tryck för paus), [Upp] och [Ner]-knapparna och längst höger är [OK]-knappen.



Använd [OK]-knappen för att välja en boktitel eller kanske objekt från en inställningsmeny. [OK]-knappen fungerar också som en pausknapp när en bok spelas. Knappen [Tillbaka] tar dig tillbaka till bokhyllan eller går tillbaka ett steg i föregående.

Du kan använda knapparna [Upp] och [Ner] för att hoppa genom kapitlen/artiklarna eller för att gå igenom alla menyer du kan stöta på.

Volymkontrollen används för att reglera volymen. Du kommer att pausa i boken när du trycker kort på denna ratt och du kan hoppa 10 sekunder framåt eller bakåt när du nu vrider på ratten. Om du sedan trycker på en av upp- och nedpilarna får du ett antal extra alternativ i denna så kallade 'Pausmeny' (se kapitel 8). Alla dessa funktioner kan också nås med den medföljande fjärrkontrollen.

Precis ovanför volymkontrollen kan du hitta en liten display. Du behöver faktiskt INTE denna display eftersom Daisybox berättar allt för dig. Om du fortfarande kan se något kan du titta på det medan enheten talar. Menyerna och andra alternativ visas också på denna skärm medan de läses upp.



Tre lampor är placerade mellan displayen och volymkontrollen:

- **Observera!** att ange t.ex. nya meddelanden.
- **Batteristatus** blinkar grönt när Daisybox är igång och batteriet laddas, lyser konstant när det är fullt, är släckt när det körs på batterier eller blinkar rött när det nästan är tomt.
- **Anslutningsstatus** blinkar grönt under anslutningsinstallationen, lyser grönt (för nätverkskabel med WiFi) eller blått (för 3G/4G) när anslutningen är OK och röd när den inte är OK.


En ljusring kommer att vara den första som tänds när Daisybox är påslagen och kan sedan indikera olika händelser eller stämningar beroende på mjukvaruversion.

Den interna högkvalitativa högtalaren kommer att stängas av när ett headset ansluts. Daisyboxen kan även anslutas till din stereo. Mottagaren för fjärrkontrollen är placerad i ramen på framsidan.

### Bakre panel

Från vänster till höger har baksidan följande anslutningar (när baksidan är vänd mot dig):


- Två runda RCA-kontakter (den ena ovanför den andra) för stereolinjeutgång.
- En fyrkantig kontakt för en nätverkskabel.
- En liten rund kontakt för nätadaptern i vägguttaget.
- Ett bärhandtag som fälls upp.

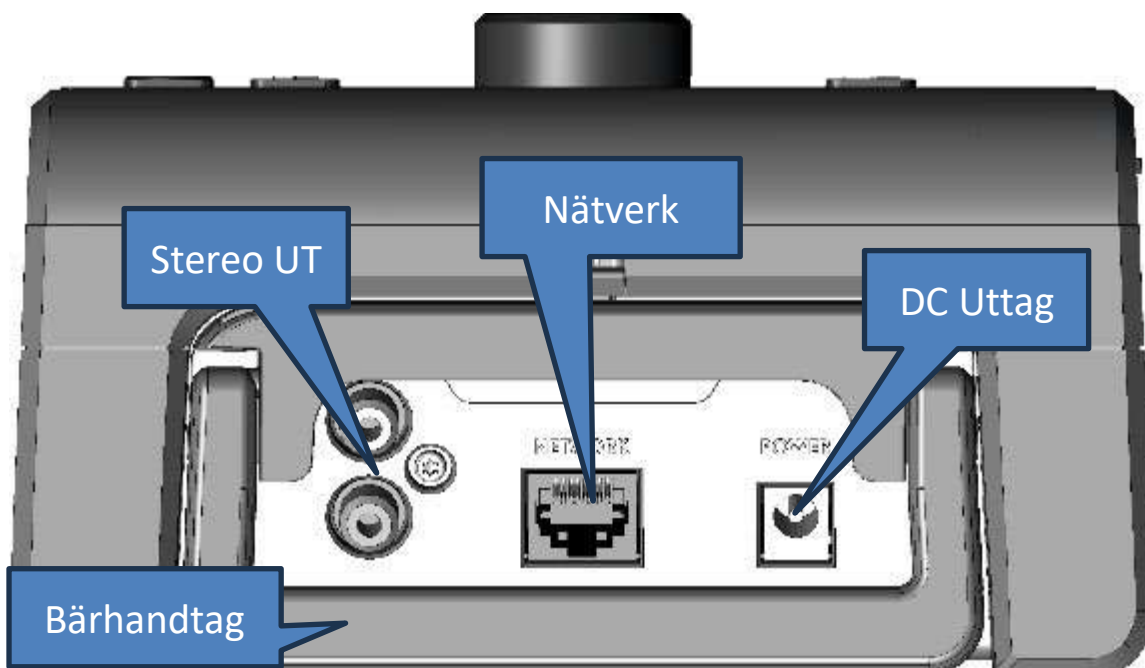

## Vänster sida

Den vänstra sidan av Daisybox har följande anslutningar från bak till fram:


- Fack för SD-kort.
- USB-kontakt för t.ex. ett USB-minne.
- Hörlurskontakt.

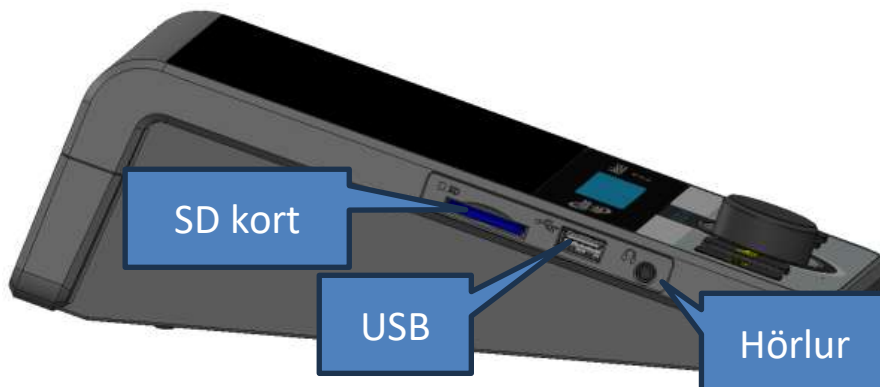

## Undersida

Under batterilocket hittar du:


- Batteripaket.
- Återställningsknapp (se även kapitel 9).
- Batteripaketkontakt.
- Plats för internminne (micro-SD-kort).
- USB för t.ex. en 3G/4G "mobilt internet"-dongel.

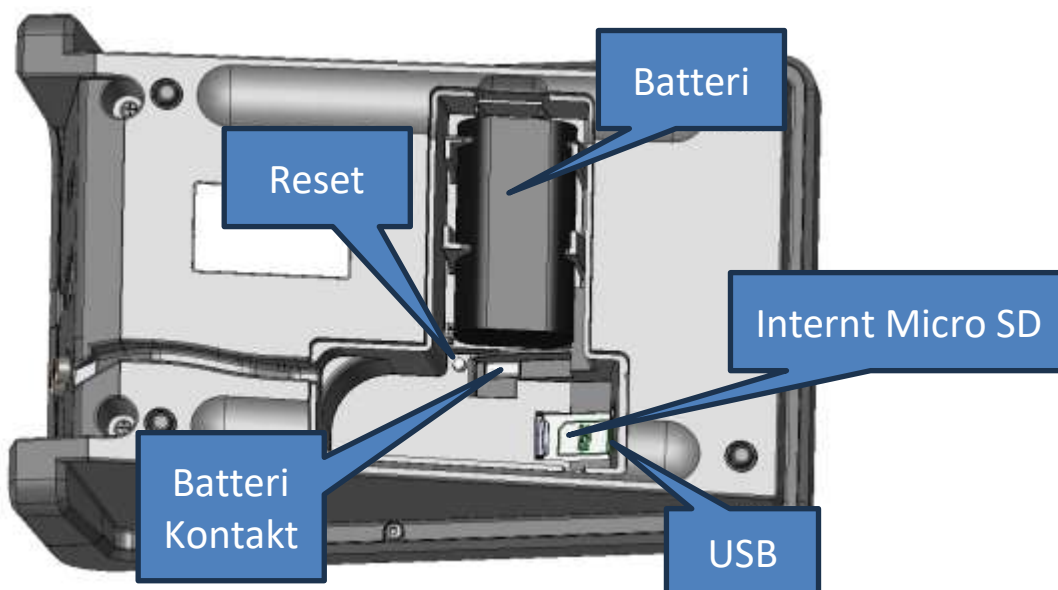

## Fjärrkontrollen

Det finns 17 knappar på fjärrkontrollen.

- Längst upp till vänster finns mute- eller pausknappen.
- Längst upp till höger finns På/Av-knappen.
- Under dessa finns en rad med 3 dubbla knappar, varav den vänstra är för att reglera volymen, den mellersta tonen och den högra är för att reglera hastigheten.
- Under dessa finns en rad med 3 knappar; den vänstra är en informationsknapp; den mittersta är för att aktivera viloläge och den högra dirigerar Daisybox till din senast spelade bok.
- Under dessa finns ett kryss med 5 knappar. Mittknappen är [OK]-knappen. Den övre och nedre delen är upp- och nedknapparna och vänster och höger är för att gå snabbt framåt och bakåt.
- Slutligen, i det nedre vänstra hörnet finns Bakåt-knappen.

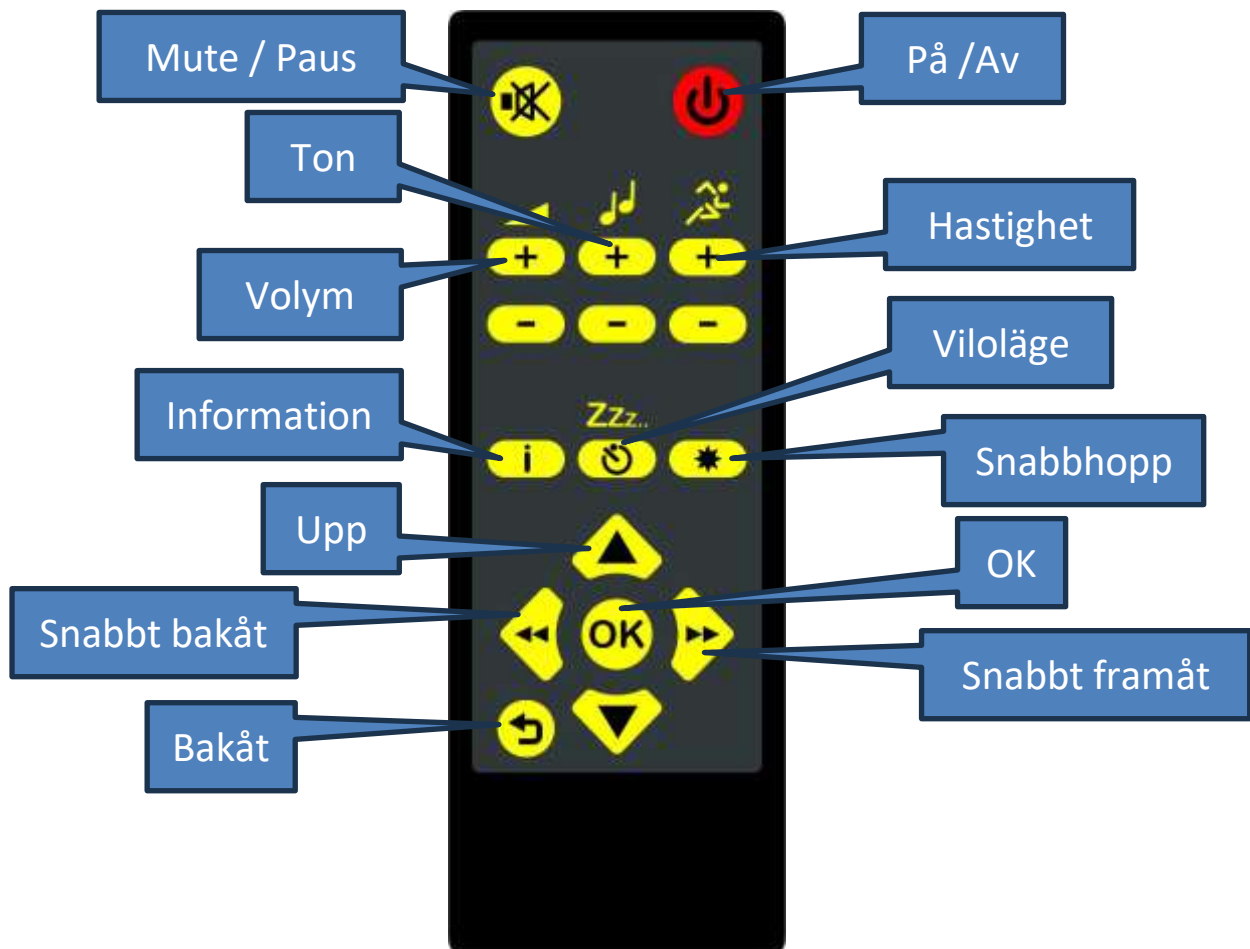

## 5 ANVÄNDA DAISYBOXEN

**Observera:** Läs kapitel 6 'Installation' innan du använder Daisybox för första gången.

### 5.1 Slå på enheten

Efter att Daisybox har anslutits till ström och till Internet, slå på enheten genom att trycka på [På]-knappen på Daisybox (denna knapp är längst till vänster). Du kan också använda fjärrkontrollen; [På]-knappen är längst upp till höger. Du kommer först att höra "på"-tonen och efter cirka 10 sekunder kommer du att höra en "start"-melodi\*). Daisybox kommer automatiskt att söka en anslutning till Internet; anslutningsstatuslampan blinkar först och blir sedan grön eller blå.

Du kan stänga av enheten genom att trycka på [På]-knappen igen i cirka 2 sekunder. Lamporna släcks sedan och du kommer att höra en kort "av"-ton.

**Bra att veta:** Du kan låsa tangentbordet för att förhindra att Daisybox slås på under transport. Tryck och håll ned tangenterna [upp] och [ner] samtidigt och tryck på [På] en gång för att låsa tangentbordet. Daisybox kommer att visa "Keyboard locked" i displayen.

Tangentbordet låses upp automatiskt när du ansluter enheten till ett vägguttag och sätter på den. Du kan låsa upp den själv med samma procedur som för låsning, men tryck sedan på [På]-tangents 3 gånger.

**Bra att veta:** Daisyboxen kan alltid stängas av genom att trycka på [ON] längre än 5 sekunder, även när Daisybox inte verkar svara på någonting.

## 5.2 Batterianvändning

Daisybox kommer att köras på det interna batteriet eller på ström från ett vägguttag (då kommer batteripaketet också att laddas).

Lampan "batteristatus" precis ovanför volymkontrollen kommer att visas (när Daisybox är påslagen):

- blinkar grönt: ansluten till ett vägguttag och batteriet laddas
- grön på: ansluten till ett vägguttag och batteriet är fullt
- av: inte ansluten till ett vägguttag, men gott om ström i batterierna (eller enheten är avstängd)
- blinkar rött: batteriet nästan tomt

Batteristatusen kan också ses när Daisybox är avstängd, genom att hålla volymkontrollen intryckt i ca. 0,5 sekunder. Den aktuella tiden och batteristatus läses då upp för dig.

Daisyboxen kan köra ca. 10 timmar på ett fullt paket och att ladda ett tomt paket tar ca. 5 timmar. En helt ny Daisybox behöver först en full laddningscykel för att kunna ge korrekt batteristatus.

## 5.3 Pausmeny

Du kan pausa Daisybox genom att kort trycka på volymkontrollen på Daisybox eller [Mute]-knappen på fjärrkontrollen. Du kan återuppta uppspelningen genom att trycka på den knappen igen.

Genom att trycka på knapparna [Upp] och [Ner] kan du bläddra igenom denna 'Pausmeny' för att hitta all slags information och alternativ som är relevanta för programmen såväl som allmänna inställningar som rör enhetens funktion. Se även kapitel 8. Till exempel:

- Öka eller minska hastigheten för att spela böcker
- Ändra rösten för Daisybox
- Ställ in insomningstimern
- Få extra information om boken du lyssnar på, som total längd eller aktuell position.

Du kan lämna 'Pausmenyn' genom att trycka på volym/pausknappen igen eller genom att trycka på [Back]-knappen. Du kan också få

'Information' som finns i den här menyn genom att trycka på knappen [Info] på din fjärrkontroll.

## **5.4 Högre eller lägre**

Använd volym/pausknappen på Daisybox för att justera ljudnivån. Detta är den stora runda knappen på framsidan av enheten (eller VOLUME +/- på din fjärrkontroll). Startvolymen kan ställas in i Pausmenyn under Enhetskonfiguration>Ljudinställningar (se även kapitel 8).

## **5.5 Daisybox-läge**

Ett bibliotek ger dig en bokhylla och du kan lägga till eller ta bort böcker via deras hemsida eller via telefonsamtal. "Basic" Daisybox-läget visar dig just denna bokhylla som är det enklaste sättet att använda sina böcker. Många bibliotek erbjuder också extra funktioner som att lägga till böcker direkt från katalogen eller presentera böcker, tidskrifter eller tidningar i separata listor. Ställ in Daisybox-läget på "Avancerat" för att aktivera dessa extra funktioner. Du kan ta bort böcker direkt från din bokhylla i båda lägena: tryck på "Paus" och välj "Ta bort den här boken".

## **5.6 Hur man väljer en bok**

När du har slagit på enheten kommer Daisybox att söka kontakt med ditt bibliotek och den kommer att läsa titlarna i din bokhylla eller spela upp boken du redan läste. Tryck på [Back]-knappen för att återgå till din bokhylla.

Du kommer att höra alla boktitlar i din bokhylla. Tryck på [OK] när du hör boken du vill läsa. [OK] är knappen längst till höger på Daisybox eller i mitten av pilknapparna på fjärrkontrollen. Listan med boktitlar kommer att upprepas när du inte gör något val.

## 5.7 Justera hastighet eller ton

Hastigheten eller tonen som används för att spela böcker kan ändras genom att trycka på volym/pausknappen; Daisyboxen slutar spela och säger "Paus". Med knapparna [Upp] och [Ner] kan du välja alternativet 'Hastighet' i 'Pausmenyn' (se även kapitel 8). Om du väljer 'Hastighet' kan du sedan använda samma knappar för att välja några steg upp eller ner (-50, -40... normal... +40, +50) varefter du väljer [OK] för att bekräfta ditt val. Fjärrkontrollen låter dig justera hastighet eller ton direkt genom att trycka på + eller -. Gå till Paus>Enhetskonfiguration>Ljudinställningar för att justera hastighet, ton eller tonhöjd när du vill att inställningarna ska gälla även efter en omstart av Daisybox.

## 5.8 Ändra rösten

Daisyboxen använder en syntetisk röst (så kallad text-till-tal) för att läsa menyer och läroböcker. Typen av röst (t.ex. manlig eller kvinnlig) och eventuellt även språket (t.ex. finska eller svenska) kan ändras om det här alternativet är tillgängligt i din Daisybox. Rösten kan ändras under uppspelning genom att trycka på volym/pausknappen; Daisybox slutar sedan spela. Med knapparna [Upp] och [Ner] kan du välja alternativet 'Enhetskonfiguration' (tryck på OK) i 'Pausmenyn' (se även kapitel 8) och 'Syntetisk röst' (+OK). Du kan sedan använda samma pilknappar för att välja från en lista med röster och bekräfta genom att trycka på OK, t.ex.:

- Graham (engelska)
- Rachel (engelska)
- Daan (nederländska)

Alla menyer kommer att ändras tillsammans med språket för den valda rösten.

## 5.9 Konfigurera viloläget

Om du vill att Daisybox ska sluta spela och stängas av automatiskt vid en viss tidpunkt kan du välja det i 'Paus-menyn'. När du till exempel lyssnar på en bok, tryck på volym-/pausknappen och välj sedan viloläge med knapparna [Upp] eller [Ned]. Du kan ställa in en tid mellan 10 och 120 minuter (eller AV). Använd vilolägesknappen [Zzz...] på fjärrkontrollen för att göra detsamma. När Daisybox startas om är denna sista inställning inaktiv och kan behöva återaktiveras vid behov. Daisybox kommer att sluta spela när det inställda antalet minuter har nåtts och du kommer att höra en tickande klockan. Insomningstimern återställs till samma antal minuter när du trycker på [OK]-knappen inom 30 sekunder. Daisyboxen stängs av när du inte vidtar någon åtgärd under dessa 30 sekunders tickande av klockan.

## 5.10 Mediameny (USB, SD, CD...)

Daisyboxens standardfunktion är att spela böcker. Men om andra medier är tillgängliga från vilka något kan spelas ut, kommer "Mediemenyn" att vara tillgänglig. Tryck på BACK-knappen från Internet Spoken Menu (eller medan webboxen "ansluter till internet") för att öppna "Media-menyn". Beroende på tillgängliga media kommer du att kunna välja mellan:

- Genvägar
- USB-minne
- CD-spelare
- Minneskort
- Internminne

Du kan sedan använda knapparna [Upp] och [Ner] för att navigera genom mapparna och filerna, medan Daisybox läser upp namnen. Välj en fil eller mapp genom att trycka på [OK]-knappen. Tryck på BACK-knappen igen för att återgå till Internet Spoken Menu.

**Bra att veta:** Finns en viss bok tillgänglig online och på ditt SD-kort eller USB-minne? ...i så fall kommer den fortfarande att återupptas

vid den punkt du lämnade, oavsett om du läste online eller från ditt lokala SD/USB-minne.

**Bra att veta:** Gå till 'Mediemenyn' genom att trycka på [Tillbaka-knappen] flera gånger. Starta om Daisybox om du inte hittar mediet som du har anslutit till i 'mediamenyn'.

### **5.11 Ladda ner till tillgängligt minne**

De flesta böcker kan laddas ner till externt minne, till exempel ett SD-kort som sedan kan spelas ut på en bärbar (daisy) spelare. tryck på volymkontroll kort för att gå till 'Paus-menyn' och använd sedan knappen [upp] eller [ner] + [OK] för att välja 'Ladda ner den här filen' (ljudfilen som just spelades upp), 'Ladda ner den här boken' eller 'Ladda ner alla filer' (när ljudfilen är en del av en större struktur som en podcast). Du kan få frågan till vilket medium den behöver laddas ner när mer än en är ansluten till/insatt i Daisybox.

På ett tomt kort kommer Daisybox att lagra de individuella ljudfilerna i en mapp som heter 'Nedladdningar' och filer som tillhör en större struktur i en mapp med titeln på den strukturen. Daisybox kommer att använda specifika mappar när de har skapats på minnesstickan/kortet av en av följande spelare: Plextor PTP, Victor Stream, Hims Sense. Andra spelare som Bones MileStone kan helt enkelt hantera standardmapparna som skapas av Daisybox.

### **5.12 Kopiera en CD till tillgängligt minne**

En ljud- av DAISY-CD kan kopieras till USB- eller SD-minne. Spåren på en ljud-CD kommer först att konverteras till komprimerat ljud (mp3 192kbps). För att kopiera en CD till USB/SD-minne går du först till Media-menyn och väljer alternativet 'CD-spelare'. Tryck på Paus så snart innehållet börjar spelas upp och välj sedan "Kopiera detta innehåll till andra media".

### 5.13 Ta bort från tillgängligt minne

Du kommer att få alternativen "Ta bort den här mappen" eller "Ta bort den här filen" medan du navigerar genom innehållet på USB- eller SD-minnet. När filer tillhör en större struktur (som en bok eller en podcast) får du inte möjlighet att ta bort enskilda filer. För att ta bort en bok (eller podcast etc.), trycker du på 'Paus' när du hör titeln på mappen som innehåller boken och väljer sedan 'ta bort den här mappen' och bekräftar den extra 'Är du säker?' fråga.

### 5.14 Navigera i (DAISY) böcker

Daisyboxen gör att du kan navigera i tidningar, tidskrifter, böcker etc. med en Daisy-struktur på ett mycket innovativt sätt. Du kan ha Daisybox starta ett nytt kapitel eller en artikel genom att trycka på [Upp]-knappen. Du kan gå tillbaka till ett kapitel eller en artikel genom att trycka på [Ned]-knappen. Genom att trycka på [OK]-knappen kan du gå ner en nivå (om detta finns). Om du till exempel hör "Kapitel 2" och du trycker på [OK] kan du sedan navigera genom artiklarna i kapitel 2. Med knappen [TILLBAKA] kan du återgå till nivån över den du var i och välja ett annat kapitel. Självklart, om du inte använder nycklarna kommer boken att läsas framifrån och bakifrån.

### Snabbspola framåt eller bakåt i texten

I pausläget kan du använda volym/pausknappen för att hoppa genom texten i ett kapitel. Om du vrider ratten åt vänster går du tillbaka genom texten. Vrider du ratten åt höger går du framåt i texten. Varje tandning kommer att glida dig 10 sekunder framåt eller bakåt i tiden (Daisyboxen kommer att tala om för dig vad den nya tidspositionen är). Om du trycker på volymratten igen börjar avläsningen där du ställer in den med volymratten. För att bekräfta detta kan du också trycka på [OK]-knappen. På fjärrkontrollen använder du knappen [<<Vänster] eller [>>Höger] för detta. **Observera:** Snabbspolning framåt och bakåt fungerar bara inom ett kapitel.

## **Bokmärken**

Daisybox kommer automatiskt ihåg var den var i en bok, tidning, tidning eller annat förinspelat program. Om du återvänder till ett visst program fortsätter Daisybox där den slutade. Det spelar ingen roll om du kommer dit via programguiden eller genom genvägslistan. Navigeringen fungerar då enligt beskrivningen ovan.

## **DAISY navigationsnivåer**

De flesta DAISY-böcker har bara en lista med kapitel och du kan helt enkelt använda knapparna [Upp] och [Ned] för att nå ett annat kapitel. Vissa böcker innehåller dock också t.ex. avsnitt där varje avsnitt innehåller kapitel. En sådan bok har då 2 (eller fler) nivåer som du kan navigera i... på nivå 1 kan du välja ett avsnitt och på nivå 2 a kapitel inom det avsnittet. Daisybox kommer som standard att presentera en så genomarbetad bok för dig som en "platt" lista med alla delar.

Du kan se de tillgängliga titlarna på varje nivå och hoppa till den sektionen med alternativet "Bläddra" i pausmenyn.


Om du vill höra nivåindikationerna medan du läser en utarbetad bok och använder [OK] och [Back] för att faktiskt växla mellan nivåer, då kan du ställa in 'Navigera med nivåer' i Paus-menyn (se även kapitel 8) .

## **5.15 Extern CD-spelare**

Om du vill spela en CD med en DAISY-bok eller annat ljud kan du ansluta en extern (bärbar) CD-spelare till USB-kontakten i Daisybox vänster sida eller till USB-kontakten bakom batterilocket (med en kabelutgång från baksidan). Vissa CD-spelare får ström från sin egen nätadapter, några från en enda USB-port i Daisyboxen och en del med en så kallad Y-kabel för att dra ström från två USB-portar. Det finns inget behov av att använda den andra kontakten på en sådan Y-kabel, eftersom Daisybox kan ge tillräckligt med ström på en USB-

kontakt. Daisybox kommer också ihåg återupptagningspunkten (bokmärket) när du använder en sådan extern CD-spelare.

## 6 INSTALLATION

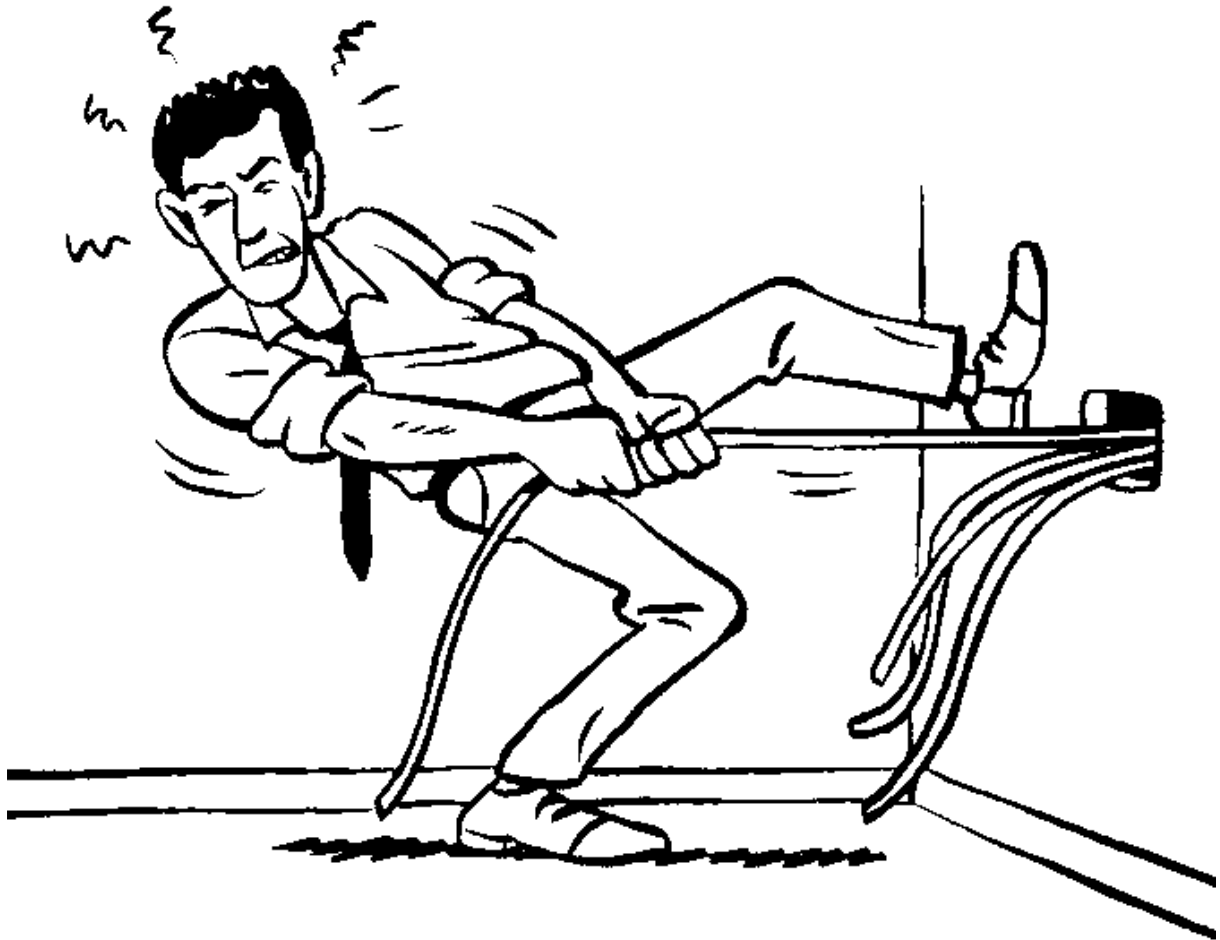

## 6.1 Vad finns i kartongen

Daisybox



Fjärrkontroll



Batterier  
AAA



Nätverkskabel



DC adapter



## **6.2 Internetanslutningen**

Innan du kan använda din Daisybox måste du redan ha en Internetanslutning. Om detta är din första anslutning får du ett modem eller router från din leverantör. Du eller din leverantör måste installera detta först. Vad detta betyder är att modem/routern kommer att anslutas med kabel till anslutningspunkten på din kabel-tv eller telefonlinjen i ditt hem.

## **6.3 Anslut Daisybox**

Det rekommenderas att först ansluta Daisybox till din router med en nätverkskabel även om du planerar att använda Daisybox trådlöst. Sätt i den runda nätadapterkontakten på baksidan av Daisybox-ingången och anslut sedan själva adaptern till eluttaget. En helt ny Daisybox behöver en full laddningscykel för att kunna ge korrekt batteristatus.


Om du vill använda fjärrkontrollen: Öppna locket på baksidan av fjärrkontrollen och sätt i batterierna. Se till att batterierna följer de angivna positiva och negativa polerna.

Se instruktionerna i avsnitt 6.4 för anslutning till ditt trådlösa nätverk.

## Andra kopplingar

Från vänster till höger har baksidan följande anslutningar (när baksidan är vänd mot dig):

- Två runda RCA-kontakter (den ena ovanför den andra) för stereolinjeutgång.
- En fyrkantig kontakt för en nätverkskabel.
- En liten rund kontakt för nätadaptern i vägguttaget.
- Ett nedfällbart bärhandtag.

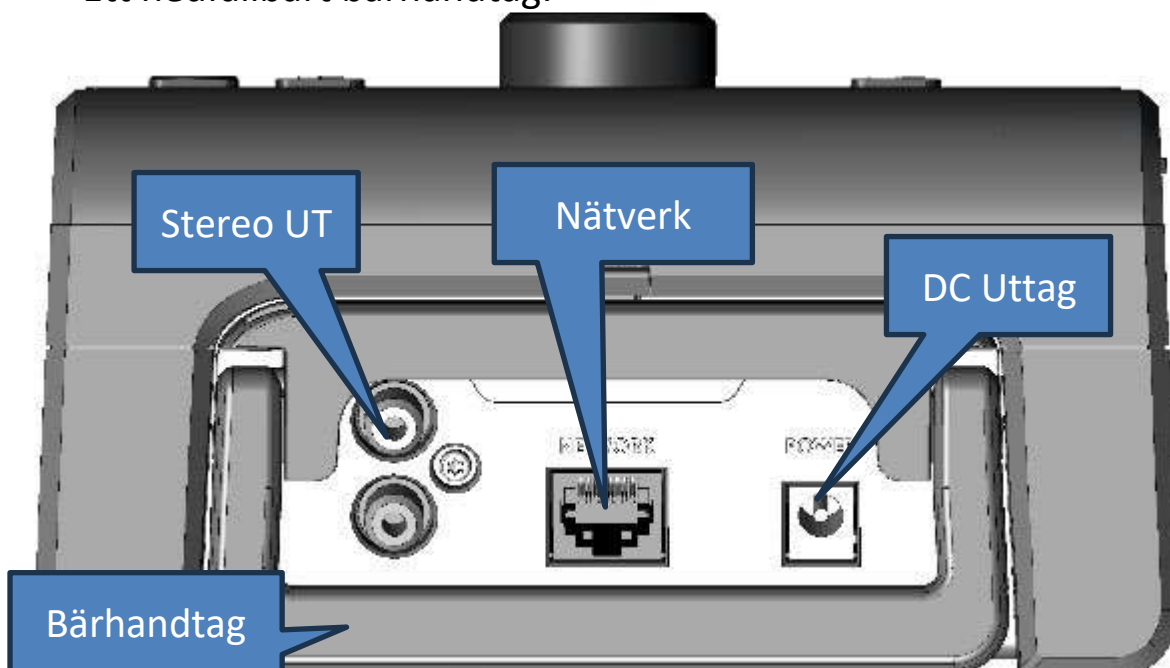


Linjeutgången har en konstant nivå och påverkas inte av volyminställningen (den reagerar dock på pausläget "mute").  
**Bra att veta:** Om du ansluter Daisybox-ljudutgången (2x RCA-kontakt) till din stereo, kan du antingen stänga av högtalaren tillfälligt genom att sänka volymen till 0 med volym/pausknappen, eller som standard i 'Pausmeny>

Enhetskonfiguration>Ljudinställningar>startvolym. En annan lösning för detta är att sätta en lös kontakt i headsetuttaget på din Daisybox. Den interna högtalaren stängs då av automatiskt.

## Vänster sida

Den vänstra sidan av Daisybox har följande anslutningar från baksidan till framsidan:


- Fack för SD-kort.
- USB-kontakt för t.ex. ett USB-minne.
- Hörlurskontakt.

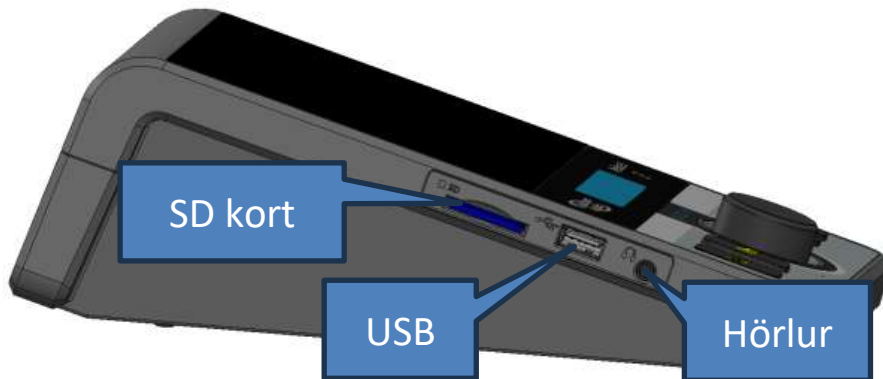

## Undersida

Under batterilocket hittar du:

- Batteripaket
- Återställningsknapp (se även kapitel 9)
- Batteripaketkontakt
- Plats för internminne (micro-SD-kort)
- USB för t.ex. en 3G/4G "mobilt internet"-dongel

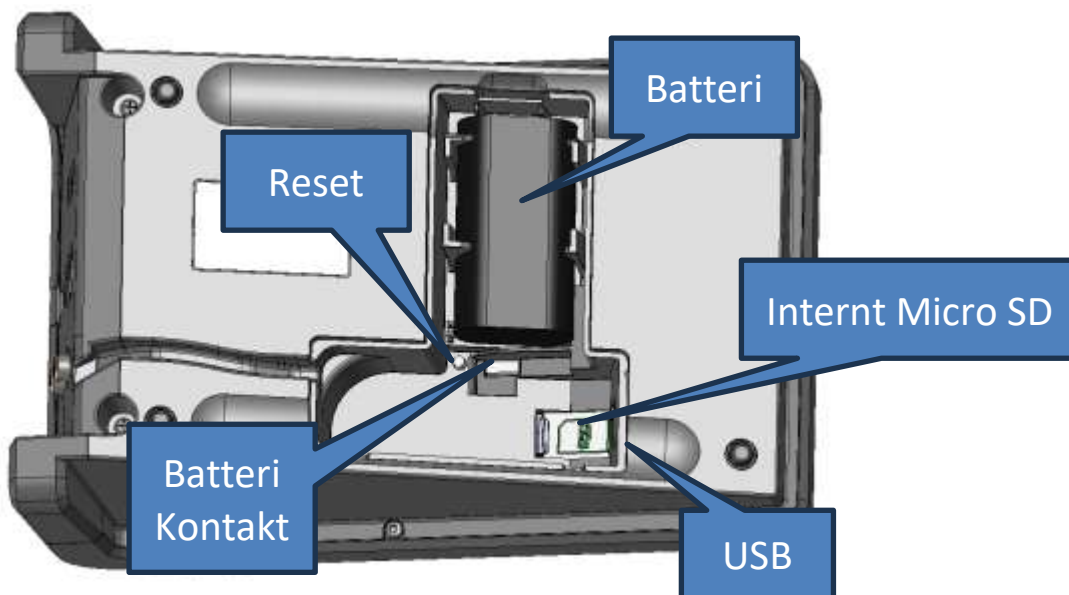

## 6.4 Inställning av trådlös anslutning

**Observera:** ha den så kallade SSID och WPA-nyckeln (se router) till hands. Utför följande steg för att ansluta din Daisybox till ett trådlöst nätverk:

- Slå på Daisybox igen genom att trycka på På/Av-knappen och vänta tills du får en talad rapport.
- Tryck på volym/pausknappen för att komma till den så kallade 'Pausmenyn'. Tryck på knappen [Upp] eller [Ned] för att komma till 'Enhetskonfiguration' och tryck sedan på knappen [OK].

**Bra att veta:** Detta skulle vara det ögonblick då du trycker på den så kallade WPS-tangenten på din router om du vill använda en sådan inloggningsfunktion (se manualen för din router)

- Använd knappen [Upp] eller [Ned] för att gå till 'Lägg till ett trådlöst nätverk' och tryck sedan på [OK].

**Bra att veta:** Daisybox kommer bara att be dig lägga till det enda nätverket när du verkligen ställde in din router på WPS enligt beskrivningen ovan.

### Välja ett trådlöst nätverk

Efter några sekunder får du en lista över de trådlösa nätverk som finns tillgängliga i din närhet. Detta nätverksnamn (SSID) och det nödvändiga lösenordet (WPA/WEP) kan hittas på din router eller i manualen som du fick från din nätverksleverantör.

- Använd knapparna [Upp] och [Ner] tills du hittar ditt nätverk och tryck på [OK]. Daisybox berättar om mottagningen är bra, normal eller svag.

### Ange ditt lösenord

Om ditt trådlösa nätverk använder en säker anslutning (som det vanligtvis gör), kommer Daisybox att fråga dig om lösenordet. En lista med bokstäver och siffror kommer att göras tillgänglig för dig; du kan använda dem för att ange lösenordet:

Val för WEP: A-f, 0-9 och klart!

Val för WPA: a-z,A-Z,0-9, några specialtecken och klart!

a b c ... z A B C ... 0 1 2 ... 9

! @ # \$ % ^ & \* ( ) [ ] { } + - = \_ / . , : ; ' " <

- Du kan antingen använda knapparna [UP] och [DOWN] eller volym/paus-ratten för att leta efter och välja rätt tecken (inmatningstecknet är det längst till höger på raden längst ner). Varje gång du har hittat rätt tecken, tryck på [OK]; lösenordet visas tecken för tecken till vänster på skärmen. Du kan radera ett sista tecken genom att trycka på knappen [Tillbaka].
- När du är klar med att mata in lösenordet, leta efter "ready" (sluttecken) och tryck på [OK]. Du kommer att höra lösenordet som du har satt in helt, varefter nätverket aktiveras.

Daisybox kommer att tala om för dig att konfigurationen har lagts till och att nätverket är redo att användas (tryck på [Tillbaka]-tangenter 3 gånger för att återgå till 'Paus-meny').

### Bra att veta:

- Du kan skriva in tecknen direkt med ett USB-tangentbord anslutet till Daisybox. Använd ENTER för att bekräfta "lösenordet".
- Om du inte lyckas få en anslutning till ett trådlöst nätverk, försök att få Daisybox att fungera genom att ansluta nätverkskabeln till din router.
- Inställningarna för den trådbundna eller trådlösa internetanslutningen kan raderas genom att trycka på knappen [Reset] i batterifacket. I följande 'Återställ-meny' (se kapitel 9) ska du välja 'Ta bort alla nätverksinställningar' och/eller 'Ta bort ett trådlöst nätverk'.
- Om en nätverkskabel är ansluten till Daisybox kommer den att ges prioritet framför ett trådlöst nätverk (som har prioritet över 3G/4G). Om kabeln kopplas bort kommer Daisybox automatiskt att övergå till trådlös (Wi-Fi) kommunikation. Prioritetsordningen är: nätverk via kabel => säkert trådlöst nätverk => osäkert trådlöst nätverk => 3G/4G-nätverk.

- Om inget nät kan hittas kommer texten [Den valda listan är tom...] att visas, kontakta i så fall din nätleverantör för råd.
- Om Daisybox inte kan hitta ditt nätverk, kontrollera först om din router skickar ut ett nätverksnamn (SSID) och om den har placerats tillräckligt nära. Räckvidden är vanligtvis mellan 3 och 15 meter beroende på situationen. Daisybox stöder 2,4GHz och 5GHz WLAN-nätverk med en WEP- och WPA/WPA2-nyckel.
- WPA2 är den bäst stödda metoden i Daisybox och det är också den säkraste. Så välj WPA2 om ditt modem eller router ger denna möjlighet.
- Om din router låter dig välja mellan WPA+WPA2 TKIP+AES, så fungerar enheten i "blandat läge". Detta innebär att både WPA1/TKIP och WPA2/AES stöds. Daisybox kommer automatiskt att välja den ena eller den andra.
- PSK står för "Pre Shared Key" (även ibland kallad "personlig"). Detta är standardmetoden för att infoga en säkerhetsnyckel. Till skillnad från 'Radius' eller 'Enterprise'-metoden kan denna metod teoretiskt sett endast användas av företag.

## 6.5 Ditt nätverk stöder inte DHCP

**Observera:** En fast IP-adress används sällan. I 99,9 % av alla fall används en automatiskt vald IP-adress (DHCP=på)!

Som standard antar Daisybox att ditt modem stöder den så kallade DHCP-proceduren genom vilken Daisybox automatiskt tilldelas en IP-adress. Om så inte är fallet måste en fast adress infogas. Ibland behöver till exempel en organisations IT-avdelning också en fast adress för Daisybox för att tilldela vissa rättigheter till nätverket.

- I 'Paus-menyn', gå till 'Enhetskonfiguration> Avancerad meny'.
- Beroende på om Daisybox är ansluten till det kabel- eller trådlösa nätverket, välj 'Kabelnätverk' eller 'Trådlöst nätverk'.
- Med hjälp av följande alternativ 'DHCP' kan du aktivera drift med en fast IP-adress (DHCP=av), eller faktiskt drift med automatisk IP-adresstilldelning av nätverket (DHCP=på).

Om det ovan citerade alternativet "DHCP" är avstängt, måste du konfigurera följande data:

- IP-adress (t.ex. 192.168. 117. 100)
- IP-nätmask (t.ex. 255.255.255.0)
- Nätverksgateway (t.ex. 192.168.117.1)
- DNS-server 1 (t.ex. 192.168.117.100)
- DNS-server 2 (valfritt, t.ex. 8.8.8.8)

Om det behövs, fråga IT-avdelningen om dessa uppgifter.

## 7 VANLIGA FRÅGOR

Om du har några frågor eller problem med Daisybox, vänligen läs följande vanliga frågor först:

- När jag trycker på ON/OFF-knappen tänds inte den gröna lampan. Vad gör jag?

**Batteridriven:** Tryck på volymkontrollen för att kontrollera batteristatus. Den behöver laddas när batterilampan lyser rött. Lås upp tangentbordet när displayen visar "Keyboard locked" (tryck och håll [upp]+[ned] och tryck [på] 3 gånger)

**12V drift:** Kontrollera om nätadaptern är korrekt ansluten. Om den har: Kontrollera att andra enheter som har anslutits till samma eluttag också fungerar. Om de inte är det: Byt ut säkringen i ditt mätarskåp.

- När jag trycker på ON/OFF-knappen får Daisybox ingen anslutning till Internet. Vad gör jag?

Kontrollera om Ethernet-kabeln och/eller routern har anslutits korrekt. Stäng av routern och sätt sedan på den igen, till exempel genom att ta ut kabeln ur eluttaget. Om det inte hjälper: Ring din nätleverantör och informera honom om dina problem med nätverket. Om det inte finns några problem: Kontakta din Daisybox-leverantör.

- När jag trycker på ON/OFF-knappen händer ingenting.

Om inget av ovanstående hjälper, ta bort anslutningskabeln från eluttaget i några sekunder och anslut den sedan igen. Daisyboxen kan alltid stängas av genom att trycka på [ON] längre än 5 sekunder, även när Daisybox inte verkar reagera på någonting.

- Nätverkslampan tänds, men jag hör ingenting. Vad gör jag?  
Om lampan blinkar är Daisybox fortfarande upptagen. Om lampan lyser konstant grönt, höj volymen (med volym/paus-ratten) på enheten eller på fjärrkontrollen. Om det inte hjälper: Tryck på volymkontrollen för att ångra ljudet. Om det inte hjälper: Kontrollera om ett headset eller ljudkabel fortfarande är ansluten till Daisybox. Om de är: Ta bort dem.
- Daisyboxens ljud är förvrängt. Vad beror det på?  
Om det finns en mobiltelefon som ligger i närheten av Daisybox, flytta sedan bort den. Om det finns en basstation nära din telefon (eller ett trådlöst headset). Flytta sedan bort den. Finns det en bärbar dator med trådlöst internet nära Daisybox, flytta sedan bort den.
- Daisyboxen fungerar inte eller den fungerar onormalt.  
Din Daisybox kan behöva återställas. Detta kan lösas genom att starta om din Daisybox med fabriksinställningarna. Stäng av enheten. Slå sedan på den igen medan du trycker på [Reset]-knappen i batterifacket. Fortsätt att trycka på Reset-knappen tills Daisybox startar om.
- Den trådlösa anslutningen fungerar inte längre.  
Stäng av Daisybox och slå sedan på den igen. Stäng även av modemmet eller routern och slå sedan på igen, till exempel genom att ta ut kabeln ur eluttaget.  
Försök att få Daisybox att fungera genom att ansluta Ethernet-kabeln som du har fått direkt till modemmet eller routern. Om detta fungerar kan du försöka återansluta till det trådlösa nätverket igen.  
Kontrollera inställningarna för din router för att se om kanalvalet ställs in automatiskt eller till ett specifikt kanalnummer. Om den är inställd på ett specifikt nummer, ändra inställningen till automatisk

(routern själv kommer då att leta efter en tillgänglig kanal). Kontakta din nätleverantör vid behov.

- Jag har ofta avbrott

Detta orsakas av problem i nätverket. Kontrollera avståndet mellan din router och Daisybox om den fungerar korrekt via en kabel men inte trådlöst. Alla väggar eller golv mellan dessa två har också en negativ inverkan på mottagningskvaliteten på ditt trådlösa nätverk. Försök att flytta Daisybox närmare routern för att se om problemet ändras. Ett närliggande trådlöst nätverk kan också störa ditt. Att ändra överföringskanalen inuti din router kan hjälpa. Routerleverantören kan ge dig information om hur du gör det.

## 8 PAUSEMENY

Genom att trycka kort på volym/pausknappen kan du sätta Daisybox i pausläge. När du sedan trycker på [Upp] eller [Ner]-knapparna kommer du att höra alternativen som tillhandahålls av 'Paus-meny'.

- Tryck kort på volymknappen: Daisybox säger "Paus"

**Bra att veta:** Vrid volymknappen just nu för att hoppa 10 sekunder framåt eller bakåt i det aktuella kapitlet. Tryck på volymkontrollen igen för att återgå till normal drift direkt.

- Tryck på [Upp] eller [Ner] för följande alternativ

Fortsätt uppspelningen

Information

Ladda ner den här boken (se avsnitt 5.11)

Bläddra

Hastighet: -50.. -10, normal, +10.. +50

Insomningstimer: av, 10, 20... 120 minuter

Enhetskonfiguration

Lägg till ett trådlöst nätverk

Daisybox-läge: Basic/Advanced

Ljudinställningar

Startvolym: tyst, mjuk, normal, hög, aktuell

Starthastighet: -50.. -10, normal, +10.. +50

Startton: -30... -10, normal, +10...+30

Konstgjord röst: Graham, Rachel

Avancerad meny

Ethernet

Ethernet DHCP: på/av

IP-adress, nätmask, gateway, DNS1, DNS2

Trådlöst nätverk

Trådlös DHCP: på/av

IP-adress, nätmask, gateway, DNS1, DNS2

Max. körtid: av, 1, 3, 6, 12, 24 timmar

Paus mellan menyalternativ: 1-5 sekunder

Av-knappsfördröjning: Av, På (0,5 sekunder)

Navigera med nivåer: Av, På

Använd IPv6: Av, På

Starta om/avstängning

Enhets status

Sammanfattningsinformation

Batterikapacitet xx %

Nätverkskabel ansluten, IP-adressen är xxx

Trådlöst ansluten till xxx, IP-adressen är xxx

Ethernet

Nätverkskabel ansluten

IP-adressen, nätmasken, routern, DNS är xxx

To emot xxx kilobyte

Skickade xxx kilobyte

Mac-adressen är xxx

Trådlöst nätverk

Du är trådlöst ansluten till xxx

Nätverkets styrka bra/medel/svag

Krypteringen är WEP/WPA/WPA2-PSK

IP-adressen, nätmasken, routern, DNS är xxx

Tog emot xxx kilobyte

Skickade xxx kilobyte  
Mac-adressen är xxx  
UMTS-status (valfritt)  
IP-adressen, nätmasken, routern, DNS är xxx  
Tog emot xxx kilobyte  
Skickade xxx kilobyte  
Serienumret är xxx  
Den aktuella tiden är xx timmar, xx minuter och xx sek  
Programversionen är xxx av xx februari xxxx  
Operativsystemet är Linux xxx  
Acapela konstgjord röst

## 9 RESET MENY

Du hittar en [Reset]-knapp i batterifacket. Om du trycker på denna medan Daisybox är på, kommer du in i 'Återställ-menyn'. I den här menyn kan du radera inställningar som "Inloggningsuppgifter, "Trådlöst nätverk", etc.

Bra att veta: Tryck och håll ned [Reset]-knappen i batterifacket, medan du slår på enheten för att återställa alla inställningar (!) till fabriksvärden. Släpp återställningsknappen när du hör omstarten. Vissa inställningar som det trådlösa nätverket kan behöva korrigeras i efterhand. Observera: Inställningar som är viktiga för enhetens funktion kan raderas på detta sätt.

- Tryck på [Reset]-knappen i batterifacket: Daisybox säger "Reset menu"
- Använd knapparna [Upp] och [Ner] och sedan [OK] för att välja:  
Återställ alla användarinställningar  
(tar bort inställningar som hastighet, ton, insomningstimer etc.)  
Ta bort alla genvägar och bokmärken  
(tar bort genvägarna för att gå till vissa alternativ i den talade guiden och bokmärkena till en specifik tidpunkt i innehållet)  
Ta bort ett trådlöst nätverk  
(tar bort ett av de trådlösa nätverken från en lista med val)

Återställ alla nätverksinställningar  
(tar bort alla nätverksinställningar som har ändrats i 'Pausmeny > Enhetskonfiguration > Avancerad meny')

Ta bort alla lagrade referenser  
(raderar alla inloggningsuppgifter som kan ha angetts)

Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna  
(alla inställningar ovan kommer att återställas till fabriksvärden)

Starta om (Daisyboxen kommer att startas om)

## 10 SPECIFIKATIONER

### Nätverk

protokoll	IPv4 och IPv6
kabel	10/100 baseT, RJ45 kabel-detektion
trådlös	IEEE802.11b/g/n (2,4GHz + 5,0GHz)
kryptering	WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPS-PB

### USB, SD, micro-SD och CD

2x USB-A v2.0 höghastighetskontakt på vänster sida och bakom

batterilocket (max. ström 1200mA för båda pluggarna kombinerat):

- USB-minnen (partitionstabell MBR eller EFI GPT), tangentbord HDI, CD

- USB 3G/4G donglar (Huawei E303/E3372h-153/E3531/E3533s-2)

1x SD-kortplats standard-/höghastighets (klass 2,4,6) SDSC, SDHC och SDXC

1x micro-SD-kortplats standard-/höghastighets (klass 2,4,6) microSD, microSDHC och microSDXC

### Ljudavkodare

Algoritmer	MPEG 1&2 lager III mp3 (CBR+VBR+ABR), WMA 4.0;4.1;7;8;9; alla profiler (5-384 kbps) MPEG4 / 2 AAC-LC(+PNS), HE-AAC v2 (Nivå 3) (SBR + PS), Ogg-Vorbis, WAV (PCM+IMA ADPCM)
------------	---

Bithastighet 8kbps-1,7Mbps

Prov frekv. 8; 11,05; 16; 22,8; 24; 32, 44,2; 48 kHz

Antal kanaler 1 (mono) eller 2 (stereo)

### Innehåll

Spellista: m3u, asx, pls, xml, smil, m3u8 och mer

Ytterligare data shoutcast/icecast metadata

Talböcker DAISY Online, DAISY Talking Books (PDTB2 för nedladdning), ncc och ncx navigationsfiler

stöds DAISY2.02, DAIS3 (ANSI/NISO Z39.86)

Text vanlig text eller HTML konverterad till tal

Bokmärken Endast sista position läst per bok/tidning...

## Audio

Frekvensområde	20 - 20 000 Hz (beroende på bithastighet)
Signal-till-brus	80 dB
Distorsion	0,2 % typisk (bithastighetsberoende)
Högtalare	Högpresterande typ, 900mW, 3 tum

## Linje ut

kontakttyp	2x RCA ('cinch')
fast nivå	400 mVrms nominellt

## Hörlurar

kontakttyp	Mini stereojack 3,5 mm
justerbar nivå	2x 100 mW (2x 8 Ohm)
Pluggdetektering	ljud stängs av när hörlurar sätts i
mikrofon	inbyggd för framtida applikationer

## Allmän

Effekt	12V 15W (3W nominellt) 100-240 V, 50-60 Hz adapter medföljer
Batteri Lithium-Ion	2S1P 7.2V-paket, cirka. 10 timmars körning, 5 timmars laddning
Fjärrkontroll	17 knappar, 140x49x20mm, 2xAAA-batteri
Driftstemp.	-10°C till +40°C
Förvaringstemp.	-20°C till +60°C
Mått	160x250x84 mm
Vikt	800g
Godkännande	CE, FCC, UL

Tel: 010-455 04 00, E-post: [info@insyn.se](mailto:info@insyn.se)  
[www.insyn.se](http://www.insyn.se)

