

Bruksanvisning my Board Buddy AIR



Ver 1.1



Innehåll

Vi presenterar my Board Buddy AIR	4
Vård och underhåll	5
Garanti	5
Komponenter i my Board Buddy	6
Sändare	6
Mottagare	6
Kontrollenhet	6
Ansluta sändaren (för AIR och GO)	7
Ansluta mottagaren (AIR och CAM)	8
Konfigurera och använda appen My Board Buddy (GO)	9
Felsökning	12

Copyright © 2023 - Sensotec NV Med ensamrätt.
Andra produkt- och företagsnamn som nämns här kan vara
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive
ägare. Version: 1.0.

Tillverkarens kontaktuppgifter:

Sensotec SA - Vlamingveld 8 - BE-8490 Jabbeke.
info@sensotec.be - www.sensotec.be.

Huvudkontor :
Vlamingveld 8, B 8490 Jabbeke T +32 50 39 49 49 - F +32 50 39 49 46
sales@sensotec.be

Vi presenterar my Board Buddy AIR

Tack för att du valde my Board Buddy AIR som lösning för att duplicera en digital projektion eller smartboard. Bilden återsänds trådlöst via en sändare till en monitor nära användaren.

my Board Buddy är en fristående eller kompletterande lösning för skollokaler som används av synskadade barn och elever.

my Board Buddy är lätt att använda tack vare en joystick som inte kräver några förkunskaper om datorer, vilket innebär att den kan användas av barn så unga som 6 år.

Kartongen innehåller följande:

- my Board Buddy sändare
- my Board Buddy mottagare
- my Board Buddy handkontroll
- Strömförsörjning x 2
- VESA monteringsplatta + buntband
- Micro-HDMI till HDMI kabel
- HDMI till HDMI kabel
- Bruksanvisning

Kontrollera alltid att alla komponenter finns med!



Vård och underhåll

Rengör din my Board Buddy med en fuktig, väl urvriden trasa. Använd aldrig frätande produkter: detta kommer att orsaka irreparabel skada på höljet.

Förvara förpackningen som min Board Buddy levererades i. Enheten kan endast skickas i denna förpackning.

Lämna alltid min Board Buddy tillräckligt med utrymme (± 10 cm) så att luft kan cirkulera genom öppningarna. Täck aldrig över gallret: du riskerar att överhätta enheten.

Använd endast den medföljande nätadaptern. Användning av felaktig typ kan skada enheten.

Slå aldrig på enheten om den har utsatts för vatten.

Placera alla kablar på ett sådant sätt att ingen kan snubbla över dem eller klämma dem.

Garanti

Sensotec NV erbjuder en garanti på min Board Buddy i maximalt två år efter köpet, i enlighet med de lagstadgade garantibestämmelserna.

Skador orsakade av olämplig eller försumlig användning täcks inte av garantin.

Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av Sensotec-tekniker. Enheten får aldrig öppnas av användaren eller tredje part. Om detta skulle hända upphör din garanti att gälla utan någon skyldighet från vår sida.

Komponenter i my Board Buddy

Sändare

1. Strömbrytare
2. Diagnostisk LED-omkopplare
3. Anslutning för nätadapter
4. HDMI-ingång
5. HDMI-utgång



Mottagare

1. Micro USB-C anslutning för strömadapter
2. Micro-HDMI utgång
3. USB-anlutning för styrenhet och avståndskamera (CAM)



Kontrollenhet


- Joystick
- Färginventering (Vit)
- Gråskala eller färg (Röd)
- Zooma in (Gul övre)
- Zooma ut (Gul nedre)
- Översikt (Grön)



Ansluta sändaren (för AIR och GO)

1. Anslut källsignalen (dator, surfplatta, smartboard, etc.) till HDMI IN-anslutningen.
2. Om en bildskärm (smartboard eller presentationskärm) var ansluten till källan kan du nu ansluta den till HDMI OUT-anslutningen.
3. Anslut 12V-nätadaptern.
4. Slå på strömbrytaren.

myBoard Buddy-sändaren startar nu. Om en skärm är ansluten till HDMI OUT-anslutningen visas Sensotec-logotypen, följt av källsignalen. När båda lysdioderna tänds är sändaren helt igång och redo att användas.

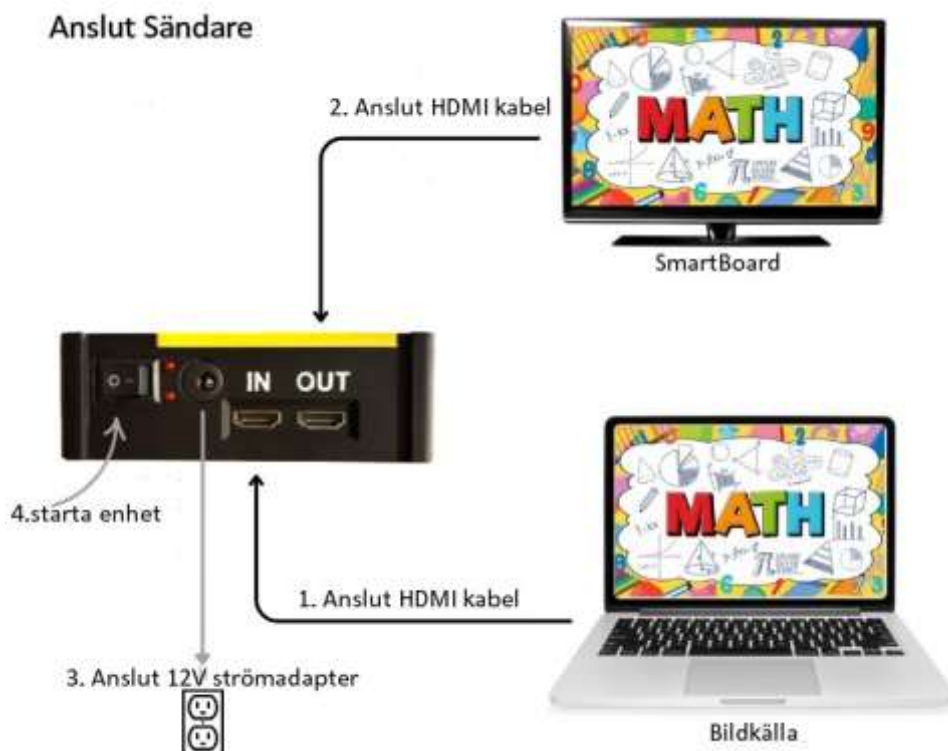

Ansluta mottagaren (AIR och CAM)

Valfritt: om du vill montera my Board Buddy-mottagaren på baksidan av skärmen, använd VESA-adaptern och medföljande buntband.

1. Se till att skärmen (elevens bildskärm) är påslagen.
2. Anslut skärmen till HDMI-porten med den medföljande mikro-HDMI-kabeln.
3. Anslut handkontrollen till en av de två USB-portarna.
4. Anslut nätadaptern till USB-C-porten och sätt i den i vägguttaget.
5. Om du har CAM-modulen, anslut my Board Buddy CAM (redan monterad på bordet) till den lediga USB-porten på mottagaren och anslut strömkabeln till vägguttaget.

Om anslutningen är korrekt visas en skärm med My Board Buddy-logotypen efter några sekunder. Om det finns en sändare i närheten med en tillgänglig bildsignal kommer en anslutning att upprättas automatiskt efter några sekunder. Om en My Board Buddy CAM har anslutits visas den också automatiskt.



Konfigurera och använda appen My Board Buddy (GO)

För min Board Buddy GO eller för AIR-användare som också vill använda iPad-funktionen:

Installera appen

1. Öppna App Store på din iPad
2. Sök efter "my Board Buddy" i sökfältet
3. Ladda ner och installera appen
4. Öppna appen när installationen är klar

Anslut

1. Se till att my Board Buddy-sändaren är påslagen och inom räckhåll.
2. Öppna my Board Buddy-appen på din iPad.
3. Tryck på den stora, tydliga knappen "Anslut automatiskt" på öppningsskärmen.

Appen söker automatiskt efter den starkaste my Board Buddy-sändaren i området och ansluter utan behov av komplicerade inställningar.

4. När anslutningen är upprättad visas bilden från sändaren omedelbart på din iPad.

Använda appens gränssnitt








Högst upp på skärmen finns en menyrad med olika funktioner:

- Du kan dölja menyraden genom att trycka var som helst på videobilden.
- Tryck på skärmen igen för att visa menyraden.

- Använd miniatyrbildsknappen för att låsa menyn så att den inte försvinner automatiskt.

Tillgängliga funktioner i menyraden

	Färginvertering: Detta byter färgerna för bättre läsbarhet av vissa texter.
	Gråskala: Konverterar bilden till gråskala samtidigt som viss färginformation behålls.
	Skärmdump: Ta en skärmdump av den aktuella bilden.
	Spela in video: Börja spela in bilden.
	Bakåtpil: Gå tillbaka till appens startskärm.

Navigering i appen

Längst ner på appens startskärm hittar du två flikar:

1. Anslutning: För att ansluta till sändaren.
2. Ögonblicksbilder: Här hittar du alla skärmdumpar och videoinspelningar du har gjort.

Bildkontroll

Precis som med den fysiska handkontrollen kan du i appen:

- Zooma in och ut med en spridnings- eller nypgest med två fingrar.
- Flytta den förstörade bilden genom att dra ett finger över skärmen.
- Använda knapparna i menyraden för olika visningsalternativ.

Visa och hantera ögonblicksbilder

1. Tryck på bakåtpilen i menyfältet för att återgå till startskärmen.
2. Välj fliken "Översiktsbilder" längst ner på skärmen.
3. Här kan du se alla skärmdumpar och videoinspelningar du har gjort.
4. Tryck på ett objekt för att visa, dela eller ta bort det.

Felsökning

När LED är markerad "ingen signal".

Detta indikerar att något är fel med sändaren. Anslutningen till källan kan ha förlorats.

Displayen längst fram i klassrummet visar "ingen signal".

Detta indikerar att något är fel med sändaren. Anslutningen till källan kan ha förlorats.

Anteckningar som är synliga på skärmen överförs inte till användaren.

Tyvärr överför inte displayen som sändaren är ansluten till denna information. Kontakta skärmtillverkaren.

my Board Buddy-mottagaren är blockerad

Ta bort nätadaptern från enheten och vänta 30 sekunder. Anslut sedan strömadaptern igen och vänta tills enheten startar upp helt. Om allt går bra kommer du tillbaka till startskärmen efter maximalt 2 minuter.

Tel: 010-455 04 00, E-post: info@insyn.se
www.insyn.se

