

PRONTO!

Användarmanual

För Pronto! 18 V3

Mjukvaruversion 3.3

Juli 2011

Manualens uppbyggnad

Denna manual är i tre delar.

Del 1 är riktad till nybörjare som har liten erfarenhet av datorer eller liknande tekniska apparater. Novisen kommer steg för steg att tas igenom proceduren för att skriva, redigera, spara och radera text samt för att ta reda på datum, tid och batterinivå – allt med enkla ord och exempel. Åtkomst till inbyggd hjälp, till manualen och användning av MP3-spelaren kommer också att förklaras så att nybörjaren fristående kan lyssna på Pronto-manualen.

Del 2 ger råd kring tilläggsprogramvara vid anslutning av mobila enheter till en PC för dataöverföring.

Du får också information om ytterligare program och drivrutiner.

Del 3 är riktad till användare som redan är bekanta med de grundläggande Pronto-funktionerna och som önskar lära sig mer om dess övriga funktioner. Detta är den verkliga manualen med en systematisk struktur med beskrivning av apparaten själv, dess allmänna användning samt mer specifika tillämpningar och funktioner i enskilda kapitel (Ordbehandlaren, Utforskaren, Adressboken, Kalendern, talsyntesen, MP3-spelaren, Kalkylatorn, datautbyte med en PC, etc.).

Bilagorna innehåller allmänna notiser och tips samt ett referensavsnitt med en lista över de grundläggande kortkommandona som kan användas för att styra kända funktioner.

De givna beskrivningarna av program och funktioner är baserade på användning av vilket som helst av Pronto-anteckningshjälpmedlen: Antingen Pronto 18 / Pronto 40 med punkt tangentbord eller Pronto QS / Pronto 40 med dess normala tangentbord (alfanumeriskt tangentbord, dvs. QWERTY-tangentbord).

Så denna manual innehåller de motsvarande kortkommandona och tangentkombinationerna för att direkt utföra kommandon eller funktioner på Pronto (QWERTY-läge såväl som punktläge).

Alla medlemmarna av anteckningshjälpmedelsfamiljen Pronto kan användas i punktläge eller qwerty-läge för att utföra kommandon.

Få punktläge:

- Pronto! 18 V3: Använd inbyggt punkt tangentbord.
- Pronto! 40: Använd punkt tangentbordsmodulen eller växla om QWERTY-tangentbordet till punktläget (FN+b).
- Pronto! QS: Växla om qwerty-tangentbordet till punktläget (FN+B).

Få qwerty-läge:

- Pronto! 18 V3: Anslut ett externt USB-tangentbord.
- Pronto! 40: Använd QWERTY-tangentbordsmodulen.
- Pronto! QS: Använd det inbyggda tangentbordet.

Du hittar grundläggande kommandon och tangentkombinationer för båda lägena i kapitel 3 "Allmän användning".

Du hittar viktiga notiser kring din säkerhet direkt efter innehållsförteckningen i denna manual.

Den tryckta manualen ger en första introduktion kring hur enheten används. Den innehåller Del 1 samt en lista över de grundläggande kortkommandona.

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Innehållsförteckning | 4 |
| <i>Vad finns i kartongen?</i> | 6 |
| <i>Överensstämmelse med EMC- och säkerhetsstandarder</i> | 6 |
| För din säkerhet | 6 |
| <i>Om batteriets livslängd</i> | 7 |
| <i>Garanti</i> | 8 |
| Del I - Introduktion - Första stegen på Pronto! 18 | 9 |
| <i>Slå på enheten</i> | 9 |
| <i>Skriva text</i> | 10 |
| <i>Läsa text</i> | 10 |
| <i>Ta reda på värden, aktivera viloläget och väck Pronto!</i> | 10 |
| <i>Hjälp</i> | 11 |
| <i>Spara</i> | 11 |
| <i>Öppna</i> | 12 |
| <i>Tomt dokument</i> | 12 |
| <i>Utforskaren</i> | 13 |
| <i>Stänga dokument</i> | 14 |
| <i>Öppna manualen</i> | 14 |
| <i>MP3-spelaren</i> | 14 |
| <i>Slå av Pronto!</i> | 16 |
| Appendix x1: Översikt | 17 |
| <i>x1.1 Kort enhetsöversikt</i> | 17 |
| <i>x1.2 Termer och förkortningar som används</i> | 17 |
| <i>x1.3 Generella akustiska signaler och meddelanden</i> | 18 |
| <i>x1.4 Tekniska data för alla enheter</i> | 19 |
| x1.5 Kontakt och support | 20 |
| Appendix x2: Kommandolista (för referens) | 22 |
| <i>X2.1 Allmänna kommandon:</i> | 22 |
| <i>X2.2 Systemknappskommandon:</i> | 22 |
| <i>X2.3 Kör program</i> | 23 |
| <i>X2.4 Ordbehandlaren</i> | 24 |
| <i>X2.5 Kalendern</i> | 26 |
| <i>X2.6 Adressboken</i> | 28 |
| <i>X2.7 Utforskaren</i> | 30 |
| <i>X2.8 Daisy-spelaren</i> | 30 |
| <i>X2.9 MP3-spelaren</i> | 31 |
| <i>X2.10 Fickminnet</i> | 32 |
| <i>X2.11 Alarmet</i> | 33 |
| <i>X2.12 Tidtagning</i> | 33 |
| <i>X2.13 Räkna ned (timer)</i> | 33 |
| <i>X2.14 Mobil</i> | 34 |
| <i>X2.15 Kalkylatorn</i> | 35 |
| <i>X2.16 Internetradion</i> | 36 |

| | |
|--|----|
| <i>X2.17 E-post</i> | 37 |
| <i>x2.18 MSN Messenger</i> | 39 |
| <i>X2.19 Webbläsaren</i> | 40 |
| <i>X2.20 PDF-dokumentläsaren</i> | 42 |

Allmän information, säkerhet och garanti

Innan du använder din enhet för första gången, var god kontrollera innehållet i kartongen. Om någonting är skadat eller saknas, var god tveka inte att kontakta din leverantör.

Vad finns i kartongen?

- Pronto
- Nätadapter
- Skyddande väska
- USB-kabel
- Seriekabel
- Installations-CD
- Manual
- Endast Pronto! 40: Alternativt tangentbord

Vänligen förvara kartongen och paketeringsmaterialet på ett säkert ställe eftersom du kan komma att behöva det när du ska frakta enheten. Att skicka in Pronto! på reparation utan ordentlig paketering kommer att göra garantin ogiltig!

Vänligen läs ordentligt igenom instruktionerna och säkerhetsvarningarna innan du använder enheten för första gången.

Pronto! är endast utformad för att användas i hem- och kontorsmiljöer. I medicinska byggnader ska den endast användas i kontorsrum.

En PC ansluten till Pronto! måste uppfylla tillämpliga EMC- och säkerhetskrav för det område där den används.

Överensstämmelse med EMC- och säkerhetsstandarder

Du hittar tillkännagivandena av överensstämmelser i slutet av denna manual.

Medicinska elektroniska enheter måste uppfylla EMC-regleringsstandarderna och måste användas och underhållas i enlighet med dessa.

Var god observera: Användning av sladdar, nätadapterar, reservdelar och tillbehör som inte uttryckligen är tillåtna av tillverkaren kan förorsaka ökad strålning eller ökad känslighet för strålning och därmed skapa en säkerhetsrisk.

För din säkerhet

Viktigt att observera: Att inte ta till sig följande varningar kan göra garantin ogiltig och kan förorsaka allvarlig personskada.

- Om PRONTO! verkar fungera onormalt eller vara skadad på något sätt, var god kontakta din BAUM-återförsäljare så snart som möjligt.
- Om du känner lukten av rök eller en odör som kommer från PRONTO!, slå omedelbart av strömmen.
- Låt inte sand eller damm komma i kontakt med PRONTO! eftersom detta kan leda till allvarlig skada och kan göra reparation omöjlig.
- Använd inte din PRONTO! på platser där starka radiovågor avges eller där det finns strålning.
- Använd inte en nätadapter som inte är gjord för användning tillsammans med PRONTO. Använd endast PRONTOs originalnätadapter!
- Använd eller förvara inte PRONTO! på något av följande ställen eftersom detta kan förorsaka skada.
- Inuti bilar med fönstren stängda i den heta solen. I direkt solljus eller nära varmvattenberedare, värmeelement, etc.
- Platser utsatta för häftiga vibrationer så som ovanpå en tvättmaskin.
- Platser utsatta för stark magnetism så som nära högtalare.
- Torka bort damm och smuts från PRONTO! med en mjuk trasa fuktad med ett utspätt neutralt rengöringsmedel, torka sedan torrt med en trasa.
- Dra alltid ur strömsladden ur PRONTO! vid rengöring.
- Använd inte PRONTO! vid åskväder.
- Använd inte PRONTO! nära vatten, till exempel i ett badrum.
- Sätt inte i eller dra ur kontakten med våta händer.
- Försök inte avlägsna batteriet.
- Värm inte upp PRONTO! i en mikrovågsugn, på en kokplatta eller liknande.
- Använd endast batteriet som följde med din PRONTO. Ersättningsbatterier är endast tillgängliga från BAUM eller lokala återförsäljare. Batteriet kan endast avlägsnas av auktoriserade servicetekniker!
- Plocka aldrig isär, försök reparera eller modifiera PRONTO! på egen hand.
- I fall vätskor eller metallfragment skulle komma in i PRONTO!, slå omedelbart av den och dra ur strömkabeln.
- Lyssna inte på hög volym under långa tidsperioder eftersom detta kan leda till hörselskador, speciellt vid användning av hörlurar.
- Dra inte ur kontakten genom att hålla i sladden när du kopplar ur strömmen från PRONTO.
- Försäkra dig om att PRONTO!, nätadaptern och strömkontakten är säkert anslutna.

Om batteriets livslängd

Livslängden hos ditt batteri beror på hur ofta och på vilket sätt det laddas och laddas ur. Under den normala åldringsprocessen minskar batteriernas kapacitet. Om batteriernas kapacitet blir för låg efter en tid måste de bytas ut.

Försök inte byta batteri själv, låt BAUM eller en auktoriserad servicepartner göra detta. Försök inte öppna Pronto!

Batterilivslängden kan påverkas av omgivande temperatur och andra miljöparametrar.

Om du inte använder Pronto! under en längre tidsperiod, var god ladda upp det regelbundet för att förhindra att batteriet laddas ur för mycket. I annat fall, om det laddas ur helt och hållet är det bara några veckors tid kvar tills batteriet kommer att vara så urladdat att enheten inte längre kan slås på eller så kan batteriet till och med bli permanent skadat.

Garanti

Prontos garanti överensstämmer med de juridiska regleringarna där den såldes. Vänligen kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Pronto-enheter sålda i Tyskland har en begränsad 2 års garanti. Batteriet har en 6-månaders garanti.

Skador förorsakade av felaktig användning omfattas inte av garantin.

BAUM Retec AG garanterar att Pronto! är fri från skador vid tillverkningstillfället. Garantin kan inte överföras till andra personer. Pronto! är utformad för slutanvändare för användning i kontors- eller hemmiljö. BAUM Retec AG förbehåller sig rätten att reparera enheten eller ersätta den med en liknande eller bättre produkt. BAUM Retec AG eller dess representanter kommer inte att ta ansvar för några direkta eller indirekta skador. Garantin kommer att bli ogiltig om garantiplomberingen är skadad. BAUM kommer inte att ta ansvaret för annan användning än vad som beskrivs i manualen.

Del I - Introduktion - Första stegen på Pronto! 18

Gratulerar! Du har slutligen Pronto! i dina händer och är utan tvivel ivrig att lära dig hur den fungerar. Följande text är inte en komplicerad handbok och är inriktad på att introducera huvudfunktionerna för dig genom praktiska exempel. Du kommer att kunna prova allt på din Pronto! vartefter du läser och på så sätt få dina första erfarenheter med Pronto.

Del 3 av denna användarmanual innehåller handboken med en mer detaljerad beskrivning av alla Prontos funktioner. Den kan också kommas åt på själva Pronto som en fil på "Hjälp"-menyn där kapitlen kan öppnas och läsas enskilt eller på installationsskivan.

Tillbaka till Pronto. Först från början.

Dina fingrar ska vila på de 8 fyrkantiga knapparna på den bakre översidan med lillfingrarna på de yttersta punkttangenterna B7 och B8 och tummarna på de två tumtangenterna på framkanten. Under din handflata finns punktdisplayen. Du kan alltså enkelt nå styrpinnen i det runda hålet i mitten av framsidan med någon av tummarna. Styrpinnen kan förflyttas uppåt och neråt, åt höger och åt vänster och kan tryckas i mittenpositionen.

Till höger och till vänster om tumtangenterna kommer du att hitta två små runda knappar, de så kallade systemknapparna. De har olika funktioner som kommer att beskrivas nedan.

Slå på enheten

För att starta Pronto! för första gången eller efter en total urladdning av batteriet, tryck de två yttersta systemknapparna (S1+S4) samtidigt i omkring 3 sekunder.

OBS: När Pronto! är påslagen och de yttersta systemknapparna S1 och S4 trycks och hålls inne i ungefär 10 sekunder kommer Pronto! att slås av helt och hållet igen. Du vill inte göra detta såvida inte Pronto har kraschat eller du inte vill använda den under mer än tre veckor.

Du kommer att höra en fallande tvåtonssignal.

(I fall du efter denna signal hör en annan med en hög och en låg ton kommer Pronto! automatiskt att slås av helt och hållet på grund av för lite batteri. Du måste ladda batteriet först. Anslut den lilla runda kontakten på laddningskabeln i det lilla runda hålet på den vänstra delen av baksidan av Pronto! och den andra änden av kabeln i ett vägguttag. Tryck sedan på de två systemknapparna [S1+S4] igen).

Under påslagningsproceduren kommer korta signaler att avges och efter ungefär en minut kommer du att höra meddelandet "Pronto meny, Ordbehandlaren". På punktdisplayen kan du läsa "MI o Ordbehandlaren".

Skriva text

Tryck på vänster tumtangente och ett nytt tomt dokument kommer att öppnas. På punktdisplayen kommer endast markören att vara synlig. Skriv en kort mening med datapunktskrift. Använd höger tumtangente för att infoga ett mellanslag. (En inställning för förkortad punktskrift på engelska och några andra språk är tillgänglig. Se kapitel 5.11.)

Om du vill korrigera vad du just har skrivit, radera helt enkelt tecknen bakåt med genom att trycka på B7 (tangente under din vänstra hands lillfinger). För att radera något annat tecken från meningen som du matat in, tryck på cursor routing-tangenten efter respektive tecken på punktdisplayen tillsammans med B7.

Det finns olika sätt att positionera markören:

1. Flytta styrpinnen med tummen i respektive riktning till den önskade positionen.
2. Tryck på den lilla cursor routing-tangenten ovanför respektive tecken på punktdisplayen.

På punktdisplayen visas nu markörens position med de nedersta punkterna 7 och 8.

Ny text kommer alltid att infogas vid den aktuella markörpositionen, så försäkra dig om att markören är positionerad i slutet av texten innan du fortsätter att skriva. För att gå till slutet av texten, tryck på punktangenterna B4, B5 och B6 tillsammans med vänster tumtangente. Träna genom att mata in en kort text.

Läsa text

Vill du läsa den första meningen igen? Hoppa till början av texten genom att trycka punktangenterna B1, B2 och B3 tillsammans med vänster tumtangente. För att läsa upp första meningen, tryck punktangenterna B3 och B6 tillsammans med de två tumtangenterna. För att läsa upp nästa mening, tryck B6 och de två tumtangenterna. För att läsa upp föregående mening, tryck B3 och de två tumtangenterna.

Vid uppläsning visas också de 18 första tecknen av texten på punktdisplayen. Du kan se den återstående delen av texten med hjälp av displaytangenterna - tre små runda knappar i en rad till höger och vänster om punktdisplayen. Genom att trycka på den högra mittersta displaytangente (D5) kommer du att se nästa 18 tecken av texten och genom att trycka på den vänstra mittersta displaytangente (D2) kommer du att gå tillbaka 18 tecken. Detta kallas att rulla.

Ta reda på värden, aktivera viloläget och väck Pronto!

Tiden har nu gått och du vill veta vad klockan är. Tryck kort på den yttersta högra systemtangente (S4) och du kommer att få veta tiden. Tryck kort två gånger på denna

tangent och du kommer att få veta datumet. Om du trycker på systemtangente för länge kommer du i stället för tiden att höra en svag signal och Pronto! kommer att läggas i viloläge. Även när Pronto! "sover" kan du dock höra tiden och datumet genom att trycka kort på S4.

Hur väcker du Pronto! igen och återvänder till ditt dokument? Tryck på den yttersta vänstra systemknappen (S1) i några sekunder. Om du inte trycker på den länge nog kommer Pronto! att fortsätta "sova" och du kommer att få höra temperaturen. Tryck kort två gånger på S1 och du kommer att få höra lufttrycket. Endast genom att trycka på S1 tillräckligt länge kommer Pronto! att vakna och låta dig återvända till din korta text i Ordbehandlaren.

I fall Pronto! talar för högt eller för lågt kan du justera volymen i steg. Tryck samtidigt på den lilla systemtangente längst till höger (S4) och en av punkttangenterna. För att ställa in volymen till en medelnivå, tryck på punkttangente B4 tillsammans med S4. Den maximala volymen kan ställas in genom att trycka S4 och B8. Talsyntesen kommer att slås av och på genom att trycka S4 tillsammans med B7. Volymen kan justeras med S4 och en punkttangent antingen när talsyntesen är påslagen eller avslagen.

Tryck S4 tillsammans med punkttangenterna B3 och B7 för att välja svaga värden och S4 tillsammans med B6 och B8 för att välja starkare värden.

Hjälp

Hur sparar du din text och öppnar ett nytt tomt dokument eller en annan fil, till exempel manualen?

Prontos hjälpfiler kan här ge dig assistans i form av den automatiska snabbhjälpen och den mera detaljerade långa sammanhangskänsliga hjälpen. Snabbhjälpen tillhandahåller information om det markerade objektet i en meny eller dialogruta som kommer att ges automatiskt via talsyntesen i samband med den upplästa objektsbeskrivningen. För mer detaljerad information om objektet och dess funktioner, öppna den långa hjälpen genom att trycka "B2B6 och vänster tumtangente". Den långa hjälpen kommer nu att läsas upp och den kan läsas på punktdisplayen genom att rulla med hjälp av displaytangenterna D5 och D2. Om hjälpen ska läsas upp igen, gå neråt med styrratten till "OK"-knappen och tillbaka upp till hjälptexten. Tryck på vänster tumtangente för att stänga den långa hjälpen och du kommer att tas tillbaka till det tidigare markerade objektet.

Spara

Låt oss börja med att spara dokument.

1. Öppna kommandomenyn genom att trycka på systemtangente S3 kort en gång alternativt med punkttangenterna B3 och B5 tillsammans med vänster tumtangente. (Alla

kommandomenyer kan anropas med B3B5B9). (OBS: Kort tryckning på S3 en gång till kommer att stänga menyn.)

2. Detta aktiverar "Arkiv"-menyn. Styrpinnen kan användas för att gå uppåt och neråt till andra alternativ, men vi kommer att stanna på "Arkiv".

3. Gå med styrpinnen åt höger för att öppna "Arkiv"-menyn som har fler val.

4. Gå med styrpinnen uppåt eller neråt till alternativet "Spara som" och tryck på vänster tumtangenta (om ett annat alternativ väljs av misstag, tryck det generella avbrytkommandot B7 och B8 tillsammans med båda tumtangenterna och börja om igen).

5. Skriv "Test" i textrutan "Filnamn". Tryck slutligen på vänster tumtangenta för att spara filen.

Öppna

Nu kan du öppna en annan textfil eller ett nytt dokument. Tryck kortkommandot punktangenterna B3B5 tillsammans med den vänstra tumtangenta igen eller tryck "S3 kort en gång". Detta aktiverar kommandomenyn igen – gå med styrpinnen åt höger för att öppna den (om du har valt ett annat alternativ av misstag, gå med styrpinnen åt vänster för att stänga det).

Gå nu med styrpinnen neråt till alternativet "Öppna" och tryck på vänster tumtangenta. Du är nu överst i en lista med filer och kan använda styrpinnen för att bläddra neråt. Här kommer du att hitta den tidigare sparade filen såväl som Pronto-manualen.

För att öppna en av dessa filer, gå till den med styrpinnen och tryck på vänster tumtangenta.

Tomt dokument

Vi har nu lärt oss hur vi sparar texter och öppnar tillgängliga texter; vi kan nu öppna ett nytt tomt dokument.

Gör som följer:

1. Anropa kommandomenyn med kortkommandot punktangenterna B3 och B5 tillsammans med vänster tumtangenta) eller genom att kort trycka S3 en gång.

2. Detta aktiverar "Arkiv"-menyn. Med styrpinnen kan du gå uppåt eller neråt till andra alternativ men vi kommer att stanna på "Arkiv".

3. Gå med styrpinnen åt höger för att öppna denna meny och komma åt andra alternativ.

4. Gå med styrpinnen uppåt eller neråt till "Nytt" och tryck på vänster tumtangenta (i fall ett annat alternativ väljs av misstag, tryck kort en gång på S3 igen eller använd det generella avbrytkommandot [punktangenterna B7 och B8 tillsammans med båda tumtangenterna] och börja om igen).

5. Detta aktiverar "Filnamn"-fältet – det föreslagna namnet "Dokument" kan bekräftas genom att trycka på vänster tumtangenta.

6. Det nya dokumentet kommer nu att öppnas och markören kommer att vara i början av punktraden.

Vårt tidigare öppnade dokument är dock fortfarande öppet och vi kan enkelt växla mellan dem genom att trycka punkttangenterna B3B6 tillsammans med B8 och vänster tumtangent B9.

Utforskaren

Låt oss nu radera vårt första dokument. För att göra detta lämnar vi Ordbehandlaren och lär känna Utforskaren.

1. Tryck på systemtangenten S3 (omedelbart bredvid den högra tumtangenten) i ungefär 3 sekunder.
2. Du kommer att höra "Pronto-menyn > Ordbehandlaren" och "MI o Ordbehandlaren o+B9B7B8" kommer att dyka upp på punktdisplayen. Om S3 har tryckts för kort kommer kommandomenyn att öppnas; om så är fallet, stäng den med avslutakommandot B9B7B8 eller S3 kort en gång till och försök igen.
3. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till "Utforskaren" och tryck på den vänstra tumtangenten.
4. Detta öppnar en lista med mappar och filer, liknande Utforskaren i Windows.
5. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till "Storage Card" och gå med styrpinnen åt höger för att öppna mappen. På detta sätt hamnar du på "Edit"-mappen som innehåller dina textfiler. (I fall du hamnar på en annan mapp, gå med styrpinnen uppåt eller neråt till "Edit"-mappen.)
6. Öppna "Edit"-mappen genom att gå med styrpinnen åt höger och därmed in i listan med textfiler.
7. Gå med styrpinnen uppåt eller neråt till testfilen.
8. Anropa kommandomenyn med ett kort tryck på S3 eller kommandot "B3 och B5 tillsammans med vänster tumtangent".
9. Detta öppnar menyn på första alternativet "Arkiv" – gå med styrpinnen åt höger för att gå in i undermenyn.
10. Denna öppnas på "Ny mapp" – gå med styrpinnen uppåt eller neråt till "Radera".
11. Tryck på vänster tumtangent för att bekräfta "Radera" och en säkerhetsfråga kommer att dyka upp.
12. Gå med styrpinnen uppåt eller neråt för att välja "Ja" och tryck på den vänstra tumtangenten.
13. Detta kommer att radera testfilen från minneskortet. Du kommer att tas tillbaka till fillistan där andra filer kan raderas eller öppnas.

Även om filen har raderats från minneskortet kan den fortfarande återfinnas i Prontos interna RAM-minne, dvs. den kan fortfarande visas på punktdisplayen i Ordbehandlaren och skulle kunna sparas under ett nytt namn.

Stänga dokument

För att radera en fil från RAM-minnet måste den stängas i Ordbehandlaren. Växla till Ordbehandlaren genom att trycka på systemtangenten S1 lite längre eller genom att gå till Pronto-menyn och välja "Ordbehandlaren".

Gör sedan som följer:

1. Tryck kort en gång på S3 för att öppna kommandomenyn och du kommer att tas till första alternativet "Arkiv".
2. Gå med styrpinnen åt höger och sedan neråt till "Stäng" och tryck sedan på vänster tumtangenta (B9).
3. Du kommer nu antingen att befinna dig i en annan öppen fil eller ett tomt dokument.

Öppna manualen

Manualen och dess enskilda kapitel kan snabbt öppnas från Pronto-menyn via undermenyn "Hjälp". Filen kommer att visas i Ordbehandlaren, dvs. när ett kapitel från handboken har valts kommer du att tas direkt till Ordbehandlaren.

För att välja och öppna ett kapitel från manualen, gör som följer:

1. Öppna Pronto-menyn genom att trycka och hålla inne systemtangenta S3. Om tangenta släpps upp för snabbt kommer endast kommandomenyn att öppnas som då måste stängas genom att kort trycka S3 en gång till.
2. Du kommer att tas till ett alternativ på Pronto-menyn. Gå med styrpinnen uppåt eller neråt för att komma åt ytterligare alternativ.
3. Så snart som du når "Hjälp", stanna på det och tryck antingen på vänster tumtangenta eller (B9) eller gå med styrpinnen ett steg åt höger.
4. En undermeny kommer att öppnas med ytterligare alternativ.
5. Gå med styrpinnen uppåt eller neråt till alternativet "Manual" och tryck antingen på vänster tumtangenta (B9) eller gå med styrpinnen ett steg åt höger.
6. De enskilda kapitlen från manualen kommer att visas i en lista. Gå med styrpinnen uppåt eller neråt till det önskade kapitlet och öppna det genom att trycka på vänster tumtangenta (B9).

Vid det här laget har du redan lärt dig en hel del. Du kan skriva och spara texter, öppna manualen samt radera filer och du vet hur du tar reda på tiden och annan användbar information.

MP3-spelaren

Låt oss avslutningsvis lyssna på lite musik och på samma gång lära oss använda Prontos MP3-spelare.

1. Öppna Pronto-menyn genom att trycka på systemknappen S3 i några sekunder - detta är den runda knappen bredvid den högra tumtangenta. Om du släpper upp knappen för snabbt kommer kommandomenyn att öppnas; denna måste stängas antingen genom att trycka B9B7B8 eller genom att kort trycka S3 igen.
2. Du är på ett alternativ i Pronto-menyn. Gå med styrpinnen uppåt och neråt för att komma åt andra menyalternativ.
3. När du når menyalternativet "MP3-spelaren", tryck på vänster tumtangenta.

4. MP3-spelaren kommer antingen att meddela att spellistan saknas eller är tom eller så kommer den att visa namnet på MP3-filen som senast spelades. För att lyssna på en ny MP3-fil, tryck S3 kort en gång för att öppna kommandomenyn.
5. Stanna på det första alternativet "Arkiv", gå med styrpinnen ett steg åt höger och bekräfta alternativet "Öppna" genom att trycka på vänster tumtangenta.
6. En lista med filer och mappar kommer nu att öppnas, liknande dialogrutan för att öppna dokument i Ordbehandlaren.
7. Gå med styrpinnen antingen uppåt eller neråt till "Storage card" och gå sedan med styrpinnen åt höger för att komma åt nivåerna i undermapparna. Gå med styrpinnen uppåt eller neråt till mappen "Music" och öppna den genom att gå med styrpinnen åt höger en gång till.
8. Mappen "Music" innehåller en lista med alla MP3-filer. För att välja en av dem, bläddra helt enkelt igenom listan till den med styrpinnen och tryck på vänster tumtangenta.
9. Listan kommer nu att stängas och musiken kommer att startas.
10. Filnamnet kommer att visas på punktdisplayen. De första tre punktcellerna visar i procent hur mycket av MP3-filen som redan har spelats. Kortkommandot "bindestreck med B7B8B9" kommer också att ge denna information via talsyntesen.
11. Musiken kan stoppas och starta om från samma ställe genom att trycka på den vänstra tumtangenta en gång till.
12. Under uppspelning kan B2-tangenten tryckas för att spola tillbaka ungefär 10 sekunder och B5 för att spola framåt 10 sekunder.
13. För att stoppa musiken, tryck på den högra tumtangenta.
14. Volymen hos MP3-spelaren kan justeras genom att trycka den absolut yttersta systemknappen S4 tillsammans med en av punkt tangenterna (enhetsvolym).
15. För att avsluta MP3-spelaren, tryck och håll inne en av systemknapparna: Med S1, S2 eller S3 kommer MP3-spelaren att fortsätta spela i bakgrunden. S4 kommer att stoppa spelaren.

Bakgrundsmusik kan spelas medan du arbetar i Ordbehandlaren.

Repetition: S1 öppnar Ordbehandlaren, S2 öppnar Kalendern, S3 Pronto-menyn och S4 växlar till viloläget.

Slå av Pronto!

Hur slår vi av Pronto!?

Genom att trycka den yttersta högra systemknappen (S4) i några sekunder kommer Pronto att växla till viloläget.

Om du glömmer att slå av Pronto! behöver du inte oroa dig för ett tomt batteri. Den automatiska avstängningsfunktionen är inställd så att Pronto! kommer att slå av sig själv om den inte har använts eller inga MP3-filer har spelats på 10 minuter.

Pronto! kan fortfarande meddela datum och tid, ange batteristatusen eller påminna om en kalenderbokning.

I fall Pronto! inte kan "väckas" genom att trycka på S1, S2 eller S3 i några sekunder och inte kan meddela tiden vid kort tryckning på S4 har Pronto! antingen stängts av helt och hållet eller så har den tvingats in i viloläget eftersom batteriet skyndsamt behöver laddas. I detta tillstånd kommer data som inte sparats endast att hållas kvar i några timmar; Pronto! måste dock anslutas till nätspänningen så snabbt som möjligt för att ladda batteriet och undvika förlust av data. När den väl är ansluten till elnätet kan Pronto! väckas ur det påtvingade viloläget på vanligt sätt genom att trycka S1, S2 eller S3 i några sekunder.

Pronto! är en Windows CE-enhet och som sådan stängs den vanligtvis inte ner helt och hållet. Om enheten stängs ner helt och hållet antingen genom brist på ström eller vid genomförande av en systemomstart måste man räkna med dataförluster. En fullständig nedstängning indikeras av en tydlig fallande tvåtonssignal och att punktdisplayen växlar till texten "off".

Appendix x1: Översikt

x1.1 Kort enhetsöversikt

Pronto! 18 V3

- Ovansidan: 8-punkts punkttangentbord, 2 tumtangenter, högtalare, 18-cells punktdisplay med 18 cursor routing-tangenter, 6 runda displayknappar (3 på vardera sidan av punktdisplayen), 4 runda systemknappar
- Framsidan: Styrpinnen, inspelningsknappen
- Baksidan (från vänster till höger): Nätspänningsanslutning (laddare), SD-minneskortsfack, seriellt gränssnitt, USB-gränssnitt (master), anslutning för hörlurar (stereo), anslutning för mikrofon, mini-USB-gränssnitt (slav)

Pronto! QS

- Ovansidan: Standardtangentbord (alfanumeriskt), högtalare
- Framsidan: Styrpinnen, 4 fyrkantiga systemknappar, inspelningsknappen
- Högra sidan: Rund på-/avknapp
- Vänstra sidan: Volymreglage (ratt), anslutning för mikrofon, anslutning för hörlurar (stereo)
- Baksidan (från vänster till höger): Nätspänningsanslutning (laddare), seriellt gränssnitt, mini-USB-gränssnitt (slav), SD-minneskortsfack, USB-gränssnitt (master)

Pronto! 40

- Ovansidan: Tangentbord (standard alfanumeriskt eller 8-punkts punkttangentbord med 2 tumtangenter), 2 tangentbordslås, högtalare, rund inspelningsknapp, 40-cells punktdisplay med 40 cursor routing-tangenter, 6 runda displayknappar (3 på vardera sidan av punktdisplayen)
- Framsidan: Styrpinnen, 4 runda systemknappar, 2 fyrkantiga tumtangenter
- Högra sidan: Rund på-/avknapp, USB-gränssnitt (master), mini-USB-gränssnitt (slav), SD-minneskortsfack, seriellt gränssnitt
- Vänstra sidan: Volymreglage (ratt), anslutning för mikrofon, anslutning för hörlurar (stereo), nätspänningsanslutning (laddare)

x1.2 Termer och förkortningar som används

ActiveSync = kommunikationsprogram för datautbyte med datorn under Windows 2000/XP.

Program = allmän term för alla funktioner och program

Knapp = bekräftar en åtgärd

Blåtand = trådlös kommunikation

Punkttangenter = B0 till B9

Minneskort = mobil databärare (minneskort)

Utforskaren = tillgång till filer, mappar och minneskort
Dialogruta = uppsättning av olika inställningar och kommandon
Displayknappar = för kontroll av punktdisplayen, D1 till D6
Alternativ = allmän term för komponenter i en meny eller dialogruta
Kortkommando = tangentkombination eller snabbtangent
Meny = lista som innehåller alternativ (program, dialogrutor, undermenyer, kommandon)
Mobile Device Center = kommunikationsprogram för datautbyte med datorn under Windows Vista / Windows 7
Styrpinne = kontrollerar rörelser, S-upp till S-mitten
Mapp = en lista med filer och mappar, t.ex. mappen "Edit" (katalog)
Positionstangenter = P-tangenter, för cursor routing på en punktdisplay
Systemknappar = för att få tillgång till program eller förfrågningar, S1 till S4
Undermeny = lista med ytterligare menyalternativ
QWERTY = betyder standardtangentbord

x1.3 Generella akustiska signaler och meddelanden

1. Slå på (starta) PRONTO med på-/avknappen:

- Melodi låg-hög.
- Punktdisplay: BAUM Pronto.

2. Slå av PRONTO (på-/avknappen) (stäng ner operativsystemet):

- Melodi hög-låg.
- Punktdisplay: off.

3. Stäng av, stäng alla program med S4 (viloläget):

- Melodi hög-låg (kort)

4. Starta/öppna program från viloläget:

- Melodi låg-hög (kort)

Möjliga felmeddelanden efter att du har slagit på:

1. Ingen laddare och batterinivån låg

- Melodi hög-hög-låg
- Punktdisplay: Battery low.

När du trycker på systemknapparna: Lågt pip.

PRONTO startar inte. Anslut laddaren och ladda upp batteriet.

2. Punktmeddelanden vid laddning:

- Charging...: AC-adaptorn är ansluten, laddningen fortsätter, Pronto är avslagen.
- battery full: AC-adaptorn är ansluten, laddningen har slutförts, Pronto är avslagen.

x1.4 Tekniska data för alla enheter

Pronto 18 V3:

Dimensioner i mm (bredd x djup x höjd): 174x92x32

Vikt: ung. 450 g

Batteriladdning: 5 V / max. 2,5 A

Batterikapacitet: 7,2 V / 2500 mAh

Minne:

- DRAM: 128 MB (internt arbetsminne)
- Inbyggd Flashdisk: 32 MB
- Internt Flash-minne (flashdisk): 1 GB (950 MB användardata)
- Externt minne (minneskort): SD- eller SDHC-minneskort
- Processor: 520 MHz

Anslutningar:

- Seriell
- USB (master)
- Mini-USB (slav)
- Blåttand
- WLAN
- Stereohörlurar
- Mikrofon (mono)
- Laddare

Pronto! QS:

Dimensioner i mm (bredd x djup x höjd): 253x92x19

Vikt: ung. 600 g

Batteriladdning: 5 V / max. 2,5 A

Batterikapacitet: 7,2 V / 2500 mAh

Minne:

- DRAM: 128 MB (internt arbetsminne)
- Inbyggd Flashdisk: 32 MB
- Internt Flash-minne (flashdisk): 1 GB (950 MB för användardata)
- Externt minne (minneskort): SD- eller SDHC-minneskort
- Processor: 520 MHz

Anslutningar:

- Seriell
- USB (master)
- Mini-USB (slav)
- Blåttand
- WLAN
- Stereohörlurar
- Mikrofon (mono)
- Laddare

Pronto! 40:

Dimensioner i mm (bredd x djup x höjd): 297x152x27

Vikt: ung. 1300 g (inkl. standardtangentbordsmodul)

Batteriladdare: 5 V / max. 2,5 A
Batterikapacitet: 7,2 V / 2500 mAh

Minne:

- DRAM: 128 MB (internt arbetsminne)
- Inbyggd Flashdisk: 32 MB
- Internt Flash-minne (flashdisk): 1 GB (950 MB för användardata)
- Externt minne (minneskort): SD- eller SDHC-minneskort
- Processor: 520 MHz

Anslutningar:

- Seriell
- USB (master)
- Mini-USB (slav)
- Blåtand
- WLAN
- Stereohörlurar
- Mikrofon (mono)
- Laddare

För alla enheter:

Batterilivslängd: Ung. 10-12 timmar (längre med inaktiverat WLAN-chip)

Viloläge: Flera dagar

Observera: Livslängden är beroende av den elektriska effektförbrukningen (blåtand, WLAN, storleken på minneskortet, USB-minnet)

Batteri: Li-Ion

AC-adapter: 100-240 Volt, 50-60 Hz

Operativsystem: Windows CE

Räckvidd för blåtand: Ung. 10 meter

Filformat:

- Ordbehandlaren: Rich Text Format (RTF), textformat (TXT)
: Endast läsning: PDF, DOC, DOCX, HTML
- Röstinspelning: MP3, WAV
- Musik: MP3, WAV, WMA
- Daisy-standard: 2.02

Systemkrav för PC-anslutning:

- Windows 2000 eller Windows XP med Microsoft ActiveSync.
- Windows Vista eller Windows 7 med Microsoft Mobile Device Center.

x1.5 Kontakt och support

PRONTO-utvecklingsteamet svarar gladeligen på frågor och tar emot förslag. En internationell e-postdiskussionsgrupp har lagts upp speciellt för detta ändamål. Den är öppen för alla frågor och förslag kring PRONTO, för att dela med sig av erfarenheter till andra PRONTO-användare och för att få tillgång till expertsupport från våra affärspartners.

För att gå med, skicka ett mail till listserv@listserv.baum.de med textinnehållet "SUBSCRIBE Prontoint "efternamn, förnamn" (utan citattecken).

Hjälp finns att få via telefon genom att ringa till +49 (0)6223/49090.

BAUM Retec AG
In der Au 22
D-69257 Wiesenbach
Germany
Tfn: +49 (0) 62 23 / 49 09 0
Fax: +49 (0) 62 23 / 49 09 399
E-post: info@baum.de
Internet: www.baum.de

Var god kontakta vår serviceavdelning i fall problem uppstår med enheten:

BAUM Retec AG
Service
In der Au 22
D-69257 Wiesenbach
Germany
Tfn: +49 (0) 62 23 / 49 09 0
Fax: +49 (0) 62 23 / 49 09 399
E-post: service@baum.de

Skador och reparationer

Vad kan göras i fall din Pronto inte längre reagerar?

- Kontrollera alla gränssnitt och anslutningar. Vänd dig till manualen för att kontrollera att rätt gränssnitt används.
- Är nätspänningsanslutningen (laddaren) ansluten till ett aktivt eluttag?

Använd aldrig en skadad enhet! Dra ut AC-adaptern. Vänligen kontakta omedelbart din lokala återförsäljare eller BAUM Retec AG:s serviceavdelning.

Appendix x2: Kommandolista (för referens)

Här hittar du alla kortkommandon och tangentkombinationer som du kan använda på Pronto (punktläge och QWERTY-läge).
Sorterade efter program.

X2.1 Allmänna kommandon:

Mellanslag: "Höger tumtangent (B0), mellanslagstangenten
Kommandotangenten: Vänster tumtangent (B9)
Radera tecken till vänster om markören: B7, Backsteg
Avbryttangent (Escape-funktion): B9B7B8, D4, Esc-tangenten
Enhetens huvudvolym: Pronto 18: „S4 tillsammans med B-tangent“ (B1 till B8), Pronto QS / Pronto 40:
Liten ratt (reglage) på vänstra sidan.
Tal på/av (endast Pronto 18): D2D5
Sammanhangskänslig hjälp: B2B6B9, F1 (FN+1)
Tangentlås på/av: S2S3
Kommandomeny: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten
Stäng av (viloläge): S4 lång
Visa Pronto-version: „V tillsammans med B7B8B9B0“, Skift+Ctrl+v
Slå av/på enheten helt och hållet: Pronto 18: S1+S4, Pronto 40 / Pronto QS: På-/avknappen

Stoppa och starta om Pronto-programvaran: D1D4B3B6, FN+vänster Skift+vänster Ctrl+7 (OBS: Förlust av icke sparade data)

Stoppa Pronto-programvaran: D1D4B2B5, FN+vänster Skift+vänster Ctrl+6 (OBS: Förlust av icke sparade data)

Starta Pronto-programvaran (efter stopp): D1D4B1B4, FN+vänster Skift+6

Starta om operativsystemet och Pronto-programvaran: D1D4B1B2B4B5, FN+vänster Skift+0

Uppdatering av Pronto-programvara och operativsystem:

Installation av fullständig Pronto-version (fullständig installation) från mappen "Storage Card\Install":

D1D4B1B4B7B8, FN+vänster Skift+1

Installation av enskilda Pronto-programvarukomponenter (uppdatering) från mappen "Storage

Card\Update": D1D4B7B8, FN+vänster Skift+vänster Ctrl+1

Installation av operativsystem från mappen "Storage Card\OS5": D1D4B2B3B5B7B8, FN+vänster Skift+3

Installation av BIOS (inte på Pronto 18): FN+vänster Skift+vänster Ctrl+3, D1D4B1B2B3B4

X2.2 Systemknappskommandon:

Korta tryck på systemknapparna:

Temperatur = S1 en gång

Lufttryck = S1 två gånger

Höjd (ovanför havsytan, uppskattning) = S1 tre gånger

Lista påminnelser = S2 en gång

Tidtagning = S2 två gånger

Räkna ned = S2 tre gånger

Kommandomenyn = S3 (identiskt med B9B3B5 eller Alt-tangenten)

Batteristatus = S3 två gånger

Kompass = S3 tre gånger

Tid = S4 en gång

Datum = S4 två gånger

Långa tryckningar på systemknapparna:

Tangentlås på/av: S2S3

Stäng av (viloläge): S4

Slå på: S1, S2, eller S3

Stäng av helt och hållet: På Pronto 18 S1S4 lång, på-/avknappen på Pronto QS och Pronto 40 (var god använd inte detta i vanliga fall)

X2.3 Kör program

Öppna Prontos huvudmeny (tillgång till alla program): S3 lång, Windows-tangenten

Ordbehandlaren = S1 lång, o tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+o

Kalendern = S2 lång, k tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+k

Adressboken = a tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+a

Utforskaren = f tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+f

PDF-dokumentläsaren = u tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+u

Mobil = l tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+l

Kalkylatorn = y tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+y

Pronto som punktdisplay (inte på Pronto QS) = p tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+p

Fickminnet = c tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+c

Inspelning = tryck på REC-knappen och fortsätt hålla den intryckt

Spela upp senaste inspelningen = REC-knappen kort en gång

DAISY-spelaren = d tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+d

Mp3-spelaren = m tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+m

E-post = e tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+e

MSN Messenger = n tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+n

Webbläsaren = w tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+w

Internetradion = r tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+r

Tidtagning och alarm (alarm, stoppur, timer) = t tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+t

Inställningar = s tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+s

Anslutningar (för blåtand på/av) = i tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+i

Hjälp (manual) = h tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+h

Var är jag = minus tillsammans med B7B8B9 (-+B7B8B9), Windows-tangenten+minus

Senaste meddelandet = nummertecknen tillsammans med B7B8B9 (#+B7B8B9), Windows-tangenten+3

Lista över meddelanden = plus tillsammans med B7B8B9 (++)B7B8B9), Windows-tangenten+Plus

X2.4 Ordbehandlaren

Öppna Ordbehandlaren: S1 lång, o+B7B8B9, Windows-tangenten+o

Punktmönster för punktläget:

Tecken: Vänster B1, höger B4, aktuellt B1B4
Ord: Vänster B2, höger B5, aktuellt B2B5
Mening: Vänster B3, höger B6, aktuell B3B6
Rad: Vänster B1B2, höger B4B5, aktuell B1B2B4B5
Stycke: Vänster B1B3, höger B4B6, aktuellt B1B3B4B6
Sida: Vänster B2B3, höger B5B6, aktuell B2B3B5B6
Början: B1B2B3, slutet B4B5B6, allt B1B2B3B4B5B6

Läsning: Punktmönster+B9B0

Markering: Punktmönster för "aktuell"+B9

Radera: Punktmönster för "aktuell"+B9B7

Radera markerad text: B7B9

Radera tecken till vänster om markören: B7

Avlägsna markering: B7B8B9

Gå till början av raden och läs upp raden: B1B2B3B7B9(B0)

Gå till slutet av raden och läs upp raden: B4B5B6B8B9(B0)

Ny rad: B9B8B4B5 eller B8

Nytt stycke: B9B8B4B6

Ny sida: B9B8B5B6

Infoga tabb: B9B8B4

Windows-liknande kommandon för QWERTY-läget:

Läsa textpassager:

Tecken vänster / höger: Pil vänster / höger
Ord vänster / höger: Ctrl+pil vänster / höger
Mening vänster / höger: Ctrl+mindre än / Skift+Ctrl+mindre än
Aktuell mening: Skift+Ctrl+mellanslag
Föregående / nästa rad: Pil upp / pil ner
Läs upp tecken: Ctrl+punkt
Bokstavera ord: Ctrl+kommatecken

Gå till-kommandon:

Föregående / nästa sida: PgUp / PgDn (FN+pil upp / FN+pil ner)
Början / slutet av raden: Home / End (FN+pil vänster / FN+pil höger)
Början / slutet av dokumentet: Ctrl+Home / Ctrl+End (FN+Ctrl+pil vänster / pil höger)

Markera text från markörpositionen:

Tecken höger / vänster: Skift+pil höger / Skift+pil vänster
Ord höger / vänster: Skift+Ctrl+pil höger / Skift+Ctrl+pil vänster
Nästa / föregående rad: Skift+pil ner / Skift+pil upp
Till slutet av raden: Skift+End (FN+Skift+pil höger)
Till början av raden: Skift+Home (FN+Skift+pil vänster)
Till början av dokumentet: Skift+Ctrl+Home (FN+Skift+pil vänster)
Till slutet av dokumentet: Skift+Ctrl+End (FN+Skift+Ctrl+pil höger)
Markera hela texten: Ctrl+a

Markera block start / block slut: Ctrl+mellanslag
Avlägsna markering: Esc

Raderingskommandon:

Radera tecken till vänster om markören: Backstegstangenten

Radera aktuellt tecken: Del-tangenten

Radera markerad text: Ctrl+Del

Ny rad: Enter-tangenten

Nytt stycke: Skift+Enter

Ny sida: Skift+Ctrl+Enter

Infoga tabb: Tabb-tangenten (TABB)

Menyfunktioner

Öppna/stäng meny: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: f+B9B8, Alt+a

Nytt dokument (dialog) = "n tillsammans med B8B9", Ctrl+n

Öppna dokument (dialog) = "o tillsammans med B8B9", Ctrl+o

Stäng dokument = "u tillsammans med B8B9", Ctrl+u

Spara dokument = "s tillsammans med B8B9", Ctrl+s

Spara som (dialog) = "a tillsammans med B8B9", Ctrl+Skift+s

Skydda/ta bort skydd på text = "z tillsammans med B8B9", Ctrl+z

Föregående fil = "Minus tillsammans med B8B9", Ctrl+minus

Lista över öppna filer = "l tillsammans med B8B9", Ctrl+l

Menyn Redigera: r+B9B8, Alt+r

Klipp ut = "x tillsammans med B8B9", Ctrl+x

Kopiera = "c tillsammans med B8B9", Ctrl+c

Klistra in = "v tillsammans med B8B9", Ctrl+v

Radera = B9B7, Ctrl+Del-tangenten

Markera början/slut på textblock = B9B1B4, Ctrl+mellanslag

Markera hela texten = B9B8B1B2B3B4B5B6, Ctrl+a

Sök (dialog) = "B1B4B5B6B8B9", Ctrl+f

Sök nästa = "B2B5B8B9", F3 (FN+3)

Ersätt (dialog) = "h tillsammans med B8B9", Ctrl+h

Sätt bokmärke = "= tillsammans med B8B9", Ctrl+m

Hoppa till bokmärke = "m tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+m

Menyn Infoga: i+B8B9, Alt+i

Infoga datum = "B2B6B8B9", F5 (FN+5)

Infoga tid = "B2B3B5B8B9", F6 (FN+6)

Ny rad (radmatning) = B8 eller B9B8B4B5, Enter-tangenten

Nytt stycke = B9B8B4B6, Skift+Enter

Ny sida (sidmatning) = B9B8B5B6, Skift+Ctrl+Enter

Infoga tabb = B9B8B4; Tabb-tangenten

Menyn Uppläsning: g+B8B9, Alt+g
Börja läsa från markörpositionen = B9 eller r+B8B9, S-mitten, Skift+Ctrl+r
Läs aktuell mening = B9B0B3B6, Skift+Ctrl+mellanslag
Läs mening till vänster = B9B0B3, Ctrl+mindre än
Läs mening till höger = B9B0B3, Ctrl+större än
Läs markerad text = "k tillsammans med B8B9", Ctrl+k

Funktioner under löpande läsning:
Starta/stoppa: S-mitten, B9 eller r+B8B9, Skift+Ctrl+r
Långsammare: S-upp
Snabbare: S-ner (normal uppläsningshastighet kommer inte att påverkas)
2 ord bakåt: S-vänster
2 ord framåt: S-höger

Menyn Verktyg: t+b8B9, Alt+t
Punkt (dialogruta för att aktivera ordbrytning, formateringstecken etc.)
Position i text = "p tillsammans med B8B9", Ctrl+p
E-post (funktioner när E-postprogrammet har startats)
Förkortning (Grade 2) (Funktioner för att förkorta punktskrift. Endast tillgängliga i fall ett konverteringsprogram existerar.)
Minnesinformation: "q tillsammans med B9B8", Ctrl+Skift+q

X2.5 Kalendern

Öppna Kalendern: S2 lång, k tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+k

Bläddra i kalendern:

Nästa / föregående bokning: S-ner / S-upp, B9B6 / B9B3, pil ner/upp
Nästa / föregående dag: S-höger / S-vänster, B9B4 / B9B1, pil höger/vänster
Nästa / föregående vecka: B5 / B2, Skift+pil vänster / Skift+pil höger
Nästa / föregående månad: B4B5 / B1B2, Skift+pil ner / Skift+pil upp
Nästa / föregående halvår: B4B6 / B1 B3, PgDn / PgUp, (FN+pil ner / FN+pil upp)
Nästa / föregående år: B5B6 / B2B3, Skift+PgDn / Skift+PgUp (FN+Skift+pil ner / FN+Skift+pil upp)

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a

Ny bokning (dialog) = "n tillsammans med B8B9", Ctrl+n

Öppna bokning (dialog) = S-mitten, B9, Enter-tangenten

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r

Radera bokning = B9B7, Del-tangenten

Sök (dialog) = "B1B4B5B6B8B9", Ctrl+f

Sök nästa = "B2B5B8B9", F3 (FN+3)

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g

Gå till idag = B0 eller "d tillsammans med B8B9", mellanslag

Gå till datum (dialog) = "j tillsammans med B8B9", Ctrl+j

Bokning

Nästa = S-ner, B9B6, pil ner

Föregående = S-upp, B9B3, pil upp

Dag

Nästa = S-höger, B4, pil höger

Föregående = S-vänster, B1, pil vänster

Vecka

Nästa = B5, Skift+pil höger

Föregående = B2, Skift+pil vänster

Månad

Nästa = B4B5, Skift+pil ner

Föregående = B1B2, Skift+pil upp

Halvår (sex månader)

Nästa = B4B6, PgDn (FN+pil ner)

Föregående = B1B3, PgUp (FN+pil upp)

År

Nästa = B5B6, Skift+PgDn (FN+Skift+pil ner)

Föregående = B2B3, Skift+PgUp (FN+Skift+pil upp)

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Filter (dialog): r+B7B9, Ctrl+r

Bokningar med punkt (dialog)

Bokningar med tal (dialog)

Datum med punkt (dialog)

Datum med tal (dialog)

Återställ till standardinställningarna

I dialogrutorna för visning av bokningar och datum:

Kommandomenyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Flytta åt vänster = l+B9B8, Ctrl+pil vänster

Flytta åt höger = r+B9B8, Ctrl+pil höger

Flytta till början = b+B8B9, Ctrl+pil upp

Flytta till slutet = e+B8B9, Ctrl+pil ner

Dölj objekt = h+B8B9, Ctrl+Del

Visa objekt = s+B8B9, Ctrl+Insert (FN+Ctrl+Del)

Återställ till standardinställningarna

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Påminnelse (dialog)

Rensa gamla bokningar (dialog)

Hantera kategorier (dialog)

Exportera (dialog)

Importera (dialog)

X2.6 Adressboken

Öppna Adressboken: a tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+a

Bläddra i adressboken och dess fält:

Första / sista kontakten: B1B2B3 / B4B5B6, Ctrl+pil upp / Ctrl+pil ner

Föregående / nästa kontakt: S-upp / S-ner, B3 / B6, pil upp / pil ner

Ett fält åt vänster / höger: S-vänster / S-höger, B1 / B4, pil vänster / pil höger

5 fält åt vänster / höger: B2 / B5, Skift+Ctrl+pil vänster / Skift+Ctrl+pil höger

Kontaktens första / sista fält: B1B2 / B4B5, Home / End (FN+pil vänster / FN+pil höger)

10 kontakter bakåt / framåt: B2B3 / B5B6, PgUp / PgDn

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a

Ny kontakt (dialog) = "n tillsammans med B8B9", Ctrl+n

Öppna kontakt (dialog) = S-mitten, B9, Enter-tangenten

Uppdatera (aktualisera) = k+B8B9, F5 (FN+5)

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r

Radera kontakt = B9B7, Del-tangenten

Sök (dialog) = "B1B4B5B6B8B9", Ctrl+f

Sök nästa = "B2B5B8B9" F3 (FN+3)

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g

Första kontakten = B1B2B3, Ctrl+pil upp

Sista kontakten = B4B5B6, Ctrl+pil ner

Föregående kontakt = S-upp, B3, pil upp

Nästa kontakt = S-ner, B6, pil ner

Kontaktens första fält = B1B2, Home (FN+pil vänster)

Kontaktens sista fält = B4B5, End (FN+pil höger)

Ett fält åt vänster = S-vänster, B1, pil vänster

Ett fält åt höger = S-höger, B4, pil höger

5 fält åt vänster = B2, Skift+Ctrl+pil vänster

5 fält åt höger = B5, Skift+Ctrl+pil höger

10 kontakter bakåt = B2B3, PgUp (FN+pil upp)

10 kontakter framåt = B5B6, PgDn (FN+pil ner)

Gå till kontakt x på sorteringsposition y = y+B8B9, Skift+Ctrl+y

Gå till kontakt i listan som startar med sträng = z+B8B9, Skift+Ctrl+z

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Val av maskprofil (dialog) = "w tillsammans med B8B9", Ctrl+w

Nästa mastermask för visning = "m tillsammans med B9", Skift+Ctrl+m

Föregående mastermask för visning = "m tillsammans med B8B9", Ctrl+m

Använd favoritmask = "u tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+u

Sorteringsordning (dialog) = "o tillsammans med B8B9", Ctrl+o

Filter (dialog) = "t tillsammans med B8B9", Ctrl+t

Inget filter = "k tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+k (endast i fall ett filter har satts)
Namn på fält (dialog)
Återställ till standardinställningarna

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Detaljerad info om kontaktfält = "plus tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+0

Läs detaljerade maskfält = "/" tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+4

Ring telefonnummer = "(" tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+1

Spela upp toner = ")" tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+2

Skicka SMS till nummer = "likhetstecken tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+3

Förflyttning i listor:

Nästa / föregående objekt: S-höger / S-vänster, B9B4 / B9B1, pil höger / pil vänster

Hoppa direkt till objekt: Skriv den första bokstaven (de första bokstäverna) i dess namn eller positionsnummer.

Början eller slutet av listan: B1B2B3B7B9 / B4B5B6B8B9, Home / End (FN+pil vänster / FN+pil höger)

Öppna/stäng kommandomenyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Ställ in maskfältens positioner i vallistor:

Flytta åt vänster = l+B9B8, Ctrl+pil vänster

Flytta åt höger = r+B9B8, Ctrl+pil höger

Till början = b+B9B8, Ctrl+pil upp

Till slutet = e+B9B8, Ctrl+pil ner

Dölj = h+B9B8, Ctrl+Del

Visa = s+B9B8, Ctrl+Insert (FN+Ctrl+Del)

X2.7 Utforskaren

Öppna Utforskaren = f tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+f

Öppna/stäng menyn = S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a

Ny mapp (dialog) = "n tillsammans med B8B9", Ctrl+n

Öppna = "o tillsammans med B8B9", Ctrl+o eller Enter-tangenten

Radera = B9B7 eller d+B8B9, Del-tangenten

Byt namn (dialog) = "r tillsammans med B8B9", Ctrl+F2 (FN+Ctrl+2)

Egenskaper (dialog) = "p tillsammans med B8B9", Alt+Enter

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r

Klipp ut = "x tillsammans med B8B9", Ctrl+x

Kopiera = "c tillsammans med B8B9" Ctrl+c

Klistra in = "v tillsammans med B8B9", Ctrl+v

Markera fil eller mapp = B0, mellanslag

Markera allt = B9B8B1B2B3B4B5B6, Ctrl+a

Invertera markering = "i tillsammans med B8B9", Skift+mellanslag

Sök (dialog) = "? tillsammans med B8B9", Ctrl+f
ZIP-arkiv = "z tillsammans med B8B9", Ctrl+z
Extrahera från ZIP-arkiv = "u tillsammans med B8B9", Ctrl+u

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v
Filter (Detaljer-dialog)
Sortering (dialog)

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t
Minne = "m tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+m
Läs antalet markerade objekt = "k tillsammans med B8b9", Ctrl+k
ZIP-förlopp

X2.8 Daisy-spelaren

Öppna Daisy-spelaren: d+B9B7B8, Windows-tangenten+d
Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a
Uppdatera ny bokhylla = n+B8B9, Ctrl+n, D1D3D4D5
Spela/stoppa: S-mitten, B9, Enter-tangenten
Boklista (dialog) = o+B9B8, Ctrl+o, D1D3D5
Stäng bok = u+B8B9, Ctrl+u, D2D4D5D6
Avsluta Daisy-spelaren = B1B4B5B8B9, Alt+F4 (Alt+FN+4)

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r
Sök (dialog) = B1B4B5B6B8B9, Ctrl+f, D1D2D4

Menyn Bokmärke: b+B8B9, Alt+b
Gå till (dialog) = #+B9B8, Ctrl+3, D3D4D5D6
Föregående = B2, D2D3D6, PgUp (FN+pil upp)
Nästa = B5, D3D5D6, PgDn (FN+pil ner)
Infoga = B9B8, D2D3D5D6, Insert-tangenten (FN+Del)
Radera (dialog) = B7, D1D2D3, Del-tangenten
Radera alla = B9B7, D1D2D3D4D5D6, Skift+Ctrl+Del

Menyn Verktyg: t+B9B8, Alt+t
Hastighet (dialog) = s+B8B9, D2D3D4, Ctrl+s
Snabbare: ++B9B8, D4D5, Ctrl+plus
Långsammare: -+B9B8, D1D2, Ctrl+minus
Välj minnestyp (dialog)

Menyn Navigera: n+B9B8, Alt+n
Högre nivå = B3, D1, S-upp, pil upp
Lägre nivå = B6, D3, S-ner, pil ner
Bakåt = B1, D1D3, S-vänster, pil vänster
Framåt = B4, D4D6, S-höger, pil höger
Början av boken = B9B1B2B3, D1D4, Home (FN+pil vänster)
Slutet av boken = B9B4B5B6, D3D6, End (FN+pil höger)
Gå till sida (dialog) = p+B8B9, D1D2D3D4, Skift+Ctrl+p
Spola framåt = B2B6B7B9B8, D5D6, Skift+Ctrl+pil höger
Spola bakåt = B3B5B9B8, D2D3, Skift+Ctrl+pil vänster

Menyn Information: o+B9B8, Alt+o
Bokinformation = i+B9, D2D4, Skift+Ctrl+i
Var är jag = r+B9, D1D2D3D5, Ctrl+r

X2.9 MP3-spelaren

Öppna MP3-spelaren: m+B9B7B8, Windows-tangent+m
Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

I huvudmenyn:

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a
Öppna (dialog) = o+B9B8, D1D3D5, Ctrl+o

Menyn Uppspelning: u+B8B9, Alt+u
Start/paus = B9, D6, S-mitten, Enter
Stopp = B0, D4, Ctrl+Enter eller mellanslag
Nästa spår (titel) = B4, D3, S-ner, pil ner
Föregående spår (titel) = B1, D1, S-upp, pil upp
Första spåret (titeln) = B3, D1D4, Home (FN+pil vänster)
Sista spåret (titeln) = B6, D3D6, End (FN+pil höger)
10 sekunder framåt = B5, D4D6, S-höger, pil höger
10 sekunder bakåt = B2, D1D3, S-vänster, pil vänster
Återuppta uppspelningen från senaste stopposition = r+B8B9, D1D2D3D5, Ctrl+r

Menyn Ljud: l+B9B8, Alt+l
Menyn Volym
Öka = B4B5, Ctrl+pil upp
Sänk = B1B2, Ctrl+pil ner

Menyn Spellista: (dialog) = s+B8B9, D1D3D4D6, Alt+s
Menyn Information (dialog) = o+B9B8, D1D3D4, Alt+o

Menyn i spellistans dialogruta:

Spellista: y+B8B9, Ctrl+y
Ny: n+B9B8, D1D3D4D5, Ctrl+n
Öppna (dialog): o+B9B8, D1D3D5, Ctrl+o
Spara som: s+B8B9, D1D2D4, Ctrl+s
Redigera: r+B8B9, Ctrl+r
Lägg till:
Fil = ++B8B9, D2D3D5, Ctrl+plus
Mapp = /+B8B9, D2D5D6, Ctrl+snedstreck
Flytta:
Vänster = l+B8B9, D1D2, Ctrl+pil vänster
Höger = r+B8B9, D4D5, Ctrl+pil höger
Början = b+B8B9, D1D2D3, Ctrl+pil upp
Slutet = z+B8B9, D4D5D6, Ctrl+pil ner
Radera = B9B7, Del-tangenten

X2.10 Fickminnet

Öppna Fickminnet och påbörja inspelning: Tryck och håll inne REC-knappen
Stoppa inspelningen och stäng Fickminnet: Släpp upp REC-knappen

Öppna fillistan och spela upp inspelning: Kort tryck på REC-knappen

Öppna Fickminnet: c+B9B7B8, Windows-tangenten+c

I huvudvyn (fillistan):

Välj inspelning: Styrpinnen upp/ner, pil upp/ner

Spela upp inspelning: B9, styrpinnen i mitten, Enter-tangenten

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a

Radera: B9B7 eller d+B8B9, Del-tangenten

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Spela upp inspelning: B9, S-mitten, Enter

Starta inspelning: s+B8B9, Ctrl+s

Tryck på någon tangent för att stoppa inspelningen. Maximal inspelningstid för varje inspelning är 10 minuter.

Spela in CardID

Spela in en alarmsignal

Inspelningskvalitet: q+B9B8, Ctrl+q

X2.11 Alarmet

Öppna alarm: t+B9B7B8, Windows-tangenten+t, välj sedan Alarm.

I huvudvyn:

Välj alarm: Styrpinnen upp/ner, pil upp/ner

Öppna alarminställningar: B9, D6, Enter

X2.12 Tidtagning

Öppna tidtagningen: S2 kort två gånger eller t+B9B7B8 resp. Windows-tangenten+t och välj sedan Tidtagning.

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Tidtagning: t+B8B9, Alt+t

Starta: B4, Ctrl+mellanslag

Pausa: B5, mellanslag

Fortsätt: B5, mellanslag

Stoppa: B6, Ctrl+mellanslag

Meddela slut-/mellantid: B8, Skift+Ctrl+z

Menyn Ljud vid tidtagning: g+B8B9, Alt+g

Ljud varje sekund: B1, Ctrl+1

Ljud var 10:e sekund: B2, Ctrl+2

Säg varje minut: B3, Ctrl+3

Inget ljud: B7, Ctrl+0

X2.13 Räkna ned (timer)

Öppna räkna ned: S2 kort tre gånger eller t+B7B8B9 resp. Windows-tangenten+t och välj sedan Räkna ned.

Starta: s+B9, Alt+s

Stoppa: o+B9, Alt+o

Ange tid: d+B9, Alt+d

Använd tid: t+B9, Alt+t

Återstående tid: r+B9, Alt+r

Stäng räkna ned: B9 eller B9B7B8, D6 eller D4, Enter eller Esc

X2.14 Mobil

Öppna Mobil: l+B7B8B9, Windows-tangenten+l

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

I huvudvyn:

Besvara samtal = B8, Ctrl+Enter

Lägg på = B7, Del

Ring samtal (dialog) = r+B9, Ctrl+r

Anslut/koppla från = a+B9, Ctrl+a

Skicka SMS = m+B9, Ctrl+m

Läs SMS (dialog) = s+B9, Ctrl+s

Visa inlästa SMS = d+B9, Ctrl+d

Inställningar (dialog) = i+B9, Ctrl+i

Informationsfält = f+B9, Ctrl+f

Statusfält = u+B9, Ctrl+u

I dialogrutan Inställningar:

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Profil: p+B9, Ctrl+p

Ställ i förgrund vid samtal: f+B9, Ctrl+f

Avgör uppringare genom adressbok: u+B9, Ctrl+u

I dialogrutan för att ringa samtal eller skicka SMS:

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Ring: r+B9, Ctrl+r resp. Skicka: c+B9, Ctrl+c

Val av telefonnummer (dialog): t+B9, Ctrl+t

Telefonnummer: p+B9, Ctrl+p

Rensa telefonnummer: n+B9, Ctrl+Del

I dialogrutan „Skicka SMS“:

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Skicka: (dialog): c+B9, Ctrl+c

SMS-text: t+B9, Ctrl+t

Radera SMS-text: r+B9, Ctrl+Del

Antal bokstäver: l+B9, Ctrl+l

I dialogrutan "Läs SMS" resp. "Visa inlästa SMS":
Öppna/stäng meny: S3 kort, B9B3b5, Alt-tangenten
Telefonnummer: t+B9, Ctrl+t
SMS-text: x+B9, Ctrl+x
Datum: d+B9, Ctrl+d
Visningsinställningar: v+B9, Ctrl+v
Radera SMS: r+B9, Del-tangenten
Skicka: s+B9, Ctrl+s
Avgör avsändare genom adressbok: n+B9, Ctrl+n
Radera SMS-text: r+B9, Ctrl+Del
Hämta nya SMS: y+B9, Ctrl+y
Avbryt hämtning av SMS: h+B9, Ctrl+h (används inte vid normal inläsning)

X2.15 Kalkylatorn

Öppna Kalkylatorn: y+B7B8B9, Windows-tangenten+y
Öppna/stäng meny: S3 kort, B9b3B5, Alt-tangenten

Menyn Funktion: f+B8B9, Alt+f

Grundräknesätt:

Addition: +, plus

Subtraktion: -, minus

Multiplikation: *, asterisk

Division: /, snedstreck

Lika med (utför beräkning): B8 eller "=", Enter eller likhetstecken

Avancerad:

Procent: %

Roten ur: sqrt

Upphöjt till: pow

Exponentiell: exp

Naturlig logaritm: ln

10-bas 10 logaritm: log

Modulo: mod

Sinus: sin, sinr, sinh, asin

Cosinus: cos, cosr, cosh, acos

Tangens: tan, tanr, tanh, atan

Uttryck:

Pi

Euler: e

Parentes vänster: (

Parentes höger:)

Menyn Redigera: r+B9B8, Alt+r

Rensa uträkningsrad (ny uträkning): e+B9, Skift+Del

Radera tecken bakåt: B7, Backstegstangenten

Infoga och rensa senaste minnesvärdet: r+B8B9, Ctrl+r

Rensa minneslista: r+B9, Skift+Ctrl+Del

Rensa uträkningsradslistan: u+B9, Ctrl+Del

Kopiera resultatet till klippbordet: z+B8B9, Ctrl+z

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Uträkningsradslista:

Nästa värde: S-ner, l+B9, pil ner (D3 inget tal)

Föregående värde: S-upp, l+B8B9, pil upp, (D1 inget tal)

Senaste uträkningen: n+B9, Skift+pil ner

Minneslista:

Nästa värde: y+B9, PgDn (FN+pil ner)

Föregående värde: y+B8B9, PgUp (FN+pil upp)

Senaste posten i minneslistan: m+B9, Skift+PgDn (FN+Skift+pil ner)

Menyn Verktyg: t+B8b9, Alt+t

Minnesfunktioner:

Infoga senaste minnesvärde: i+B8B9, Skift+Ctrl+i

Infoga i minneslistan: i+B9, Skift+Ctrl+h

Addera till senaste minnesvärdet (M-plus): ++B8B9, Ctrl+plus

Subtrahera från senaste minnesvärdet (M-minus): -+B8B9, Ctrl+minus

Säg senaste minnesvärdet: s+B9, Skift+Ctrl+s

Läs upp uträkningsraden: a+B9, Skift+Ctrl+a

Inställningar (dialog): o+B9, Skift+Ctrl+o

Menyn Användarkonstanter: k+B8B9, Alt+k

x:

Infoga x i uträkningsrad: x

Infoga värdet av x i uträkningen

Infoga uträkningsrad i x: 1+B8B9, Skift+Ctrl+1

Säg x värde: 1+B9, Ctrl+1

y:

Infoga y i uträkningsrad: y

Infoga värdet av y i uträkningen

Infoga uträkningsrad i y: 2+B8B9, Skift+Ctrl+2

Säg y värde: 2+B9, Ctrl+2

z:

Infoga z i uträkningsrad: z

Infoga värdet av z i uträkningen

Infoga uträkningsrad i z: 3+B8B9, Skift+Ctrl+3

Säg z värde: 3+B9, Ctrl+3

Menyn Omvandling: o+B8B9, Alt+o

Fahrenheit i Celsius

Tum i centimeter

Radianer i grader

Grader i radianer

X2.16 Internetradion

Observera: För att använda detta program måste Pronto ha en aktiv anslutning till webben, dvs. via en ActiveSync-anslutning till en Internet-ansluten PC, WLAN eller via mobiltelefon och giltig RAS-/GPRS-anslutning.

Öppna Internetradion: r+B7b8B9, Windows-tangenten+r
Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

I huvudvyn:

Spela nästa/föregående funna radiostation: B4/B1, D4D6, S-höger/S-vänster, pil höger/vänster
Spela nästa/föregående sparade radiostation: B6/B3, D3/D1, S-ner/S-upp, pil ner/upp
Spela en av de 10 snabbvalsstationerna: Skriv in siffran 0 till 9
Spara aktuell radiostation på position 0 till 9: Siffra+B9B8, Ctrl+siffra

Menyn Hantera radiostationer: h+B9B8, Alt+h
Sök efter radiostationer (dialog): f+B9B8, D1D2D4, Ctrl+f

I dialogrutan „Söker efter radiostationer“:
Listan Radiostation
Textrutan Info (genre, bithastighet, position)
Knappen Sök radiostationer (dialog)

I dialogrutan Sökinställningar:
Listan Genrer
Kryssrutan Filtrera på bithastighet
Knappen Starta sökning

Menyn Snabbvalsinställningar: s+B9B8, Alt+s
Automatiskt snabbval (sparar 10 positioner): B1B2B3B4B5B6B8B9, D1D2D3D4D5D6, Ctrl+a

Menyn Uppspelning: u+B9B8, Alt+u
Spela upp: B9, D6, S-mitten, Enter
Paus/fortsätt: B0, D1D3D4D6, mellanslag
Stopp: B9B7B8, D4, Ctrl+Enter

Menyn Gå till: g+B9B8, Alt+g
Nästa radiostation: B4, D4D6, S-höger, pil höger
Föregående radiostation: B1, D1D3, S-vänster, pil vänster
Nästa snabbval: B6, D3, S-ner, pil ner
Föregående snabbval: B3, D1, S-upp, pil upp

Menyn Verktyg: t+B9B8, Alt+t
Inställningar (dialog med inställningar för uppspelning i bakgrunden)

Menyn Information: o+B9B8, Alt+o
Aktuell radiostation (dialog): u+B9B8, Ctrl+u

X2.17 E-post

Observera: För att använda detta program måste Pronto ha en aktiv anslutning till webben, dvs. via en ActiveSync-anslutning till en Internet-ansluten PC, WLAN eller via mobiltelefon och giltig RAS-/GPRS-anslutning.

Öppna E-postprogrammet: e+B7b8B9, Windows-tangenten+e

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Växla mellan mapplistan och meddelandelistan i huvudvyn: B9B1B3 eller B9B4B6, D1D3 eller D4D6, Skift+Tabb eller Tabb

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a

Nytt e-postmeddelande: n+B8B9, Ctrl+n

Ny mapp: d+B8B9, Skift+Ctrl+e

Byt namn på mapp: 2+B9, F2 (FN+2)

Öppna e-postmeddelande: B9, D6, S-mitten, Enter, Ctrl+o (startar Ordbehandlaren)

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r

Kopiera meddelande till meddelandemapp: c+B8B9, Ctrl+c

Flytta meddelande till meddelandemapp: v+B8B9, Skift+Ctrl+v

Radera meddelande eller mapp: B9B7, Del

Markera meddelande: B0, mellanslag

Markera alla meddelanden i meddelandelistan: %+B9, Ctrl+a

Invertera markering: h+B8B9, Skift+mellanslag

Menyn Åtgärder: d+B8B9, Alt+d

Skicka och ta emot (alla konton): m+B8B9, Ctrl+m

Svara (när meddelandet är stängt): r+B8B9, Ctrl+r

Svara alla (när meddelandet är stängt): y+B8B9, Skift+Ctrl+r

Svara avsändaren (när meddelandet är stängt): z+B8B9, Skift+Alt+r

Vidarebefordra (när meddelandet är stängt): w+B8B9, Ctrl+f

Växla till Inkorg: i+B8B9, Skift+Ctrl+i

Växla till Utkorg: o+B8B9, Skift+Ctrl+o

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Konton (dialog)

Mappinformation

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g

Nästa brev: B9B6, D3, S-ner, pil ner

Föregående brev: B9B3, D1, S-upp, pil upp

Första brevet i listan: B9B1B2B3B7, D1D4, Home

Sista brevet i listan: B9B4B5B6B8, D3D6, End

Kommandon i Ordbehandlaren när ett meddelande har öppnats:

Menyn Verktyg / E-post:

Brevhuvud: b+B7B8B9, F8 eller B9B1B3, D1D3, Skift+Tabb

Spara meddelande (i Utkorg): s+B9, D1D2D4D5D6, F7

Stäng meddelande: 4+B9, D1D4D5D6, F4

Svara

Svara alla

Svara avsändaren

Vidarebefordra

x2.18 MSN Messenger

Observera: För att använda detta program måste Pronto ha en aktiv webbanslutning, dvs. via en ActiveSync-anslutning till en Internet-ansluten PC eller via en mobiltelefon och giltig RAS-/GPRS-anslutning.

Öppna programmet MSN Messenger: n+B7b8B9, Windows-tangenten+n
Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a

Min status: u+B8B9, Ctrl+u

(online, upptagen, strax tillbaka, inte vid datorn, i telefon, på lunch)

Menyn Kontakter: k+B8B9, Alt+k

Hantera kontakter: c+B8B9, Ctrl+c

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Kontaktlista:

Visa alla kontakter

Visa enbart kontakter som är online

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Hantera profiler (dialog): p+B8B9, Ctrl+p

Ljudinställningar (dialog)

Inställningar (dialog)

I chattfönstret:

Menyn Konversation:

Bjud in: e+B8B9, Ctrl+e

Spara konversation som textfil: s+B8B9, Ctrl+s

Ta bort konversation: B9B7, Del

Ta bort och stäng alla konversationer

Läsningssläge, aktivera/inaktivera: l+B8B9, Ctrl+l

Objekt i dialogrutan Hantera kontakter:

Lista: Medlemskap

Lista: Kontakter

Knapp: Lägg till

Knapp: Ta bort

Knapp: Ändra medlemskap

Knapp: Blockera / Ta bort blockering

Objekt i chattfönstret:

Lista: Konversationer

Lista: Meddelande

Textruta: Text

Knapp: Skicka

Knapp: Stäng konversation

X2.19 Webbläsaren

Observera: För att använda detta program måste Pronto ha en aktiv webbanslutning, dvs. via en ActiveSync-anslutning till en Internet-ansluten PC eller med en giltig WLAN-anslutning eller via en mobiltelefon och giltig RAS-/GPRS-anslutning.

Starta Webbläsaren: w+B9B7B8, Windows-tangent+w
Öppna/stäng menyn: S3 kort, 9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a

Menyn Öppna:

Webbadress (dialog): o+B8B9, Ctrl+o

Fil (dialog)

Menyn Spara:

Aktuell sida (dialog)

Spara länk (dialog för att ladda ner filer)

Avsluta Webbläsaren: 4+B8B9, Alt+F4

Menyn Redigera: r+B9B8, Alt+r

Markera block början/slutet: x+B9, Ctrl+mellanslag

Kopiera: c+B8B9, Ctrl+c

* Klippta in: v+B8B9, Ctrl+v

Markera allt: %+B9, Ctrl+a

Avmarkera block: u+B9, Ctrl+u

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g

Menyn Tecken:

Nästa tecken: B4B9, pil höger

Föregående tecken: B1B9, pil vänster

Aktuellt tecken: B1B4B9, Skift+mellanslag

Menyn Ord:

Nästa ord: B5B9, Ctrl+pil höger

Föregående ord: B2B9, Ctrl+pil vänster

Aktuellt ord: B2B5B9, Ctrl+mellanslag

Menyn Virtuellt rad:

Nästa rad: D5+S-ner, Ctrl+F0

Föregående rad: D5+S-upp, Skift+F0

Läs rad: D5+S-mitten, F0

Menyn Mening:

Nästa mening: S-ner, B6B9, D3, pil ner

Föregående mening: S-upp, B3B9, D1, pil upp

Läs aktuell mening: B3B6B9, Ctrl+Enter

Menyn Stycke:

Nästa stycke: B4B5B9, D2D3, Ctrl+pil ner

Föregående stycke: B1B2B9, D1D2, Ctrl+pil upp

Läs stycke: B1B3B4B6B9, Skift+Enter

Menyn Sida:

Sida bakåt: B2B3B9, D5D6, Alt+pil vänster

Sida framåt: B5B6B9, D4D5, Alt+pil höger

Startsida

Överst på sidan: B1B2B3B9, D1D4, Ctrl+Home (FN+Ctrl+pil vänster)

Slutet på sidan: B4B5B6B9, D3D6, Ctrl+End (FN+Ctrl+pil höger)

Menyn Länk eller kontroll:

Nästa länk eller kontroll: S-höger, B4B6B9, D4D6, Tab

Föregående länk eller kontroll: S-vänster, B4B6B8B9, D1D3, Skift+Tab

Menyn Länk:

Nästa länk: k+B9, D4D5D6, Ctrl+k
Föregående länk: k+B9B8, D1D2D3, Ctrl+Skift+k

Menyn Kontroll:

Nästa kontroll: n+B9, D1D2D3D4D6, Ctrl+n
Föregående kontroll: n+B8B9, D1D3D4D5D6, Ctrl+Skift+n

Menyn Rubrik:

Nästa rubrik: h+B9, D1D2D5, Ctrl+h
Föregående rubrik: h+B8B9, D2D4D5, Ctrl+Skift+h

Menyn Textruta:

Nästa textruta: e+B9, D1D5, Ctrl+e
Föregående textruta: e+B8B9, D2D4, Ctrl+Skift+e

Menyn Textblock:

Nästa textblock: m+B9, D2D3D4D5, Ctrl+PgDn
Föregående textblock: m+B8B9, D1D2D5D6, Ctrl+PgUp

Menyn Ram:

Nästa ram: r+B9, D1D2D3D5, Ctrl+r
Föregående ram: r+B8B9, D2D4D5D6, Ctrl+Skift+r

Menyn Sök: s+B8B9, Alt+s

Ny sökning: ?+B8B9, D1D2D4, Ctrl+f
Sök nästa: ?+B7B8B9, D1D4D6, F3 (FN+3)

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Sidinformation (dialog)
Uppdatera: u+B8B9, D1D5D6, F5 (FN+5)

Menyn Historik:

Efter datum (idag, senaste veckan, 2/3 veckor sedan)
Efter webbplats
Mest besökta webbsidor
Besökta idag
Töm historiken

Fönster (dialog)

Nerladdningshanteraren (dialog)

Inställningar (dialog)

Länk- eller bildinformation (dialog)

Menyn Favoriter: f+B8B9, Alt+f

Lägg till (dialog)
Visa favoriter (menylista)
Hantera favoriter (dialog)

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Använd aktuell sida som startsida
Starta läsning: B9, D3D5, Ctrl+Skift+mellanslag
Stoppa läsning: B4B6B7B9, D2D6, Esc
Rensa temporära Internetfiler

X2.20 PDF-dokumentläsaren

Starta PDF-dokumentläsaren: u+B9B7B8, Windows-tangenten+u

Öppna/stäng menyn: S3 kort, 9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a

Öppna: o+B8B9, D1D3D5, Ctrl+o

Spara som textfil: s+B8B9, D2D3D4, Ctrl+s

Information: i+B8B9, D2D4, Ctrl+i

Avsluta: 4+B9, Alt+F4

Menyn Redigera: r+B9B8, Alt+r

Markera början/slut av block: B23B5B9, D2D3D6, Insert (FN+Del)

Kopiera: c+B8B9, Ctrl+c

Markera allt: %+B9, Ctrl+a

Avmarkera: u+B9, Ctrl+u

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g

Menyn Tecken:

Nästa tecken: B4B9, pil höger

Föregående tecken: B1B9, pil vänster

Läs aktuellt tecken: B1B4B9, Skift+mellanslag

Menyn Ord:

Nästa ord: B5B9, Ctrl+pil höger

Föregående ord: B2B9, Ctrl+pil vänster

Läs aktuellt ord: B2B5B9, Ctrl+mellanslag

Menyn Rad:

Nästa rad: S-ner, B4B5B9, D3, pil ner

Föregående rad: S-upp, B1B2B9, D1, pil upp

Läs aktuell rad: B1B2B4B5B9, Skift+Ctrl+mellanslag

Menyn Mening:

Nästa mening: B6B9, PgDn (FN+pil ner)

Föregående mening: B3B9, PgUp (FN+pil upp)

Läs aktuell mening: B3B6B9, Ctrl+Enter

Menyn Stycke:

Nästa stycke: B4B6B9, Skift+PgDn (FN+Skift+pil ner)

Föregående stycke: B1B3B9, Skift+PgUp (FN+Skift+pil upp)

Läs aktuellt stycke: B1B3B4B6B9, Skift+Enter

Menyn Sida:

Nästa sida: B5B6B9, Ctrl+PgDn (FN+Ctrl+pil ner)

Föregående sida: B2B3B9, Ctrl+PgUp (FN+Ctrl+pil upp)

Gå till sidnummer (dialog): m+B8B9, Ctrl+m

Menyn Länk:

Nästa länk: D4D6, Tab

Föregående länk: D1D3, Skift+Tab

Menyn Dokument:

Början av dokumentet: B1B2B3B9, D1D4, Home (FN+pil vänster)

Slutet av dokumentet: B4B5B6B9, D3D6, End (FN+pil höger)

Menyn Bokmärke:

Nästa bokmärke: D3D5D6, Skift+End

Föregående bokmärke: D2D3D6, Skift+Home

Lista bokmärken

Menyn Sök: d+B8B9, Alt+d

Ny sökning: ?+B8B9, D1D2D4, Ctrl+f
Sök nästa: n+B9B0, D1D4D6, F3 (FN+3)

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t
Plats i dokumentet: p+B8B9, D1D2D3D4, Ctrl+p
Starta löpande läsning: B9, D3D5, Skift+Ctrl+Enter
Stoppa löpande läsning: B4B6B7B9, D2D6, Esc