



Användarmanual

Version 1.5 – januari 2008

Svensk



Copyright 2007 BAUM Retec AG, Schloss Langenzell, Wiesenbach, Tyskland. Alla rättigheter är förbehållna BAUM. Inga delar av denna manual får förändras eller spridas i någon form eller i något annat syfte, eller lagras i någon databas eller annat system, utan föregående skriftligt tillstånd från BAUM Retec AG.

Vi har vinnlagt oss om att all information i detta dokument skall vara korrekt i alla delar. Varken BAUM Retec AG eller dess representant kan göras ansvariga för eventuella felaktigheter. Inte heller kan skadestånd utkrävas för eventuella skador som uppkommit genom användande av information som lämnats i detta dokument.

Om VISIO

Praktisk design, lätt att använda, ändå kraftfull – det är vad VISIO står för.

Trots att den är en av de minsta, lättaste och bäst designade enheterna, ger VISIO dig alla de funktioner du kan förvänta dig från en utmärkt Läs-TV.

Visio innehåller full färg, autofokus och ett antal falska färger. Omvända förgrund och bakgrundsfärger liksom fast fokus för handskrift och ifyllande av formulär. Tack vare sin bildoptimering kommer VISIO alltid att ge dig en optimal bildkvalitet.

Om denna manual

Denna manual vänder sig till användaren. VISIO har monterats av din återförsäljare eller skickats till dig som en fullt monterad och testad enhet. I denna manual kommer du att hitta all den information du behöver för att kunna använda din VISIO.

Innehållsförteckning

Om VISIO.....	2
Om denna manual.....	2
Innehållsförteckning.....	3
Innan du börjar.....	4
Hur du placerar VISIO på ditt bord.....	4
Första gången du slår på strömmen.....	5
VISIO Kontrollpanel.....	6
VISIO Kontrollpanels knappar – Snabbguide.....	6
Bekanta dig med din nya VISIO.....	7
Justering av skärmen i höjdled.....	10
För din säkerhet.....	10
Skötsel och underhåll.....	13
Garanti.....	15
Skador och reparation.....	15
Servicebox.....	15
Tekniska data.....	16

Innan du börjar

Läs säkerhetsföreskrifterna i slutet av denna manual och kontrollera förpackningens innehåll.

Vad finns i förpackningen:

- 1 VISIO Läs-TV
- 1 Nätaggregat
- 1 Strömkabel
- 1 användarmanual

Hur du placerar VISIO på ditt bord


Ställ VISIO på ditt bord så långt bak att, när det är fullt utdraget (närmast din mage), den främre kanten på XY-bordet är i nivå med den främre kanten på ditt bord eller något bakom. I position längst till vänster eller längst till höger skall XY-bordets kant inte nå utanför kanten på bordet! Detta för att VISO skall stå stadigt och säkert när du arbetar med den.



Första gången du slår på strömmen

Följande kapitel kan normalt sett hoppas över eftersom detta redan skall vara gjort när du får din VISIO. Det skall inte vara nödvändigt att göra detta igen.


Sätt i strömkontakten i väggen. Kontrollera att den runda pluggen i andra ändan av strömkontakten är ansluten på kamerans baksida.

Tryck in strömbrytaren  på kontrollpanelen, ljuset tänds omgående och bildskärmen skall starta automatiskt. (Kontrollera att det lyser en grön lampa på högra sidan av TFT-skärmen. Skärmens strömbrytare sitter direkt under den gröna lampan).

Tryck på "Bild" knappen .

Om det är ett svart fält på någon av bildens sidor, tryck på "AUTO" knappen på skärmens högra sida.

VISIO Kontrollpanel

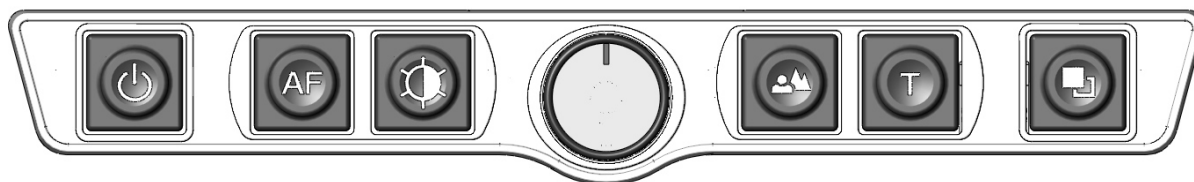

VISIO Kontrollpanels knappar – Snabbguide



Strömbrytare

Ett kort tryck sätter på enheten (ljuset tänds).
Tryck in knappen igen för att stänga av.




Autofokus

Växlar mellan autofokus på och av.
Autofokus på ger alltid en skarp bild.
Autofokus av skall du använda när du vill skriva.



Optimera bilden

Välj mellan 5 olika inställningar av bildkvalitén för optimal läsning av dokument med dålig kontrast eller dåligt tryck.

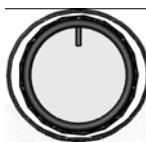

Zoom

Vrid ratten åt vänster för att minska förstoring, vrid ratten åt höger för att öka förstoring.



Bild

Välj detta läge för att titta på bilder eller dokument i fullfärg.
Passar också bra att använda vid dålig kvalitet på texten. Tryck igen för att växla mellan normala och ljusare färger.



Text – Omvänd

Använd textläge vid läsning. Detta läge ger möjlighet till ökad kontrast vilket underlättar läsningen. Tryck igen för att skifta för- och bakgrundsfärg.



Falska färger

Fungerar bara när VISIO är i textläge!
Tryck för att växla mellan 7 falska färger. (Använd textknappen för att skifta för- och bakgrundsfärg)

Bekanta dig med din nya VISIO

Du har redan lärt dig hur du skall placera VISIO på ditt bord och du har anslutit strömkabeln till din VISIO.

Du kan luta bildskärmen något så att du bekvämt kan betrakta skärmen. Luta inte skärmen för mycket, försök inte att överskrida stoppgränsen.

Sätt nu på din VISIO och använd den för första gången.

Kontrollpanelen är placerad direkt under skärmen. Strömknappen är placerad längst till vänster. Ett kort tryck på strömknappen kommer att sätta på din VISIO. Ljuset tänds omgående och en bild kommer att framträda på skärmen efter ett par sekunder. Då stänger av din VISIO genom att hålla strömknappen intryckt mer än en halv sekund. Om du av misstag kommer åt strömknappen händer alltså inget. Träna på att slå på och av din VISIO några gånger och lämna den sedan påslagen för att fortsätta.

Placera ett dokument på **XY-bordet**. Använd ett dokument med färg, som till exempel en broschyr eller en tidning med text och bilder.

Du kan fixera ditt dokument horisontellt genom att skjuta det mot den silverfärgade kanten på den bakre delen av XY-bordet. På så sätt är det lätt att följa raden när du rör XY-bordet åt höger eller vänster.

På XY-bordet finns en broms med vars hjälp du kan låsa bordet.

Bromsspaken sitter vid främre kanten av XY-bordet. Om du rör spaken längst åt vänster kan du röra XY-bordet i alla riktningar. När spaken är i mittläget kan XY-bordet bara skjutas åt vänster eller höger and. Ställer du spaken längst åt höger är XY-bordet helt låst.

Lägg nu ditt dokument mot XY-bordets bakre kant och ställ bromsspaken längst åt vänster.

Vi skall nu använda kontrollpanelens knappar. Vi har redan lärt oss att strömknappen är den knapp som sitter längst till vänster.

Mitt på kontrollpanelen är det en rund ratt. Detta är zoomratten med vars hjälp du ställer in förstoringen. Genom att vrida ratten medurs ökas förstoringen medan en vridning moturs kommer att minska förstoringen.

Vrid ratten moturs så långt det går för att uppnå mista förstoring.

Tryck nu på **bildknappen**. Bildknappen sitter till höger om zoomratten. Genom att trycka på den här knappen ställer du in VISIO på fullfärgsläge eller bildläge. Detta läge är idealist när du skall titta på bilder och det är också bra då du skall läsa material i dåligt tryck. Upplev naturliga färger i alla skiftningar.

Flytta XY-bordet tills du ser en bild i ditt dokument . Är bilden för liten så ökar du förstoringen genom att vrida på zoomratten medurs. Om du tappat bort dig och inte vet var du befinner dig i ditt dokument, minska förstoringen, flytta XY-bordet och öka förstoringen igen.

Tryck nu på bildknappen igen för att växla till ljusa färger. Ett tryck till tar dig tillbaka till normala färger (VISIO kommer ihåg de senaste inställningarna även om strömmen stängs av).

Nu har du redan lärt dig ganska mycket om din VISIO, hursomhelst låt oss nu läsa lite text.

Förflytta XY-bordet till en position där du kan se lite text på skärmen. Tryck nu på **textknappen**. Textknappen sitter till höger om bildknappen. Det är andra knappen till höger om zoomratten. Bilden kommer nu att visas i högkontrast och i med enbart två falska färger. Om du trycker på textknappen igen kommer förgrunds- och bakgrundsfärgen att visas i omvänt läge. Tryck på knappen några gånger för att se skillnaden. Växla även mellan bildläge och textläge för att se skillnaden. I textläget framhävs bokstäverna tydligare med hög kontrast medan du i bildläget kan se alla färger och gråa skuggor.

Tycker du inte om färgerna som visas i textläget? Inga problem! Låt oss ändra på dem. Du kan välja mellan sju olika falska färgkombinationer och genom att vända på förgrund och bakgrundsfärgerna har du tillgång till 14 olika färgkombinationer. Prova genom att trycka på **falska färgerknappen**. Detta är knappen längst till höger på kontrollpanelen. Varje gång du trycker på den förändras färgen. När du gått igenom alla 7 möjligheter börjar den om från början igen. Kom ihåg att den här knappen bara fungerar i textläget och saknar funktion i bildläget. Om du vill vis förgrunds- och bakgrundsfärgen i omvänt läge trycker du på textknappen.

De falska färger du har tillgång till är svart-vit, svart-gul, svart-cyanblå, svart-grön, svart-lila, blå-vit and blå-gul.

Välj färgerna du föredrar med falska färgerknappen och tryck på textknappen för omvända förgrunds- och bakgrundsfärger tills du hittar det läge du föredrar.

OBS: VISIO kommer ihåg färginställningarna du valt så om du växlar från textläge till bildläge och sedan återgår till textläge, så hittar du dina tidigare valda färger där. VISIO kommer även ihåg dina inställningar om strömmen stängs av.

Nu när du har hittat de färginställningar du föredrar i textläget, skall vi försöka läsa en text med dålig kontrast och svagt tryck. I de flesta fallen kommer VISIOs automatiska bildkontroll ge dig en förstoring av ditt dokument med bra kvalitet. Detta är lätt om du har ett dokument med svarta bokstäver på ett vitt papper. Ibland är dock dokumentet du skall läsa av dålig kvalitet som till exempel färgad text på färgad bakgrund eller en dålig kopia med svagt tryck på grått papper. I dessa fallen har vi användning av **Optimera bildenknappen**. Detta är den tredje knappen från vänster, direkt till vänster om zoomratten. Med optimera bildenknappen väljer du en av fem nivåer av optimering av bilden. Så om du inte är nöjd med bildkvalitén på VISIOs skärm, tryck bara på den här knappen flera gånger tills du får det bästa resultatet.

OBS: Om du tycker att föregående inställning är den som är bäst, tryck fyra gånger på knappen för att komma tillbaka till detta läge. VISIO kommer ihåg de inställningar du gör här även om strömmen slås av.

Nu återstår det bara en knapp att förklara. **Autofokusknappen**. Det låter komplicerat men den är mycket enkel att använda.

VISIO startas alltid med autofokus på. Detta innebär att, oavsett hur tjock boken är eller hur böjd sidan är, kommer VISIO alltid att fokusera på den del som visas och ge dig en skarp bild på skärmen. Så detta är den inställning du oftast kommer att föredra.

Hursomhelst, ibland kanske du vill fylla i blanketter, lösa korsord, måla naglarna eller titta på tredimensionella objekt. Det är här som fokusfixeringen kommer till användning.

Först skall vi hitta knappen. Autofokusknappen är andra knappen från vänster. Tryck på den för att växla mellan autofokus på eller av. På skärmen kommer du att under några sekunder se texten "AF ON" eller "AF OFF". Låt oss testa hur detta fungerar. Tryck på knappen och kontrollera att "AF ON" visas på skärmen, autofokus är nu påslaget. VISIO kommer att förstora dokumentet som ligger på XY-bordet och ge en skarp bild på skärmen. Lägg nu din hand på dokumentet. VISIO kommer nu att förstora din hand och du kommer att se en skarp bild av denna i skärmen medan bokstäverna i ditt dokument är suddiga. Samma sak kommer att hända om du vill fylla i ett

formulär. I stället för att visa skarpa bokstäver, kommer VISIO att fokusera på baksidan av din hand som håller i pennan. Tar du bort din hand så kommer bokstäverna att bli skarpa igen.

Låt oss nu göra samma sak men med fixerad fokus. Placera ett papper på XY-bordet. Om texten är suddig trycker du på autofokusknappen så att "AF ON" visas på skärmen. Nu när bokstäverna i ditt dokument är skarpa trycker du på autofokusknappen igen. "AF OFF" kommer nu att visas på skärmen. Om du nu försöker att skriva något i ditt dokument kommer VISIO att fokusera på bokstäverna i dokumentet och inte på din hand. När du skrivit färdigt trycker du på autofokusknappen igen för att slå på autofokus. "AF ON" visas på skärmen.

Nu har vi gått igenom alla funktioner på VISIO. Vi hoppas du kommer att ha glädje av din nya Läs-TV.

Justering av skärmen i höjdled

Möjligheten att justera skärmen i höjdled är ett tillägg och ingår alltså inte i standardutförandet av VISIO. Skärmen kan justeras i höjdled 80mm i 9 steg. För att justera, drag ut båda knapparna (på vänster och höger sida på baksidan av skärmen) samtidigt. Hitta rätt position genom att föra skärmen upp eller ner och släpp knapparna när du är nöjd.

För din säkerhet

Viktigt: Förbiseende av följande varningar kan åsidosätta garantin och orsaka allvarliga skador.

Kontrollera förpackningens innehåll innan du använder enheten. Om delar fattas eller är skadade, tveka inte att ta kontakt med din återförsäljare.

Behåll emballaget, så att du på ett säkert sätt kan returnera enheten om det skulle behövas. Bristfällig paketering kan åsidosätta garantin. Behöver du ett nytt emballage kan vi skicka det till dig.

Läs noga igenom användarmanualen och säkerhetsföreskrifterna innan du använder enheten första gången.

Denna enhet får bara användas i hem- eller kontorsmiljö.

Placera inte din VISIO på ett ostadigt underlag. Det kan leda till allvarliga skador på enheten eller användaren. Följ noga instruktionerna om hur enheten skall placeras detta för att undvika att enheten vippar eller välter genom att ha marginal till bordets kanter.

XY-bordet och läs-TV:ns skärm innehåller lösa delar. Var försiktig när du ändrar skärmen eller flyttar XY-bordet. Skada kan uppstå om fingrar eller kläder fastnar i mekanismen. Om du har problem med att hantera enheten på ett säkert sätt ber vi dig ta kontakt med din återförsäljare för råd och stöd.

Strömkabeln får endast anslutas till ett jordat uttag.

Använd inte enheten om du hittar skador på enheten eller skador på kablar.

Om enheten betar sig på ett onormalt sätt, eller verkar vara skadad ber vi dig ta kontakt med din återförsäljare.

Om du känner röklukt eller någon annan onormal lukt från enheten, slå av strömmen omedelbart.

Försök inte att reparera enheten själv. Öppnande eller borttagande av hölje kan orsaka skador.

Tillåt inte att sand eller damm kommer i kontakt med enheten eftersom detta kan leda till allvarlig skada och göra en reparation omöjlig.

Använd inte enheten med smutsiga händer.

För inte utsättas för radiovågor eller annan strålning. Mobiltelefoner bör inte finnas inom 30 cm från enheten.

Använd endast originaltillbehör. Andra tillbehör kan skada enheten eller orsaka krångel eller säkerhetsproblem.

Använd ingen strömenhet som inte är avsedd för den här enheten. Använd endast originalströmadaptern!

Använd inte strömadaptern till andra enheter.

Undvik att ha vätskor i närheten av enheten.

Använd eller förvara inte enheten på någon av följande platser eftersom detta kan orsaka skada:

- I bil med stängda rutor som är utsatt för starkt solsken.
- I direkt solljus eller nära braskaminer, element etc.
- På platser som är utsatta för stark vibration som till exempel ovanpå en tvättmaskin.
- På platser utsatta för stark magnetism som till exempel i närheten av högtalare.
- Fuktiga platser (badrum), i vatten, eller i närheten av vatten.
- I regn eller snö.
- Förvaras inte i utrymmen med temperatur under 0°C eller över 40°C.
- Luftfuktigheten skall vara mellan 20 % till 80 %
- Undvik hastiga temperaturförändringar.

Om du flyttar enheten från ett kallt utrymme till ett varmt rum kan kondens uppstå. Vänta med att använda enheten tills den uppnått rumstemperatur.

Avlägsna strömkabeln före rengöring.

Rengör med en mjuk lätt fuktad trasa utspädd med ett neutralt rengöringsmedel, torka sedan torrt med en ren trasa. Låt inte enheten komma i direkt kontakt med vatten.

För inte in lösa föremål i öppningar på enheten.

Använd inte enheten under åskväder. Dra ut strömkabeln från väggen under åskväder. Vi rekommenderar att du använder ett spänningsskydd som kan inhandlas hos din lokala elhandlare. Observera att detta inte ger ett 100 % skydd mot överspänning.

Sätt inte i eller dra ur strömkabeln med våta händer.

Värm inte upp enheten i en mikrovågsugn, på en spis eller liknande.

Montera aldrig isär och försök att reparera enheten själv.

Om vätska eller metallfragment kommer in i enheten, stäng omedelbart av den och drag ut strömkabeln.

Dra aldrig i sladden när du drar ut strömkabeln utan ta tag i själva kontakten.

Undvik skakningar. Låt inte apparaten falla omkull.

Reparationer får endast utföras av BAUMs servicepersonal eller av personal utsedda av BAUM Retec AG.

Skötsel och underhåll

Undvik fukt och vatten.

Använd bara en ren torr trasa för rengöring av höljet. Använd inga rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Skydda enheten från extrem värme, som till exempel starkt solsken, uppvärmningsenheter, varma bilar osv.

Vid extrem kyla och frost blir enheten instabil och måste långsamt återföras till normal rumstemperatur. Enheten får under inga omständigheter värmas upp eller "tinas upp" i en vanlig ugn, mikrovågsugn eller någon annan uppvärmningsenhet!

Undvik mekaniska skador på hölje eller tillbehör.
Använd endast den medföljande strömkabeln.

Vänligen kontakta vår serviceavdelning om du stöter på några problem eller om du har några frågor:

BAUM Retec AG,
Service,
In der Au 22,
D-69257 Wiesenbach
Germany.
Tel: +49 06223 4909-0
E-mail: service@baum.de

Insyn Sverige AB
Ankdammsgatan 22
171 43 Solna
Tel: 08-446 63 60
info@insyn.se

Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskild försiktighet gällande Electro Magnetic Compatibility (EMC). Den måste installeras och servas i enlighet med EMC riktlinjer.

Varning: Användning av tillbehör, omvandlare och kablar andra än de som anges i specifikationen och de som levereras med enheten av återförsäljaren kan leda till ökad strålning eller minska enhetens tålighet.

Garanti

BAUM Retec AG garanterar att denna enhet, räknat från den dag den levererats, är befriad från alla fel i material och utförande. Garantin går inte att överlåta och gäller inte för grupper, fleranvändare eller agenturer. Denna enhet har gjorts för den enskilde köparen för att användas i hem eller arbetsmiljö. För övriga garantivillkor hänvisas till den lokala återförsäljaren.

Skador och reparation

Vad skall jag göra om VISIO går sönder?

- Har du kontrollerat alla inställningar och anslutningar i enlighet med denna manual?
- Har du tagit bort den skyddande plastfilmen från kameranlinsen?
- Har du försäkrat dig om att elnätet är tillgängligt?

Använd inte en skadad enhet! Koppla bort en trasig enhet från elnätet! Tveka inte att ta kontakt med din lokala återförsäljare eller med BAUM Retec AG.

Du kan få kontakt med BAUM Retec AG på telefonnummer (+49) 6223 4909 i Tyskland. Vi kommer att hjälpa dig att kontrollera din VISIO och om den skulle vara trasig skickar vi en servicebox så att du i den kan skicka din VISIO till vår serviceavdelning. Visa denna manual för den person som kommer att hjälpa dig att paketera din VISIO i serviceboxen.

Servicebox

För att skicka VISIO i serviceboxen gör du på följande sätt:

- Stäng av VISIO
- Dra ut strömkabeln
- Tag bort strömkabeln från din VISIO (ta bort 4 clips, som håller fast kabeln i ramen, ta bort kabeln, sätt tillbaka clipsen).
- Sätt skärmen i upprätt läge samt drag åt bromsen på XY-bordet
- Tag bort mjukplastdelar och wellpapp ur lådan.
- Täck vänster och höger sida av skärmen med mjukplast som bilden visar.
- Lyft VISIO i handtaget på ovansidan och placera den i lådan. VISO går bara att placera åt ett håll . (se bild)

- Placera wellpappdelarna i den övre delen så som bilden visar och lägg strömkabeln i det lilla facket som uppstår.
- Stäng lådan.



Tekniska data

- Full färg
- 7 falska färger med utökad kontrast + omvänd bild ger 14 kombinationer (svart-vit, svart-gul, svart-cyanblå, svart-grön, svart-lila, blå-vit and blå-gul)
- Autofokus
- Fixerad fokus för handskrift
- Automatisk exponering
- Zoomområde 3 till 45 gånger
- Lättviktsutförande (cirka 10.8kg)
- Mått: 388 mm x 498 mm x 560 mm
- Strömförsörjning 100-240VAC 50/60Hz 1.7A max.

Adress

BAUM Retec AG
Schloss Langenzell
D-69257 Wiesenbach

Germany

Phone: +49 (0) 62 23 / 4909-0
Fax: +49 (0) 62 23 / 4909-399
E-Mail: info@baum.de
Web: www.baum.de

Products and services for the blind and visually impaired

BAUM

© 2008 Copyright by BAUM Retec AG

Insyn Sverige AB
Ankdammsgatan 22
171 43 Solna
Tel: 08-446 63 60
info@insyn.se
<http://www.insyn.se>

