

PRONTO!

Användarmanual

För Pronto! 40

Mjukvaruversion 3.3

Juli 2011

Manualens uppbyggnad

Denna manual är i tre delar.

Del 1 är riktad till nybörjare som har liten erfarenhet av datorer eller liknande tekniska apparater. Novisen kommer steg för steg att tas igenom proceduren för att skriva, redigera, spara och radera text samt för att ta reda på datum, tid och batterinivå – allt med enkla ord och exempel. Åtkomst till inbyggd hjälp, till manualen och användning av MP3-spelaren kommer också att förklaras så att nybörjaren fristående kan lyssna på Pronto-manualen.

Del 2 ger råd kring tilläggsprogramvara vid anslutning av mobila enheter till en PC för dataöverföring.

Du får också information om ytterligare program och drivrutiner.

Del 3 är riktad till användare som redan är bekanta med de grundläggande Pronto-funktionerna och som önskar lära sig mer om dess övriga funktioner. Detta är den verkliga manualen med en systematisk struktur med beskrivning av apparaten själv, dess allmänna användning samt mer specifika tillämpningar och funktioner i enskilda kapitel (Ordbehandlaren, Utforskaren, Adressboken, Kalendern, talsyntesen, MP3-spelaren, Kalkylatorn, datautbyte med en PC, etc.).

Bilagorna innehåller allmänna notiser och tips samt ett referensavsnitt med en lista över de grundläggande kortkommandona som kan användas för att styra kända funktioner.

De givna beskrivningarna av program och funktioner är baserade på användning av vilket som helst av Pronto-anteckningshjälpmedlen: Antingen Pronto 18 / Pronto 40 med punkt tangentbord eller Pronto QS / Pronto 40 med dess normala tangentbord (alfanumeriskt tangentbord, dvs. QWERTY-tangentbord).

Så denna manual innehåller de motsvarande kortkommandona och tangentkombinationerna för att direkt utföra kommandon eller funktioner på Pronto (QWERTY-läge såväl som punktläge).

Alla medlemmarna av anteckningshjälpmedelsfamiljen Pronto kan användas i punktläge eller qwerty-läge för att utföra kommandon.

Få punktläge:

- Pronto! 18 V3: Använd inbyggt punkt tangentbord.
- Pronto! 40: Använd punkt tangentbordsmodulen eller växla om QWERTY-tangentbordet till punktläget (FN+b).
- Pronto! QS: Växla om qwerty-tangentbordet till punktläget (FN+B).

Få qwerty-läge:

- Pronto! 18 V3: Anslut ett externt USB-tangentbord.
- Pronto! 40: Använd QWERTY-tangentbordsmodulen.
- Pronto! QS: Använd det inbyggda tangentbordet.

Du hittar grundläggande kommandon och tangentkombinationer för båda lägena i kapitel 3 "Allmän användning".

Du hittar viktiga notiser kring din säkerhet direkt efter innehållsförteckningen i denna manual.

Den tryckta manualen ger en första introduktion kring hur enheten används. Den innehåller Del 1 samt en lista över de grundläggande kortkommandona.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	4
<i>Vad finns i kartongen?</i>	6
<i>Överensstämmelse med EMC- och säkerhetsstandarder</i>	6
För din säkerhet.....	6
<i>Om batteriets livslängd</i>	7
<i>Garanti</i>	8
Del I - Introduktion - Första stegen på Pronto! 40	9
<i>Slå på enheten</i>	11
<i>Skriva text</i>	11
<i>Läsa text</i>	12
<i>Ta reda på värden, aktivera viloläget och väck Pronto!</i>	12
<i>Hjälp</i>	13
<i>Spara</i>	13
<i>Öppna</i>	14
<i>Tomt dokument</i>	14
<i>Utforskaren</i>	15
<i>Stänga dokument</i>	16
<i>Öppna manualen</i>	16
<i>MP3-spelaren</i>	16
<i>Slå av Pronto!</i>	17
Appendix x1: Översikt.....	19
<i>x1.1 Kort enhetsöversikt</i>	19
<i>x1.2 Termer och förkortningar som används</i>	19
<i>x1.3 Generella akustiska signaler och meddelanden</i>	20
<i>x1.4 Tekniska data för alla enheter</i>	21
x1.5 Kontakt och support.....	22
Appendix x2: Kommandolista (för referens)	24
<i>X2.1 Allmänna kommandon:</i>	24
<i>X2.2 Systemknappscommandon:</i>	24
<i>X2.3 Kör program</i>	25
<i>X2.4 Ordbehandlaren</i>	26
<i>X2.5 Kalendern</i>	28
<i>X2.6 Adressboken</i>	30
<i>X2.7 Utforskaren</i>	32
<i>X2.8 Daisy-spelaren</i>	32
<i>X2.9 MP3-spelaren</i>	33
<i>X2.10 Fickminnet</i>	34
<i>X2.11 Alarmet</i>	35
<i>X2.12 Tidtagning</i>	35
<i>X2.13 Räkna ned (timer)</i>	35
<i>X2.14 Mobil</i>	36
<i>X2.15 Kalkylatorn</i>	37
<i>X2.16 Internetradion</i>	38

X2.17 E-post	39
x2.18 MSN Messenger	41
X2.19 Webbläsaren	42
X2.20 PDF-dokumentläsaren	44

Allmän information, säkerhet och garanti

Innan du använder din enhet för första gången, var god kontrollera innehållet i kartongen. Om någonting är skadat eller saknas, var god tveka inte att kontakta din leverantör.

Vad finns i kartongen?

- Pronto
- Nätadapter
- Skyddande väska
- USB-kabel
- Seriekabel
- Installations-CD
- Manual
- Endast Pronto! 40: Alternativt tangentbord

Vänligen förvara kartongen och paketeringsmaterialet på ett säkert ställe eftersom du kan komma att behöva det när du ska frakta enheten. Att skicka in Pronto! på reparation utan ordentlig paketering kommer att göra garantin ogiltig!

Vänligen läs ordentligt igenom instruktionerna och säkerhetsvarningarna innan du använder enheten för första gången.

Pronto! är endast utformad för att användas i hem- och kontorsmiljöer. I medicinska byggnader ska den endast användas i kontorsrum.

En PC ansluten till Pronto! måste uppfylla tillämpliga EMC- och säkerhetskrav för det område där den används.

Överensstämmelse med EMC- och säkerhetsstandarder

Du hittar tillkännagivandena av överensstämmelser i slutet av denna manual.

Medicinska elektroniska enheter måste uppfylla EMC-regleringsstandarderna och måste användas och underhållas i enlighet med dessa.

Var god observera: Användning av sladdar, nätadapterar, reservdelar och tillbehör som inte uttryckligen är tillåtna av tillverkaren kan förorsaka ökad strålning eller ökad känslighet för strålning och därmed skapa en säkerhetsrisk.

För din säkerhet

Viktigt att observera: Att inte ta till sig följande varningar kan göra garantin ogiltig och kan förorsaka allvarlig personskada.

- Om PRONTO! verkar fungera onormalt eller vara skadad på något sätt, var god kontakta din BAUM-återförsäljare så snart som möjligt.
- Om du känner lukten av rök eller en odör som kommer från PRONTO!, slå omedelbart av strömmen.
- Låt inte sand eller damm komma i kontakt med PRONTO! eftersom detta kan leda till allvarlig skada och kan göra reparation omöjlig.
- Använd inte din PRONTO! på platser där starka radiovågor avges eller där det finns strålning.
- Använd inte en nätadapter som inte är gjord för användning tillsammans med PRONTO. Använd endast PRONTOs originalnätadapter!
- Använd eller förvara inte PRONTO! på något av följande ställen eftersom detta kan förorsaka skada.
- Inuti bilar med fönstren stängda i den heta solen. I direkt solljus eller nära varmvattenberedare, värmeelement, etc.
- Platser utsatta för häftiga vibrationer så som ovanpå en tvättmaskin.
- Platser utsatta för stark magnetism så som nära högtalare.
- Torka bort damm och smuts från PRONTO! med en mjuk trasa fuktad med ett utspätt neutralt rengöringsmedel, torka sedan torrt med en trasa.
- Dra alltid ur strömsladden ur PRONTO! vid rengöring.
- Använd inte PRONTO! vid åskväder.
- Använd inte PRONTO! nära vatten, till exempel i ett badrum.
- Sätt inte i eller dra ur kontakten med våta händer.
- Försök inte avlägsna batteriet.
- Värm inte upp PRONTO! i en mikrovågsugn, på en kokplatta eller liknande.
- Använd endast batteriet som följde med din PRONTO. Ersättningsbatterier är endast tillgängliga från BAUM eller lokala återförsäljare. Batteriet kan endast avlägsnas av auktoriserade servicetekniker!
- Plocka aldrig isär, försök reparera eller modifiera PRONTO! på egen hand.
- I fall vätskor eller metallfragment skulle komma in i PRONTO!, slå omedelbart av den och dra ur strömkabeln.
- Lyssna inte på hög volym under långa tidsperioder eftersom detta kan leda till hörselskador, speciellt vid användning av hörlurar.
- Dra inte ur kontakten genom att hålla i sladden när du kopplar ur strömmen från PRONTO.
- Försäkra dig om att PRONTO!, nätadaptern och strömkontakten är säkert anslutna.

Om batteriets livslängd

Livslängden hos ditt batteri beror på hur ofta och på vilket sätt det laddas och laddas ur. Under den normala åldringsprocessen minskar batteriernas kapacitet. Om batteriernas kapacitet blir för låg efter en tid måste de bytas ut.

Försök inte byta batteri själv, låt BAUM eller en auktoriserad servicepartner göra detta. Försök inte öppna Pronto!

Batterilivslängden kan påverkas av omgivande temperatur och andra miljöparametrar.

Om du inte använder Pronto! under en längre tidsperiod, var god ladda upp det regelbundet för att förhindra att batteriet laddas ur för mycket. I annat fall, om det laddas ur helt och hållet är det bara några veckors tid kvar tills batteriet kommer att vara så urladdat att enheten inte längre kan slås på eller så kan batteriet till och med bli permanent skadat.

Garanti

Prontos garanti överensstämmer med de juridiska regleringarna där den såldes. Vänligen kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Pronto-enheter sålda i Tyskland har en begränsad 2 års garanti. Batteriet har en 6-månaders garanti.

Skador förorsakade av felaktig användning omfattas inte av garantin.

BAUM Retec AG garanterar att Pronto! är fri från skador vid tillverkningstillfället. Garantin kan inte överföras till andra personer. Pronto! är utformad för slutanvändare för användning i kontors- eller hemmiljö. BAUM Retec AG förbehåller sig rätten att reparera enheten eller ersätta den med en liknande eller bättre produkt. BAUM Retec AG eller dess representanter kommer inte att ta ansvar för några direkta eller indirekta skador. Garantin kommer att bli ogiltig om garantiplomberingen är skadad. BAUM kommer inte att ta ansvaret för annan användning än vad som beskrivs i manualen.

Del I - Introduktion - Första stegen på Pronto! 40

Gratulerar till införskaffandet av ditt Pronto-anteckningshjälpmedel – utan tvekan är du ivrig att upptäcka allt som Pronto! kan göra. De följande sidorna utgör inte en komplett handbok utan är utformade för att introducera dig till de viktigaste funktionerna genom praktiska exempel och för att hjälpa dig hitta på tangentbordet. Allting du läser här kan du omedelbart prova på Pronto! och på så sätt hjälpa dig på din väg med Pronto.

Del 3 av denna användarmanual innehåller handboken med en mera detaljerad beskrivning av Prontos funktioner. Den kan också kommas åt i själva Pronto! som en fil på "Hjälp"-menyn där kapitlen kan öppnas och läsas individuellt eller på installationsskivan.

Så, tillbaka till Pronto!: Hur är den upplagd?

Den övre sidan har tangenter som på ett normalt litet tangentbord som du skulle hitta på en PC. Det är också möjligt att ta bort detta tangentbord och ersätta det med ett 8-punkts punkt tangentbord. Båda tangentborden är moduler som enkelt kan bytas ut av användaren på egen hand. För att byta tangentbordsmodulen, gör som följer:

1. I bakkanten av ovansidan, till vänster och höger bredvid tangentbordet hittar du 2 låsknappar.
2. Skjut den högra knappen åt höger och samtidigt den vänstra knappen åt vänster. Detta lossar på tangentbordsmodulen.
3. Lyft upp modulen och avlägsna den.
4. Utan tangentbordsmodulen visar ovansidan av enheten en fördjupning där modulen normalt placeras.
5. För att fästa tangentbordsmodulen, placera framkanten av modulen i främre delen av fördjupningen och släpp sedan ner den i bakkant och tryck ner den.
6. Låsknapparna låses och tangentbordsmodulen är ansluten till enheten.

Du kan även byta moduler medan Pronto! är påslagen.

Nu låter vi Pronto! ha kvar standardtangentbordet och utforskar de andra delarna och tangenterna på ovansidan.

Till vänster bredvid tangentbordet hittar du en enda rund knapp. Detta är Inspelningsknappen (REC) som används för att starta inspelningar med fickminnet. Den inbyggda mikrofonen är placerad på den högra sidan av tangentbordet och markerad med ett litet hål.

Framför tangentbordet hittar du punktdisplayen med cursor routing- tangenter (positioneringstangenter) ovanför varje cell och 3 displayknappar på höger samt vänster sida av punktdisplayen.

Du kan känna en liten rörlig spak på den sluttande framsidan av enheten. Detta är styrpinnen som medger förflyttning åt höger, vänster, uppåt och neråt och som även kan

tryckas. Med denna styrpinne kan du förflytta dig i dokument, menyer eller listor samt välja funktioner. Den förenklar all förflyttning i dessa riktningar oberoende av piltangenterna.

Till vänster och höger om styrpinnen hittar du två små fyrkantiga knappar. Dessa är tumtangenter precis som på punkttangentbordsmodulen.

På högersidan finns det en liten rund knapp. Detta är av- och påslagningsknappen som används för att helt och hållet slå på och av Pronto.

Låt oss nu återvända till standardtangentbordet och dess egna tangenter. Som på alla liknande datortangentbord har en del tangenter mer än en funktion kopplad till sig. I denna introduktion kommer endast den första kopplade funktionen att anges. Tangenterna i den svenska tangentbordslayouten är arrangerade som följer (uppifrån och ner samt från vänster till höger):

Översta raden:

Esc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, plus, accent, Del, Backsteg

Andra raden:

TABB, q, w, e, r, t, y, u, i, o, p, å, umlaut, Enter (övre halvan)

Tredje raden:

Versallås, a, s, d, f, g, h, j, k, l, ö, ä, apostrof, Enter (nedre delen)

Fjärde raden:

Vänster Skift-tangent, mindre än, z, x, c, v, b, n, m, kommatecken, punkt, streck, höger Skift-tangent, pil upp, FN

Nedersta raden:

Vänster Ctrl-tangent, WIN, FN, Alt, vänster mellanslag, höger mellanslag, AltGr, Programknappen, höger Ctrl-tangent, pil vänster, pil ner, pil höger.

Följande tangenter har en liten upphöjd punkt: a, f, j, ö, n, y, 2, 6, plus, Tab-tangenten, vänster och höger Ctrl-tangent samt höger Skift-tangent.

Som utgångsposition, placera fingrarna på vänster hand på tangenterna a, s, d och f samt fingrarna på höger hand på j, k, l och ö.

När du använder punkttangentbordet kommer du att hitta 8 punkttangenter och 2 tumtangenter.

Från vänster till höger kallas de B7, B3, B2, B1, B4, B5, B6, B8. Den vänstra tumtangenter kallas B9, den högra tumtangenter kallas B0 och är mellanslag.

Låt oss titta närmare på den sluttande framsidan. Vi känner redan till de 2 fyrkantiga tumtangenter till vänster (B9) och höger (B0) om styrpinnen. Längre till vänster och höger hittar vi 2 små runda knappar. Dessa systemknappar används för att lägga

Pronto! i viloläget, för att slå på den igen samt för att växla mellan olika program. De kan också utföra andra funktioner som vi kommer att lära oss senare.

Från vänster till höger på den sluttande framsidan hittar vi följande saker:
Tangenterna S1 och S2, tumtangenter B9, styrpinnen, tumtangenter B0, tangenterna S3 och S4.

Slå på enheten

För att slå på Pronto! (antingen för första gången eller efter uppladdning av batteriet), tryck och håll inne på-/avknappen i ca 3 sekunder.

OBS: Om denna knapp trycks igen kommer Pronto! att stängas av helt och hållet.

Pronto! ska normalt stängas av genom att använda systemknapparna för att växla till viloläget.

Efter att du har slagit på kommer du att höra en stigande tvåtonssignal; om du hör en fallande tvåtonssignal omedelbart efteråt kommer Pronto! automatiskt att stängas av eftersom den inte får tillräckligt med ström. Om så är fallet måste batteriet laddas: Ta laddaren, sätt i den lilla runda kontakten i den lilla öppningen längst bak till vänster på Pronto! och anslut den andra kabeln till ett vägguttag. Tryck sedan på på-/avknappen på högra sidan av enheten en gång till och vänta på den stigande signalen.

Under uppstartsproceduren kommer korta signaler att avges och efter ungefär en minut kommer du att höra meddelandet "Pronto-meny, Ordbehandlaren".

Tryck nu Enter eller vänster tumtangent (B9) på punkttangentbordet för att bekräfta och ett tomt dokument kommer att öppnas.

I fall Prontos meddelanden är för höga eller för låga kan volymen justeras med ratten på vänstra sidan av enheten. Vridning på ratten mot dig kommer att minska volymen och vridning bort från dig kommer att öka den. Volymen kan inte slås av helt och hållet med denna ratt och den kommer alltid att bibehålla ett minimivärde.

Skriva text

Skriv nu din första träningstext: "Pronto! är underbar och väldigt användbar. Vi älskar att arbeta med Pronto!". Tryck sedan på Enter eller punkttangent B8 för att påbörja en ny rad.

Om du gör skrivfel, tryck helt enkelt på Backsteg (den sista tangenten till höger på den översta raden) eller tryck på punkttangent B7 för att radera tecknen bakåt.

Det finns flera sätt att placera markören på ett visst ställe:

1. Gå med styrpinnen med hjälp av din tumme i den lämpliga riktningen till det önskade stället.
2. Använd höger eller vänster piltangent för att gå till det önskade stället.

3. Tryck på den lilla positioneringstangenten för att dra markören till den önskade positionen.

När du förflyttar dig genom texten kommer talsyntesen att läsa upp det aktuella tecknet samt på punktdisplayen visa markören med punkterna 7,8.

Ny text kommer alltid att infogas på den aktuella markörpositionen; var god försäkra dig om att markören är placerad i slutet av raden innan du matar in mer text. För att göra detta, använd antingen piltangenterna för att förflytta dig ner och sedan åt höger, bokstav för bokstav, tills du når slutet av sista ordet, eller använd kommandot för att hoppa till slutet av filen – tryck och håll inne vänster FN-tangent, tryck och håll inne vänster Ctrl-tangent, tryck höger piltangent och släpp sedan alla tre tangenterna. Vänster FN-tangent är den tredje tangenten från vänster på den nedersta raden. Denna tangentkombination motsvarar kommandot Ctrl+End som du kanske känner igen från Windows.

När du använder punkttangentbordet utförs kommandot för att hoppa till slutet av filen genom att trycka punkttangenterna B4B5B6 tillsammans med vänstra tumtangenten (B9).

Träna genom att skriva ytterligare några meningar.

Läsa text

För att läsa igenom din träningstext, hoppa till början av filen genom att trycka vänster FN-tangent tillsammans med Ctrl-tangenten och vänster piltangent eller punkttangenterna B1B2B3 tillsammans med vänstra tumtangenten (B9).

För att läsa rad för rad, gå antingen neråt i texten med styrepinnen eller pil ner, eller på liknande sätt uppåt med styrepinnen eller pil upp.

När du läser visas endast 40 tecken ur texten på punktdisplayen. Du kan se den återstående delen av texten med hjälp av displayknapparna - tre små runda knappar i en rad till höger och vänster om punktraden. Genom att trycka på den mittersta högra displayknappen (D5) kommer du att se nästa 40 tecken av textraden och genom att trycka på den mittersta vänstra displayknappen (D2) kommer du att gå tillbaka 40 tecken. Detta kallas att rulla eller scrolla.

Ta reda på värden, aktivera viloläget och väck Pronto!

En tid har nu förflutit och du skulle vilja veta vad klockan är: Kort tryckning på systemknappen S4 kommer att ange den lokala tiden (S4 är den andra tangenten till höger om styrepinnen). Två korta tryckningar efter varandra på denna tangent kommer att ange datumet. Om denna tangent trycks lite längre kommer du däremot inte att höra tiden utan i stället kommer du att höra en svag signal och Pronto! kommer att växla till viloläget; även när Pronto! "sover" kan du fortfarande ta reda på tiden eller datumet genom att trycka kort på S4.

Så, hur väcker vi nu Pronto! och kommer tillbaka till våran träningstext? Tryck helt enkelt på systemknappen längst till vänster (S1) i en kort stund – om du inte håller nere den tillräckligt länge kommer Pronto! att fortsätta “sova” och kommer den här gången att läsa upp temperaturen. Av nyfikenhet trycker du återigen på S1-tangenten kort två gånger och den här gången kommer du att höra lufttrycket.

Om du trycker på den vänstra systemknappen (S1) tillräckligt länge kommer Pronto! att vakna. Detta kommer att ta dig tillbaka till Ordbehandlaren där du kan läsa din träningstext genom att förflytta dig uppåt och neråt genom den.

Hjälp

Hur kan träningstexten sparas eller ett nytt tomt dokument eller ny fil öppnas (t.ex. manualen)?

Prontos hjälpsystem kan hjälpa dig med dessa uppgifter. Det finns två typer: Den automatiska snabbhjälpen och den sammanhangskänsliga långa hjälpen. Snabbhjälpen tillhandahåller information om det markerade objektet i en meny eller dialogruta och ges automatiskt via talsyntesen. För mer detaljerad information om objektet och dess funktioner kan den långa hjälpen anropas genom att trycka på F1-tangenten: Tryck FN-tangenten (dvs. den tredje tangenten från vänster på den nedersta raden) tillsammans med siffran “1” och hjälpen kommer att läsas upp och visas i punktskrift.

När du använder punkt tangentbordet kan du anropa den sammanhangskänsliga hjälpen genom att trycka punkt tangenterna B2B6 tillsammans med den vänstra tumtangenten B9.

För att lyssna en gång till, gå ner med styrpinnen till “OK”-knappen och sedan tillbaka upp till hjälptexten.

Tryck på Enter- eller B9-tangenten för att trycka på “OK”-knappen. Detta stänger hjälpen och du återvänder till det tidigare markerade objektet.

Spara

Låt oss börja med att spara dokument.

1. Anropa kommandomenyn genom att trycka på Alt-tangenten (denna återfinns till vänster, bredvid vänster mellanslag och den kan användas för att anropa kommandomenyn från vilket som helst program). Alternativt tryck på systemtangenten S3 kort en gång för att öppna kommandomenyn; S3-tangenten återfinns till höger om styrpinnen (OBS: Kort tryckning på S3 eller Alt en gång till kommer att stänga menyn).
2. Menyn kommer att öppnas på första alternativet “Arkiv”. De andra menyvalen kan nås genom att gå uppåt och neråt med styrpinnen, men stanna nu kvar på “Arkiv”.
3. Gå med styrpinnen åt höger och öppna Arkiv-menyn; denna innehåller en lista över ytterligare alternativ.
4. Gå med styrpinnen uppåt eller neråt till “Spara som” och bekräfta genom att trycka Enter, den vänstra tumtangenten (B9) eller styrpinnen (S-mitten). Om ett annat alternativ valts av misstag, tryck på Esc-tangenten eller på punkt tangenterna B7B8B9 på

punkttangentbordet – detta är ett generellt kommando för att avbryta och börja om. Esc-tangenten är tangenten längst till vänster på den översta raden.

5. En textruta med rubriken “Filnamn” kommer att öppnas – skriv in “Test”. Tryck nu på Enter eller den vänstra tumtangenten (B9) för att spara filen.

Öppna

En annan textfil eller ett nytt tomt dokument kan nu öppnas: tryck på Alt-tangenten en gång till eller tryck på S3 kort en gång. Menyn kommer återigen att öppnas på “Arkiv” – gå med styrpinnen åt höger för att öppna detta alternativ (om ett annat alternativ öppnas av misstag, gå med styrpinnen åt vänster för att stänga det). Gå nu med styrpinnen neråt genom menyn till “Öppna” och tryck Enter eller den vänstra tumtangenten (B9).

En lista över dokument kommer att öppnas. Använd styrpinnen för att bläddra igenom listan och hitta det tidigare sparade dokumentet. Handboken kommer också att finnas i denna lista.

För att öppna ett av dessa dokument, gå till det med styrpinnen och tryck Enter eller den vänstra tumtangenten (B9).

Tomt dokument

Du har nu lärt dig hur du sparar texter och öppnar existerande texter; öppna nu ett nytt tomt dokument.

Gör som följer:

1. Anropa kommandomenyn med Alt-tangenten eller genom att trycka S3 kort en gång.
2. Menyn kommer att öppnas på “Arkiv”-alternativet. De andra menyvalen kan nås genom att gå uppåt och neråt med styrpinnen, men stanna nu kvar på “Arkiv”.
3. Gå med styrpinnen åt höger för att öppna Arkiv-menyn; fler alternativ kommer att dyka upp.
4. Stanna antingen kvar på det första alternativet eller gå med styrpinnen uppåt eller neråt till “Nytt” och tryck sedan antingen Enter, den vänstra tumtangenten (B9) eller styrpinnen (S-mitten) för att bekräfta valet. Om ett annat alternativ väljs av misstag, tryck på Esc-tangenten eller punkttangenterna B7B8B9 – detta är ett generellt kommando för att avbryta och börja om. Esc-tangenten är tangenten längst till vänster på den översta raden.
5. En textruta med rubriken “Filnamn” kommer att öppnas. Det föreslagna namnet “Dokument” kan accepteras genom att trycka Enter eller den vänstra tumtangenten (B9).
6. Det nya dokumentet skapas alltså och markören återfinns i början av filen.

Det tidigare öppnade dokumentet är dock fortfarande öppet men att växla från det ena till det andra är enkelt: Tryck Ctrl tillsammans med minustangenten (-) eller punkttangenterna B3B6B8 tillsammans med den vänstra tumtangenten (B9).

Utforskaren

Radera nu det första textdokumentet.

För att göra det, avsluta Ordbehandlaren och bekanta dig med Utforskaren.

1. Tryck på Windows-tangenten (WIN) eller tryck på den lilla runda systemknappen S3 i 3 sekunder – S3 finns till höger om styrpinnen.
2. Du kommer att höra “Pronto-menyn, Ordbehandlaren”. Om S3 inte har hållits inne tillräckligt länge kommer kommandomenyn att öppnas; i fall detta händer, stäng den genom att kort trycka på S3 en gång till och försök igen.
3. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till “Utforskaren” och tryck Enter eller den vänstra tumtangenten (B9).
4. En lista kommer att öppnas som innehåller olika mappar och filer liknande Utforskaren i Windows.
5. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till mappen “Storage Card” – gå nu med styrpinnen åt höger för att öppna den. Mappen “Edit” innehåller dina textfiler. (I fall du hamnar på en annan mapp, gå uppåt eller neråt med styrpinnen till “Edit”-mappen.)
6. Öppna “Edit”-mappen genom att gå med styrpinnen åt höger och du kommer att tas till en lista över dina textfiler.
7. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till din testfil.
8. Anropa kommandomenyn genom att trycka antingen S3 kort en gång eller Alt-tangenten.
9. Menyn kommer att öppnas på första alternativet “Arkiv” – gå med styrpinnen åt höger för att nå undermenyn.
10. Detta kommer att öppna undermenyn på första alternativet “Nytt” – gå uppåt eller neråt med styrpinnen till “Radera”.
11. Tryck Enter eller den vänstra tumtangenten (B9) för att bekräfta valet av “Radera” – en säkerhetsfråga kommer att dyka upp.
12. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till knappen “Ja” och tryck Enter eller den vänstra tumtangenten (B9).
13. Detta kommer att radera testfilen från minneskortet. Du kommer att tas tillbaka till fillistan där andra filer kan raderas eller öppnas.

Även om filen har raderats från minneskortet kan den fortfarande hittas i Prontos interna RAM-minne, dvs. den kan fortfarande dyka upp i Ordbehandlaren och kan sparas igen med ett annat namn.

Stänga dokument

För att radera en fil från RAM-minnet måste den först stängas i Ordbehandlaren. Växla först till Ordbehandlaren genom att trycka och hålla inne S1 i en kort stund eller genom att välja “Ordbehandlaren” på Pronto-menyn.

Gör sedan som följer:

1. Tryck Alt eller S3 kort en gång för att öppna kommandomenyn som kommer att öppnas på första alternativet “Arkiv”.
2. Gå åt höger och sedan neråt med styrpinnen till “Stäng” och tryck Enter eller den vänstra tumtangenten (B9).

3. Antingen en annan fil eller ett tomt dokument kommer nu att dyka upp.

Öppna manualen

Manualen och dess enskilda kapitel kan snabbt öppnas från Pronto-menyn under "Hjälp"-alternativet. Filen kommer att visas i Ordbehandlaren, dvs. när du väljer ett kapitel från handboken kommer Ordbehandlaren att öppnas på samma gång.

För att välja och öppna ett kapitel från handboken, gör som följer:

1. Öppna Pronto-menyn genom att trycka Windows-tangenten (WIN) eller S3 en kort stund. I fall S3 inte har hållits inne tillräckligt länge kommer kommandomenyn att öppnas; om så är fallet måste den stängas genom att kort trycka S3 en gång till.
2. Pronto-menyn kommer att öppnas på ett av dess alternativ. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen för att nå andra alternativ på menyn.
3. När du har nått "Hjälp", stanna och gå med styrpinnen ett steg åt höger.
4. En undermeny kommer att öppnas som innehåller ytterligare alternativ.
5. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till "Manual" och gå med styrpinnen ett steg åt höger.
6. Handbokens enskilda kapitel visas i en lista. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till det önskade kapitlet och öppna det genom att trycka Enter eller den vänstra tumtangenten (B9).

Du har nu lärt dig en hel del: Du kan skriva och spara texter, öppna manualen, radera filer samt ta reda på den lokala tiden och annan information.

MP3-spelaren

Låt oss lyssna på lite musik som avslutning och på samma gång lära oss hur Prontos MP3-spelare används. Gör som följer:

1. Öppna Pronto-menyn genom att trycka på Windows-tangenten (WIN) eller genom att trycka på S3 under en kort stund – S3 är den lilla runda knappen till höger om styrpinnen. I fall S3 inte har hållits inne tillräckligt länge kommer kommandomenyn att öppnas; om så är fallet måste den stängas genom att kort trycka S3 en gång till.
2. Pronto-menyn kommer att öppnas på ett av dess alternativ. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen för att nå andra alternativ på menyn.
3. När du har nått "MP3-spelaren", stanna och tryck Enter eller den vänstra tumtangenten (B9).
4. MP3-spelaren kommer antingen att meddela att det inte finns någon spellista eller att den är tom eller så kommer den att visa filnamnet för den senaste ljudfilen som spelades upp. För att lyssna på en annan fil, tryck antingen på Alt-tangenten eller kort på S3 en gång – detta kommer att öppna kommandomenyn.
5. Stanna på första alternativet i menyn, "Arkiv", gå ett steg åt höger med styrpinnen och bekräfta alternativet "Öppna" genom att trycka Enter eller den vänstra tumtangenten (B9).
6. En lista över filer och mappar kommer nu att öppnas liknande när du öppnar filer i Ordbehandlaren.

7. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till "Storage card". Gå med styrpinnen åt höger för att nå de olika nivåerna i undermappen. Gå nu uppåt eller neråt med styrpinnen till mappen "Music" och öppna den genom att än en gång gå med styrpinnen åt höger.
8. Mappen "Music" innehåller MP3-filer. För att öppna en av dem, välj den helt enkelt genom att bläddra igenom listan med styrpinnen och trycka Enter eller den vänstra tumtangenten (B9).
9. Fillistan kommer att stängas och musiken kommer att spelas upp. Punktdisplayen kommer att visa filnamnet. De första tre punktcellerna kommer att visa i procent hur mycket av filen som redan har spelats. Denna information kan du också ta reda på och få uppläst genom att trycka Windows-tangenten tillsammans med minustangenten (-). När du använder punkttangentbordet, tryck "streck tillsammans med B7B8B9".
10. Pausa och fortsätt uppspelningen från samma ställe genom att trycka Enter eller den vänstra tumtangenten (B9).
11. Under uppspelning kommer förflyttning åt vänster att spola tillbaka 10 sekunder och förflyttning åt höger kommer att spola framåt 10 sekunder åt gången.
12. För att stoppa musiken, tryck mellanslag eller den högra tumtangenten (B0).
13. Avsluta MP3-spelaren genom att trycka på en av systemknapparna i en kort stund: Med S1, S2 och S3 kommer MP3-spelaren att fortsätta spela i bakgrunden; S4 kommer att stoppa spelaren.

Repetition: S1 öppnar Ordbehandlaren; S2 öppnar Kalendern; S3 öppnar Pronto-menyn; S4 lägger enheten i viloläget.

Slå av Pronto!

Hur slås Pronto! av?

Tryck och håll inne S4 (den andra lilla runda knappen till höger om styrpinnen) för att lägga Pronto! i viloläget.

Om du glömmer att slå av Pronto, oroa dig inte för att hitta ett tomt batteri; den automatiska avstängningsfunktionen är utformad så att Pronto! som standard automatiskt kommer att stänga av sig själv efter 10 minuters inaktivitet eller 10 minuter efter att en ljudfil har slutat spelas.

Även när Pronto! "sover" kan den dock fortfarande tala om datumet och tiden, meddela batteristatus eller ge en påminnelse om en kalenderbokning.

I fall Pronto! inte kan "väckas" efter att du har tryckt S1, S2 eller S3 i en kort stund och tiden inte kan läsas upp genom att kort trycka på S4 har den antingen stängts ner helt och hållet eller så har den tvingats in i viloläget eftersom batteriet skyndsamt behöver laddas.

I denna situation är icke sparade data fortfarande tillgängliga i några timmar men laddaren måste anslutas så snart som möjligt för att ladda batteriet och undvika förlust av data. Så snart som laddaren är ansluten kan Pronto! väckas från dess påtvingade viloläge på det vanliga sättet genom att trycka S1, S2 eller S3 i en kort stund.

Pronto! är en Windows CE-enhet och som sådan stängs den aldrig av helt och hållet. Om enheten dock stängs av helt och hållet, antingen till följd av brist på ström eller pga.

systemomstart (på-/avknappen), kan viss förlust av data förväntas. Varning för en fullständig nedstängning ges i form av en klar fallande tvåtonssignal.

Appendix x1: Översikt

x1.1 Kort enhetsöversikt

Pronto! 18 V3

- Ovansidan: 8-punkts punkttangentbord, 2 tumtangenter, högtalare, 18-cells punktdisplay med 18 cursor routing-tangenter, 6 runda displayknappar (3 på vardera sidan av punktdisplayen), 4 runda systemknappar
- Framsidan: Styrpinnen, inspelningsknappen
- Baksidan (från vänster till höger): Nätspänningsanslutning (laddare), SD-minneskortsfack, seriellt gränssnitt, USB-gränssnitt (master), anslutning för hörlurar (stereo), anslutning för mikrofon, mini-USB-gränssnitt (slav)

Pronto! QS

- Ovansidan: Standardtangentbord (alfanumeriskt), högtalare
- Framsidan: Styrpinnen, 4 fyrkantiga systemknappar, inspelningsknappen
- Högra sidan: Rund på-/avknapp
- Vänstra sidan: Volymreglage (ratt), anslutning för mikrofon, anslutning för hörlurar (stereo)
- Baksidan (från vänster till höger): Nätspänningsanslutning (laddare), seriellt gränssnitt, mini-USB-gränssnitt (slav), SD-minneskortsfack, USB-gränssnitt (master)

Pronto! 40

- Ovansidan: Tangentbord (standard alfanumeriskt eller 8-punkts punkttangentbord med 2 tumtangenter), 2 tangentbordslås, högtalare, rund inspelningsknapp, 40-cells punktdisplay med 40 cursor routing-tangenter, 6 runda displayknappar (3 på vardera sidan av punktdisplayen)
- Framsidan: Styrpinnen, 4 runda systemknappar, 2 fyrkantiga tumtangenter
- Högra sidan: Rund på-/avknapp, USB-gränssnitt (master), mini-USB-gränssnitt (slav), SD-minneskortsfack, seriellt gränssnitt
- Vänstra sidan: Volymreglage (ratt), anslutning för mikrofon, anslutning för hörlurar (stereo), nätspänningsanslutning (laddare)

x1.2 Termer och förkortningar som används

ActiveSync = kommunikationsprogram för datautbyte med datorn under Windows 2000/XP.

Program = allmän term för alla funktioner och program

Knapp = bekräftar en åtgärd

Blåtand = trådlös kommunikation

Punkttangenter = B0 till B9

Minneskort = mobil databärare (minneskort)

Utforskaren = tillgång till filer, mappar och minneskort
Dialogruta = uppsättning av olika inställningar och kommandon
Displayknappar = för kontroll av punktdisplayen, D1 till D6
Alternativ = allmän term för komponenter i en meny eller dialogruta
Kortkommando = tangentkombination eller snabbtangent
Meny = lista som innehåller alternativ (program, dialogrutor, undermenyer, kommandon)
Mobile Device Center = kommunikationsprogram för datautbyte med datorn under Windows Vista / Windows 7
Styrpinne = kontrollerar rörelser, S-upp till S-mitten
Mapp = en lista med filer och mappar, t.ex. mappen "Edit" (katalog)
Positionstangenter = P-tangenter, för cursor routing på en punktdisplay
Systemknappar = för att få tillgång till program eller förfrågningar, S1 till S4
Undermeny = lista med ytterligare menyalternativ
QWERTY = betyder standardtangentbord

x1.3 Generella akustiska signaler och meddelanden

1. Slå på (starta) PRONTO med på-/avknappen:

- Melodi låg-hög.
- Punktdisplay: BAUM Pronto.

2. Slå av PRONTO (på-/avknappen) (stäng ner operativsystemet):

- Melodi hög-låg.
- Punktdisplay: off.

3. Stäng av, stäng alla program med S4 (viloläget):

- Melodi hög-låg (kort)

4. Starta/öppna program från viloläget:

- Melodi låg-hög (kort)

Möjliga felmeddelanden efter att du har slagit på:

1. Ingen laddare och batterinivån låg

- Melodi hög-hög-låg
- Punktdisplay: Battery low.

När du trycker på systemknapparna: Lågt pip.

PRONTO startar inte. Anslut laddaren och ladda upp batteriet.

2. Punktmeddelanden vid laddning:

- Charging...: AC-adaptorn är ansluten, laddningen fortsätter, Pronto är avslagen.
- battery full: AC-adaptorn är ansluten, laddningen har slutförts, Pronto är avslagen.

x1.4 Tekniska data för alla enheter

Pronto 18 V3:

Dimensioner i mm (bredd x djup x höjd): 174x92x32

Vikt: ung. 450 g

Batteriladdning: 5 V / max. 2,5 A

Batterikapacitet: 7,2 V / 2500 mAh

Minne:

- DRAM: 128 MB (internt arbetsminne)
- Inbyggd Flashdisk: 32 MB
- Internt Flash-minne (flashdisk): 1 GB (950 MB användardata)
- Externt minne (minneskort): SD- eller SDHC-minneskort
- Processor: 520 MHz

Anslutningar:

- Seriell
- USB (master)
- Mini-USB (slav)
- Blåttand
- WLAN
- Stereohörlurar
- Mikrofon (mono)
- Laddare

Pronto! QS:

Dimensioner i mm (bredd x djup x höjd): 253x92x19

Vikt: ung. 600 g

Batteriladdning: 5 V / max. 2,5 A

Batterikapacitet: 7,2 V / 2500 mAh

Minne:

- DRAM: 128 MB (internt arbetsminne)
- Inbyggd Flashdisk: 32 MB
- Internt Flash-minne (flashdisk): 1 GB (950 MB för användardata)
- Externt minne (minneskort): SD- eller SDHC-minneskort
- Processor: 520 MHz

Anslutningar:

- Seriell
- USB (master)
- Mini-USB (slav)
- Blåttand
- WLAN
- Stereohörlurar
- Mikrofon (mono)
- Laddare

Pronto! 40:

Dimensioner i mm (bredd x djup x höjd): 297x152x27

Vikt: ung. 1300 g (inkl. standardtangentbordsmodul)

Batteriladdare: 5 V / max. 2,5 A
Batterikapacitet: 7,2 V / 2500 mAh

Minne:

- DRAM: 128 MB (internt arbetsminne)
- Inbyggd Flashdisk: 32 MB
- Internt Flash-minne (flashdisk): 1 GB (950 MB för användardata)
- Externt minne (minneskort): SD- eller SDHC-minneskort
- Processor: 520 MHz

Anslutningar:

- Seriell
- USB (master)
- Mini-USB (slav)
- Blåtand
- WLAN
- Stereohörlurar
- Mikrofon (mono)
- Laddare

För alla enheter:

Batterilivslängd: Ung. 10-12 timmar (längre med inaktiverat WLAN-chip)

Viloläge: Flera dagar

Observera: Livslängden är beroende av den elektriska effektförbrukningen (blåtand, WLAN, storleken på minneskortet, USB-minnet)

Batteri: Li-Ion

AC-adapter: 100-240 Volt, 50-60 Hz

Operativsystem: Windows CE

Räckvidd för blåtand: Ung. 10 meter

Filformat:

- Ordbehandlaren: Rich Text Format (RTF), textformat (TXT)
: Endast läsning: PDF, DOC, DOCX, HTML
- Röstinspelning: MP3, WAV
- Musik: MP3, WAV, WMA
- Daisy-standard: 2.02

Systemkrav för PC-anslutning:

- Windows 2000 eller Windows XP med Microsoft ActiveSync.
- Windows Vista eller Windows 7 med Microsoft Mobile Device Center.

x1.5 Kontakt och support

PRONTO-utvecklingsteamet svarar gladeligen på frågor och tar emot förslag. En internationell e-postdiskussionsgrupp har lagts upp speciellt för detta ändamål. Den är öppen för alla frågor och förslag kring PRONTO, för att dela med sig av erfarenheter till andra PRONTO-användare och för att få tillgång till expertsupport från våra affärspartners.

För att gå med, skicka ett mail till listserv@listserv.baum.de med textinnehållet "SUBSCRIBE Prontoint "efternamn, förnamn" (utan citattecken).

Hjälp finns att få via telefon genom att ringa till +49 (0)6223/49090.

BAUM Retec AG
In der Au 22
D-69257 Wiesenbach
Germany
Tfn: +49 (0) 62 23 / 49 09 0
Fax: +49 (0) 62 23 / 49 09 399
E-post: info@baum.de
Internet: www.baum.de

Var god kontakta vår serviceavdelning i fall problem uppstår med enheten:

BAUM Retec AG
Service
In der Au 22
D-69257 Wiesenbach
Germany
Tfn: +49 (0) 62 23 / 49 09 0
Fax: +49 (0) 62 23 / 49 09 399
E-post: service@baum.de

Skador och reparationer

Vad kan göras i fall din Pronto inte längre reagerar?

- Kontrollera alla gränssnitt och anslutningar. Vänd dig till manualen för att kontrollera att rätt gränssnitt används.
- Är nätspänningsanslutningen (laddaren) ansluten till ett aktivt eluttag?

Använd aldrig en skadad enhet! Dra ut AC-adaptern. Vänligen kontakta omedelbart din lokala återförsäljare eller BAUM Retec AG:s serviceavdelning.

Appendix x2: Kommandolista (för referens)

Här hittar du alla kortkommandon och tangentkombinationer som du kan använda på Pronto (punktläge och QWERTY-läge).
Sorterade efter program.

X2.1 Allmänna kommandon:

Mellanslag: "Höger tumtangent (B0), mellanslagstangenten
Kommandotangenten: Vänster tumtangent (B9)
Radera tecken till vänster om markören: B7, Backsteg
Avbryttangent (Escape-funktion): B9B7B8, D4, Esc-tangenten
Enhetens huvudvolym: Pronto 18: „S4 tillsammans med B-tangent“ (B1 till B8), Pronto QS / Pronto 40:
Liten ratt (reglage) på vänstra sidan.
Tal på/av (endast Pronto 18): D2D5
Sammanhangskänslig hjälp: B2B6B9, F1 (FN+1)
Tangentlås på/av: S2S3
Kommandomeny: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten
Stäng av (viloläge): S4 lång
Visa Pronto-version: „V tillsammans med B7B8B9B0“, Skift+Ctrl+v
Slå av/på enheten helt och hållet: Pronto 18: S1+S4, Pronto 40 / Pronto QS: På-/avknappen

Stoppa och starta om Pronto-programvaran: D1D4B3B6, FN+vänster Skift+vänster Ctrl+7 (OBS: Förlust av icke sparade data)
Stoppa Pronto-programvaran: D1D4B2B5, FN+vänster Skift+vänster Ctrl+6 (OBS: Förlust av icke sparade data)
Starta Pronto-programvaran (efter stopp): D1D4B1B4, FN+vänster Skift+6
Starta om operativsystemet och Pronto-programvaran: D1D4B1B2B4B5, FN+vänster Skift+0

Uppdatering av Pronto-programvara och operativsystem:
Installation av fullständig Pronto-version (fullständig installation) från mappen "Storage Card\Install":
D1D4B1B4B7B8, FN+vänster Skift+1
Installation av enskilda Pronto-programvarukomponenter (uppdatering) från mappen "Storage Card\Update": D1D4B7B8, FN+vänster Skift+vänster Ctrl+1
Installation av operativsystem från mappen "Storage Card\OS5": D1D4B2B3B5B7B8, FN+vänster Skift+3
Installation av BIOS (inte på Pronto 18): FN+vänster Skift+vänster Ctrl+3, D1D4B1B2B3B4

X2.2 Systemknappskommandon:

Korta tryck på systemknapparna:

Temperatur = S1 en gång
Lufttryck = S1 två gånger
Höjd (ovanför havsytan, uppskattning) = S1 tre gånger
Lista påminnelser = S2 en gång
Tidtagning = S2 två gånger
Räkna ned = S2 tre gånger
Kommandomenyn = S3 (identiskt med B9B3B5 eller Alt-tangenten)
Batteristatus = S3 två gånger
Kompass = S3 tre gånger
Tid = S4 en gång

Datum = S4 två gånger

Långa tryckningar på systemknapparna:

Tangentlås på/av: S2S3

Stäng av (viloläge): S4

Slå på: S1, S2, eller S3

Stäng av helt och hållet: På Pronto 18 S1S4 lång, på-/avknappen på Pronto QS och Pronto 40 (var god använd inte detta i vanliga fall)

X2.3 Kör program

Öppna Prontos huvudmeny (tillgång till alla program): S3 lång, Windows-tangenten

Ordbehandlaren = S1 lång, o tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+o

Kalendern = S2 lång, k tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+k

Adressboken = a tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+a

Utforskaren = f tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+f

PDF-dokumentläsaren = u tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+u

Mobil = l tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+l

Kalkylatorn = y tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+y

Pronto som punktdisplay (inte på Pronto QS) = p tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+p

Fickminnet = c tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+c

Inspelning = tryck på REC-knappen och fortsätt hålla den intryckt

Spela upp senaste inspelningen = REC-knappen kort en gång

DAISY-spelaren = d tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+d

Mp3-spelaren = m tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+m

E-post = e tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+e

MSN Messenger = n tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+n

Webbläsaren = w tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+w

Internetradion = r tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+r

Tidtagning och alarm (alarm, stoppur, timer) = t tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+t

Inställningar = s tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+s

Anslutningar (för blåtand på/av) = i tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+i

Hjälp (manual) = h tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+h

Var är jag = minus tillsammans med B7B8B9 (-+B7B8B9), Windows-tangenten+minus

Senaste meddelandet = nummertecknen tillsammans med B7B8B9 (#+B7B8B9), Windows-tangenten+3

Lista över meddelanden = plus tillsammans med B7B8B9 (++B7B8B9), Windows-tangenten+Plus

X2.4 Ordbehandlaren

Öppna Ordbehandlaren: S1 lång, o+B7B8B9, Windows-tangenten+o

Punktmönster för punktläget:

Tecken: Vänster B1, höger B4, aktuellt B1B4
Ord: Vänster B2, höger B5, aktuellt B2B5
Mening: Vänster B3, höger B6, aktuell B3B6
Rad: Vänster B1B2, höger B4B5, aktuell B1B2B4B5
Stycke: Vänster B1B3, höger B4B6, aktuellt B1B3B4B6
Sida: Vänster B2B3, höger B5B6, aktuell B2B3B5B6
Början: B1B2B3, slutet B4B5B6, allt B1B2B3B4B5B6

Läsning: Punktmönster+B9B0

Markering: Punktmönster för "aktuell"+B9

Radera: Punktmönster för "aktuell"+B9B7

Radera markerad text: B7B9

Radera tecken till vänster om markören: B7

Avlägsna markering: B7B8B9

Gå till början av raden och läs upp raden: B1B2B3B7B9(B0)

Gå till slutet av raden och läs upp raden: B4B5B6B8B9(B0)

Ny rad: B9B8B4B5 eller B8

Nytt stycke: B9B8B4B6

Ny sida: B9B8B5B6

Infoga tabb: B9B8B4

Windows-liknande kommandon för QWERTY-läget:

Läsa textpassager:

Tecken vänster / höger: Pil vänster / höger
Ord vänster / höger: Ctrl+pil vänster / höger
Mening vänster / höger: Ctrl+mindre än / Skift+Ctrl+mindre än
Aktuell mening: Skift+Ctrl+mellanslag
Föregående / nästa rad: Pil upp / pil ner
Läs upp tecken: Ctrl+punkt
Bokstavera ord: Ctrl+kommatecken

Gå till-kommandon:

Föregående / nästa sida: PgUp / PgDn (FN+pil upp / FN+pil ner)
Början / slutet av raden: Home / End (FN+pil vänster / FN+pil höger)
Början / slutet av dokumentet: Ctrl+Home / Ctrl+End (FN+Ctrl+pil vänster / pil höger)

Markera text från markörpositionen:

Tecken höger / vänster: Skift+pil höger / Skift+pil vänster
Ord höger / vänster: Skift+Ctrl+pil höger / Skift+Ctrl+pil vänster
Nästa / föregående rad: Skift+pil ner / Skift+pil upp
Till slutet av raden: Skift+End (FN+Skift+pil höger)
Till början av raden: Skift+Home (FN+Skift+pil vänster)
Till början av dokumentet: Skift+Ctrl+Home (FN+Skift+pil vänster)
Till slutet av dokumentet: Skift+Ctrl+End (FN+Skift+Ctrl+pil höger)
Markera hela texten: Ctrl+a

Markera block start / block slut: Ctrl+mellanslag
Avlägsna markering: Esc

Raderingskommandon:

Radera tecken till vänster om markören: Backstegstangenten

Radera aktuellt tecken: Del-tangenten

Radera markerad text: Ctrl+Del

Ny rad: Enter-tangenten

Nytt stycke: Skift+Enter

Ny sida: Skift+Ctrl+Enter

Infoga tabb: Tabb-tangenten (TABB)

Menyfunktioner

Öppna/stäng meny: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: f+B9B8, Alt+a

Nytt dokument (dialog) = "n tillsammans med B8B9", Ctrl+n

Öppna dokument (dialog) = "o tillsammans med B8B9", Ctrl+o

Stäng dokument = "u tillsammans med B8B9", Ctrl+u

Spara dokument = "s tillsammans med B8B9", Ctrl+s

Spara som (dialog) = "a tillsammans med B8B9", Ctrl+Skift+s

Skydda/ta bort skydd på text = "z tillsammans med B8B9, Ctrl+z"

Föregående fil = "Minus tillsammans med B8B9", Ctrl+minus

Lista över öppna filer = "l tillsammans med B8B9", Ctrl+l

Menyn Redigera: r+B9B8, Alt+r

Klipp ut = "x tillsammans med B8B9", Ctrl+x

Kopiera = "c tillsammans med B8B9", Ctrl+c

Klistra in = "v tillsammans med B8B9", Ctrl+v

Radera = B9B7, Ctrl+Del-tangenten

Markera början/slut på textblock = B9B1B4, Ctrl+mellanslag

Markera hela texten = B9B8B1B2B3B4B5B6, Ctrl+a

Sök (dialog) = "B1B4B5B6B8B9", Ctrl+f

Sök nästa = "B2B5B8B9", F3 (FN+3)

Ersätt (dialog) = "h tillsammans med B8B9", Ctrl+h

Sätt bokmärke = "= tillsammans med B8B9", Ctrl+m

Hoppa till bokmärke = "m tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+m

Menyn Infoga: i+B8B9, Alt+i

Infoga datum = "B2B6B8B9", F5 (FN+5)

Infoga tid = "B2B3B5B8B9", F6 (FN+6)

Ny rad (radmatning) = B8 eller B9B8B4B5, Enter-tangenten

Nytt stycke = B9B8B4B6, Skift+Enter

Ny sida (sidmatning) = B9B8B5B6, Skift+Ctrl+Enter

Infoga tabb = B9B8B4; Tabb-tangenten

Menyn Uppläsning: g+B8B9, Alt+g
Börja läsa från markörpositionen = B9 eller r+B8B9, S-mitten, Skift+Ctrl+r
Läs aktuell mening = B9B0B3B6, Skift+Ctrl+mellanslag
Läs mening till vänster = B9B0B3, Ctrl+mindre än
Läs mening till höger = B9B0B3, Ctrl+större än
Läs markerad text = "k tillsammans med B8B9", Ctrl+k

Funktioner under löpande läsning:
Starta/stoppa: S-mitten, B9 eller r+B8B9, Skift+Ctrl+r
Långsammare: S-upp
Snabbare: S-ner (normal uppläsningshastighet kommer inte att påverkas)
2 ord bakåt: S-vänster
2 ord framåt: S-höger

Menyn Verktyg: t+b8B9, Alt+t
Punkt (dialogruta för att aktivera ordbrytning, formateringstecken etc.)
Position i text = "p tillsammans med B8B9", Ctrl+p
E-post (funktioner när E-postprogrammet har startats)
Förkortning (Grade 2) (Funktioner för att förkorta punktskrift. Endast tillgängliga i fall ett konverteringsprogram existerar.)
Minnesinformation: "q tillsammans med B9B8", Ctrl+Skift+q

X2.5 Kalendern

Öppna Kalendern: S2 lång, k tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+k

Bläddra i kalendern:

Nästa / föregående bokning: S-ner / S-upp, B9B6 / B9B3, pil ner/upp
Nästa / föregående dag: S-höger / S-vänster, B9B4 / B9B1, pil höger/vänster
Nästa / föregående vecka: B5 / B2, Skift+pil vänster / Skift+pil höger
Nästa / föregående månad: B4B5 / B1B2, Skift+pil ner / Skift+pil upp
Nästa / föregående halvår: B4B6 / B1 B3, PgDn / PgUp, (FN+pil ner / FN+pil upp)
Nästa / föregående år: B5B6 / B2B3, Skift+PgDn / Skift+PgUp (FN+Skift+pil ner / FN+Skift+pil upp)

Öppna/stäng meny: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a

Ny bokning (dialog) = "n tillsammans med B8B9", Ctrl+n

Öppna bokning (dialog) = S-mitten, B9, Enter-tangenten

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r

Radera bokning = B9B7, Del-tangenten

Sök (dialog) = "B1B4B5B6B8B9", Ctrl+f

Sök nästa = "B2B5B8B9", F3 (FN+3)

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g

Gå till idag = B0 eller "d tillsammans med B8B9", mellanslag

Gå till datum (dialog) = "j tillsammans med B8B9", Ctrl+j

Bokning

Nästa = S-ner, B9B6, pil ner

Föregående = S-upp, B9B3, pil upp

Dag

Nästa = S-höger, B4, pil höger

Föregående = S-vänster, B1, pil vänster

Vecka

Nästa = B5, Skift+pil höger

Föregående = B2, Skift+pil vänster

Månad

Nästa = B4B5, Skift+pil ner

Föregående = B1B2, Skift+pil upp

Halvår (sex månader)

Nästa = B4B6, PgDn (FN+pil ner)

Föregående = B1B3, PgUp (FN+pil upp)

År

Nästa = B5B6, Skift+PgDn (FN+Skift+pil ner)

Föregående = B2B3, Skift+PgUp (FN+Skift+pil upp)

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Filter (dialog): r+B7B9, Ctrl+r

Bokningar med punkt (dialog)

Bokningar med tal (dialog)

Datum med punkt (dialog)

Datum med tal (dialog)

Återställ till standardinställningarna

I dialogrutorna för visning av bokningar och datum:

Kommandomenyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Flytta åt vänster = l+B9B8, Ctrl+pil vänster

Flytta åt höger = r+B9B8, Ctrl+pil höger

Flytta till början = b+B8B9, Ctrl+pil upp

Flytta till slutet = e+B8B9, Ctrl+pil ner

Dölj objekt = h+B8B9, Ctrl+Del

Visa objekt = s+B8B9, Ctrl+Insert (FN+Ctrl+Del)

Återställ till standardinställningarna

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Påminnelse (dialog)

Rensa gamla bokningar (dialog)

Hantera kategorier (dialog)

Exportera (dialog)

Importera (dialog)

X2.6 Adressboken

Öppna Adressboken: a tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+a

Bläddra i adressboken och dess fält:

Första / sista kontakten: B1B2B3 / B4B5B6, Ctrl+pil upp / Ctrl+pil ner

Föregående / nästa kontakt: S-upp / S-ner, B3 / B6, pil upp / pil ner

Ett fält åt vänster / höger: S-vänster / S-höger, B1 / B4, pil vänster / pil höger

5 fält åt vänster / höger: B2 / B5, Skift+Ctrl+pil vänster / Skift+Ctrl+pil höger

Kontaktens första / sista fält: B1B2 / B4B5, Home / End (FN+pil vänster / FN+pil höger)

10 kontakter bakåt / framåt: B2B3 / B5B6, PgUp / PgDn

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a

Ny kontakt (dialog) = "n tillsammans med B8B9", Ctrl+n

Öppna kontakt (dialog) = S-mitten, B9, Enter-tangenten

Uppdatera (aktualisera) = k+B8B9, F5 (FN+5)

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r

Radera kontakt = B9B7, Del-tangenten

Sök (dialog) = "B1B4B5B6B8B9", Ctrl+f

Sök nästa = "B2B5B8B9" F3 (FN+3)

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g

Första kontakten = B1B2B3, Ctrl+pil upp

Sista kontakten = B4B5B6, Ctrl+pil ner

Föregående kontakt = S-upp, B3, pil upp

Nästa kontakt = S-ner, B6, pil ner

Kontaktens första fält = B1B2, Home (FN+pil vänster)

Kontaktens sista fält = B4B5, End (FN+pil höger)

Ett fält åt vänster = S-vänster, B1, pil vänster

Ett fält åt höger = S-höger, B4, pil höger

5 fält åt vänster = B2, Skift+Ctrl+pil vänster

5 fält åt höger = B5, Skift+Ctrl+pil höger

10 kontakter bakåt = B2B3, PgUp (FN+pil upp)

10 kontakter framåt = B5B6, PgDn (FN+pil ner)

Gå till kontakt x på sorteringsposition y = y+B8B9, Skift+Ctrl+y

Gå till kontakt i listan som startar med sträng = z+B8B9, Skift+Ctrl+z

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Val av maskprofil (dialog) = "w tillsammans med B8B9", Ctrl+w

Nästa mastermask för visning = "m tillsammans med B9", Skift+Ctrl+m

Föregående mastermask för visning = "m tillsammans med B8B9", Ctrl+m

Använd favoritmask = "u tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+u

Sorteringsordning (dialog) = "o tillsammans med B8B9", Ctrl+o

Filter (dialog) = "t tillsammans med B8B9", Ctrl+t

Inget filter = "k tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+k (endast i fall ett filter har satts)
Namn på fält (dialog)
Återställ till standardinställningarna

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Detaljerad info om kontaktfält = "plus tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+0

Läs detaljerade maskfält = "/" tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+4

Ring telefonnummer = "(tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+1

Spela upp toner = ")" tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+2

Skicka SMS till nummer = "likhetstecken tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+3

Förflyttning i listor:

Nästa / föregående objekt: S-höger / S-vänster, B9B4 / B9B1, pil höger / pil vänster

Hoppa direkt till objekt: Skriv den första bokstaven (de första bokstäverna) i dess namn eller positionsnummer.

Början eller slutet av listan: B1B2B3B7B9 / B4B5B6B8B9, Home / End (FN+pil vänster / FN+pil höger)

Öppna/stäng kommandomenyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Ställ in maskfältens positioner i vallistor:

Flytta åt vänster = l+B9B8, Ctrl+pil vänster

Flytta åt höger = r+B9B8, Ctrl+pil höger

Till början = b+B9B8, Ctrl+pil upp

Till slutet = e+B9B8, Ctrl+pil ner

Dölj = h+B9B8, Ctrl+Del

Visa = s+B9B8, Ctrl+Insert (FN+Ctrl+Del)

X2.7 Utforskaren

Öppna Utforskaren = f tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+f

Öppna/stäng menyn = S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a

Ny mapp (dialog) = "n tillsammans med B8B9", Ctrl+n

Öppna = "o tillsammans med B8B9", Ctrl+o eller Enter-tangenten

Radera = B9B7 eller d+B8B9, Del-tangenten

Byt namn (dialog) = "r tillsammans med B8B9", Ctrl+F2 (FN+Ctrl+2)

Egenskaper (dialog) = "p tillsammans med B8B9", Alt+Enter

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r

Klipp ut = "x tillsammans med B8B9", Ctrl+x

Kopiera = "c tillsammans med B8B9" Ctrl+c

Klistra in = "v tillsammans med B8B9", Ctrl+v

Markera fil eller mapp = B0, mellanslag

Markera allt = B9B8B1B2B3B4B5B6, Ctrl+a

Invertera markering = "i tillsammans med B8B9", Skift+mellanslag

Sök (dialog) = "? tillsammans med B8B9", Ctrl+f
ZIP-arkiv = "z tillsammans med B8B9", Ctrl+z
Extrahera från ZIP-arkiv = "u tillsammans med B8B9", Ctrl+u

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v
Filter (Detaljer-dialog)
Sortering (dialog)

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t
Minne = "m tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+m
Läs antalet markerade objekt = "k tillsammans med B8b9", Ctrl+k
ZIP-förlopp

X2.8 Daisy-spelaren

Öppna Daisy-spelaren: d+B9B7B8, Windows-tangenten+d
Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a
Uppdatera ny bokhylla = n+B8B9, Ctrl+n, D1D3D4D5
Spela/stoppa: S-mitten, B9, Enter-tangenten
Boklista (dialog) = o+B9B8, Ctrl+o, D1D3D5
Stäng bok = u+B8B9, Ctrl+u, D2D4D5D6
Avsluta Daisy-spelaren = B1B4B5B8B9, Alt+F4 (Alt+FN+4)

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r
Sök (dialog) = B1B4B5B6B8B9, Ctrl+f, D1D2D4

Menyn Bokmärke: b+B8B9, Alt+b
Gå till (dialog) = #+B9B8, Ctrl+3, D3D4D5D6
Föregående = B2, D2D3D6, PgUp (FN+pil upp)
Nästa = B5, D3D5D6, PgDn (FN+pil ner)
Infoga = B9B8, D2D3D5D6, Insert-tangenten (FN+Del)
Radera (dialog) = B7, D1D2D3, Del-tangenten
Radera alla = B9B7, D1D2D3D4D5D6, Skift+Ctrl+Del

Menyn Verktyg: t+B9B8, Alt+t
Hastighet (dialog) = s+B8B9, D2D3D4, Ctrl+s
Snabbare: ++B9B8, D4D5, Ctrl+plus
Långsammare: -+B9B8, D1D2, Ctrl+minus
Välj minnestyp (dialog)

Menyn Navigera: n+B9B8, Alt+n
Högre nivå = B3, D1, S-upp, pil upp
Lägre nivå = B6, D3, S-ner, pil ner
Bakåt = B1, D1D3, S-vänster, pil vänster
Framåt = B4, D4D6, S-höger, pil höger
Början av boken = B9B1B2B3, D1D4, Home (FN+pil vänster)
Slutet av boken = B9B4B5B6, D3D6, End (FN+pil höger)
Gå till sida (dialog) = p+B8B9, D1D2D3D4, Skift+Ctrl+p
Spola framåt = B2B6B7B9B8, D5D6, Skift+Ctrl+pil höger
Spola bakåt = B3B5B9B8, D2D3, Skift+Ctrl+pil vänster

Menyn Information: o+B9B8, Alt+o
Bokinformation = i+B9, D2D4, Skift+Ctrl+i
Var är jag = r+B9, D1D2D3D5, Ctrl+r

X2.9 MP3-spelaren

Öppna MP3-spelaren: m+B9B7B8, Windows-tangent+m
Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

I huvudmenyn:

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a
Öppna (dialog) = o+B9B8, D1D3D5, Ctrl+o

Menyn Uppspelning: u+B8B9, Alt+u
Start/paus = B9, D6, S-mitten, Enter
Stopp = B0, D4, Ctrl+Enter eller mellanslag
Nästa spår (titel) = B4, D3, S-ner, pil ner
Föregående spår (titel) = B1, D1, S-upp, pil upp
Första spåret (titeln) = B3, D1D4, Home (FN+pil vänster)
Sista spåret (titeln) = B6, D3D6, End (FN+pil höger)
10 sekunder framåt = B5, D4D6, S-höger, pil höger
10 sekunder bakåt = B2, D1D3, S-vänster, pil vänster
Återuppta uppspelningen från senaste stopposition = r+B8B9, D1D2D3D5, Ctrl+r

Menyn Ljud: l+B9B8, Alt+l
Menyn Volym
Öka = B4B5, Ctrl+pil upp
Sänk = B1B2, Ctrl+pil ner

Menyn Spellista: (dialog) = s+B8B9, D1D3D4D6, Alt+s
Menyn Information (dialog) = o+B9B8, D1D3D4, Alt+o

Menyn i spellistans dialogruta:

Spellista: y+B8B9, Ctrl+y
Ny: n+B9B8, D1D3D4D5, Ctrl+n
Öppna (dialog): o+B9B8, D1D3D5, Ctrl+o
Spara som: s+B8B9, D1D2D4, Ctrl+s
Redigera: r+B8B9, Ctrl+r
Lägg till:
Fil = ++B8B9, D2D3D5, Ctrl+plus
Mapp = /+B8B9, D2D5D6, Ctrl+snedstreck
Flytta:
Vänster = l+B8B9, D1D2, Ctrl+pil vänster
Höger = r+B8B9, D4D5, Ctrl+pil höger
Början = b+B8B9, D1D2D3, Ctrl+pil upp
Slutet = z+B8B9, D4D5D6, Ctrl+pil ner
Radera = B9B7, Del-tangenten

X2.10 Fickminnet

Öppna Fickminnet och påbörja inspelning: Tryck och håll inne REC-knappen
Stoppa inspelningen och stäng Fickminnet: Släpp upp REC-knappen

Öppna fillistan och spela upp inspelning: Kort tryck på REC-knappen

Öppna Fickminnet: c+B9B7B8, Windows-tangenten+c

I huvudvyn (fillistan):

Välj inspelning: Styrpinnen upp/ner, pil upp/ner

Spela upp inspelning: B9, styrpinnen i mitten, Enter-tangenten

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a

Radera: B9B7 eller d+B8B9, Del-tangenten

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Spela upp inspelning: B9, S-mitten, Enter

Starta inspelning: s+B8B9, Ctrl+s

Tryck på någon tangent för att stoppa inspelningen. Maximal inspelningstid för varje inspelning är 10 minuter.

Spela in CardID

Spela in en alarmsignal

Inspelningskvalitet: q+B9B8, Ctrl+q

X2.11 Alarmet

Öppna alarm: t+B9B7B8, Windows-tangenten+t, välj sedan Alarm.

I huvudvyn:

Välj alarm: Styrpinnen upp/ner, pil upp/ner

Öppna alarminställningar: B9, D6, Enter

X2.12 Tidtagning

Öppna tidtagningen: S2 kort två gånger eller t+B9B7B8 resp. Windows-tangenten+t och välj sedan Tidtagning.

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Tidtagning: t+B8B9, Alt+t

Starta: B4, Ctrl+mellanslag

Pausa: B5, mellanslag

Fortsätt: B5, mellanslag

Stoppa: B6, Ctrl+mellanslag

Meddela slut-/mellantid: B8, Skift+Ctrl+z

Menyn Ljud vid tidtagning: g+B8B9, Alt+g

Ljud varje sekund: B1, Ctrl+1

Ljud var 10:e sekund: B2, Ctrl+2

Säg varje minut: B3, Ctrl+3

Inget ljud: B7, Ctrl+0

X2.13 Räkna ned (timer)

Öppna räkna ned: S2 kort tre gånger eller t+B7B8B9 resp. Windows-tangenten+t och välj sedan Räkna ned.

Starta: s+B9, Alt+s

Stoppa: o+B9, Alt+o

Ange tid: d+B9, Alt+d

Använd tid: t+B9, Alt+t

Återstående tid: r+B9, Alt+r

Stäng räkna ned: B9 eller B9B7B8, D6 eller D4, Enter eller Esc

X2.14 Mobil

Öppna Mobil: l+B7B8B9, Windows-tangenten+l

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

I huvudvyn:

Besvara samtal = B8, Ctrl+Enter

Lägg på = B7, Del

Ring samtal (dialog) = r+B9, Ctrl+r

Anslut/koppla från = a+B9, Ctrl+a

Skicka SMS = m+B9, Ctrl+m

Läs SMS (dialog) = s+B9, Ctrl+s

Visa inlästa SMS = d+B9, Ctrl+d

Inställningar (dialog) = i+B9, Ctrl+i

Informationsfält = f+B9, Ctrl+f

Statusfält = u+B9, Ctrl+u

I dialogrutan Inställningar:

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Profil: p+B9, Ctrl+p

Ställ i förgrund vid samtal: f+B9, Ctrl+f

Avgör uppringare genom adressbok: u+B9, Ctrl+u

I dialogrutan för att ringa samtal eller skicka SMS:

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Ring: r+B9, Ctrl+r resp. Skicka: c+B9, Ctrl+c

Val av telefonnummer (dialog): t+B9, Ctrl+t

Telefonnummer: p+B9, Ctrl+p

Rensa telefonnummer: n+B9, Ctrl+Del

I dialogrutan „Skicka SMS“:

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Skicka: (dialog): c+B9, Ctrl+c

SMS-text: t+B9, Ctrl+t

Radera SMS-text: r+B9, Ctrl+Del

Antal bokstäver: l+B9, Ctrl+l

I dialogrutan "Läs SMS" resp. "Visa inlästa SMS":
Öppna/stäng meny: S3 kort, B9B3b5, Alt-tangenten
Telefonnummer: t+B9, Ctrl+t
SMS-text: x+B9, Ctrl+x
Datum: d+B9, Ctrl+d
Visningsinställningar: v+B9, Ctrl+v
Radera SMS: r+B9, Del-tangenten
Skicka: s+B9, Ctrl+s
Avgör avsändare genom adressbok: n+B9, Ctrl+n
Radera SMS-text: r+B9, Ctrl+Del
Hämta nya SMS: y+B9, Ctrl+y
Avbryt hämtning av SMS: h+B9, Ctrl+h (används inte vid normal inläsning)

X2.15 Kalkylatorn

Öppna Kalkylatorn: y+B7B8B9, Windows-tangenten+y
Öppna/stäng meny: S3 kort, B9b3B5, Alt-tangenten

Menyn Funktion: f+B8B9, Alt+f

Grundräknesätt:

Addition: +, plus

Subtraktion: -, minus

Multiplikation: *, asterisk

Division: /, snedstreck

Lika med (utför beräkning): B8 eller "=", Enter eller likhetstecken

Avancerad:

Procent: %

Roten ur: sqrt

Upphöjt till: pow

Exponentiell: exp

Naturlig logaritm: ln

10-bas 10 logaritm: log

Modulo: mod

Sinus: sin, sinr, sinh, asin

Cosinus: cos, cosr, cosh, acos

Tangens: tan, tanr, tanh, atan

Uttryck:

Pi

Euler: e

Parentes vänster: (

Parentes höger:)

Menyn Redigera: r+B9B8, Alt+r

Rensa uträkningsrad (ny uträkning): e+B9, Skift+Del

Radera tecken bakåt: B7, Backstegstangenten

Infoga och rensa senaste minnesvärdet: r+B8B9, Ctrl+r

Rensa minneslista: r+B9, Skift+Ctrl+Del

Rensa uträkningsradslistan: u+B9, Ctrl+Del

Kopiera resultatet till klippbordet: z+B8B9, Ctrl+z

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Uträkningsradslista:

Nästa värde: S-ner, l+B9, pil ner (D3 inget tal)

Föregående värde: S-upp, l+B8B9, pil upp, (D1 inget tal)

Senaste uträkningen: n+B9, Skift+pil ner

Minneslista:

Nästa värde: y+B9, PgDn (FN+pil ner)

Föregående värde: y+B8B9, PgUp (FN+pil upp)

Senaste posten i minneslistan: m+B9, Skift+PgDn (FN+Skift+pil ner)

Menyn Verktyg: t+B8b9, Alt+t

Minnesfunktioner:

Infoga senaste minnesvärde: i+B8B9, Skift+Ctrl+i

Infoga i minneslistan: i+B9, Skift+Ctrl+h

Addera till senaste minnesvärdet (M-plus): ++B8B9, Ctrl+plus

Subtrahera från senaste minnesvärdet (M-minus): --B8B9, Ctrl+minus

Säg senaste minnesvärdet: s+B9, Skift+Ctrl+s

Läs upp uträkningsraden: a+B9, Skift+Ctrl+a

Inställningar (dialog): o+B9, Skift+Ctrl+o

Menyn Användarkonstanter: k+B8B9, Alt+k

x:

Infoga x i uträkningsrad: x

Infoga värdet av x i uträkningen

Infoga uträkningsrad i x: 1+B8B9, Skift+Ctrl+1

Säg x värde: 1+B9, Ctrl+1

y:

Infoga y i uträkningsrad: y

Infoga värdet av y i uträkningen

Infoga uträkningsrad i y: 2+B8B9, Skift+Ctrl+2

Säg y värde: 2+B9, Ctrl+2

z:

Infoga z i uträkningsrad: z

Infoga värdet av z i uträkningen

Infoga uträkningsrad i z: 3+B8B9, Skift+Ctrl+3

Säg z värde: 3+B9, Ctrl+3

Menyn Omvandling: o+B8B9, Alt+o

Fahrenheit i Celsius

Tum i centimeter

Radianer i grader

Grader i radianer

X2.16 Internetradion

Observera: För att använda detta program måste Pronto ha en aktiv anslutning till webben, dvs. via en ActiveSync-anslutning till en Internet-ansluten PC, WLAN eller via mobiltelefon och giltig RAS-/GPRS-anslutning.

Öppna Internetradion: r+B7b8B9, Windows-tangenten+r
Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

I huvudvyn:

Spela nästa/föregående funna radiostation: B4/B1, D4D6, S-höger/S-vänster, pil höger/vänster
Spela nästa/föregående sparade radiostation: B6/B3, D3/D1, S-ner/S-upp, pil ner/upp
Spela en av de 10 snabbvalsstationerna: Skriv in siffran 0 till 9
Spara aktuell radiostation på position 0 till 9: Sifra+B9B8, Ctrl+sifra

Menyn Hantera radiostationer: h+B9B8, Alt+h
Sök efter radiostationer (dialog): f+B9B8, D1D2D4, Ctrl+f

I dialogrutan „Söker efter radiostationer“:
Listan Radiostation
Textrutan Info (genre, bithastighet, position)
Knappen Sök radiostationer (dialog)

I dialogrutan Sökinställningar:
Listan Genrer
Kryssrutan Filtrera på bithastighet
Knappen Starta sökning

Menyn Snabbvalsinställningar: s+B9B8, Alt+s
Automatiskt snabbval (sparar 10 positioner): B1B2B3B4B5B6B8B9, D1D2D3D4D5D6, Ctrl+a

Menyn Uppspelning: u+B9B8, Alt+u
Spela upp: B9, D6, S-mitten, Enter
Paus/fortsätt: B0, D1D3D4D6, mellanslag
Stopp: B9B7B8, D4, Ctrl+Enter

Menyn Gå till: g+B9B8, Alt+g
Nästa radiostation: B4, D4D6, S-höger, pil höger
Föregående radiostation: B1, D1D3, S-vänster, pil vänster
Nästa snabbval: B6, D3, S-ner, pil ner
Föregående snabbval: B3, D1, S-upp, pil upp

Menyn Verktyg: t+B9B8, Alt+t
Inställningar (dialog med inställningar för uppspelning i bakgrunden)

Menyn Information: o+B9B8, Alt+o
Aktuell radiostation (dialog): u+B9B8, Ctrl+u

X2.17 E-post

Observera: För att använda detta program måste Pronto ha en aktiv anslutning till webben, dvs. via en ActiveSync-anslutning till en Internet-ansluten PC, WLAN eller via mobiltelefon och giltig RAS-/GPRS-anslutning.

Öppna E-postprogrammet: e+B7b8B9, Windows-tangenten+e
Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Växla mellan mapplistan och meddelandelistan i huvudvyn: B9B1B3 eller B9B4B6, D1D3 eller D4D6, Skift+Tabb eller Tabb

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a
Nytt e-postmeddelande: n+B8B9, Ctrl+n
Ny mapp: d+B8B9, Skift+Ctrl+e
Byt namn på mapp: 2+B9, F2 (FN+2)
Öppna e-postmeddelande: B9, D6, S-mitten, Enter, Ctrl+o (startar Ordbehandlaren)

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r
Kopiera meddelande till meddelandemapp: c+B8B9, Ctrl+c
Flytta meddelande till meddelandemapp: v+B8B9, Skift+Ctrl+v
Radera meddelande eller mapp: B9B7, Del
Markera meddelande: B0, mellanslag
Markera alla meddelanden i meddelandelistan: %+B9, Ctrl+a
Invertera markering: h+B8B9, Skift+mellanslag

Menyn Åtgärder: d+B8B9, Alt+d
Skicka och ta emot (alla konton): m+B8B9, Ctrl+m
Svara (när meddelandet är stängt): r+B8B9, Ctrl+r
Svara alla (när meddelandet är stängt): y+B8B9, Skift+Ctrl+r
Svara avsändaren (när meddelandet är stängt): z+B8B9, Skift+Alt+r
Vidarebefordra (när meddelandet är stängt): w+B8B9, Ctrl+f
Växla till Inkorg: i+B8B9, Skift+Ctrl+i
Växla till Utkorg: o+B8B9, Skift+Ctrl+o

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t
Konton (dialog)
Mappinformation

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g
Nästa brev: B9B6, D3, S-ner, pil ner
Föregående brev: B9B3, D1, S-upp, pil upp
Första brevet i listan: B9B1B2B3B7, D1D4, Home
Sista brevet i listan: B9B4B5B6B8, D3D6, End

Kommandon i Ordbehandlaren när ett meddelande har öppnats:

Menyn Verktyg / E-post:
Brevhuvud: b+B7B8B9, F8 eller B9B1B3, D1D3, Skift+Tabb
Spara meddelande (i Utkorg): s+B9, D1D2D4D5D6, F7
Stäng meddelande: 4+B9, D1D4D5D6, F4
Svara
Svara alla
Svara avsändaren
Vidarebefordra

x2.18 MSN Messenger

Observera: För att använda detta program måste Pronto ha en aktiv webbanslutning, dvs. via en ActiveSync-anslutning till en Internet-ansluten PC eller via en mobiltelefon och giltig RAS-/GPRS-anslutning.

Öppna programmet MSN Messenger: n+B7b8B9, Windows-tangenten+n
Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a

Min status: u+B8B9, Ctrl+u

(online, upptagen, strax tillbaka, inte vid datorn, i telefon, på lunch)

Menyn Kontakter: k+B8B9, Alt+k

Hantera kontakter: c+B8B9, Ctrl+c

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Kontaktlista:

Visa alla kontakter

Visa enbart kontakter som är online

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Hantera profiler (dialog): p+B8B9, Ctrl+p

Ljudinställningar (dialog)

Inställningar (dialog)

I chattfönstret:

Menyn Konversation:

Bjud in: e+B8B9, Ctrl+e

Spara konversation som textfil: s+B8B9, Ctrl+s

Ta bort konversation: B9B7, Del

Ta bort och stäng alla konversationer

Läsningssläge, aktivera/inaktivera: l+B8B9, Ctrl+l

Objekt i dialogrutan Hantera kontakter:

Lista: Medlemskap

Lista: Kontakter

Knapp: Lägg till

Knapp: Ta bort

Knapp: Ändra medlemskap

Knapp: Blockera / Ta bort blockering

Objekt i chattfönstret:

Lista: Konversationer

Lista: Meddelande

Textruta: Text

Knapp: Skicka

Knapp: Stäng konversation

X2.19 Webbläsaren

Observera: För att använda detta program måste Pronto ha en aktiv webbanslutning, dvs. via en ActiveSync-anslutning till en Internet-ansluten PC eller med en giltig WLAN-anslutning eller via en mobiltelefon och giltig RAS-/GPRS-anslutning.

Starta Webbläsaren: w+B9B7B8, Windows-tangent+w
Öppna/stäng menyn: S3 kort, 9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a

Menyn Öppna:

Webbadress (dialog): o+B8B9, Ctrl+o

Fil (dialog)

Menyn Spara:

Aktuell sida (dialog)

Spara länk (dialog för att ladda ner filer)

Avsluta Webbläsaren: 4+B8B9, Alt+F4

Menyn Redigera: r+B9B8, Alt+r

Markera block början/slutet: x+B9, Ctrl+mellanslag

Kopiera: c+B8B9, Ctrl+c

* Klistra in: v+B8B9, Ctrl+v

Markera allt: %+B9, Ctrl+a

Avmarkera block: u+B9, Ctrl+u

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g

Menyn Tecken:

Nästa tecken: B4B9, pil höger

Föregående tecken: B1B9, pil vänster

Aktuellt tecken: B1B4B9, Skift+mellanslag

Menyn Ord:

Nästa ord: B5B9, Ctrl+pil höger

Föregående ord: B2B9, Ctrl+pil vänster

Aktuellt ord: B2B5B9, Ctrl+mellanslag

Menyn Virtuellt rad:

Nästa rad: D5+S-ner, Ctrl+F0

Föregående rad: D5+S-upp, Skift+F0

Läs rad: D5+S-mitten, F0

Menyn Mening:

Nästa mening: S-ner, B6B9, D3, pil ner

Föregående mening: S-upp, B3B9, D1, pil upp

Läs aktuell mening: B3B6B9, Ctrl+Enter

Menyn Stycke:

Nästa stycke: B4B5B9, D2D3, Ctrl+pil ner

Föregående stycke: B1B2B9, D1D2, Ctrl+pil upp

Läs stycke: B1B3B4B6B9, Skift+Enter

Menyn Sida:

Sida bakåt: B2B3B9, D5D6, Alt+pil vänster

Sida framåt: B5B6B9, D4D5, Alt+pil höger

Startsida

Överst på sidan: B1B2B3B9, D1D4, Ctrl+Home (FN+Ctrl+pil vänster)

Slutet på sidan: B4B5B6B9, D3D6, Ctrl+End (FN+Ctrl+pil höger)

Menyn Länk eller kontroll:

Nästa länk eller kontroll: S-höger, B4B6B9, D4D6, Tab

Föregående länk eller kontroll: S-vänster, B4B6B8B9, D1D3, Skift+Tab

Menyn Länk:

Nästa länk: k+B9, D4D5D6, Ctrl+k
Föregående länk: k+B9B8, D1D2D3, Ctrl+Skift+k

Menyn Kontroll:

Nästa kontroll: n+B9, D1D2D3D4D6, Ctrl+n
Föregående kontroll: n+B8B9, D1D3D4D5D6, Ctrl+Skift+n

Menyn Rubrik:

Nästa rubrik: h+B9, D1D2D5, Ctrl+h
Föregående rubrik: h+B8B9, D2D4D5, Ctrl+Skift+h

Menyn Textruta:

Nästa textruta: e+B9, D1D5, Ctrl+e
Föregående textruta: e+B8B9, D2D4, Ctrl+Skift+e

Menyn Textblock:

Nästa textblock: m+B9, D2D3D4D5, Ctrl+PgDn
Föregående textblock: m+B8B9, D1D2D5D6, Ctrl+PgUp

Menyn Ram:

Nästa ram: r+B9, D1D2D3D5, Ctrl+r
Föregående ram: r+B8B9, D2D4D5D6, Ctrl+Skift+r

Menyn Sök: s+B8B9, Alt+s

Ny sökning: ?+B8B9, D1D2D4, Ctrl+f
Sök nästa: ?+B7B8B9, D1D4D6, F3 (FN+3)

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Sidinformation (dialog)
Uppdatera: u+B8B9, D1D5D6, F5 (FN+5)

Menyn Historik:

Efter datum (idag, senaste veckan, 2/3 veckor sedan)
Efter webbplats
Mest besökta webbsidor
Besökta idag
Töm historiken

Fönster (dialog)

Nerladdningshanteraren (dialog)

Inställningar (dialog)

Länk- eller bildinformation (dialog)

Menyn Favoriter: f+B8B9, Alt+f

Lägg till (dialog)
Visa favoriter (menylista)
Hantera favoriter (dialog)

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Använd aktuell sida som startsida
Starta läsning: B9, D3D5, Ctrl+Skift+mellanslag
Stoppa läsning: B4B6B7B9, D2D6, Esc
Rensa temporära Internetfiler

X2.20 PDF-dokumentläsaren

Starta PDF-dokumentläsaren: u+B9B7B8, Windows-tangenten+u

Öppna/stäng menyn: S3 kort, 9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a

Öppna: o+B8B9, D1D3D5, Ctrl+o

Spara som textfil: s+B8B9, D2D3D4, Ctrl+s

Information: i+B8B9, D2D4, Ctrl+i

Avsluta: 4+B9, Alt+F4

Menyn Redigera: r+B9B8, Alt+r

Markera början/slut av block: B23B5B9, D2D3D6, Insert (FN+Del)

Kopiera: c+B8B9, Ctrl+c

Markera allt: %+B9, Ctrl+a

Avmarkera: u+B9, Ctrl+u

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g

Menyn Tecken:

Nästa tecken: B4B9, pil höger

Föregående tecken: B1B9, pil vänster

Läs aktuellt tecken: B1B4B9, Skift+mellanslag

Menyn Ord:

Nästa ord: B5B9, Ctrl+pil höger

Föregående ord: B2B9, Ctrl+pil vänster

Läs aktuellt ord: B2B5B9, Ctrl+mellanslag

Menyn Rad:

Nästa rad: S-ner, B4B5B9, D3, pil ner

Föregående rad: S-upp, B1B2B9, D1, pil upp

Läs aktuell rad: B1B2B4B5B9, Skift+Ctrl+mellanslag

Menyn Mening:

Nästa mening: B6B9, PgDn (FN+pil ner)

Föregående mening: B3B9, PgUp (FN+pil upp)

Läs aktuell mening: B3B6B9, Ctrl+Enter

Menyn Stycke:

Nästa stycke: B4B6B9, Skift+PgDn (FN+Skift+pil ner)

Föregående stycke: B1B3B9, Skift+PgUp (FN+Skift+pil upp)

Läs aktuellt stycke: B1B3B4B6B9, Skift+Enter

Menyn Sida:

Nästa sida: B5B6B9, Ctrl+PgDn (FN+Ctrl+pil ner)

Föregående sida: B2B3B9, Ctrl+PgUp (FN+Ctrl+pil upp)

Gå till sidnummer (dialog): m+B8B9, Ctrl+m

Menyn Länk:

Nästa länk: D4D6, Tab

Föregående länk: D1D3, Skift+Tab

Menyn Dokument:

Början av dokumentet: B1B2B3B9, D1D4, Home (FN+pil vänster)

Slutet av dokumentet: B4B5B6B9, D3D6, End (FN+pil höger)

Menyn Bokmärke:

Nästa bokmärke: D3D5D6, Skift+End

Föregående bokmärke: D2D3D6, Skift+Home

Lista bokmärken

Menyn Sök: d+B8B9, Alt+d

Ny sökning: ?+B8B9, D1D2D4, Ctrl+f
Sök nästa: n+B9B0, D1D4D6, F3 (FN+3)

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t
Plats i dokumentet: p+B8B9, D1D2D3D4, Ctrl+p
Starta löpande läsning: B9, D3D5, Skift+Ctrl+Enter
Stoppa löpande läsning: B4B6B7B9, D2D6, Esc