

# PRONTO!

## Användarmanual

För Pronto! QS

Mjukvaruversion 3.3

Juli 2011

## Manualens uppbyggnad

Denna manual är i tre delar.

**Del 1** är riktad till nybörjare som har liten erfarenhet av datorer eller liknande tekniska apparater. Novisen kommer steg för steg att tas igenom proceduren för att skriva, redigera, spara och radera text samt för att ta reda på datum, tid och batterinivå – allt med enkla ord och exempel. Åtkomst till inbyggd hjälp, till manualen och användning av MP3-spelaren kommer också att förklaras så att nybörjaren fristående kan lyssna på Pronto-manualen.

**Del 2** ger råd kring tilläggsprogramvara vid anslutning av mobila enheter till en PC för dataöverföring.

Du får också information om ytterligare program och drivrutiner.

**Del 3** är riktad till användare som redan är bekanta med de grundläggande Pronto-funktionerna och som önskar lära sig mer om dess övriga funktioner. Detta är den verkliga manualen med en systematisk struktur med beskrivning av apparaten själv, dess allmänna användning samt mer specifika tillämpningar och funktioner i enskilda kapitel (Ordbehandlaren, Utforskaren, Adressboken, Kalendern, talsyntesen, MP3-spelaren, Kalkylatorn, datautbyte med en PC, etc.).

Bilagorna innehåller allmänna notiser och tips samt ett referensavsnitt med en lista över de grundläggande kortkommandona som kan användas för att styra kända funktioner.

De givna beskrivningarna av program och funktioner är baserade på användning av vilket som helst av Pronto-anteckningshjälpmedlen: Antingen Pronto 18 / Pronto 40 med punkt tangentbord eller Pronto QS / Pronto 40 med dess normala tangentbord (alfanumeriskt tangentbord, dvs. QWERTY-tangentbord).

Så denna manual innehåller de motsvarande kortkommandona och tangentkombinationerna för att direkt utföra kommandon eller funktioner på Pronto (QWERTY-läge såväl som punktläge).

Alla medlemmarna av anteckningshjälpmedelsfamiljen Pronto kan användas i punktläge eller qwerty-läge för att utföra kommandon.

Få punktläge:

- Pronto! 18 V3: Använd inbyggt punkt tangentbord.
- Pronto! 40: Använd punkt tangentbordsmodulen eller växla om QWERTY-tangentbordet till punktläget (FN+b).
- Pronto! QS: Växla om qwerty-tangentbordet till punktläget (FN+B).

Få qwerty-läge:

- Pronto! 18 V3: Anslut ett externt USB-tangentbord.
- Pronto! 40: Använd QWERTY-tangentbordsmodulen.
- Pronto! QS: Använd det inbyggda tangentbordet.

Du hittar grundläggande kommandon och tangentkombinationer för båda lägena i kapitel 3 "Allmän användning".

Du hittar viktiga notiser kring din säkerhet direkt efter innehållsförteckningen i denna manual.

Den tryckta manualen ger en första introduktion kring hur enheten används. Den innehåller Del 1 samt en lista över de grundläggande kortkommandona.

# Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| Innehållsförteckning.....   | 4  |
| <i>Vad finns i kartongen?</i> .....                                 | 6  |
| <i>Överensstämmelse med EMC- och säkerhetsstandarder</i> .....      | 6  |
| För din säkerhet.....   | 6  |
| <i>Om batteriets livslängd</i> .....                                | 7  |
| <i>Garanti</i> .....  | 8  |
| Del I - Introduktion - Första stegen på Pronto! QS .....            | 9  |
| <i>Slå på enheten</i> .....   | 10 |
| <i>Skriva text</i> .....  | 11 |
| <i>Läsa text</i> .....  | 11 |
| <i>Ta reda på värden, aktivera viloläget och väck Pronto!</i> ..... | 11 |
| <i>Hjälp</i> .....  | 12 |
| <i>Spara</i> .....  | 12 |
| <i>Öppna</i> .....  | 13 |
| <i>Tomt dokument</i> .....  | 13 |
| <i>Utforskaren</i> .....  | 13 |
| <i>Stänga dokument</i> .....  | 14 |
| <i>Öppna manualen</i> .....   | 14 |
| <i>MP3-spelaren</i> .....   | 15 |
| <i>Slå av Pronto!</i> .....   | 16 |
| Appendix x1: Översikt.....  | 18 |
| <i>x1.1 Kort enhetsöversikt</i> .....                               | 18 |
| <i>x1.2 Termer och förkortningar som används</i> .....              | 18 |
| <i>x1.3 Generella akustiska signaler och meddelanden</i> .....      | 19 |
| <i>x1.4 Tekniska data för alla enheter</i> .....                    | 20 |
| x1.5 Kontakt och support.....                                       | 21 |
| Appendix x2: Kommandolista (för referens) .....                     | 23 |
| <i>X2.1 Allmänna kommandon:</i> .....                               | 23 |
| <i>X2.2 Systemknappscommandon:</i> .....                            | 23 |
| <i>X2.3 Kör program</i> .....                                       | 24 |
| <i>X2.4 Ordbehandlaren</i> .....                                    | 25 |
| <i>X2.5 Kalendern</i> .....   | 27 |
| <i>X2.6 Adressboken</i> .....                                       | 29 |
| <i>X2.7 Utforskaren</i> .....                                       | 31 |
| <i>X2.8 Daisy-spelaren</i> .....                                    | 31 |
| <i>X2.9 MP3-spelaren</i> .....                                      | 32 |
| <i>X2.10 Fickminnet</i> .....                                       | 33 |
| <i>X2.11 Alarmet</i> .....  | 34 |
| <i>X2.12 Tidtagning</i> .....                                       | 34 |
| <i>X2.13 Räkna ned (timer)</i> .....                                | 34 |
| <i>X2.14 Mobil</i> .....  | 35 |
| <i>X2.15 Kalkylatorn</i> .....                                      | 36 |
| <i>X2.16 Internetradion</i> .....                                   | 37 |

|  |    |
|--|----|
| <b>X2.17 E-post</b> .....              | 38 |
| <b>x2.18 MSN Messenger</b> .....       | 40 |
| <b>X2.19 Webbläsaren</b> .....         | 41 |
| <b>X2.20 PDF-dokumentläsaren</b> ..... | 43 |

## Allmän information, säkerhet och garanti

Innan du använder din enhet för första gången, var god kontrollera innehållet i kartongen. Om någonting är skadat eller saknas, var god tveka inte att kontakta din leverantör.

### ***Vad finns i kartongen?***

- Pronto
- Nätadapter
- Skyddande väska
- USB-kabel
- Seriekabel
- Installations-CD
- Manual
- Endast Pronto! 40: Alternativt tangentbord

Vänligen förvara kartongen och paketeringsmaterialet på ett säkert ställe eftersom du kan komma att behöva det när du ska frakta enheten. Att skicka in Pronto! på reparation utan ordentlig paketering kommer att göra garantin ogiltig!

Vänligen läs ordentligt igenom instruktionerna och säkerhetsvarningarna innan du använder enheten för första gången.

Pronto! är endast utformad för att användas i hem- och kontorsmiljöer. I medicinska byggnader ska den endast användas i kontorsrum.

En PC ansluten till Pronto! måste uppfylla tillämpliga EMC- och säkerhetskrav för det område där den används.

### ***Överensstämmelse med EMC- och säkerhetsstandarder***

Du hittar tillkännagivandena av överensstämmelser i slutet av denna manual.

Medicinska elektroniska enheter måste uppfylla EMC-regleringsstandarderna och måste användas och underhållas i enlighet med dessa.

**Var god observera: Användning av** sladdar, nätadapterar, reservdelar och tillbehör som inte uttryckligen är tillåtna av tillverkaren kan förorsaka ökad strålning eller ökad känslighet för strålning och därmed skapa en säkerhetsrisk.

### **För din säkerhet**

Viktigt att observera: Att inte ta till sig följande varningar kan göra garantin ogiltig och kan förorsaka allvarlig personskada.

- Om PRONTO! verkar fungera onormalt eller vara skadad på något sätt, var god kontakta din BAUM-återförsäljare så snart som möjligt.
- Om du känner lukten av rök eller en odör som kommer från PRONTO!, slå omedelbart av strömmen.
- Låt inte sand eller damm komma i kontakt med PRONTO! eftersom detta kan leda till allvarlig skada och kan göra reparation omöjlig.
- Använd inte din PRONTO! på platser där starka radiovågor avges eller där det finns strålning.
- Använd inte en nätadapter som inte är gjord för användning tillsammans med PRONTO. Använd endast PRONTOs originalnätadapter!
- Använd eller förvara inte PRONTO! på något av följande ställen eftersom detta kan förorsaka skada.
  - Inuti bilar med fönstren stängda i den heta solen. I direkt solljus eller nära varmvattenberedare, värmeelement, etc.
  - Platser utsatta för häftiga vibrationer så som ovanpå en tvättmaskin.
  - Platser utsatta för stark magnetism så som nära högtalare.
  - Torka bort damm och smuts från PRONTO! med en mjuk trasa fuktad med ett utspätt neutralt rengöringsmedel, torka sedan torrt med en trasa.
  - Dra alltid ur strömsladden ur PRONTO! vid rengöring.
  - Använd inte PRONTO! vid åskväder.
  - Använd inte PRONTO! nära vatten, till exempel i ett badrum.
  - Sätt inte i eller dra ur kontakten med våta händer.
  - Försök inte avlägsna batteriet.
  - Värm inte upp PRONTO! i en mikrovågsugn, på en kokplatta eller liknande.
  - Använd endast batteriet som följde med din PRONTO. Ersättningsbatterier är endast tillgängliga från BAUM eller lokala återförsäljare. Batteriet kan endast avlägsnas av auktoriserade servicetekniker!
  - Plocka aldrig isär, försök reparera eller modifiera PRONTO! på egen hand.
  - I fall vätskor eller metallfragment skulle komma in i PRONTO!, slå omedelbart av den och dra ur strömkabeln.
  - Lyssna inte på hög volym under långa tidsperioder eftersom detta kan leda till hörselskador, speciellt vid användning av hörlurar.
  - Dra inte ur kontakten genom att hålla i sladden när du kopplar ur strömmen från PRONTO.
  - Försäkra dig om att PRONTO!, nätadaptern och strömkontakten är säkert anslutna.

### ***Om batteriets livslängd***

Livslängden hos ditt batteri beror på hur ofta och på vilket sätt det laddas och laddas ur. Under den normala åldringsprocessen minskar batteriernas kapacitet. Om batteriernas kapacitet blir för låg efter en tid måste de bytas ut.

Försök inte byta batteri själv, låt BAUM eller en auktoriserad servicepartner göra detta. Försök inte öppna Pronto!

Batterilivslängden kan påverkas av omgivande temperatur och andra miljöparametrar.

Om du inte använder Pronto! under en längre tidsperiod, var god ladda upp det regelbundet för att förhindra att batteriet laddas ur för mycket. I annat fall, om det laddas ur helt och hållet är det bara några veckors tid kvar tills batteriet kommer att vara så urladdat att enheten inte längre kan slås på eller så kan batteriet till och med bli permanent skadat.

## **Garanti**

Prontos garanti överensstämmer med de juridiska regleringarna där den såldes. Vänligen kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Pronto-enheter sålda i Tyskland har en begränsad 2 års garanti. Batteriet har en 6-månaders garanti.

Skador förorsakade av felaktig användning omfattas inte av garantin.

BAUM Retec AG garanterar att Pronto! är fri från skador vid tillverkningstillfället. Garantin kan inte överföras till andra personer. Pronto! är utformad för slutanvändare för användning i kontors- eller hemmiljö. BAUM Retec AG förbehåller sig rätten att reparera enheten eller ersätta den med en liknande eller bättre produkt. BAUM Retec AG eller dess representanter kommer inte att ta ansvar för några direkta eller indirekta skador. Garantin kommer att bli ogiltig om garantiplomberingen är skadad. BAUM kommer inte att ta ansvaret för annan användning än vad som beskrivs i manualen.



## Del I - Introduktion - Första stegen på Pronto! QS

Gratulerar till införskaffandet av Pronto! QS – utan tvivel är du ivrig att upptäcka allt som Pronto! kan göra. De följande sidorna utgör inte en komplett handbok utan är utformade för att introducera dig till de viktigaste funktionerna genom praktiska exempel och för att hjälpa dig hitta på tangentbordet.

Allting du läser här kan omedelbart provas på Pronto och på så sätt hjälpa dig på din väg med Pronto.

Del 3 av denna användarmanual innehåller handboken med en mera detaljerad beskrivning av alla Prontos funktioner. Den kan också komma åt från själva Pronto! som en fil på "Hjälp"-menyn där kapitlen kan öppnas och läsas individuellt eller på installationsskivan.

Så, tillbaka till Pronto: Hur är den upplagd?

Ovansidan har tangenter som på ett normalt litet tangentbord som du skulle hitta på en PC. Du vet att tangentbordet är vänt rätt när du kan känna en liten rörlig spak på framsidan; detta är styrcippen som medger förflyttning åt höger, vänster, uppåt och neråt och som också kan tryckas.

På högra sidan finns det en liten rund knapp; detta är på-/avknappen som används för att slå på Pronto! helt och hållet.

Låt oss nu gå över till själva tangenterna.

Precis som på alla liknande datortangentbord har vissa tangenter fler än en funktion kopplade till sig. I denna introduktion kommer endast den första kopplade funktionen att anges. Tangenterna är i den svenska tangentbordslayouten arrangerade som följer (uppifrån och ner och från vänster till höger):

Översta raden:

Esc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, plus, accent, Del, Backsteg

Andra raden:

TABB, q, w, e, r, t, y, u, i, o, p, å, umlaut, Enter (övre halvan)

Tredje raden:

Versallås, a, s, d, f, g, h, j, k, l, ö, ä, apostrof, Enter (nedre halvan)

Fjärde raden:

Vänster Skift-tangent, mindre än, z, x, c, v, b, n, m, kommatecken, punkt, streck, höger Skift-tangent, pil upp, FN

Nedersta raden:

Vänster Ctrl-tangent, WIN, FN, Alt, vänster mellanslag, höger mellanslag, AltGr, Programknappen, höger Ctrl-tangent, pil vänster, pil ner, pil höger.

Följande tangenter har en liten upphöjd punkt: a, f, j, ö, n, y, 2, 6, plus, Tab-tangenten, vänster och höger Ctrl-tangent samt höger Skift-tangent.

Som utgångsposition, placera fingrarna på den vänstra handen på tangenterna a, s, d och f och fingrarna på den högra handen på j, k, l och ö.

Det blir på så sätt enkelt att komma åt den rörliga spaken i den runda fördjupningen i mitten av framsidan med båda tummarna. Denna spak kallas styrpinnen och den kan röras uppåt, neråt, åt höger och åt vänster; den kan också tryckas i mittenpositionen. Den underlättar all förflyttning i dessa riktningar oberoende av piltangenterna.

Låt oss titta närmare på framsidan. Till vänster om styrpinnen finns det två lite nedsänkta fyrkantiga knappar och till höger finns det ytterligare tre. Dessa systemknappar används för att lägga Pronto! i viloläget, för att slå på den igen samt för att växla mellan olika program. De kan också utföra andra funktioner som vi kommer att lära oss senare.

Från vänster till höger hittar vi på framsidan S1- och S2-knapparna, styrpinnen, S3- och S4-knapparna samt Inspelningsknappen (REC).

### ***Slå på enheten***

För att slå på Pronto! (antingen för första gången eller efter att ha laddat batteriet), tryck och håll inne på-/avknappen i ca 3 sekunder.

OBS: Om denna knapp trycks igen kommer Pronto! att stängas av helt och hållet.

Pronto! ska normalt stängas av genom att använda systemknapparna för att växla till viloläget.

Efter att du har slagit på kommer du att höra en stigande tvåtonssignal; om du hör en fallande tvåtonssignal omedelbart efteråt kommer Pronto! att automatiskt stängas av eftersom den inte får tillräckligt med ström. Om så är fallet måste batteriet laddas: Ta laddaren, sätt i den lilla runda kontakten i den lilla öppningen längst till vänster på baksidan av Pronto! och anslut den andra kabeln till ett eluttag. Tryck sedan på på-/avknappen på den högra sidan av enheten en gång till och vänta på den stigande signalen.

Under uppstartsproceduren kommer korta signaler att avges och efter ungefär 1 minut kommer du att höra meddelandet "Pronto-meny, Ordbehandlaren".

Tryck nu Enter för att bekräfta och ett tomt dokument kommer att öppnas.

I fall Prontos meddelanden är för höga eller för låga kan volymen justeras med ratten på den vänstra sidan av enheten. Vridning på ratten mot dig kommer att minska volymen

och vridning bort från dig kommer att öka den. Volymen kan inte slås av helt och hållet med denna ratt och den kommer alltid att bibehålla ett minimivärde.

### ***Skriva text***

Skriv nu din första träningstext: "Pronto! är underbar och väldigt användbar. Vi älskar att arbeta med Pronto!". Tryck sedan på Enter för att påbörja en ny mening.

Om du gör några skrivfel, tryck helt enkelt på Backsteg (den sista tangenten till höger på den översta raden) för att radera tecknen bakåt.

Det finns flera sätt att positionera markören på en viss plats:

1. Gå med styrpinnen med hjälp av din tumme i den lämpliga riktningen till den önskade platsen.
2. Använd höger eller vänster piltangent för att gå till den önskade platsen.

När du förflyttar dig igenom texten kommer talsyntesen att läsa upp det aktuella tecknet.

Ny text kommer alltid att infogas på den aktuella markörpositionen; var god försäkra dig om att markören är placerad i slutet av raden innan du matar in mera text. För att göra detta, använd antingen piltangenterna för att flytta neråt och sedan till höger, bokstav för bokstav, tills du når slutet av det sista ordet, eller använd kommandot för att hoppa till slutet av filen – tryck och håll inne vänster FN-tangent, tryck och håll inne vänster Ctrl-tangent, tryck på höger piltangent och släpp sedan upp alla tre tangenterna. Den vänstra FN-tangenten är den tredje tangenten från vänster på den nedersta raden. Denna tangentkombination motsvarar kommandot Ctrl+End som kanske är bekant för dig från Windows.

Träna genom att skriva ytterligare några meningar.

### ***Läsa text***

För att läsa igenom din träningstext, hoppa till början av filen genom att trycka vänster FN-tangent tillsammans med Ctrl-tangenten och vänster piltangent. För att läsa rad för rad, gå antingen neråt i texten med styrpinnen eller pil ner, eller likaledes uppåt med styrpinnen eller pil upp.

### ***Ta reda på värden, aktivera viloläget och väck Pronto!***

En tid har nu förflutit och du skulle vilja veta vad klockan är: Kort tryckning på systemknappen S4 kommer att ge den lokala tiden (S4 är den andra knappen till höger om styrpinnen). Kort tryckning på denna knapp två gånger i följd kommer att ge datumet. I fall denna knapp trycks lite längre kommer du däremot inte att höra tiden utan i stället kommer du att höra en svag signal och Pronto! kommer att växla till viloläget; även när Pronto! "sover" kan du fortfarande ta reda på tiden eller datumet genom att trycka kort på S4.

Så, hur väcker vi nu Pronto! och kommer tillbaka till våran träningstext? Tryck helt enkelt på systemknappen längst till vänster (S1) i en kort stund – om du inte håller den nere tillräckligt länge kommer Pronto! att fortsätta “sova” och denna gång kommer den att läsa upp temperaturen. Av nyfikenhet trycker du på S1-knappen kort två gånger och den här gången kommer du att höra lufttrycket.

Om du trycker på vänster systemknapp (S1) tillräckligt länge kommer Pronto! att vakna. Detta kommer att ta dig tillbaka till Ordbehandlaren där du kan läsa din träningstext genom att gå uppåt och neråt genom den.

## **Hjälp**

Hur kan träningstexten sparas eller ett nytt tomt dokument eller en ny fil öppnas (t.ex. manualen)?

Prontos hjälpsystem kan hjälpa till med dessa uppgifter. Det finns två typer: Den automatiska snabbhjälpen och den sammanhangskänsliga långa hjälpen. Snabbhjälpen tillhandahåller information om det markerade objektet i en meny eller dialogruta och ges automatiskt via talsyntesen. För mer detaljerad information om objektet och dess funktioner kan den långa hjälpen anropas genom att trycka på F1-tangenten: Tryck på FN-tangenten (dvs. den tredje tangenten från vänster på den nedersta raden) tillsammans med siffran “1” och hjälpen kommer att läsas upp. För att lyssna en gång till, gå neråt med styrpinnen till “OK”-knappen och sedan tillbaka upp till hjälptexten. Tryck på Enter-tangenten för att stänga hjälpen och för att återvända till det tidigare markerade objektet.

## **Spara**

Låt oss börja spara dokument.

1. Anropa kommandomenyn genom att trycka på Alt-tangenten (denna återfinns till vänster, bredvid vänster mellanslag och den kan användas för att anropa kommandomenyn från vilket program som helst). Alternativt tryck kort en gång på systemknappen S3 för att öppna kommandomenyn; S3-tangenten återfinns omedelbart till höger om styrpinnen (OBS: Kort tryckning på S3 eller Alt än en gång kommer att stänga menyn).
2. Menyn kommer att öppnas på det första alternativet, “Arkiv”. De andra menyvalen kan nås genom att gå uppåt och neråt med styrpinnen men stanna nu kvar på “Arkiv”.
3. Gå med styrpinnen åt höger och öppna Arkiv-menyn; denna innehåller en lista med ytterligare alternativ.
4. Gå med styrpinnen uppåt eller neråt till “Spara som” och bekräfta genom att trycka Enter eller styrpinnen (S-mitten). Om ett annat alternativ väljs av misstag, tryck på Esc-tangenten – detta är ett generellt kommando för att avbryta och börja om. Esc-tangenten är tangenten längst till vänster på den översta raden.
5. En textruta med rubriken “Filnamn” kommer att öppnas – skriv in “Test”. Tryck nu på Enter för att spara filen.

## **Öppna**

En annan textfil eller ett nytt tomt dokument kan nu öppnas: Tryck på Alt-tangenten en gång till eller tryck på S3 kort en gång. Menyn kommer att öppnas igen på "Arkiv" – gå med styrpinnen åt höger för att öppna detta alternativ (om ett annat alternativ öppnas av misstag, gå med styrpinnen åt vänster för att stänga det). Gå nu med styrpinnen ner genom menyn till "Öppna" och tryck Enter.

En lista med dokument kommer att öppnas. Använd styrpinnen för att bläddra igenom listan och hitta det tidigare sparade dokumentet. Handboken kommer också att finnas i denna lista.

För att öppna ett av dessa dokument, gå till det med styrpinnen och tryck Enter.

## **Tomt dokument**

Du har nu lärt dig hur du sparar texter och öppnar existerande texter; öppna nu ett nytt tomt dokument.

Gör som följer:

1. Anropa kommandomenyn med Alt-tangenten eller genom att trycka S3 kort en gång.
2. Menyn kommer att öppnas på "Arkiv"-alternativet. De andra menyvalen kan nås genom att gå uppåt och neråt med styrpinnen men stanna nu kvar på "Arkiv".
3. Gå med styrpinnen åt höger för att öppna Arkiv-menyn; fler alternativ kommer att dyka upp.
4. Stanna antingen kvar på det första alternativet eller gå med styrpinnen uppåt eller neråt till "Nytt" och tryck sedan antingen på Enter eller styrpinnen (S-mitten) för att bekräfta valet. Om ett annat alternativ väljs av misstag, tryck på Esc-tangenten – detta är ett generellt kommando för att avbryta och börja om. Esc-tangenten är tangenten längst till vänster på den översta raden.
5. En textruta med rubriken "Filnamn" kommer att öppnas. Det föreslagna namnet "Dokument" kan accepteras genom att trycka Enter.
6. Det nya dokumentet skapas alltså och markören återfinns i början av filen.

Det tidigare öppnade dokumentet är dock fortfarande öppet men att växla från ett öppnat dokument till ett annat är enkelt: Tryck Ctrl tillsammans med minustangenten (-).

## **Utforskaren**

Radera nu det första textdokumentet.

För att göra det, avsluta Ordbehandlaren och bekanta dig med Utforskaren.

1. Tryck på Windows-tangenten (WIN) eller tryck på den lilla nedsänkta systemknappen S3 i 3 sekunder – S3 finns till höger om styrpinnen.
2. Du kommer att höra "Pronto-meny, Ordbehandlaren". I fall S3 inte har hållits nere tillräckligt länge kommer kommandomenyn att öppnas; om så är fallet, stäng den genom att trycka Esc eller genom att trycka S3 kort en gång till och försök igen.
3. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till "Utforskaren" och tryck Enter.

4. En lista kommer att öppnas som innehåller olika mappar och filer liknande Utforskaren i Windows.
5. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till mappen "Storage Card" – gå nu med styrpinnen åt höger för att öppna den. Du kommer att hamna på mappen "Edit" som innehåller dina textfiler (i fall du hamnar på en annan mapp, gå uppåt eller neråt med styrpinnen till "Edit"-mappen).
6. Öppna "Edit"-mappen genom att gå med styrpinnen åt höger och du kommer att tas till en lista med dina textfiler.
7. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till din testfil.
8. Anropa kommandomenyn genom att trycka antingen S3 kort en gång eller Alt-tangenten.
9. Menyn kommer att öppnas på det första alternativet, "Arkiv" – gå med styrpinnen åt höger för att komma åt undermenyn.
10. Detta kommer att visa det första alternativet "Nytt" – gå uppåt eller neråt med styrpinnen till "Radera".
11. Tryck Enter för att bekräfta valet av "Radera" – en säkerhetsfråga kommer att dyka upp.
12. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till "Ja"-knappen och tryck Enter.
13. Detta kommer att radera testfilen från minneskortet. Du kommer att tas tillbaka till fillistan där andra filer kan raderas eller öppnas.

Även om filen har raderats från minneskortet kan den fortfarande återfinnas i Prontos interna RAM-minne, dvs. den kan fortfarande dyka upp i Ordbehandlaren och kan sparas igen med ett annat namn.

### ***Stänga dokument***

För att radera en fil från RAM-minnet måste den först stängas i Ordbehandlaren. Växla först till Ordbehandlaren genom att trycka och hålla inne S1 i en kort stund eller genom att välja "Ordbehandlaren" på Pronto-menyn.

Gör sedan som följer:

1. Tryck Alt eller S3 kort en gång för att öppna kommandomenyn som kommer att öppnas på det första alternativet "Arkiv".
2. Gå åt höger och sedan neråt med styrpinnen till "Stäng" och tryck Enter.
3. Antingen en annan fil eller ett tomt dokument kommer nu att dyka upp.

### ***Öppna manualen***

Manualen och dess enskilda kapitel kan snabbt öppnas från Pronto-menyn under "Hjälp"-alternativet. Filen kommer att visas i Ordbehandlaren, dvs. när du väljer ett kapitel från handboken kommer Ordbehandlaren att öppnas på samma gång.

För att välja och öppna ett kapitel från manualen, gör som följer:

1. Öppna Pronto-menyn genom att trycka Windows-tangenten (WIN) eller S3 i en kort stund. I fall S3 inte har hållits inne tillräckligt länge kommer kommandomenyn att öppnas; om så är fallet måste den stängas genom att kort trycka S3 en gång till.
2. Pronto-menyn kommer att öppnas på ett av dess alternativ. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen för att komma åt andra alternativ i menyn.
3. När du har nått "Hjälp", stanna och tryck Enter eller gå med styrpinnen ett steg åt höger.
4. En undermeny kommer att öppnas som innehåller ytterligare alternativ.
5. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till "Manual" och tryck Enter eller gå med styrpinnen ett steg åt höger.
6. De enskilda kapitlen i handboken visas i en lista. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till det önskade kapitlet och öppna det genom att trycka Enter.

Du har nu lärt dig en hel del: Du kan skriva och spara texter, öppna manualen, radera filer samt ta reda på lokal tid och annan information.

## ***MP3-spelaren***

Låt oss som avslutning lyssna på lite musik och på samma gång lära oss hur man använder Prontos MP3-spelare. Gör som följer:

1. Öppna Pronto-menyn genom att trycka på Windows-tangenten (WIN) eller genom att trycka på S3 i en kort stund – S3 är den nedsänkta fyrkantiga tangenten till höger om styrpinnen. I fall S3 inte har hållits inne tillräckligt länge kommer kommandomenyn att öppnas; om så är fallet måste den stängas genom att trycka Esc eller S3 kort en gång till.
2. Pronto-menyn kommer att öppnas på ett av dess alternativ. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen för att komma åt andra alternativ på menyn.
3. När du har nått "MP3-spelaren", stanna och tryck Enter.
4. MP3-spelaren kommer antingen att meddela att det inte finns någon spellista eller att den är tom, eller så kommer den att visa filnamnet för den MP3-fil som senast spelades. För att lyssna på en annan fil, tryck antingen på Alt-tangenten eller på S3 kort en gång – detta kommer att öppna kommandomenyn.
5. Stanna på det första alternativet på menyn, "Arkiv", gå en gång åt höger med styrpinnen och bekräfta alternativet "Öppna" genom att trycka Enter.
6. En lista med filer och mappar kommer nu att öppnas, liknande när du öppnar filer i Ordbehandlaren.
7. Gå uppåt eller neråt med styrpinnen till "Storage card". Gå med styrpinnen åt höger för att komma åt de olika nivåerna i undermappen. Gå nu uppåt eller neråt med styrpinnen till mappen "Music" och öppna den genom att en gång till gå med styrpinnen åt höger.
8. "Music"-mappen innehåller alla MP3-filerna. För att öppna en av dem, välj den helt enkelt genom att bläddra igenom listan med styrpinnen och trycka Enter.
9. Fillistan kommer att stängas och musiken kommer att spelas upp. (I fall en punktdisplay har anslutits kommer den att visa filnamnet. De första tre punktcellerna kommer att i procent visa hur mycket av filen som redan har spelats.) Denna information

kan du också ta reda på och få uppläst genom att trycka Windows-tangenten tillsammans med minustangenten (-).

10. Pausa och fortsätt spela musiken från samma ställe genom att trycka Enter.

11. Under uppspelning kommer förflyttning åt vänster att spola tillbaka 10 sekunder och förflyttning åt höger kommer att spola framåt 10 sekunder åt gången.

12. För att stoppa musiken, tryck mellanslag eller Ctrl tillsammans med Enter.

13. Volymen i MP3-spelaren kan justeras med ratten på den vänstra sidan av enheten (enhetsvolymen).

14. Avsluta MP3-spelaren genom att trycka på en av systemknapparna i en kort stund: Med S1, S2 och S3 kommer MP3-spelaren att fortsätta spela i bakgrunden; S4 kommer att stoppa spelaren.

Det är alltså möjligt att använda Ordbehandlaren och på samma gång lyssna på musik i bakgrunden.

Repetition: S1 öppnar Ordbehandlaren; S2 öppnar Kalendern; S3 öppnar Pronto-menyn; S4 lägger enheten i viloläget.

## ***Slå av Pronto!***

Hur slås Pronto! av?

Tryck och håll inne S4 (den andra tangenten till höger om styrpinnen) för att lägga Pronto! i viloläget.

Om du glömmer att slå av Pronto!, oroa dig inte för att hitta ett tomt batteri; den automatiska avstängningsfunktionen är utformad så att Pronto! som standard automatiskt kommer att stänga av sig själv efter 10 minuters inaktivitet eller 10 minuter efter att en MP3-fil har slutat spelas.

Även när Pronto! "sover" kan den dock fortfarande tala om datumet och tiden, ange batteristatusen eller ge påminnelser om kalenderbokningar.

I fall Pronto! inte kan "väckas" efter tryckning på S1, S2 eller S3 i en kort stund och det inte går att ta reda på tiden genom att trycka kort på S4 har den antingen stängts av helt och hållet eller så har den tvingats in i viloläget eftersom batteriet skyndsamt behöver laddas.

I denna situation är icke sparade data fortfarande tillgängliga i några timmar men laddaren måste anslutas så snart som möjligt för att ladda batteriet och undvika förlust av data. Så snart som laddaren är ansluten kan Pronto! väckas från dess påtvingade viloläge på det vanliga sättet genom att trycka S1, S2 eller S3 i en kort stund.

Pronto! är en Windows CE-enhet och som sådan stängs den aldrig av helt och hållet. I fall enheten dock stängs av helt och hållet till följd av brist på ström eller systemomstart (på-/avknappen) kan viss förlust av data förväntas. Varning för en fullständig nedstängning ges i form av en klar fallande tvåtonssignal.



# Appendix x1: Översikt

## ***x1.1 Kort enhetsöversikt***

Pronto! 18 V3

- Ovansidan: 8-punkts punkt tangentbord, 2 tumtangenter, högtalare, 18-cells punktdisplay med 18 cursor routing-tangenter, 6 runda displayknappar (3 på vardera sidan av punktdisplayen), 4 runda systemknappar
- Framsidan: Styrpinnen, inspelningsknappen
- Baksidan (från vänster till höger): Nätspänningsanslutning (laddare), SD-minneskortsfack, seriellt gränssnitt, USB-gränssnitt (master), anslutning för hörlurar (stereo), anslutning för mikrofon, mini-USB-gränssnitt (slav)

Pronto! QS

- Ovansidan: Standardtangentbord (alfanumeriskt), högtalare
- Framsidan: Styrpinnen, 4 fyrkantiga systemknappar, inspelningsknappen
- Högra sidan: Rund på-/avknapp
- Vänstra sidan: Volymreglage (ratt), anslutning för mikrofon, anslutning för hörlurar (stereo)
- Baksidan (från vänster till höger): Nätspänningsanslutning (laddare), seriellt gränssnitt, mini-USB-gränssnitt (slav), SD-minneskortsfack, USB-gränssnitt (master)

Pronto! 40

- Ovansidan: Tangentbord (standard alfanumeriskt eller 8-punkts punkt tangentbord med 2 tumtangenter), 2 tangentbordslås, högtalare, rund inspelningsknapp, 40-cells punktdisplay med 40 cursor routing-tangenter, 6 runda displayknappar (3 på vardera sidan av punktdisplayen)
- Framsidan: Styrpinnen, 4 runda systemknappar, 2 fyrkantiga tumtangenter
- Högra sidan: Rund på-/avknapp, USB-gränssnitt (master), mini-USB-gränssnitt (slav), SD-minneskortsfack, seriellt gränssnitt
- Vänstra sidan: Volymreglage (ratt), anslutning för mikrofon, anslutning för hörlurar (stereo), nätspänningsanslutning (laddare)

## ***x1.2 Termer och förkortningar som används***

ActiveSync = kommunikationsprogram för datautbyte med datorn under Windows 2000/XP.

Program = allmän term för alla funktioner och program

Knapp = bekräftar en åtgärd

Blåtand = trådlös kommunikation

Punkt tangentbord = B0 till B9

Minneskort = mobil databärare (minneskort)

Utforskaren = tillgång till filer, mappar och minneskort  
Dialogruta = uppsättning av olika inställningar och kommandon  
Displayknappar = för kontroll av punktdisplayen, D1 till D6  
Alternativ = allmän term för komponenter i en meny eller dialogruta  
Kortkommando = tangentkombination eller snabbtangent  
Meny = lista som innehåller alternativ (program, dialogrutor, undermenyer, kommandon)  
Mobile Device Center = kommunikationsprogram för datautbyte med datorn under Windows Vista / Windows 7  
Styrpinne = kontrollerar rörelser, S-upp till S-mitten  
Mapp = en lista med filer och mappar, t.ex. mappen "Edit" (katalog)  
Positionstangenter = P-tangenter, för cursor routing på en punktdisplay  
Systemknappar = för att få tillgång till program eller förfrågningar, S1 till S4  
Undermeny = lista med ytterligare menyalternativ  
QWERTY = betyder standardtangentbord

### ***x1.3 Generella akustiska signaler och meddelanden***

1. Slå på (starta) PRONTO med på-/avknappen:

- Melodi låg-hög.
- Punktdisplay: BAUM Pronto.

2. Slå av PRONTO (på-/avknappen) (stäng ner operativsystemet):

- Melodi hög-låg.
- Punktdisplay: off.

3. Stäng av, stäng alla program med S4 (viloläget):

- Melodi hög-låg (kort)

4. Starta/öppna program från viloläget:

- Melodi låg-hög (kort)

Möjliga felmeddelanden efter att du har slagit på:

1. Ingen laddare och batterinivån låg

- Melodi hög-hög-låg
- Punktdisplay: Battery low.

När du trycker på systemknapparna: Lågt pip.

PRONTO startar inte. Anslut laddaren och ladda upp batteriet.

2. Punktmeddelanden vid laddning:

- Charging...: AC-adaptorn är ansluten, laddningen fortsätter, Pronto är avslagen.
- battery full: AC-adaptorn är ansluten, laddningen har slutförts, Pronto är avslagen.

## ***x1.4 Tekniska data för alla enheter***

### Pronto 18 V3:

Dimensioner i mm (bredd x djup x höjd): 174x92x32

Vikt: ung. 450 g

Batteriladdning: 5 V / max. 2,5 A

Batterikapacitet: 7,2 V / 2500 mAh

Minne:

- DRAM: 128 MB (internt arbetsminne)
- Inbyggd Flashdisk: 32 MB
- Internt Flash-minne (flashdisk): 1 GB (950 MB användardata)
- Externt minne (minneskort): SD- eller SDHC-minneskort
- Processor: 520 MHz

Anslutningar:

- Seriell
- USB (master)
- Mini-USB (slav)
- Blåttand
- WLAN
- Stereohörlurar
- Mikrofon (mono)
- Laddare

### Pronto! QS:

Dimensioner i mm (bredd x djup x höjd): 253x92x19

Vikt: ung. 600 g

Batteriladdning: 5 V / max. 2,5 A

Batterikapacitet: 7,2 V / 2500 mAh

Minne:

- DRAM: 128 MB (internt arbetsminne)
- Inbyggd Flashdisk: 32 MB
- Internt Flash-minne (flashdisk): 1 GB (950 MB för användardata)
- Externt minne (minneskort): SD- eller SDHC-minneskort
- Processor: 520 MHz

Anslutningar:

- Seriell
- USB (master)
- Mini-USB (slav)
- Blåttand
- WLAN
- Stereohörlurar
- Mikrofon (mono)
- Laddare

### Pronto! 40:

Dimensioner i mm (bredd x djup x höjd): 297x152x27

Vikt: ung. 1300 g (inkl. standardtangentbordsmodul)

Batteriladdare: 5 V / max. 2,5 A  
Batterikapacitet: 7,2 V / 2500 mAh

Minne:

- DRAM: 128 MB (internt arbetsminne)
- Inbyggd Flashdisk: 32 MB
- Internt Flash-minne (flashdisk): 1 GB (950 MB för användardata)
- Externt minne (minneskort): SD- eller SDHC-minneskort
- Processor: 520 MHz

Anslutningar:

- Seriell
- USB (master)
- Mini-USB (slav)
- Blåtand
- WLAN
- Stereohörlurar
- Mikrofon (mono)
- Laddare

För alla enheter:

Batterilivslängd: Ung. 10-12 timmar (längre med inaktiverat WLAN-chip)

Viloläge: Flera dagar

Observera: Livslängden är beroende av den elektriska effektförbrukningen (blåtand, WLAN, storleken på minneskortet, USB-minnet)

Batteri: Li-Ion

AC-adapter: 100-240 Volt, 50-60 Hz

Operativsystem: Windows CE

Räckvidd för blåtand: Ung. 10 meter

Filformat:

- Ordbehandlaren: Rich Text Format (RTF), textformat (TXT)  
: Endast läsning: PDF, DOC, DOCX, HTML
- Röstinspelning: MP3, WAV
- Musik: MP3, WAV, WMA
- Daisy-standard: 2.02

Systemkrav för PC-anslutning:

- Windows 2000 eller Windows XP med Microsoft ActiveSync.
- Windows Vista eller Windows 7 med Microsoft Mobile Device Center.

## **x1.5 Kontakt och support**

PRONTO-utvecklingsteamet svarar gladeligen på frågor och tar emot förslag. En internationell e-postdiskussionsgrupp har lagts upp speciellt för detta ändamål. Den är öppen för alla frågor och förslag kring PRONTO, för att dela med sig av erfarenheter till andra PRONTO-användare och för att få tillgång till expertsupport från våra affärspartners.

För att gå med, skicka ett mail till [listserv@listserv.baum.de](mailto:listserv@listserv.baum.de) med textinnehållet "SUBSCRIBE Prontoint "efternamn, förnamn" (utan citattecken).

Hjälp finns att få via telefon genom att ringa till +49 (0)6223/49090.

BAUM Retec AG  
In der Au 22  
D-69257 Wiesenbach  
Germany  
Tfn: +49 (0) 62 23 / 49 09 0  
Fax: +49 (0) 62 23 / 49 09 399  
E-post: [info@baum.de](mailto:info@baum.de)  
Internet: [www.baum.de](http://www.baum.de)

Var god kontakta vår serviceavdelning i fall problem uppstår med enheten:

BAUM Retec AG  
Service  
In der Au 22  
D-69257 Wiesenbach  
Germany  
Tfn: +49 (0) 62 23 / 49 09 0  
Fax: +49 (0) 62 23 / 49 09 399  
E-post: [service@baum.de](mailto:service@baum.de)

#### Skador och reparationer

Vad kan göras i fall din Pronto inte längre reagerar?

- Kontrollera alla gränssnitt och anslutningar. Vänd dig till manualen för att kontrollera att rätt gränssnitt används.
- Är nätspänningsanslutningen (laddaren) ansluten till ett aktivt eluttag?

Använd aldrig en skadad enhet! Dra ut AC-adaptern. Vänligen kontakta omedelbart din lokala återförsäljare eller BAUM Retec AG:s serviceavdelning.

## Appendix x2: Kommandolista (för referens)

Här hittar du alla kortkommandon och tangentkombinationer som du kan använda på Pronto (punktläge och QWERTY-läge).  
Sorterade efter program.

### **X2.1 Allmänna kommandon:**

Mellanslag: "Höger tumtangent (B0), mellanslagstangenten  
Kommandotangenten: Vänster tumtangent (B9)  
Radera tecken till vänster om markören: B7, Backsteg  
Avbryttangent (Escape-funktion): B9B7B8, D4, Esc-tangenten  
Enhetens huvudvolym: Pronto 18: „S4 tillsammans med B-tangent“ (B1 till B8), Pronto QS / Pronto 40:  
Liten ratt (reglage) på vänstra sidan.  
Tal på/av (endast Pronto 18): D2D5  
Sammanhangskänslig hjälp: B2B6B9, F1 (FN+1)  
Tangentlås på/av: S2S3  
Kommandomeny: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten  
Stäng av (viloläge): S4 lång  
Visa Pronto-version: „V tillsammans med B7B8B9B0“, Skift+Ctrl+v  
Slå av/på enheten helt och hållet: Pronto 18: S1+S4, Pronto 40 / Pronto QS: På-/avknappen

Stoppa och starta om Pronto-programvaran: D1D4B3B6, FN+vänster Skift+vänster Ctrl+7 (OBS: Förlust av icke sparade data)

Stoppa Pronto-programvaran: D1D4B2B5, FN+vänster Skift+vänster Ctrl+6 (OBS: Förlust av icke sparade data)

Starta Pronto-programvaran (efter stopp): D1D4B1B4, FN+vänster Skift+6

Starta om operativsystemet och Pronto-programvaran: D1D4B1B2B4B5, FN+vänster Skift+0

Uppdatering av Pronto-programvara och operativsystem:

Installation av fullständig Pronto-version (fullständig installation) från mappen "Storage Card\Install":

D1D4B1B4B7B8, FN+vänster Skift+1

Installation av enskilda Pronto-programvarukomponenter (uppdatering) från mappen "Storage

Card\Update": D1D4B7B8, FN+vänster Skift+vänster Ctrl+1

Installation av operativsystem från mappen "Storage Card\OS5": D1D4B2B3B5B7B8, FN+vänster Skift+3

Installation av BIOS (inte på Pronto 18): FN+vänster Skift+vänster Ctrl+3, D1D4B1B2B3B4

### **X2.2 Systemknappskommandon:**

#### **Korta tryck på systemknapparna:**

Temperatur = S1 en gång

Lufttryck = S1 två gånger

Höjd (ovanför havsytan, uppskattning) = S1 tre gånger

Lista påminnelser = S2 en gång

Tidtagning = S2 två gånger

Räkna ned = S2 tre gånger

Kommandomenyn = S3 (identiskt med B9B3B5 eller Alt-tangenten)

Batteristatus = S3 två gånger

Kompass = S3 tre gånger

Tid = S4 en gång

Datum = S4 två gånger

### **Långa tryckningar på systemknapparna:**

Tangentlås på/av: S2S3

Stäng av (viloläge): S4

Slå på: S1, S2, eller S3

Stäng av helt och hållet: På Pronto 18 S1S4 lång, på-/avknappen på Pronto QS och Pronto 40 (var god använd inte detta i vanliga fall)

### **X2.3 Kör program**

Öppna Prontos huvudmeny (tillgång till alla program): S3 lång, Windows-tangenten

Ordbehandlaren = S1 lång, o tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+o

Kalendern = S2 lång, k tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+k

Adressboken = a tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+a

Utforskaren = f tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+f

PDF-dokumentläsaren = u tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+u

Mobil = l tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+l

Kalkylatorn = y tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+y

Pronto som punktdisplay (inte på Pronto QS) = p tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+p

Fickminnet = c tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+c

Inspelning = tryck på REC-knappen och fortsätt hålla den intryckt

Spela upp senaste inspelningen = REC-knappen kort en gång

DAISY-spelaren = d tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+d

Mp3-spelaren = m tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+m

E-post = e tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+e

MSN Messenger = n tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+n

Webbläsaren = w tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+w

Internetradion = r tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+r

Tidtagning och alarm (alarm, stoppur, timer) = t tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+t

Inställningar = s tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+s

Anslutningar (för blåtand på/av) = i tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+i

Hjälp (manual) = h tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+h

Var är jag = minus tillsammans med B7B8B9 (-+B7B8B9), Windows-tangenten+minus

Senaste meddelandet = nummertecknen tillsammans med B7B8B9 (#+B7B8B9), Windows-tangenten+3

Lista över meddelanden = plus tillsammans med B7B8B9 (++B7B8B9), Windows-tangenten+Plus

### **X2.4 Ordbehandlaren**

Öppna Ordbehandlaren: S1 lång, o+B7B8B9, Windows-tangenten+o

Punktmönster för punktläget:

Tecken: Vänster B1, höger B4, aktuellt B1B4  
Ord: Vänster B2, höger B5, aktuellt B2B5  
Mening: Vänster B3, höger B6, aktuell B3B6  
Rad: Vänster B1B2, höger B4B5, aktuell B1B2B4B5  
Stycke: Vänster B1B3, höger B4B6, aktuellt B1B3B4B6  
Sida: Vänster B2B3, höger B5B6, aktuell B2B3B5B6  
Början: B1B2B3, slutet B4B5B6, allt B1B2B3B4B5B6

Läsning: Punktmönster+B9B0

Markering: Punktmönster för "aktuell"+B9

Radera: Punktmönster för "aktuell"+B9B7

Radera markerad text: B7B9

Radera tecken till vänster om markören: B7

Avlägsna markering: B7B8B9

Gå till början av raden och läs upp raden: B1B2B3B7B9(B0)

Gå till slutet av raden och läs upp raden: B4B5B6B8B9(B0)

Ny rad: B9B8B4B5 eller B8

Nytt stycke: B9B8B4B6

Ny sida: B9B8B5B6

Infoga tabb: B9B8B4

Windows-liknande kommandon för QWERTY-läget:

Läsa textpassager:

Tecken vänster / höger: Pil vänster / höger  
Ord vänster / höger: Ctrl+pil vänster / höger  
Mening vänster / höger: Ctrl+mindre än / Skift+Ctrl+mindre än  
Aktuell mening: Skift+Ctrl+mellanslag  
Föregående / nästa rad: Pil upp / pil ner  
Läs upp tecken: Ctrl+punkt  
Bokstavera ord: Ctrl+kommatecken

Gå till-kommandon:

Föregående / nästa sida: PgUp / PgDn (FN+pil upp / FN+pil ner)  
Början / slutet av raden: Home / End (FN+pil vänster / FN+pil höger)  
Början / slutet av dokumentet: Ctrl+Home / Ctrl+End (FN+Ctrl+pil vänster / pil höger)

Markera text från markörpositionen:

Tecken höger / vänster: Skift+pil höger / Skift+pil vänster  
Ord höger / vänster: Skift+Ctrl+pil höger / Skift+Ctrl+pil vänster  
Nästa / föregående rad: Skift+pil ner / Skift+pil upp  
Till slutet av raden: Skift+End (FN+Skift+pil höger)  
Till början av raden: Skift+Home (FN+Skift+pil vänster)  
Till början av dokumentet: Skift+Ctrl+Home (FN+Skift+pil vänster)  
Till slutet av dokumentet: Skift+Ctrl+End (FN+Skift+Ctrl+pil höger)  
Markera hela texten: Ctrl+a



Markera block start / block slut: Ctrl+mellanslag  
Avlägsna markering: Esc

Raderingskommandon:

Radera tecken till vänster om markören: Backstegstangenten

Radera aktuellt tecken: Del-tangenten

Radera markerad text: Ctrl+Del

Ny rad: Enter-tangenten

Nytt stycke: Skift+Enter

Ny sida: Skift+Ctrl+Enter

Infoga tabb: Tab-tangenten (TAB)

Menyfunktioner

Öppna/stäng meny: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: f+B9B8, Alt+a

Nytt dokument (dialog) = "n tillsammans med B8B9", Ctrl+n

Öppna dokument (dialog) = "o tillsammans med B8B9", Ctrl+o

Stäng dokument = "u tillsammans med B8B9", Ctrl+u

Spara dokument = "s tillsammans med B8B9", Ctrl+s

Spara som (dialog) = "a tillsammans med B8B9", Ctrl+Skift+s

Skydda/ta bort skydd på text = "z tillsammans med B8B9, Ctrl+z"

Föregående fil = "Minus tillsammans med B8B9", Ctrl+minus

Lista över öppna filer = "l tillsammans med B8B9", Ctrl+l

Menyn Redigera: r+B9B8, Alt+r

Klipp ut = "x tillsammans med B8B9", Ctrl+x

Kopiera = "c tillsammans med B8B9", Ctrl+c

Klistra in = "v tillsammans med B8B9", Ctrl+v

Radera = B9B7, Ctrl+Del-tangenten

Markera början/slut på textblock = B9B1B4, Ctrl+mellanslag

Markera hela texten = B9B8B1B2B3B4B5B6, Ctrl+a

Sök (dialog) = "B1B4B5B6B8B9", Ctrl+f

Sök nästa = "B2B5B8B9", F3 (FN+3)

Ersätt (dialog) = "h tillsammans med B8B9", Ctrl+h

Sätt bokmärke = "= tillsammans med B8B9", Ctrl+m

Hoppa till bokmärke = "m tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+m

Menyn Infoga: i+B8B9, Alt+i

Infoga datum = "B2B6B8B9", F5 (FN+5)

Infoga tid = "B2B3B5B8B9", F6 (FN+6)

Ny rad (radmatning) = B8 eller B9B8B4B5, Enter-tangenten

Nytt stycke = B9B8B4B6, Skift+Enter

Ny sida (sidmatning) = B9B8B5B6, Skift+Ctrl+Enter

Infoga tabb = B9B8B4; Tab-tangenten

Menyn Uppläsning: g+B8B9, Alt+g  
Börja läsa från markörpositionen = B9 eller r+B8B9, S-mitten, Skift+Ctrl+r  
Läs aktuell mening = B9B0B3B6, Skift+Ctrl+mellanslag  
Läs mening till vänster = B9B0B3, Ctrl+mindre än  
Läs mening till höger = B9B0B3, Ctrl+större än  
Läs markerad text = "k tillsammans med B8B9", Ctrl+k

Funktioner under löpande läsning:  
Starta/stoppa: S-mitten, B9 eller r+B8B9, Skift+Ctrl+r  
Långsammare: S-upp  
Snabbare: S-ner (normal uppläsningshastighet kommer inte att påverkas)  
2 ord bakåt: S-vänster  
2 ord framåt: S-höger

Menyn Verktyg: t+b8B9, Alt+t  
Punkt (dialogruta för att aktivera ordbrytning, formateringstecken etc.)  
Position i text = "p tillsammans med B8B9", Ctrl+p  
E-post (funktioner när E-postprogrammet har startats)  
Förkortning (Grade 2) (Funktioner för att förkorta punktskrift. Endast tillgängliga i fall ett konverteringsprogram existerar.)  
Minnesinformation: "q tillsammans med B9B8", Ctrl+Skift+q

## ***X2.5 Kalendern***

Öppna Kalendern: S2 lång, k tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+k

Bläddra i kalendern:

Nästa / föregående bokning: S-ner / S-upp, B9B6 / B9B3, pil ner/upp  
Nästa / föregående dag: S-höger / S-vänster, B9B4 / B9B1, pil höger/vänster  
Nästa / föregående vecka: B5 / B2, Skift+pil vänster / Skift+pil höger  
Nästa / föregående månad: B4B5 / B1B2, Skift+pil ner / Skift+pil upp  
Nästa / föregående halvår: B4B6 / B1 B3, PgDn / PgUp, (FN+pil ner / FN+pil upp)  
Nästa / föregående år: B5B6 / B2B3, Skift+PgDn / Skift+PgUp (FN+Skift+pil ner / FN+Skift+pil upp)

Öppna/stäng meny: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a

Ny bokning (dialog) = "n tillsammans med B8B9", Ctrl+n

Öppna bokning (dialog) = S-mitten, B9, Enter-tangenten

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r

Radera bokning = B9B7, Del-tangenten

Sök (dialog) = "B1B4B5B6B8B9", Ctrl+f

Sök nästa = "B2B5B8B9", F3 (FN+3)

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g

Gå till idag = B0 eller "d tillsammans med B8B9", mellanslag

Gå till datum (dialog) = "j tillsammans med B8B9", Ctrl+j

Bokning

Nästa = S-ner, B9B6, pil ner

Föregående = S-upp, B9B3, pil upp

Dag

Nästa = S-höger, B4, pil höger

Föregående = S-vänster, B1, pil vänster

Vecka

Nästa = B5, Skift+pil höger

Föregående = B2, Skift+pil vänster

Månad

Nästa = B4B5, Skift+pil ner

Föregående = B1B2, Skift+pil upp

Halvår (sex månader)

Nästa = B4B6, PgDn (FN+pil ner)

Föregående = B1B3, PgUp (FN+pil upp)

År

Nästa = B5B6, Skift+PgDn (FN+Skift+pil ner)

Föregående = B2B3, Skift+PgUp (FN+Skift+pil upp)

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Filter (dialog): r+B7B9, Ctrl+r

Bokningar med punkt (dialog)

Bokningar med tal (dialog)

Datum med punkt (dialog)

Datum med tal (dialog)

Återställ till standardinställningarna

I dialogrutorna för visning av bokningar och datum:

Kommandomenyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Flytta åt vänster = l+B9B8, Ctrl+pil vänster

Flytta åt höger = r+B9B8, Ctrl+pil höger

Flytta till början = b+B8B9, Ctrl+pil upp

Flytta till slutet = e+B8B9, Ctrl+pil ner

Dölj objekt = h+B8B9, Ctrl+Del

Visa objekt = s+B8B9, Ctrl+Insert (FN+Ctrl+Del)

Återställ till standardinställningarna

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Påminnelse (dialog)

Rensa gamla bokningar (dialog)

Hantera kategorier (dialog)

Exportera (dialog)

Importera (dialog)

## **X2.6 Adressboken**

Öppna Adressboken: a tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+a

Bläddra i adressboken och dess fält:

Första / sista kontakten: B1B2B3 / B4B5B6, Ctrl+pil upp / Ctrl+pil ner

Föregående / nästa kontakt: S-upp / S-ner, B3 / B6, pil upp / pil ner

Ett fält åt vänster / höger: S-vänster / S-höger, B1 / B4, pil vänster / pil höger

5 fält åt vänster / höger: B2 / B5, Skift+Ctrl+pil vänster / Skift+Ctrl+pil höger

Kontaktens första / sista fält: B1B2 / B4B5, Home / End (FN+pil vänster / FN+pil höger)

10 kontakter bakåt / framåt: B2B3 / B5B6, PgUp / PgDn

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a

Ny kontakt (dialog) = "n tillsammans med B8B9", Ctrl+n

Öppna kontakt (dialog) = S-mitten, B9, Enter-tangenten

Uppdatera (aktualisera) = k+B8B9, F5 (FN+5)

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r

Radera kontakt = B9B7, Del-tangenten

Sök (dialog) = "B1B4B5B6B8B9", Ctrl+f

Sök nästa = "B2B5B8B9" F3 (FN+3)

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g

Första kontakten = B1B2B3, Ctrl+pil upp

Sista kontakten = B4B5B6, Ctrl+pil ner

Föregående kontakt = S-upp, B3, pil upp

Nästa kontakt = S-ner, B6, pil ner

Kontaktens första fält = B1B2, Home (FN+pil vänster)

Kontaktens sista fält = B4B5, End (FN+pil höger)

Ett fält åt vänster = S-vänster, B1, pil vänster

Ett fält åt höger = S-höger, B4, pil höger

5 fält åt vänster = B2, Skift+Ctrl+pil vänster

5 fält åt höger = B5, Skift+Ctrl+pil höger

10 kontakter bakåt = B2B3, PgUp (FN+pil upp)

10 kontakter framåt = B5B6, PgDn (FN+pil ner)

Gå till kontakt x på sorteringsposition y = y+B8B9, Skift+Ctrl+y

Gå till kontakt i listan som startar med sträng = z+B8B9, Skift+Ctrl+z

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Val av maskprofil (dialog) = "w tillsammans med B8B9", Ctrl+w

Nästa mastermask för visning = "m tillsammans med B9", Skift+Ctrl+m

Föregående mastermask för visning = "m tillsammans med B8B9", Ctrl+m

Använd favoritmask = "u tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+u

Sorteringsordning (dialog) = "o tillsammans med B8B9", Ctrl+o

Filter (dialog) = "t tillsammans med B8B9", Ctrl+t

Inget filter = "k tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+k (endast i fall ett filter har satts)  
Namn på fält (dialog)  
Återställ till standardinställningarna

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Detaljerad info om kontaktfält = "plus tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+0

Läs detaljerade maskfält = "/" tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+4

Ring telefonnummer = "(" tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+1

Spela upp toner = ")" tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+2

Skicka SMS till nummer = "likhetstecken tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+3

Förflyttning i listor:

Nästa / föregående objekt: S-höger / S-vänster, B9B4 / B9B1, pil höger / pil vänster

Hoppa direkt till objekt: Skriv den första bokstaven (de första bokstäverna) i dess namn eller positionsnummer.

Början eller slutet av listan: B1B2B3B7B9 / B4B5B6B8B9, Home / End (FN+pil vänster / FN+pil höger)

Öppna/stäng kommandomenyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Ställ in maskfältens positioner i vallistor:

Flytta åt vänster = l+B9B8, Ctrl+pil vänster

Flytta åt höger = r+B9B8, Ctrl+pil höger

Till början = b+B9B8, Ctrl+pil upp

Till slutet = e+B9B8, Ctrl+pil ner

Dölj = h+B9B8, Ctrl+Del

Visa = s+B9B8, Ctrl+Insert (FN+Ctrl+Del)

## **X2.7 Utforskaren**

Öppna Utforskaren = f tillsammans med B7B8B9, Windows-tangenten+f

Öppna/stäng menyn = S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a

Ny mapp (dialog) = "n tillsammans med B8B9", Ctrl+n

Öppna = "o tillsammans med B8B9", Ctrl+o eller Enter-tangenten

Radera = B9B7 eller d+B8B9, Del-tangenten

Byt namn (dialog) = "r tillsammans med B8B9", Ctrl+F2 (FN+Ctrl+2)

Egenskaper (dialog) = "p tillsammans med B8B9", Alt+Enter

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r

Klipp ut = "x tillsammans med B8B9", Ctrl+x

Kopiera = "c tillsammans med B8B9" Ctrl+c

Klistra in = "v tillsammans med B8B9", Ctrl+v

Markera fil eller mapp = B0, mellanslag

Markera allt = B9B8B1B2B3B4B5B6, Ctrl+a

Invertera markering = "i tillsammans med B8B9", Skift+mellanslag

Sök (dialog) = "? tillsammans med B8B9", Ctrl+f  
ZIP-arkiv = "z tillsammans med B8B9", Ctrl+z  
Extrahera från ZIP-arkiv = "u tillsammans med B8B9", Ctrl+u

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v  
Filter (Detaljer-dialog)  
Sortering (dialog)

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t  
Minne = "m tillsammans med B8B9", Skift+Ctrl+m  
Läs antalet markerade objekt = "k tillsammans med B8b9", Ctrl+k  
ZIP-förlopp

## **X2.8 Daisy-spelaren**

Öppna Daisy-spelaren: d+B9B7B8, Windows-tangenten+d  
Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a  
Uppdatera ny bokhylla = n+B8B9, Ctrl+n, D1D3D4D5  
Spela/stoppa: S-mitten, B9, Enter-tangenten  
Boklista (dialog) = o+B9B8, Ctrl+o, D1D3D5  
Stäng bok = u+B8B9, Ctrl+u, D2D4D5D6  
Avsluta Daisy-spelaren = B1B4B5B8B9, Alt+F4 (Alt+FN+4)

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r  
Sök (dialog) = B1B4B5B6B8B9, Ctrl+f, D1D2D4

Menyn Bokmärke: b+B8B9, Alt+b  
Gå till (dialog) = #+B9B8, Ctrl+3, D3D4D5D6  
Föregående = B2, D2D3D6, PgUp (FN+pil upp)  
Nästa = B5, D3D5D6, PgDn (FN+pil ner)  
Infoga = B9B8, D2D3D5D6, Insert-tangenten (FN+Del)  
Radera (dialog) = B7, D1D2D3, Del-tangenten  
Radera alla = B9B7, D1D2D3D4D5D6, Skift+Ctrl+Del

Menyn Verktyg: t+B9B8, Alt+t  
Hastighet (dialog) = s+B8B9, D2D3D4, Ctrl+s  
Snabbare: ++B9B8, D4D5, Ctrl+plus  
Långsammare: -+B9B8, D1D2, Ctrl+minus  
Välj minnestyp (dialog)

Menyn Navigera: n+B9B8, Alt+n  
Högre nivå = B3, D1, S-upp, pil upp  
Lägre nivå = B6, D3, S-ner, pil ner  
Bakåt = B1, D1D3, S-vänster, pil vänster  
Framåt = B4, D4D6, S-höger, pil höger  
Början av boken = B9B1B2B3, D1D4, Home (FN+pil vänster)  
Slutet av boken = B9B4B5B6, D3D6, End (FN+pil höger)  
Gå till sida (dialog) = p+B8B9, D1D2D3D4, Skift+Ctrl+p  
Spola framåt = B2B6B7B9B8, D5D6, Skift+Ctrl+pil höger  
Spola bakåt = B3B5B9B8, D2D3, Skift+Ctrl+pil vänster

Menyn Information: o+B9B8, Alt+o  
Bokinformation = i+B9, D2D4, Skift+Ctrl+i  
Var är jag = r+B9, D1D2D3D5, Ctrl+r

## **X2.9 MP3-spelaren**

Öppna MP3-spelaren: m+B9B7B8, Windows-tangent+m  
Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

I huvudmenyn:

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a  
Öppna (dialog) = o+B9B8, D1D3D5, Ctrl+o

Menyn Uppspelning: u+B8B9, Alt+u  
Start/paus = B9, D6, S-mitten, Enter  
Stopp = B0, D4, Ctrl+Enter eller mellanslag  
Nästa spår (titel) = B4, D3, S-ner, pil ner  
Föregående spår (titel) = B1, D1, S-upp, pil upp  
Första spåret (titeln) = B3, D1D4, Home (FN+pil vänster)  
Sista spåret (titeln) = B6, D3D6, End (FN+pil höger)  
10 sekunder framåt = B5, D4D6, S-höger, pil höger  
10 sekunder bakåt = B2, D1D3, S-vänster, pil vänster  
Återuppta uppspelningen från senaste stopposition = r+B8B9, D1D2D3D5, Ctrl+r

Menyn Ljud: l+B9B8, Alt+l  
Menyn Volym  
Öka = B4B5, Ctrl+pil upp  
Sänk = B1B2, Ctrl+pil ner

Menyn Spellista: (dialog) = s+B8B9, D1D3D4D6, Alt+s  
Menyn Information (dialog) = o+B9B8, D1D3D4, Alt+o

Menyn i spellistans dialogruta:

Spellista: y+B8B9, Ctrl+y  
Ny: n+B9B8, D1D3D4D5, Ctrl+n  
Öppna (dialog): o+B9B8, D1D3D5, Ctrl+o  
Spara som: s+B8B9, D1D2D4, Ctrl+s  
Redigera: r+B8B9, Ctrl+r  
Lägg till:  
Fil = ++B8B9, D2D3D5, Ctrl+plus  
Mapp = /+B8B9, D2D5D6, Ctrl+snedstreck  
Flytta:  
Vänster = l+B8B9, D1D2, Ctrl+pil vänster  
Höger = r+B8B9, D4D5, Ctrl+pil höger  
Början = b+B8B9, D1D2D3, Ctrl+pil upp  
Slutet = z+B8B9, D4D5D6, Ctrl+pil ner  
Radera = B9B7, Del-tangenten

## **X2.10 Fickminnet**

Öppna Fickminnet och påbörja inspelning: Tryck och håll inne REC-knappen  
Stoppa inspelningen och stäng Fickminnet: Släpp upp REC-knappen

Öppna fillistan och spela upp inspelning: Kort tryck på REC-knappen

Öppna Fickminnet: c+B9B7B8, Windows-tangenten+c

I huvudvyn (fillistan):

Välj inspelning: Styrpinnen upp/ner, pil upp/ner

Spela upp inspelning: B9, styrpinnen i mitten, Enter-tangenten

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a

Radera: B9B7 eller d+B8B9, Del-tangenten

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Spela upp inspelning: B9, S-mitten, Enter

Starta inspelning: s+B8B9, Ctrl+s

Tryck på någon tangent för att stoppa inspelningen. Maximal inspelningstid för varje inspelning är 10 minuter.

Spela in CardID

Spela in en alarmsignal

Inspelningskvalitet: q+B9B8, Ctrl+q

## ***X2.11 Alarmet***

Öppna alarm: t+B9B7B8, Windows-tangenten+t, välj sedan Alarm.

I huvudvyn:

Välj alarm: Styrpinnen upp/ner, pil upp/ner

Öppna alarminställningar: B9, D6, Enter

## ***X2.12 Tidtagning***

Öppna tidtagningen: S2 kort två gånger eller t+B9B7B8 resp. Windows-tangenten+t och välj sedan Tidtagning.

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Tidtagning: t+B8B9, Alt+t

Starta: B4, Ctrl+mellanslag

Pausa: B5, mellanslag

Fortsätt: B5, mellanslag

Stoppa: B6, Ctrl+mellanslag

Meddela slut-/mellantid: B8, Skift+Ctrl+z

Menyn Ljud vid tidtagning: g+B8B9, Alt+g

Ljud varje sekund: B1, Ctrl+1

Ljud var 10:e sekund: B2, Ctrl+2

Säg varje minut: B3, Ctrl+3

Inget ljud: B7, Ctrl+0



## **X2.13 Räkna ned (timer)**

Öppna räkna ned: S2 kort tre gånger eller t+B7B8B9 resp. Windows-tangenten+t och välj sedan Räkna ned.

Starta: s+B9, Alt+s

Stoppa: o+B9, Alt+o

Ange tid: d+B9, Alt+d

Använd tid: t+B9, Alt+t

Återstående tid: r+B9, Alt+r

Stäng räkna ned: B9 eller B9B7B8, D6 eller D4, Enter eller Esc

## **X2.14 Mobil**

Öppna Mobil: l+B7B8B9, Windows-tangenten+l

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

I huvudvyn:

Besvara samtal = B8, Ctrl+Enter

Lägg på = B7, Del

Ring samtal (dialog) = r+B9, Ctrl+r

Anslut/koppla från = a+B9, Ctrl+a

Skicka SMS = m+B9, Ctrl+m

Läs SMS (dialog) = s+B9, Ctrl+s

Visa inlästa SMS = d+B9, Ctrl+d

Inställningar (dialog) = i+B9, Ctrl+i

Informationsfält = f+B9, Ctrl+f

Statusfält = u+B9, Ctrl+u

I dialogrutan Inställningar:

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Profil: p+B9, Ctrl+p

Ställ i förgrund vid samtal: f+B9, Ctrl+f

Avgör uppringare genom adressbok: u+B9, Ctrl+u

I dialogrutan för att ringa samtal eller skicka SMS:

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Ring: r+B9, Ctrl+r resp. Skicka: c+B9, Ctrl+c

Val av telefonnummer (dialog): t+B9, Ctrl+t

Telefonnummer: p+B9, Ctrl+p

Rensa telefonnummer: n+B9, Ctrl+Del

I dialogrutan „Skicka SMS“:

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Skicka: (dialog): c+B9, Ctrl+c

SMS-text: t+B9, Ctrl+t

Radera SMS-text: r+B9, Ctrl+Del

Antal bokstäver: l+B9, Ctrl+l

I dialogrutan "Läs SMS" resp. "Visa inlästa SMS":  
Öppna/stäng meny: S3 kort, B9B3b5, Alt-tangenten  
Telefonnummer: t+B9, Ctrl+t  
SMS-text: x+B9, Ctrl+x  
Datum: d+B9, Ctrl+d  
Visningsinställningar: v+B9, Ctrl+v  
Radera SMS: r+B9, Del-tangenten  
Skicka: s+B9, Ctrl+s  
Avgör avsändare genom adressbok: n+B9, Ctrl+n  
Radera SMS-text: r+B9, Ctrl+Del  
Hämta nya SMS: y+B9, Ctrl+y  
Avbryt hämtning av SMS: h+B9, Ctrl+h (används inte vid normal inläsning)

## ***X2.15 Kalkylatorn***

Öppna Kalkylatorn: y+B7B8B9, Windows-tangenten+y  
Öppna/stäng meny: S3 kort, B9b3B5, Alt-tangenten

Menyn Funktion: f+B8B9, Alt+f

Grundräknesätt:

Addition: +, plus

Subtraktion: -, minus

Multiplikation: \*, asterisk

Division: /, snedstreck

Lika med (utför beräkning): B8 eller "=", Enter eller likhetstecken

Avancerad:

Procent: %

Roten ur: sqrt

Upphöjt till: pow

Exponentiell: exp

Naturlig logaritm: ln

10-bas 10 logaritm: log

Modulo: mod

Sinus: sin, sinr, sinh, asin

Cosinus: cos, cosr, cosh, acos

Tangens: tan, tanr, tanh, atan

Uttryck:

Pi

Euler: e

Parentes vänster: (

Parentes höger: )

Menyn Redigera: r+B9B8, Alt+r

Rensa uträkningsrad (ny uträkning): e+B9, Skift+Del

Radera tecken bakåt: B7, Backstegstangenten

Infoga och rensa senaste minnesvärdet: r+B8B9, Ctrl+r

Rensa minneslista: r+B9, Skift+Ctrl+Del

Rensa uträkningsradslistan: u+B9, Ctrl+Del

Kopiera resultatet till klippbordet: z+B8B9, Ctrl+z

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Uträkningsradslista:

Nästa värde: S-ner, l+B9, pil ner (D3 inget tal)

Föregående värde: S-upp, l+B8B9, pil upp, (D1 inget tal)

Senaste uträkningen: n+B9, Skift+pil ner

Minneslista:

Nästa värde: y+B9, PgDn (FN+pil ner)

Föregående värde: y+B8B9, PgUp (FN+pil upp)

Senaste posten i minneslistan: m+B9, Skift+PgDn (FN+Skift+pil ner)

Menyn Verktyg: t+B8b9, Alt+t

Minnesfunktioner:

Infoga senaste minnesvärde: i+B8B9, Skift+Ctrl+i

Infoga i minneslistan: i+B9, Skift+Ctrl+h

Addera till senaste minnesvärdet (M-plus): ++B8B9, Ctrl+plus

Subtrahera från senaste minnesvärdet (M-minus): --B8B9, Ctrl+minus

Säg senaste minnesvärdet: s+B9, Skift+Ctrl+s

Läs upp uträkningsraden: a+B9, Skift+Ctrl+a

Inställningar (dialog): o+B9, Skift+Ctrl+o

Menyn Användarkonstanter: k+B8B9, Alt+k

x:

Infoga x i uträkningsrad: x

Infoga värdet av x i uträkningen

Infoga uträkningsrad i x: 1+B8B9, Skift+Ctrl+1

Säg x värde: 1+B9, Ctrl+1

y:

Infoga y i uträkningsrad: y

Infoga värdet av y i uträkningen

Infoga uträkningsrad i y: 2+B8B9, Skift+Ctrl+2

Säg y värde: 2+B9, Ctrl+2

z:

Infoga z i uträkningsrad: z

Infoga värdet av z i uträkningen

Infoga uträkningsrad i z: 3+B8B9, Skift+Ctrl+3

Säg z värde: 3+B9, Ctrl+3

Menyn Omvandling: o+B8B9, Alt+o

Fahrenheit i Celsius

Tum i centimeter

Radianer i grader

Grader i radianer

## **X2.16 Internetradion**

Observera: För att använda detta program måste Pronto ha en aktiv anslutning till webben, dvs. via en ActiveSync-anslutning till en Internet-ansluten PC, WLAN eller via mobiltelefon och giltig RAS-/GPRS-anslutning.

Öppna Internetradion: r+B7b8B9, Windows-tangenten+r  
Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

I huvudvyn:

Spela nästa/föregående funna radiostation: B4/B1, D4D6, S-höger/S-vänster, pil höger/vänster  
Spela nästa/föregående sparade radiostation: B6/B3, D3/D1, S-ner/S-upp, pil ner/upp  
Spela en av de 10 snabbvalsstationerna: Skriv in siffran 0 till 9  
Spara aktuell radiostation på position 0 till 9: Sifra+B9B8, Ctrl+sifra

Menyn Hantera radiostationer: h+B9B8, Alt+h  
Sök efter radiostationer (dialog): f+B9B8, D1D2D4, Ctrl+f

I dialogrutan „Söker efter radiostationer“:  
Listan Radiostation  
Textrutan Info (genre, bithastighet, position)  
Knappen Sök radiostationer (dialog)

I dialogrutan Sökinställningar:  
Listan Genrer  
Kryssrutan Filtrera på bithastighet  
Knappen Starta sökning

Menyn Snabbvalsinställningar: s+B9B8, Alt+s  
Automatiskt snabbval (sparar 10 positioner): B1B2B3B4B5B6B8B9, D1D2D3D4D5D6, Ctrl+a

Menyn Uppspelning: u+B9B8, Alt+u  
Spela upp: B9, D6, S-mitten, Enter  
Paus/fortsätt: B0, D1D3D4D6, mellanslag  
Stopp: B9B7B8, D4, Ctrl+Enter

Menyn Gå till: g+B9B8, Alt+g  
Nästa radiostation: B4, D4D6, S-höger, pil höger  
Föregående radiostation: B1, D1D3, S-vänster, pil vänster  
Nästa snabbval: B6, D3, S-ner, pil ner  
Föregående snabbval: B3, D1, S-upp, pil upp

Menyn Verktyg: t+B9B8, Alt+t  
Inställningar (dialog med inställningar för uppspelning i bakgrunden)

Menyn Information: o+B9B8, Alt+o  
Aktuell radiostation (dialog): u+B9B8, Ctrl+u

## **X2.17 E-post**

Observera: För att använda detta program måste Pronto ha en aktiv anslutning till webben, dvs. via en ActiveSync-anslutning till en Internet-ansluten PC, WLAN eller via mobiltelefon och giltig RAS-/GPRS-anslutning.

Öppna E-postprogrammet: e+B7b8B9, Windows-tangenten+e

Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Växla mellan mapplistan och meddelandelistan i huvudvyn: B9B1B3 eller B9B4B6, D1D3 eller D4D6, Skift+Tabb eller Tabb

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a

Nytt e-postmeddelande: n+B8B9, Ctrl+n

Ny mapp: d+B8B9, Skift+Ctrl+e

Byt namn på mapp: 2+B9, F2 (FN+2)

Öppna e-postmeddelande: B9, D6, S-mitten, Enter, Ctrl+o (startar Ordbehandlaren)

Menyn Redigera: r+B8B9, Alt+r

Kopiera meddelande till meddelandemapp: c+B8B9, Ctrl+c

Flytta meddelande till meddelandemapp: v+B8B9, Skift+Ctrl+v

Radera meddelande eller mapp: B9B7, Del

Markera meddelande: B0, mellanslag

Markera alla meddelanden i meddelandelistan: %+B9, Ctrl+a

Invertera markering: h+B8B9, Skift+mellanslag

Menyn Åtgärder: d+B8B9, Alt+d

Skicka och ta emot (alla konton): m+B8B9, Ctrl+m

Svara (när meddelandet är stängt): r+B8B9, Ctrl+r

Svara alla (när meddelandet är stängt): y+B8B9, Skift+Ctrl+r

Svara avsändaren (när meddelandet är stängt): z+B8B9, Skift+Alt+r

Vidarebefordra (när meddelandet är stängt): w+B8B9, Ctrl+f

Växla till Inkorg: i+B8B9, Skift+Ctrl+i

Växla till Utkorg: o+B8B9, Skift+Ctrl+o

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Konton (dialog)

Mappinformation

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g

Nästa brev: B9B6, D3, S-ner, pil ner

Föregående brev: B9B3, D1, S-upp, pil upp

Första brevet i listan: B9B1B2B3B7, D1D4, Home

Sista brevet i listan: B9B4B5B6B8, D3D6, End

Kommandon i Ordbehandlaren när ett meddelande har öppnats:

Menyn Verktyg / E-post:

Brevhuvud: b+B7B8B9, F8 eller B9B1B3, D1D3, Skift+Tabb

Spara meddelande (i Utkorg): s+B9, D1D2D4D5D6, F7

Stäng meddelande: 4+B9, D1D4D5D6, F4

Svara

Svara alla

Svara avsändaren

Vidarebefordra

## ***x2.18 MSN Messenger***

Observera: För att använda detta program måste Pronto ha en aktiv webbanslutning, dvs. via en ActiveSync-anslutning till en Internet-ansluten PC eller via en mobiltelefon och giltig RAS-/GPRS-anslutning.

Öppna programmet MSN Messenger: n+B7b8B9, Windows-tangenten+n  
Öppna/stäng menyn: S3 kort, B9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B8B9, Alt+a

Min status: u+B8B9, Ctrl+u

(online, upptagen, strax tillbaka, inte vid datorn, i telefon, på lunch)

Menyn Kontakter: k+B8B9, Alt+k

Hantera kontakter: c+B8B9, Ctrl+c

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Kontaktlista:

Visa alla kontakter

Visa enbart kontakter som är online

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Hantera profiler (dialog): p+B8B9, Ctrl+p

Ljudinställningar (dialog)

Inställningar (dialog)

I chattfönstret:

Menyn Konversation:

Bjud in: e+B8B9, Ctrl+e

Spara konversation som textfil: s+B8B9, Ctrl+s

Ta bort konversation: B9B7, Del

Ta bort och stäng alla konversationer

Läsningssläge, aktivera/inaktivera: l+B8B9, Ctrl+l

Objekt i dialogrutan Hantera kontakter:

Lista: Medlemskap

Lista: Kontakter

Knapp: Lägg till

Knapp: Ta bort

Knapp: Ändra medlemskap

Knapp: Blockera / Ta bort blockering

Objekt i chattfönstret:

Lista: Konversationer

Lista: Meddelande

Textruta: Text

Knapp: Skicka

Knapp: Stäng konversation

## ***X2.19 Webbläsaren***

**Observera:** För att använda detta program måste Pronto ha en aktiv webbanslutning, dvs. via en ActiveSync-anslutning till en Internet-ansluten PC eller med en giltig WLAN-anslutning eller via en mobiltelefon och giltig RAS-/GPRS-anslutning.

Starta Webbläsaren: w+B9B7B8, Windows-tangenten+w  
Öppna/stäng menyn: S3 kort, 9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a

Menyn Öppna:

Webbadress (dialog): o+B8B9, Ctrl+o

Fil (dialog)

Menyn Spara:

Aktuell sida (dialog)

Spara länk (dialog för att ladda ner filer)

Avsluta Webbläsaren: 4+B8B9, Alt+F4

Menyn Redigera: r+B9B8, Alt+r

Markera block början/slutet: x+B9, Ctrl+mellanslag

Kopiera: c+B8B9, Ctrl+c

\* Klippta in: v+B8B9, Ctrl+v

Markera allt: %+B9, Ctrl+a

Avmarkera block: u+B9, Ctrl+u

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g

Menyn Tecken:

Nästa tecken: B4B9, pil höger

Föregående tecken: B1B9, pil vänster

Aktuellt tecken: B1B4B9, Skift+mellanslag

Menyn Ord:

Nästa ord: B5B9, Ctrl+pil höger

Föregående ord: B2B9, Ctrl+pil vänster

Aktuellt ord: B2B5B9, Ctrl+mellanslag

Menyn Virtuellt rad:

Nästa rad: D5+S-ner, Ctrl+F0

Föregående rad: D5+S-upp, Skift+F0

Läs rad: D5+S-mitten, F0

Menyn Mening:

Nästa mening: S-ner, B6B9, D3, pil ner

Föregående mening: S-upp, B3B9, D1, pil upp

Läs aktuell mening: B3B6B9, Ctrl+Enter

Menyn Stycke:

Nästa stycke: B4B5B9, D2D3, Ctrl+pil ner

Föregående stycke: B1B2B9, D1D2, Ctrl+pil upp

Läs stycke: B1B3B4B6B9, Skift+Enter

Menyn Sida:

Sida bakåt: B2B3B9, D5D6, Alt+pil vänster

Sida framåt: B5B6B9, D4D5, Alt+pil höger

Startsida

Överst på sidan: B1B2B3B9, D1D4, Ctrl+Home (FN+Ctrl+pil vänster)

Slutet på sidan: B4B5B6B9, D3D6, Ctrl+End (FN+Ctrl+pil höger)

Menyn Länk eller kontroll:

Nästa länk eller kontroll: S-höger, B4B6B9, D4D6, Tab

Föregående länk eller kontroll: S-vänster, B4B6B8B9, D1D3, Skift+Tab

Menyn Länk:

Nästa länk: k+B9, D4D5D6, Ctrl+k  
Föregående länk: k+B9B8, D1D2D3, Ctrl+Skift+k

Menyn Kontroll:

Nästa kontroll: n+B9, D1D2D3D4D6, Ctrl+n  
Föregående kontroll: n+B8B9, D1D3D4D5D6, Ctrl+Skift+n

Menyn Rubrik:

Nästa rubrik: h+B9, D1D2D5, Ctrl+h  
Föregående rubrik: h+B8B9, D2D4D5, Ctrl+Skift+h

Menyn Textruta:

Nästa textruta: e+B9, D1D5, Ctrl+e  
Föregående textruta: e+B8B9, D2D4, Ctrl+Skift+e

Menyn Textblock:

Nästa textblock: m+B9, D2D3D4D5, Ctrl+PgDn  
Föregående textblock: m+B8B9, D1D2D5D6, Ctrl+PgUp

Menyn Ram:

Nästa ram: r+B9, D1D2D3D5, Ctrl+r  
Föregående ram: r+B8B9, D2D4D5D6, Ctrl+Skift+r

Menyn Sök: s+B8B9, Alt+s

Ny sökning: ?+B8B9, D1D2D4, Ctrl+f  
Sök nästa: ?+B7B8B9, D1D4D6, F3 (FN+3)

Menyn Visa: v+B8B9, Alt+v

Sidinformation (dialog)  
Uppdatera: u+B8B9, D1D5D6, F5 (FN+5)

Menyn Historik:

Efter datum (idag, senaste veckan, 2/3 veckor sedan)  
Efter webbplats  
Mest besökta webbsidor  
Besökta idag  
Töm historiken

Fönster (dialog)

Nerladdningshanteraren (dialog)

Inställningar (dialog)

Länk- eller bildinformation (dialog)

Menyn Favoriter: f+B8B9, Alt+f

Lägg till (dialog)  
Visa favoriter (menylista)  
Hantera favoriter (dialog)

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t

Använd aktuell sida som startsida  
Starta läsning: B9, D3D5, Ctrl+Skift+mellanslag  
Stoppa läsning: B4B6B7B9, D2D6, Esc  
Rensa temporära Internetfiler

## ***X2.20 PDF-dokumentläsaren***

Starta PDF-dokumentläsaren: u+B9B7B8, Windows-tangenten+u



Öppna/stäng menyn: S3 kort, 9B3B5, Alt-tangenten

Menyn Arkiv: a+B9B8, Alt+a

Öppna: o+B8B9, D1D3D5, Ctrl+o

Spara som textfil: s+B8B9, D2D3D4, Ctrl+s

Information: i+B8B9, D2D4, Ctrl+i

Avsluta: 4+B9, Alt+F4

Menyn Redigera: r+B9B8, Alt+r

Markera början/slut av block: B23B5B9, D2D3D6, Insert (FN+Del)

Kopiera: c+B8B9, Ctrl+c

Markera allt: %+B9, Ctrl+a

Avmarkera: u+B9, Ctrl+u

Menyn Gå till: g+B8B9, Alt+g

Menyn Tecken:

Nästa tecken: B4B9, pil höger

Föregående tecken: B1B9, pil vänster

Läs aktuellt tecken: B1B4B9, Skift+mellanslag

Menyn Ord:

Nästa ord: B5B9, Ctrl+pil höger

Föregående ord: B2B9, Ctrl+pil vänster

Läs aktuellt ord: B2B5B9, Ctrl+mellanslag

Menyn Rad:

Nästa rad: S-ner, B4B5B9, D3, pil ner

Föregående rad: S-upp, B1B2B9, D1, pil upp

Läs aktuell rad: B1B2B4B5B9, Skift+Ctrl+mellanslag

Menyn Mening:

Nästa mening: B6B9, PgDn (FN+pil ner)

Föregående mening: B3B9, PgUp (FN+pil upp)

Läs aktuell mening: B3B6B9, Ctrl+Enter

Menyn Stycke:

Nästa stycke: B4B6B9, Skift+PgDn (FN+Skift+pil ner)

Föregående stycke: B1B3B9, Skift+PgUp (FN+Skift+pil upp)

Läs aktuellt stycke: B1B3B4B6B9, Skift+Enter

Menyn Sida:

Nästa sida: B5B6B9, Ctrl+PgDn (FN+Ctrl+pil ner)

Föregående sida: B2B3B9, Ctrl+PgUp (FN+Ctrl+pil upp)

Gå till sidnummer (dialog): m+B8B9, Ctrl+m

Menyn Länk:

Nästa länk: D4D6, Tab

Föregående länk: D1D3, Skift+Tab

Menyn Dokument:

Början av dokumentet: B1B2B3B9, D1D4, Home (FN+pil vänster)

Slutet av dokumentet: B4B5B6B9, D3D6, End (FN+pil höger)

Menyn Bokmärke:

Nästa bokmärke: D3D5D6, Skift+End

Föregående bokmärke: D2D3D6, Skift+Home

Lista bokmärken

Menyn Sök: d+B8B9, Alt+d

Ny sökning: ?+B8B9, D1D2D4, Ctrl+f  
Sök nästa: n+B9B0, D1D4D6, F3 (FN+3)

Menyn Verktyg: t+B8B9, Alt+t  
Plats i dokumentet: p+B8B9, D1D2D3D4, Ctrl+p  
Starta löpande läsning: B9, D3D5, Skift+Ctrl+Enter  
Stoppa löpande läsning: B4B6B7B9, D2D6, Esc

