




Keypad -Kortmanual

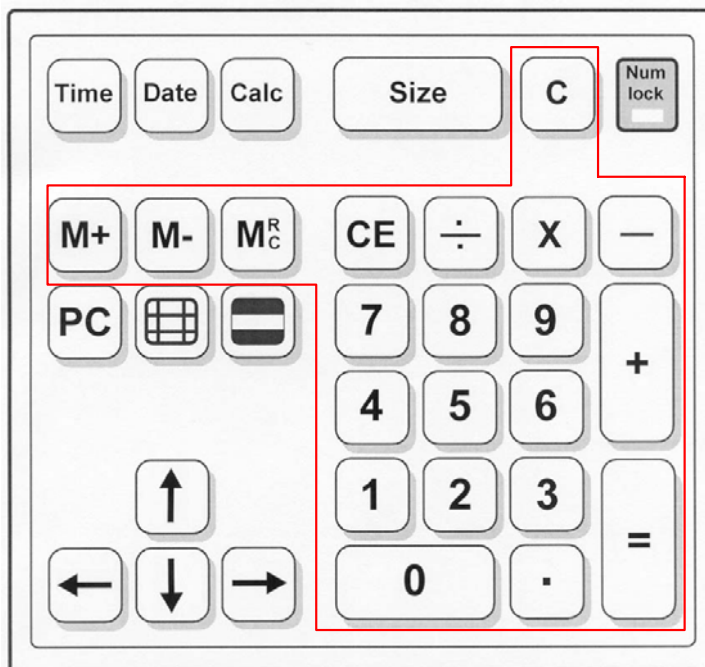

'Time': Klocka på och av.

'Date': Datumvisare på och av.

'Calc' Miniräknare på och av. Den numeriska delen M+, M-, MRC och C tillhör miniräknaren.

'Size': Justerar, i fyra steg, storleken på klocka, datum visare och miniräknare.

'PC': Väljer mellan hel datorbild, hel kamerabild eller delad dator – och kamerabild.



Vid hel kamerabild : Ett tryck ger horisontella referens linjer. För att få fram vertikala referens linjer. Tryck ner tangenten ytterliggare en gång. Linjerna justeras med piltangenterna.

Forts. Nästa sida >>



Nordisk Synsupport AB

Informationsteknik för synskadade



Vid delad kamera / PC bild: Varje tryck ger växling mellan horisontal och vertikal bildindelning .



Vid hel kamerabild : Tryck en gång och du får horisontal avskärmning . Nästa tryck ger vertikala kulisser. Storleken på avskärmningen justeras med piltangenterna.

Vid delad kamera / PC- bild: Varje tryck flyttar kamera bilden upp / ner alternativt höger / Vänster.