



Orcam Read ,

Läsning med artificiell intelligens!

Liten handhållen kamera som med OCR-hantering och talsyntes läser upp text från alla tryckta ytor och digitala skärmar. Det gör att du kan läsa din bok, morgontidning, skyltar, menyer, dataskärm, projektorduk, smarttelefon och surfplatta.

Håll OrCam Read som en penna 15-35 cm från texten, Tryck till på startknappen för att fånga och få en text uppläst. Inbyggda lampor tänds om ljuset inte räcker till.

Utseende:

I ena änden sitter en kamera som pekar framåt, där finns även en laser som projicerar en ram eller en pil. På ena långsidan finns alla knappar samlade, Närmast kameran sitter en rund startknapp, längre upp sitter en plus och en minusknapp för volym. Sedan kommer 4 ledlampor för batteristatus, och sedan en avlång Strömknapp.

Över strömknappen finns ett USB-C uttag för laddning.

Funktioner:

Texttolkning – Tolkad text, läses upp med talsyntes. ser upp med talsyn

Klockfunktion - Röststyrning. Read meddelar aktuell tid och datum.

Inbyggd Bluetooth - som du kan använda för att ansluta till hörlurar eller en extern högtalare.

OrCam app – App för inställning av Read (Finns för iPhone eller Android).

Specifikation:

Mått 122 mm x 25 mm x 13 mm

Vikt 45 gram

Kamera 13 megapixlar

Anslutning Blåtand eller via hörlursuttag på enheten.

ArtNr	Benämning	Pris
1-9240	Orcam Read 3	19 900:-
1-9230-10	Orcam Read Stativ	1 280:-
1-4630-02	Orcam Read Stand m högtalare	4 960:-

Pris exkl. moms